

« СОГЛАСОВАНО »

Главный врач НИИ
фтизиопульмонологии
М.А.Иванова
М.Сеченова
М.Т.Чернов
2010 г.

« УТВЕРЖДАЮ »

генеральный директор
ООО «Инполимед – В»
«Инполимед-В»
В.А.Пивоваров
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИМЕРНОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ И РАНЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ «ИОДПОЛИКОМ».

Назначение.

Композиция полимерная для покрытия операционных и раневых поверхностей «Иодполиком» предназначена:

- для предоперационного покрытия операционного поля ;
- для покрытия травматических и огнестрельных ран на период транспортирования больных;
- для покрытия травматических и операционных ран в период послеоперационного лечения;
- для лечения бытовых травм.

Основные свойства.

Композиция полимерная «Иодполиком» представляет собой красно-бурый раствор комплекса сополимера винилпирролидона с бутилметакрилатом марки ППБ-1 (6%) и йода (« 2.25% ») в этиловом спирте.

Йод в композиции находится в связанном состоянии и не оказывает обжигающего действия на ткани организма.

После нанесения композиции на поверхность кожи или на раневую поверхность образуется антимикробная водонерастворимая пленка с высокой адгезией к тканям организма.

Время высыхания композиции на кожном покрове или на поверхности раны составляет 2 – 3 минуты.

Композиция обладает высокой антимикробной активностью по отношению к грамположительным , грамотрицательным и к кислотостойким бактериям в течение всего времени нахождения пленки на поверхности кожи или раны.

Способ применения.

Композиция наносится на поверхность кожи или раны с помощью палочки, снабженной на конце ватным тампоном , или непосредственно из полиэтиленовой ампулы , снабженной навинчивающейся полимерной канюлей для прокалывания ампулы и равномерного нанесения композиции на обрабатываемую поверхность.

После нанесения композиция высыхает в течение 2-3 минут, образуя на поверхности водонерастворимое паропроницаемое защитное покрытие с высокой адгезией к коже или к раневой поверхности. Пленка обеспечивает антибактериальное и противогрибковое действие в течение всего времени нахождения на поверхности.

Образующаяся пленка постепенно сходит с поверхности кожного покрова или с раневой поверхности в течение 1 – 5 суток. При необходимости покрытие может быть удалено с помощью ватного тампона , пропитанного спиртом.

Побочные действия.

У лиц с повышенной чувствительностью к препаратам йода могут наблюдаться явления иодизма.

Форма выпуска.

Композиция выпускается в герметично закрытых банках или флаконах из темного стекла или полимерных материалов или в полиэтиленовых ампулах , уложенных в картонную или блистерную упаковку.

Условия и сроки хранения.

Композиция хранится в помещении при температуре от -50 до + 40 С в защищенном от света месте. Срок хранения 5 лет с момента выпуска.

