

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач ЦКБ РАН

Профессор

Н.Г. Гончаров

« 01 » сентября 2011 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Пронто»

Н.Д. Герасимова

« 01 » июля 2011 г.



Инструкция по применению

**«Салфетки углеродные атравматические стерильные «ИнКар»
в наборах и отдельных упаковках»**

ПУ-0001-00-00 ИП

Оглавление:

1. Назначение	3
2. Основные технические характеристики	3
3. Противопоказания к применению	5
4. Способ применения	5
5. Правила хранения и использования	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетки углеродные атравматические стерильные «ИнКар» в наборах и отдельных упаковках (в дальнейшем – салфетки), предназначенные для очистки и дезинфицирования ран путем нейтрализации токсических веществ в области раневой поверхности, нормализации pH тканей и дренажа фиброгнойного экссудата, адсорбции гнойноспецифического запаха, исключения боли и разрушений новообразованных тканей при перевязках или аллергии к применению других лекарственных средств для санации ран и т.п.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки углеродные атравматические стерильные «ИнКар» в наборах и отдельных упаковках состоят из лечебных и сорбирующих салфеток.

Лечебная салфетка комплекта изготовлена из углеродной ткани, применяется при лечении повреждении мягких тканей различной этиологии (ожоговые раны, раны при открытых переломах, пролежни и трофические язвы) на всех стадиях раневого процесса. Даже без лекарственных средств она не допускает инфицирования раны, не «присыхает» к ней, быстро снимает воспаление и отек.

Сорбирующая салфетка изготовлена из медицинского углеволокнистого сорбента, используется при лечении гнойных и вяло-заживающих ран, трофических язв, ожогов, свищей, осложненных послеоперационных ран. Эффективность салфетки основана на ее высокой пористости и капиллярной активности. Такая салфетка сорбирует микроорганизмы, химические вещества, гнойные выделения. Она снимает боль, обладает гемостатическим действием, поглощает запах и не вызывает побочных эффектов.

Эффективность:

Сорбирующие и лечебные салфетки комплектов не травмируют поверхность раны при перевязках, сохраняют под собой слой раневого экссудата, что благотворно сказывается на эпителизации.

Хорошие сорбционные свойства материалов салфеток приводят к быстрому очищению ран в воспалительной стадии и позволяют использовать методику пропитки салфеток лекарственными препаратами, не снимая повязку с раны.

Салфетки обладают гемостатическим эффектом, стимулируют рост эпителизации без нарушения их кровообращения.

Исключение необходимости частых перевязок и их безболезненность создают комфорт для больных и снижают расход анальгетиков.

Размеры:

Лечебные и сорбирующие салфетки имеют размеры: $(10 \times 10) \pm 0,5$ см; $(20 \times 25) \pm 0,5$ см; $(50 \times 50) \pm 0,5$ см. Толщина – 0,5 мм.

Комплектация:

Каждая отдельно упакованная салфетка имеет следующую комплектацию:

- Салфетка – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.

Салфетки углеродные атравматические стерильные «ИнКар» выпускаются в наборах:

- Набор малый и состоит из:

- Салфетка лечебная 10x10 см - 1 шт.;
- Салфетка сорбирующая 10x10 см - 1 шт.;
- Общая инструкция по применению – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.

- Набор средний и состоит из:

- Салфетка лечебная 10x10 см - 1 шт.;
- Салфетка сорбирующая 10x10 см - 1 шт.;
- Салфетка лечебная 20x25 см - 1 шт.;
- Салфетка сорбирующая 20x25 см - 1 шт.;

- Общая инструкция по применению – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.
- Набор большой, состоит из:
 - Салфетка лечебная 10х10 см - 1 шт.;
 - Салфетка сорбирующая 10х10 см - 1 шт.;
 - Салфетка лечебная 20х25 см - 1 шт.;
 - Салфетка сорбирующая 20х25 см - 1 шт.
 - Салфетка лечебная 50х50 см - 1 шт.;
 - Салфетка сорбирующая 50х50 см - 1 шт.;
 - Общая инструкция по применению – 1 шт.;
 - Упаковка – 1 шт.

В набор входят салфетки, упакованные в индивидуальную упаковку.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Побочные эффекты не известны. Противопоказаний нет.

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется последовательное использование сорбирующих и лечебных салфеток.

Сорбирующая салфетка используется на начальной стадии лечения для дренирования и очищения раны от микроорганизмов, гнойных выделений и других субстанций.

Лечебная салфетка, применяется в комбинации с различными лекарственными препаратами, которые наносятся поверх материала, для полной эпителизации раневой поверхности.

При применении необходимо вскрыть упаковку, отделив пленку от бумаги, вынуть салфетку, полностью закрыть ей обработанную рану, перекрыв её приблизительно на 2 см, покрыть двойным слоем марлевой повязки и зафиксировать бинтом, сеткой или пластырем. Применения дополнительных лекарственных средств не требуется.

Перевязка делается через 1-2 дня в зависимости от интенсивности раневых выделений. Салфетка может быть заменена в случае её полной пропитки раневыми выделениями. Марлевую повязку можно менять через 1-8 часов в зависимости от назначения врача.

В случае высыхания салфетки на ране: её можно удалить, смачивая сверху раствором фурацилина 3%, или физиологическим раствором, или кипяченой водой.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Каждая салфетка упакована в индивидуальную герметичную упаковку.

Гарантийный срок хранения не менее трех лет от даты изготовления салфетки, при условии сохранения герметичности.

Салфетки транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных техническими условиями.