

Инструкция по применению

Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax

Описание:

Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax представляет собой производное воска (70%) и вазелина (30%).

Размягчается в руках, легко разминается, принимая различную форму.

Способ стерилизации: гамма-облучение.

Показания:

Для остановки костных кровотечений:

- в ортопедии и травматологии;
- в торакальной хирургии (грудина и ребра);
- в стоматологии и челюстной хирургии;
- в нейрохирургии (при трепанации).

Способ действия:

Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax не оказывает каких-либо независимых фармакологических свойств.

Остановка кровотечений достигается при механической закупорке внутрикостных сосудов. Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax не рассасывается.

Предупреждения:

См. способ наложения

Противопоказания:

Нет

Способ наложения:

Для остановки кровотечений.

Предварительно следует размягчить стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax, размяв ее руками. Затем при помощи шпателя необходимо наложить стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax на кость для остановки костного кровотечения. Наносите как можно меньшее количество, в противном случае будет оказываться негативное действие на восстановление кости. Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax остается в организме.

Побочные эффекты:


Стерильное гемостатическое хирургическое средство - воск костный Bone Wax задерживает восстановление кости и может вызвать воспалительную реакцию на инородное тело.

Условия и сроки хранения:

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Использовать сразу же после открытия упаковки.

Хранить при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$.

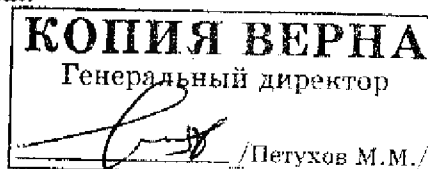

Другая информация:


Использовать только в случае, если упаковка не повреждена.
Для одноразового использования. Повторно не стерилизовать.

Форма выпуска:

Кол-во в упаковке 24 шт.

Символы на упаковке:

					
Для одноразового применения	См. инструкцию по применению	Номер партии	Стерильно	Срок хранения	Артикул

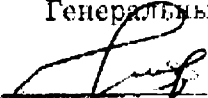КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
 /Петухов М.М./