



Медиканова

ООО «Медиканова»

ул. Орджоникидзе 3.

тел. (495)952-0649; (495)729-7980

www.medicanova.org

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор


ООО «Медиканова»

Венсковский В. Н. Венсковский В. Н.




Скребок костный стоматологический **MICROSS**


Инструкция по применению

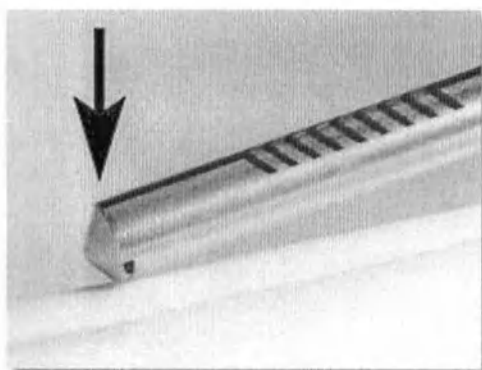


Держать устройство необходимо так, чтобы маркер на поверхности катетера был обращен в сторону врача-хирурга.

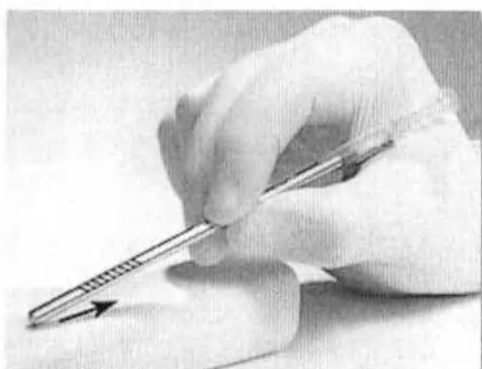


Костная ткань собирается посредством надавливания внешнего интерфейса инструмента на костную поверхность и извлечением его назад.

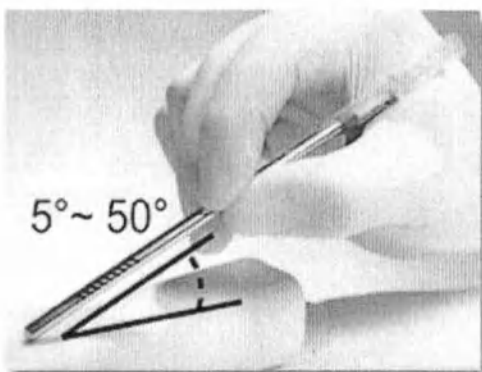


Кость может собираться как с плоских поверхностей, так и из полостей (выемок). Угол работы варьируется от 5° до 50° .

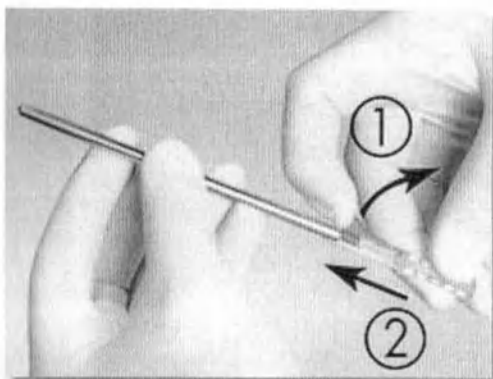


Изменяя угол работы и давление на инструмент, можно изменять количество и консистенцию собираемой кости

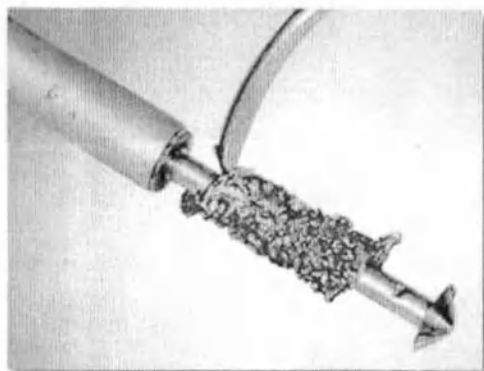

Костный скребок Microsaw может вмещать объем до 0,25 см³.

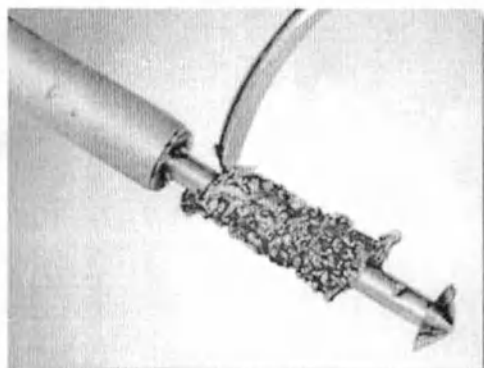

Чтобы достать собранную кость, необходимо положить инструмент в стерильную чашу (емкость), затем освободить рычаг и плавно двигать устройство назад до полного открытия. Используйте только стерильные инструменты для извлечения аутогенного костного материала из отсека.

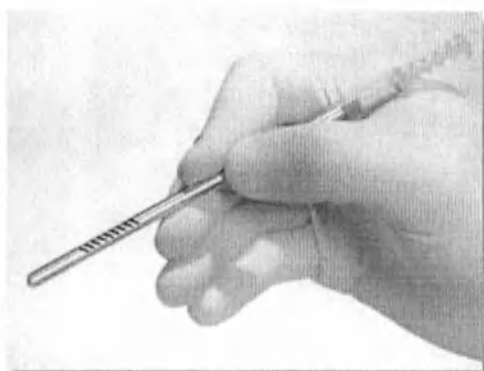

Для того чтобы собрать больше костной ткани, нужно привести рукоятку в исходное положение и сцепить рычаг.

Производитель:
C.G.M. S.p.A. DIVISIONE MEDICALE META
 Via E. Villa, 7 - 42100 Reggio Emilia - ITALY
 Тел.: +39 0522.50.23.11 Факс: +39 0522.50.23.33
www.metahosp.com info@metahosp.it



Прошито, скреплено и пронумеровано

2 листа

ООО Медиканова

Генеральный директор

Венсковский В.Н.

