


КОД ОКП 93 9800

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «МО «Отдел медицинской
техники»

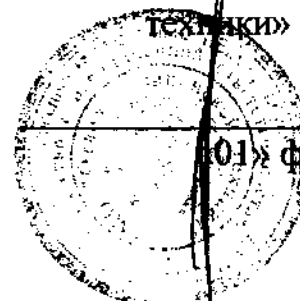

Цикин А.Ю.
01» февраля 2011 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Устройство инфузионное однократного применения

Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р ИСО 11607-2003; ГОСТ Р 51609

2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Устройство инфузионное однократного применения

1. Назначение

Используется в лечебно-профилактических учреждениях для внутривенного введения инфузионных растворов.

2. Противопоказания к применению

Противопоказания отсутствуют.

3. Порядок работы изделия


- Убедиться в целостности упаковки.
- Проверить срок годности системы.
- Вскрыть упаковку только в соответствующем месте (обозначено на упаковке).
- Пластиковым шипом присоединить систему к флакону с инфузионным раствором.
- Установить флакон в стойку и при помощи роликового зажима дать раствору заполнить трубку системы полностью.
- Выпустить весь воздух из трубок системы.
- После введения иглы в вену настроить скорость капельного введения раствора при помощи роликового зажима
- Применить однократного.
- После применения следует уничтожить согласно инструкции Минздрава по утилизации

4. Правила хранения и использования

Хранить при температуре 0 – +30°C и относительной влажности не более 85%.

Срок годности 3 года с даты производства.

Директор
(должность)

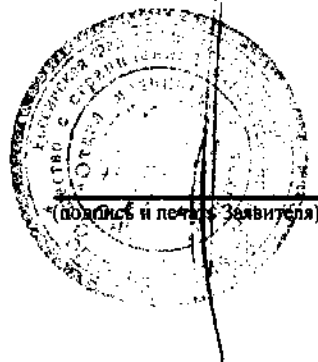

А.Ю. Цикин
(И.О. Фамилия)

