


КОД ОКП 93 9800

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «МО «Отдел медицинской  
техники»

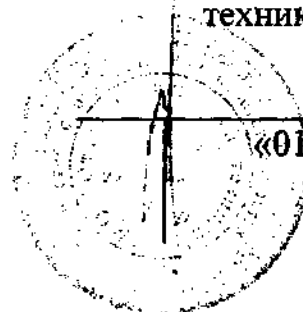

Цикин А.Ю.

«01» февраля 2011 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Шприцы инъекционные однократного применения с иглами,  
объемом: 1мл; 2,5мл; 5мл; 10мл; 20мл; 30мл; 50мл**

**Соответствует требованиям национальных стандартов  
ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009; ГОСТ Р ИСО 7864-2009; ГОСТ 19126-2007; ГОСТ Р 51609**

2011

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Шприцы инъекционные однократного применения с иглами, объемом: 1мл; 2,5мл; 5мл; 10мл; 20мл; 30мл; 50мл

### 1. Назначение

Используется в лечебно-профилактических учреждениях для внутримышечного, внутривенного и подкожного введения лекарственных средств.

### 2. Противопоказания к применению

Противопоказания отсутствуют.

### 3. Порядок работы изделия

- Осмотреть упаковку шприца на герметичность.
- Убедиться в действии срока годности шприца.
- Вскрыть упаковку и извлечь шприц.
- Снять колпачок с иглы и набрать лекарственное средство.
- Удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх.
- После проведения инъекции шприц уничтожить согласно инструкции Минздрава по утилизации

### 4. Правила хранения и использования

Хранить при температуре 0 – +30°C и относительной влажности не более 85%.

Срок годности 3 года с даты производства.

Директор  
(должность)



А.Ю. Цикин  
(И.О. Фамилия)

