

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов
одноразовая

ТУ 9398-001-63114590-2013

Назначение:

Ёмкость-контейнер (далее - контейнер) предназначена для бесконтактного снятия иглы со шприца во избежание получения медработником производственной травмы. Контейнер имеет специальные отверстия для съема металлических острых частей с одноразового медицинского инструментария, удобен для операционных, процедурных, лечебных учреждений всех профилей.

Показания:

Применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на скорой помощи и др.
Содержимое подлежит дезинфекции.

Основные характеристики:

1. Контейнер выпускается

Объем, л	1
В (высота), мм	125
Диаметр горловины, мм	50
Диаметр дна, мм	100
Масса ёмкости, г	55

2. Собранная ёмкость герметична и выдерживает внутреннее избыточное давление не менее 10 кПа.
3. Ёмкость выдерживает не менее двух падений без разрушения и течи при ударе при свободном падении с высоты 0,9 м.
4. Ёмкость выдерживает усилие при сжатии в осевом направлении не менее 343 Н.

Комплектация упаковки:

1. Контейнер (контейнер, крышка с встроенной вставкой для безопасного снятия игл со шприца, ручка);
2. Маркировочная наклейка.

Алгоритм сбора отходов в одноразовые контейнеры:

1. Возьмите маркировочную наклейку;
 2. Заполните предложенную форму, в целях соблюдения СанПин 2.1.7.2790-10;
 3. Наклейте заполненную маркировочную наклейку на контейнер;
 4. Контейнер на две трети заполните дезинфицирующим средством;
 5. Крышку зафиксируйте на контейнере, закрыв ее плотно до щелчка, отверстие для снятия игл при этом должно быть открытым. Крышка оснащена замком, обеспечивающим герметичность и индикатором вскрытия;
- Контейнер готов к использованию!
6. В процессе сбора игл крышка должна находиться в верхнем положении фиксатора;
 7. Выполните инъекцию, поднесите шприц с иглой к контейнеру.

9. Опустите кончик иглы в дезинфицирующий раствор, находящийся внутри контейнера;
10. Потяните поршень шприца на себя;
11. Затем подденьте канюлю иглы за подходящее отверстие на крышке. Игла попадет в дезинфицирующий раствор.
12. Выпустите дезинфицирующий раствор, набранный ранее в шприц через иглу, обратно в контейнер;
13. Заполните контейнер иглами на $\frac{3}{4}$;
14. Прикройте отверстие для игл;
15. Выдержите время экспозиции дезинфицирующего средства, после чего жидкость слейте через отверстие для снятия игл;
16. Отверстие для снятия игл закрыть заглушкой. Проследите за тем, чтобы при закрытии крышки произошел глухой щелчок;
17. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения на территории ЛПУ.

При сборе медицинских отходов запрещается:

1. Снимать ручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;
2. Пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одной емкости в другую;
3. Утрамбовывать отходы;
4. Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
5. Устанавливать одноразовые контейнеры для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

Транспортирование и хранение

Ёмкости транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Ёмкости хранят в крытых сухих складских помещениях по условию хранения 2 по ГОСТ 15150 на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие емкостей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Требования безопасности

Использованные изделия подвергают обеззараживанию и утилизации на специальных полигонах.

Директор
ООО «Современные полимерные технологии»

Зарипов И.Р.



А
Томский
в контору
Знамен
диз. №

