

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»



Якимов Ю.В.

2022 г.

СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДМ.69573749.030.РЭ

Дата последнего пересмотра: 13.09.2022 г.

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТОЛА МАТЕРИАЛЫ И ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	11
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	12
4 УПАКОВКА	13
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	14
6 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	15
7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	17
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
9 УТИЛИЗАЦИЯ	19
10 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ	20
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	21
12 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	22
13 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ А	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	25
ПРИЛОЖЕНИЕ В	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	35

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021» (далее – стол), предназначенное для ухода за новорожденными, например, мытья или замены пелёнок, проведения медицинских процедур и манипуляций в различных специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СанПин 2.1.3678-20 (например: операционные, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных, послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка и т.д.), в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20.

Стол предназначен для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Показания к применению стола: Уход за новорожденными, например, мытье или замена пелёнок, проведения медицинских процедур и манипуляций в различных специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20

Противопоказания к применению стола: Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Возможные побочные эффекты: Не выявлены.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением стола по назначению: Не выявлены.

Риски применения стола: Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения стола приведены в мерах предосторожности.

Стол представляет собой жесткую каркасную конструкцию со столешницей из АБС-пластика, с отбортовкой, предотвращающей соскальзывание мягкого ложемент. Ложемент представляет собой чехол из медицинского кожзаменителя, с наполнением поролоном. Стол ряда артикулов оборудован сдвоенной столешницей из АБС-пластика, где место размещения мягкого ложемент совмещено с мойкой. В мойке установлен смеситель, слив. Стол оборудован полкой и/или дверьми распашными. Наружная сторона дверей распашных выполнена из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской. Стол ряда артикулов оборудован опорами колесными и ручкой для перемещения.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508 и Приказу Минздрава РФ от 6 июня 2012 г. № 4н.

Стол является неинвазивным медицинским изделием, не имеет прямого контакта с телом человека при предусмотренном изготовителем применении.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа стола приведен в Приложении Б.

Материалы, используемые при изготовлении стола одной серии, и обозначение серии для формирования артикула конкретизированного заказа приведены в Приложении В.

Внешний вид вариантов исполнения стола приведен в Приложении Г.

Список вариантов исполнения стола приведен в Приложении Д.

Расшифровка символов приведена в Приложении Е.

Символы, применяемые в маркировке, приведены в Приложении В.

Для записи обозначения стола при заказе и/или в документации указывают название изделия и артикул.

1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Внешний вид стола приведен в Приложении Б.

1.2 Функциональные размеры стола соответствуют значениям ниже.

Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм, допустимое отклонение высоты отделений ± 12 мм.

Стол артикулов ДМ-1-106-42, ДМ-2-106-42

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм x 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 829 мм x 468 мм – 1 шт.

Высота отделения над полкой 316 мм.

Стол артикулов ДМ-1-106-43, ДМ-2-106-43

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм x 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 825 мм x 570 мм – 1 шт.

Высота отделения над открытой полкой 212 мм.

Высота отделения над и под полкой, за дверьми распашными 213 мм.

Дверь распашная по ширине и высоте 408 мм x 430 мм – 2 шт.

Стол артикулов ДМ-1-106-44, ДМ-2-106-44

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм x 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по длине и ширине 825 мм x 570 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 327 мм.

Высота отделения над полкой 324 мм.

Дверь распашная по ширине и высоте 408 мм x 660 мм – 2 шт.

Стол артикулов ДМ-1-106-45, ДМ-2-106-45

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм x 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 824 мм x 575 мм – 1 шт.

Высота отделения над открытой полкой 212 мм.

Высота отделения над и под полкой, за дверьми распашными 222 мм.

Дверь распашная по ширине и высоте 408 мм х 454 мм – 2 шт.

Длина ручки для передвижения стола 330 мм

Высота верхней части ручки от пола 721 мм

Стол артикулов ДМ-3-106-45

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм х 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 825 мм х 578 мм – 1 шт.

Высота отделения над открытой полкой – 206 мм.

Высота отделения над и под полкой, за дверьми распашными - 234 мм.

Дверь распашная по ширине и высоте 408 мм х 482 мм – 2 шт.

Длина ручки для передвижения стола - 330 мм

Высота верхней части ручки от пола - 721 мм

Стол артикулов ДМ-1-106-46, ДМ-2-106-46

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм х 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 825 мм х 575 мм – 1 шт.

Высота отделения над и под полкой, за дверьми распашными – 337 мм.

Дверь распашная по ширине и высоте 409 мм х 684 мм – 2 шт.

Длина ручки для передвижения стола 330 мм

Высота верхней части ручки от пола 721 мм

Стол артикулов ДМ-3-106-46

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм х 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по ширине и глубине 825 мм х 575 мм – 1 шт.

Высота отделения над полкой 343 мм.

Высота отделения под полкой 350 мм.

Дверь распашная по ширине и высоте 409 мм х 705 мм – 2 шт.

Длина ручки для передвижения стола 330 мм

Высота верхней части ручки от пола 721 мм

Стол артикулов ДМ-1-111-16, ДМ-2-111-16, ДМ-1-111-17, ДМ-2-111-17

Размер ложементов должен составлять по ширине и глубине 820 мм x 596 мм – 1 шт.

Размер полки должен составлять по длине и ширине 850 мм x 568 мм – 1 шт.

Высота отделения над полкой 324 мм.

Высота отделения под полкой 330 мм.

Дверь распашная по ширине и высоте 421 мм x 660 мм – 4 шт.

Размер раковины Ш x Д x Г 600 мм x 450 мм x 141 мм - 1 шт.;

Длина и высота смесителя должна соответствовать рисунку Г1.

Высота от пола до столешницы у столов всех артикулов должна составлять 850 мм.

1.3 Габаритные размеры и масса стола в сборе приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Габаритные размеры стола, мм, (Ширина x Глубина x Высота), ± 4 мм	Масса стола, кг, ± 10%
ДМ-1-106-42	900 x 700 x 995	30
ДМ-1-106-43		55
ДМ-1-106-44		52
ДМ-1-106-45		57
ДМ-1-106-46		54
ДМ-2-106-42		23
ДМ-2-106-43		43
ДМ-2-106-44		41
ДМ-2-106-45		45
ДМ-2-106-46		43
ДМ-3-106-45		48
ДМ-3-106-46		55

ДМ-1-111-16	1800 x 700 x 995	74
ДМ-1-111-17		
ДМ-2-111-16		
ДМ-2-111-17		

1.4 Столешница выдерживает равномерно-распределенную нагрузку $(20 \pm 1,0)$ кг.

1.5 Полка выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку $(15 \pm 1,0)$ кг;

1.6 Совокупная предельная рабочая нагрузка на стол с учетом предельной равномерно распределенной нагрузки на столешницу и каждую полку, составляет:

Для стола артикулов: ДМ-1-106-42, ДМ-1-106-44, ДМ-1-106-46, ДМ-2-106-42, ДМ-2-106-44, ДМ-2-106-46, ДМ-3-106-46 не более 35 кг;

- Для стола артикулов: ДМ-1-106-43, ДМ-2-106-43, ДМ-1-106-45, ДМ-2-106-45, ДМ-3-106-45 не более 50 кг

- Для стола артикулов ДМ-1-111-16, ДМ-1-111-17, ДМ-2-111-16, ДМ-2-111-17: не более 70 кг;.

1.7 Стол всех артикулов, за исключением ДМ-1-106-45, ДМ-1-106-46, ДМ-2-106-45, ДМ-2-106-46, ДМ-3-106-45, ДМ-3-106-46 установлен на опоры регулируемые, обеспечивающие устойчивость на твердой поверхности. Стол артикулов ДМ-1-106-45, ДМ-1-106-46, ДМ-2-106-45, ДМ-2-106-46, ДМ-3-106-45, ДМ-3-106-46 установлен на опоры колесные, обеспечивающие устойчивость на твердой поверхности.

1.8 Стол на опорах колесных соответствует следующим требованиям:

1.8.1 Установленные опоры колесные снабжены тормозами, при включении которых не должно происходить непредусмотренного перемещения стола в положении эксплуатации по поверхности с углом наклона 5° относительно горизонтальной плоскости.

Тормозами оборудованы две опоры колесные из четырех.

1.8.2 Перемещение стола на опорах колесных по ровной горизонтальной поверхности осуществляется плавно, без заеданий.

1.8.3 Усилие перемещения стола на опорах колесных с отключенными тормозами без нагрузки по твердой плоской поверхности не более 98 Н (9,8 кгс)

1.8.4 Зазор между поверхностью пола и одной из опор колесных не более 3 мм.

1.9 Двери распашные имеют механизм фиксации, предотвращающий их самопроизвольное открывание.

1.10 Двери распашные установлены на петли, обеспечивающие их плавное, без перекосов, открывание и закрывание с усилием не более 20 Н (2 кгс).

1.11 Зазоры в проемах дверей распашных на сторону составляют не более 2 мм.

1.12 Столы при заблокированных опорах колёсных (при наличии) не перемещаются при открывании дверей распашных.

1.13 Уклон дна чаши к выпускному отверстию стола со встроенной раковиной обеспечивает полный слив воды через выпуск.

1.14 Цвет лакокрасочных покрытий столов, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда. Цвет корпуса стола белый или серый. Наружная сторона двери и фасада ящика выдвижного белого, серого, красного, оранжевого, желтого, зеленого или фиолетового цвета.

1.15 Поверхности стола устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

1.16 Средний срок службы стола до списания составляет не менее 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы стола. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности

нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТОЛА МАТЕРИАЛЫ И ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Стол изготовлен из материалов в соответствии с Приложением В.

2.2 Смеситель соответствует по размерам рисунку Г1 приложения Г, и комплектуется гибкой подводкой 1/2" длиной 1м, с допустимым отклонением $\pm 5\%$.

2.3 Сливной сифон соответствует ГОСТ 23289-2016, комплектуется гибкой гофрированной трубой диаметром 40/50 мм длиной 800 мм, с допустимым отклонением $\pm 5\%$.

2.4 Материалы стола имеют обозначения, отображаемые в артикуле надставки в соответствии с Приложением Б.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1.1 В комплект поставки стола всех артикулов, кроме перечисленных в п. 3.1.2 и в п.3.1.3 должны входить:

- | | |
|---|--------|
| 1 Стол одного артикула в соответствии с Приложением В - | 1 шт.; |
| 2 Руководство по эксплуатации ДМ.69573749.030.РЭ - | 1 шт.; |

3.1.2 В комплект поставки стола артикулов ДМ-1-111-16, ДМ-1-111-17,

ДМ-2-111-16, ДМ-2-111-17 должны входить:

- | | |
|---|--------|
| 1 Стол одного артикула в соответствии с Приложением В - | 1 шт.; |
| 2 Руководство по эксплуатации ДМ.69573749.030.РЭ - | 1 шт.; |
| 3 Смеситель - | 1 шт.; |
| 4 Гибкая подводка - | 2 шт.; |
| 5 Сифон - | 1 шт.; |
| 6 Гибкая гофрированная - | 1 шт.; |

3.1.3 В комплект поставки стола артикулов ДМ-1-106-45, ДМ-1-106-46, ДМ-2-106-45, ДМ-2-106-46, ДМ-3-106-45, ДМ-3-106-46 должны входить:

- | | |
|---|--------|
| 1 Стол одного артикула в соответствии с Приложением В - | 1 шт.; |
| 2 Руководство по эксплуатации ДМ.69573749.030.РЭ - | 1 шт.; |
| 3 Полотенцедержатель - | 1 шт.; |
| 4 Мусорное ведро - | 1 шт.; |

3.1.4 При заказе стола необходимо указывать название изделия и артикул, сформированный согласно приложению Б.

3.1.5 Стол по желанию заказчика может поставаться в собранном и разобранном виде. Сборка стола должна осуществляться только представителями предприятия-изготовителя.

4 УПАКОВКА

4.1 Перед упаковкой металлические части стола подвергаются обезжириванию и консервации по группе П-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

4.2 Потребительская упаковка представляет собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Фасадные части стола укрываются воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, стол оборачивается стрейч-плёнкой из полиэтилена, на углах устанавливаются уголки из полиуретана либо трубка из пенополиэтилена, затем стол упаковывается в ящик из гофрированного картона. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения стола внутри упаковки при транспортировании.

4.3 Не установленные на стол детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упакованы в пакет из полиэтилена, а затем помещены в потребительскую упаковку вместе со столом.

4.4 Для транспортирования столы в потребительских упаковках помещают в деревянный ящик. Перед упаковкой в транспортный ящик потребительская упаковка стола прокладывается поролоном. Для фиксации может быть использован шпагат и/или уголки.

4.5 Стол может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ- 1 по ГОСТ 9.014.

4.6 В транспортную упаковку вложен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование стола;
- количество мест;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование стола должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2 Размещение и крепление упаковок со столами в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3 Транспортирование стола крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50°C;

Относительная влажность до 100% при температуре плюс 25°C.

5.4 Стол должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5 Хранение стола должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °C;

Относительная влажность до 80 % при температуре 25 °C.

5.6 Хранение стола в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Стол предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например: операционные, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных, послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка и т.д.), в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

6.2 Эксплуатация стола должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

6.3 Меры предосторожности при применении стола

Стол предназначен для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20.

Стол должен быть использован только по прямому назначению.

Стол должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности с перепадом высот не более 10 мм.

Предельная максимальная равномерная нагрузка на горизонтальные поверхности стола должна не превышать указанную в пп.1.4, 1.5.

Предельная максимальная равномерная нагрузка на стол не должна превышать указанную в п.1.6.

Перед использованием, ложемент необходимо покрывать плотной тканью, исключаящую контакт материала ложемента с кожей новорожденного.

Запрещается неравномерное нагружение полок и столешницы.

Запрещается вставать и/или садиться на стол.

Запрещается использовать стол, если имеются механические повреждения таких частей стола, как опоры колесные, петли дверей распашных, механизмы фиксации дверей распашных, ложемента.

При закрывании двери распашной необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук.

Запрещается перемещать стол, при нахождении на столешнице ребёнка.

6.4 Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении потрескивания горизонтальных поверхностей, смесителя, слива или регулируемых опор) и/или механических повреждений частей стола, способных снизить устойчивость стола к нагружению, способных вызвать нарушение устойчивости стола, падение или опрокидывание, необходимо освободить стол от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением стола, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Стол по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде.

ВНИМАНИЕ: Сборка стола осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Очистка стола

Перед применением стола его поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за столом заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5% раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки стол следует насухо протереть.

8.2 Дезинфекция стола

Дезинфекцию поверхностей стола проводят путем однократного протирания поверхностей 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию стола следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей стола биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Стол является нестерильным изделием и не предназначен для стерилизации.

8.3 При обнаружении механических повреждений таких частей стола, как столешница, опоры колесные, механизмы дверей распашных, необходимо обратиться к предприятию-изготовителю.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Стол подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

9.2 Стол, не имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должен утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

9.3 Стол, имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21 и перед утилизацией должен быть подвергнут обеззараживанию. После соответствующего обеззараживания стол может быть утилизирован совместно с твердыми коммунальными отходами.

**10 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ**

**ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические условия»;**

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

11.2 При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

11.3 Гарантийный срок эксплуатации стола составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.4 Гарантийный срок хранения стола составляет 5 лет.

11.5 Средний срок службы стола до списания составляет не менее 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы стола.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-
складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества стола, отправлять по адресу:

info@doctormebel.ru

13 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт стола осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принцип формирования артикула для конкретизированного заказа

Артикул варианта исполнения стола формируется в виде:

серия- AAA -XX. Кх.Фх

где:

серия - обозначает материалы стола в соответствии с Приложением В, таблицами В.1, В.2, В.3.

AAA – признак функционала стола:

- Значение 106 означает что стол оснащен столешницей для размещения мягкого ложемент;
- Значение 111 означает что стол оснащен сдвоенной столешницей из АБС-пластика, где место размещения мягкого ложемент совмещено с мойкой.

XX – признак конструктивного решения стола по внешнему виду в соответствии с Приложением Д и функциональными размерами в соответствии с требованиями п.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

Кх – признак цвета корпуса:

Номер обозначения цвета корпуса в соответствии с Таблицей Д.1;

Фхх – признак цвета двери.

Номер обозначения цвета двери в соответствии с Таблицей Д.1

Таблица Д.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений цвета корпуса цвета двери

Признак	Значение признака	Аббревиатура обозначения в артикуле
Цвет каркаса	Белый	K1
	Серый	K2
Цвет двери	Зеленый	Ф1
	Оранжевый	Ф2
	Голубой	Ф3
	Белый	Ф5

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Используемые при изготовлении стола материалы

Таблица В.1 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-1
для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием по ГОСТ 22233 скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика по ТУ 2214-019-00203521-96;
Корпус: Панели толщиной 16 мм из полипропилена по ГОСТ 26996-86
Полка: Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 8 мм (HPL-HighPressureLaminate)- ТУ 2256-001-68946326-2012
Дверь распашная: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс по ГОСТ 14918, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017 с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты по ТУ 5769-003-48588528-00.

Таблица В.2 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-2
для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием по ГОСТ 22233 скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика по ТУ 2214-019-00203521-96;
Корпус и полка: Панели ЛДСП 16мм по ГОСТ 32289-2013 (плиты древесно-стружечные ламинированные, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров, тип Р5, класс эмиссии формальдегида Е1)

Дверь распашная:

Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс по ГОСТ 14918, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017 с наполнением из плиты ЛДСП 16мм по ГОСТ 32289-2013

**Таблица В.3 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-3
для формирования артикула**

Материалы стола
Вертикальный несущий каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием по ГОСТ 22233
Корпус и полка: Панели ЛДСП 16мм по ГОСТ 32289-2013 (плиты древесно-стружечные ламинированные, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров, тип Р5, класс эмиссии формальдегида Е1)
Дверь распашная: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс по ГОСТ 14918, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской по ТУ 2329-001-26348249-2015 или ТУ 20.30.22-001-03811176-2017 с наполнением из плиты ЛДСП 16мм по ГОСТ 32289-2013
Опоры колесные: Опоры колесные с одним колесом или колесной парой. Сталь с гальваническим покрытием. Полиамид, полипропилен, ПЭВД, ПВД, ПЭНП. Колесо из термопластичной резины.

Для изготовления столов всех серий используются:

Опоры регулируемые: Полиэтилен высокого давления (ПЭВД, ПВД) или низкой плотности (ПЭНП, LDPE) и оцинкованная сталь

Ложемент: кожзам, поролон

Ручка для перемещения, ручки дверей распашных: алюминий

Смеситель: сталь хромированная

Сливной выпуск: пластик

Мусорное ведро: пластик ударопрочный

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Внешний вид вариантов исполнения стола, технический рисунок смесителя.

Таблица Г. Внешний вид вариантов исполнения стола. Рисунки определяют внешний вид в одном из возможных цветовых решений для каждой серии стола, конструктивные особенности заданы отдельно.

Столы пеленальные медицинские серии ДМ-1		
		
Стол артикул ДМ-1-106-42	Стол артикул ДМ-1-106-43	Стол артикул ДМ-1-106-44
		
Стол артикул ДМ-1-106-45	Стол артикул ДМ-1-106-46	Стол артикул ДМ-1-111-16



Стол артикул
ДМ-1-111-17

Стол пеленальные медицинские серии ДМ-2



Стол артикул
ДМ-2-106-42



Стол артикул
ДМ-2-106-43



Стол артикул
ДМ-2-106-44




Стол артикул
ДМ-2-106-45



Стол артикул
ДМ-2-106-46



Стол артикул
ДМ-2-111-16

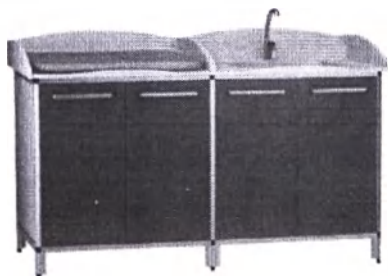

Стол артикул
ДМ-2-111-17

Стол пеленальные медицинские серии ДМ-3



Стол артикул
ДМ-3-106-45



Стол артикул
ДМ-3-106-46

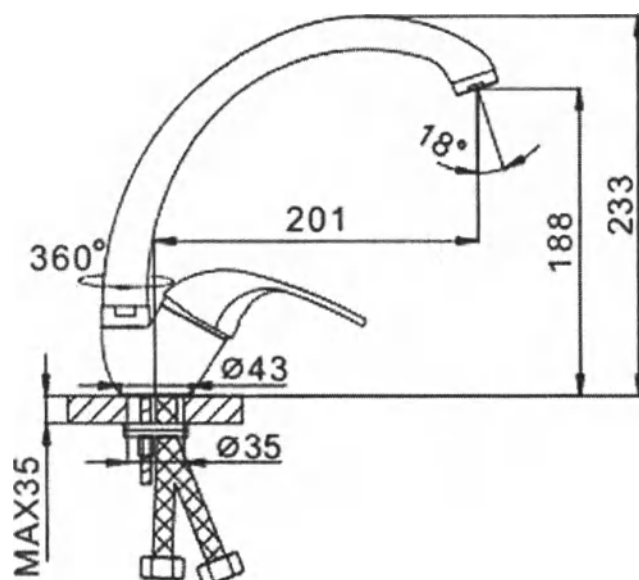


Рисунок Г1 Технический рисунок смесителя, которым комплектуется стол артикулов ДМ-1-111-16, ДМ-2-111-16, ДМ-1-111-17, ДМ-2-111-17.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Перечень вариантов исполнения стола

№ п.п.	Вариант исполнения	Обозначение конструкторского документа
1.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-42.К1	ДМ-1.СТП.69573749.030.1
2.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-42.К2	
3.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-43.К1.Ф1	ДМ-1.СТП.69573749.030.2
4.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-43.К1.Ф5	
5.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-43.К2.Ф1	
6.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-43.К2.Ф5	
7.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-44.К1.Ф1	ДМ-1.СТП.69573749.030.3
8.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-44.К1.Ф5	
9.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-44.К2.Ф1	
10.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-44.К2.Ф5	
11.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-45.К1.Ф1	ДМ-1.СТП.69573749.030.4
12.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-45.К1.Ф5	
13.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-45.К2.Ф1	
14.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-45.К2.Ф5	
15.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-46.К1.Ф1	ДМ-1.СТП.69573749.030.5
16.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-46.К1.Ф5	
17.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-46.К2.Ф1	
18.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-106-46.К2.Ф5	
19.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-111-16.К1.Ф1	ДМ-1.СТП.69573749.030.6
20.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-111-16.К1.Ф5	
21.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-	

	69573749-2021 ДМ-1-111-16.К2.Ф1	
22.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-111-16.К2.Ф5	
23.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-111-17.К1.Ф1	ДМ-1.СТП.69573749.030.7
24.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-111-17.К1.Ф5	
25.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-111-17.К2.Ф1	
26.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-1-111-17.К2.Ф5	
27.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-42.К1	ДМ-2.СТП.69573749.030.1
28.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-42.К2	
29.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-43.К1.Ф2	ДМ-2.СТП.69573749.030.2
30.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-43.К1.Ф5	
31.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-43.К2.Ф2	
32.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-43.К2.Ф5	
33.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-44.К1.Ф2	ДМ-2.СТП.69573749.030.3
34.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-44.К1.Ф5	
35.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-44.К2.Ф2	
36.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-44.К2.Ф5	
37.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-45.К1.Ф2	ДМ-2.СТП.69573749.030.4
38.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-45.К1.Ф5	
39.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-45.К2.Ф2	
40.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-45.К2.Ф5	
41.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-46.К1.Ф2	ДМ-2.СТП.69573749.030.5
42.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-46.К1.Ф5	
43.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-46.К2.Ф2	
44.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-106-46.К2.Ф5	
45.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-	ДМ-2.СТП.69573749.030.6

	69573749-2021 ДМ-2-111-16.К1.Ф2	
46.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-111-16.К1.Ф5	
47.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-111-16.К2.Ф2	
48.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-111-16.К2.Ф5	
49.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-111-17.К1.Ф2	ДМ-2.СТП.69573749.030.7
50.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-111-17.К1.Ф5	
51.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-111-17.К2.Ф2	
52.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-2-111-17.К2.Ф5	
53.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-45.К1.Ф3	ДМ-3.СТП.69573749.030.1
54.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-45.К1.Ф5	
55.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-45.К2.Ф3	
56.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-45.К2.Ф5	
57.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-46.К1.Ф3	ДМ-3.СТП.69573749.030.2
58.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-46.К1.Ф5	
59.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-46.К2.Ф3	
60.	Стол пеленальный медицинский по ТУ 32.50.30-030-69573749-2021 ДМ-3-106-46.К2.Ф5	

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Символы, применяемые в маркировке

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Знак соответствия добровольной сертификации

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
35/тридцать пять листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Доктор Мебель»
Якимов Ю. В.