



ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения
Зеркало гинекологическое одноразовое.

1. Назначение

Зеркало гинекологическое одноразовое используется в гинекологических и смотровых кабинетах различных лечебно-профилактических учреждений. Данное изделие позволяет произвести осмотр шейки матки, в частности, ее наружной области, а также выполнить забор материала для анализов и некоторые другие манипуляции.

2. Основные технические характеристики

Зеркало гинекологическое применяется для осмотра слизистой влагалища и шейки матки. Длина и форма рукоятки зеркала создают максимальный комфорт при работе с инструментом. Конструкция замка обеспечивает надежную фиксацию створок в выбранном положении. Прозрачные створки зеркала — анатомичны и высоко функциональны.

3. Противопоказания к применению

Не применять при нарушении целостности потребительской тары.

4. Подготовка к работе, порядок работы изделия

Проверьте целостность потребительской тары, срок годности и извлеките изделие.

Расположите зеркало с сомкнутыми створками у входа во влагалище

Введите зеркало во влагалище.

Разверните створки зеркала во фронтальную плоскость.

Разведите створки на необходимое расстояние.

Зафиксируйте замок зеркала, развернув фиксатор во фронтальную плоскость.

При извлечении зеркала последовательность манипуляций обратная последовательности манипуляций при введении зеркала.

Зеркало гинекологическое одноразовое легко вводится, а также надежно закрепляется в раскрытом положении с помощью винтового фиксатора.

Устройства стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Предназначены только для однократного применения.

5. Срок хранения.

Срок хранения — 5 лет от даты изготовления.

После применения устройство утилизировать в соответствии с национальными стандартами.