

Инструкция по эксплуатации

Иглы стоматологические одноразовые Hogen Spitze, типо-размеров: 27G, 30G, 31G, производства C-K DENTAL IND. CO., LTD 126, NAE DONG, OJEONG-KU, BUCHEON-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA СИ-КЕЙ ДЕНТАЛ ИНД., КО. ЛТД 126, НЭ ДОН, ОДЖОН-КУ, БУЧЕН-СИТИ, КЬЁНДЖИ-ДО, Республика Корея.

Перед использованием стоматологических игл следует проверить пломбу картриджа!
(НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ВСКРЫТИЯ ПЛОМБЫ)

1. Сломать герметичную пломбу.
2. Вставить шприц в картридж с анестетиком, затем надеть стоматологическую иглу.
3. Не следует наклонять металлический корпус в области соединения с пластиковой частью, игла может проткнуть ткань и причинить травму.
4. Стоматологическая игла должна оставаться в защитном колпачке, пока не будет набран уровень фактического использования.
5. Использовать защитный колпачок для удаления острия и разламывания иглы после использования.
6. Убедиться, что стоматологические иглы были использованы соответствующим образом.

Перед открытием повернуть колпачок. Удалить колпачок для осуществления инъекции. Присоединить иглу к стоматологическому шприцу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при влажности ниже 70%. Хранить в месте защищенном от попадания влаги.

Генеральный директор



Д.В.Семенов