



В. С. Гуторов

2010г.

**ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России**

**ПАМЯТКА**

**по пользованию бандажами родовыми  
БН2-**

**Регистрационное удостоверение № ФС 01012005/2394-05**

Бандажи родовые предназначены для будущих мам со второй половины беременности с целью снятия избыточного напряжения на переднюю брюшную стенку, крестцово-подвздошное сочленение, а также для профилактики симфизита, образования в послеродовом периоде стрий (растяжек), слабости мышечно-апоневротического каркаса передней брюшной стенки, грыжеобразования. Перед сном бандаж снимается.

**Применение:**

Бандаж родовый надевается на хлопчатобумажное белье в положении «лежа» на спине. Размер бандажа из хлопчатобумажной ткани регулируется шнуровками, расположенными спереди и сзади. Пояс-подхват из ленты эластичной, позволяет удерживать плод в правильном положении.

**Противопоказания:**

Бандажи родовые нельзя применять при:

- локальных дерматитов,
- гнойничковых инфекций.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при  $t\ 40^{\circ}\text{C}$  с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи родовые транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000.

Бандажи родовые должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей родовых требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Зам. зав. ОМР

Т.Ф. Перевезенцева