



Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА по пользованию реклинаторами КР1-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012006/5577- 06

Реклинаторы предназначены для формирования правильной осанки у детей и взрослых.

Применение:

Реклинаторы изготавливаются из хлопчатобумажной ткани или эластичных материалов. Фиксируются реклинаторы при помощи ленты «контакт», при этом осуществляется разведение плечевого пояса с приведением лопаток и действительной коррекцией грудного отдела позвоночника с целью его реклинации, разгрузки тел позвонков без включения работы мышечного аппарата.

Реклинаторы надеваются на хлопчатобумажное белье в положении «стоя» и носятся 3 – 4 часа в сутки (при вынужденном положении тела – работа за письменным столом и т.д.).

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Реклинаторы транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000.

Реклинаторы должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие реклинаторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

И.о. зав. ОМР

Т.Ф. Перевезенцева