



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

2010г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

по пользованию бандажами послеродовыми

БН2-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012005/2394 - 05

Бандажи послеродовые предназначены для женщин в послеродовом периоде с целью поддержания ослабленной передней брюшной стенки, профилактики симфизита, образования стрий (растяжек), слабости мышечно-апоневротического каркаса передней брюшной стенки, грыжеобразования, опущения внутренних органов.

Применение:

Бандаж послеродовой надевается на хлопчатобумажное белье в положении «лежа» на спине. Фиксация бандажа послеродового из хлопчатобумажной ткани регулируется шнуровкой, из эластичных материалов – крючками и петлями на ленте. Бандажом послеродовым необходимо пользоваться в течение всего дня. Перед сном бандаж снимается.

Противопоказания:

Бандажи послеродовые нельзя применять при:

- локальных дерматитов,
- гнойничковых инфекциях.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи послеродовые транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000.

Бандажи послеродовые должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей послеродовых требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Зам. зав. ОМР

Перев

Т.Ф. Перевезенцева

«ОРБИТА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

143968, Московская область, г. Реутов, ул. Некрасова, д. 12
r/s 40702810238120111279 в Сбербанке РФ г. Москва Лефортовское ОСБ № 6901/1668
k/s 30101810400000000225 БИК 044828225
ИНН 5012044153 КПП 504101001

тел./факс (495) 913-24-66, 913-24-66
моб. офис (901) 523-58-49, 523-58-50

Исх.: 0102/01
01.02.2010г.

ФГУП «Московский
протезно-реабилитационный
центр «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

ООО «ОРБИТА» сообщает Вам, что продукция, выпускаемая ФГУП «МПРЦ «Здоровье», пользуется большим спросом у покупателей. В частности изделия для будущих мам:


- Бандаж дородовой;
- Бандаж послеродовой;
- Бюстгальтер дородовой;
- Бюстгальтер послеродовой;

Отмечается высокое качество и надежность изделий. Большой ассортимент и широкий размерный ряд всегда позволяют подобрать нужную модель изделия.

Отзывы покупателей положительные.

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА»


ОРБИТА Петрушин О.Е.

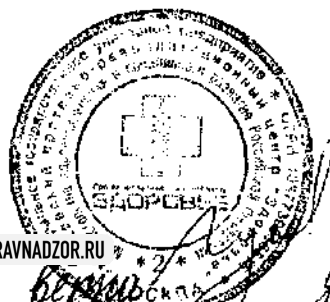



Министерство здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
Федеральное Государственное унитарное
предприятие " Орловское протезно –
ортопедическое предприятие"
(ФГУП " Орловское ПрОП" Минздравсоцразвития России)
302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18
тел./факс (4862) 47-10-78
e-mail: orto @ orel.ru

ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития
России

20.01.2010г. № 14

ФГУП «Орловское ПрОП» Минздравсоцразвития России на протяжении многих лет закупает у Вас бандажи до- и послеродовые, бюстгалтеры до- и послеродовые. Претензий по качеству не имеем.

Директор



Исп. *Павлова Т.И.*

54-49-23

[Signature]
П.А.Боринов



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Копия

директор В.С. Тутсеров

Отзыв на повторовой


Я, Савинова Наталья Владимировна,
проживающая по адресу: Московская
область, г. Истринское ш. Остодская
д 4 в 58, подтверждаю данные:

Уважаемая повторовой базируется, которая
нашего лица быстро портит и имеет
лишнюю, обрывается иррегулярную
фигурную форму, для перемещения
при помощи коррес. (помощи
предотвратить возникновение травм.)
Уважаемая базируется и остается ровной.

04.02.2010

СЗ

Московский протезно-реабилитационный
центр «ЗДОРОВЬЕ»

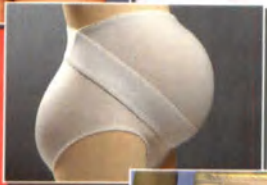

Протезно-реабилитационный центр
ЗДОРОВЬЕ

максимальный выбор
корсетно-бандажных изделий

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский протезно-реабилитационный центр «Здоровье» организовано в 1938 году. Десятки лет предприятие прогрессивно развивалось, совершенствуя материальную базу и накапливая бесценный опыт по оказанию протезно-ортопедической помощи населению.

В последние годы функции ФГУП «МПРЦ «Здоровье» существенно расширились, и сегодня это - Центр, оснащенный новейшим производственным оборудованием, с высококвалифицированным штатом сотрудников, где все усилия направлены на оказание профессиональной протезно-ортопедической помощи населению.

Центр является ведущим федеральным государственным унитарным предприятием России в области разработки и производства бандажных и корсетных изделий ортопедического назначения, в том числе бюстгалтеров, полуграций и купальников для фиксации экзопротеза молочной железы. Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 250 наименований.

По техническим условиям, разработанным ФГУП «МПРЦ «Здоровье», выпускают индивидуальные корсеты, бандажи и комплекты для протезирования молочной железы более 110 протезно-ортопедических предприятий России.

Изделия с маркой ФГУП «МПРЦ «Здоровье» отличает современный дизайн и высокий уровень качества, соответствующий международным стандартам. Широкий ассортимент изделий в сочетании с разнообразием используемых в производстве материалов обеспечивает реабилитацию населения по обширному спектру медицинских показаний. Все изделия имеют регистрационные удостоверения и сертификаты.

Центр «Здоровье» - постоянный участник всероссийских и международных выставок по тематике ортопедии и реабилитации.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье»:

- обеспечивает инвалидов и население г.Москвы и Московской области протезно-ортопедическими изделиями корсетной и бандажной групп, в том числе и по индивидуальным заказам;
- оказывает консультативные услуги;
- проводит комплексную реабилитацию женщин после мастэктомии, включая протезирование;
- поставляет на протезно-ортопедические предприятия России всю номенклатуру своих изделий, как в состоянии полной готовности, так и в виде полуфабрикатов (например, бюстгалтеры и полуграции с незаконченной обработкой застежки и бретелей для более точной посадки изделия на фигуре);
- предлагает комфортные изделия для будущих мам;
- осуществляет выездное обслуживание населения по городу Москве и Московской области.

На базе Центра пациентам оказывают ряд реабилитационных услуг.

Во избежание таких послеоперационных осложнений, как искривление шейно-грудного отдела позвоночника, лимфостаз верхней конечности и т.д., предлагается курс занятий аквааэробикой в бассейне, курсы занятий в зале лечебной физкультуры, определенные виды массажа, а также бандажирование, обертывание, кинезотерапия, аппаратный лимфодренаж.

В рамках комплексной реабилитации женщин после мастэктомии действует кабинет психологической помощи.

В соответствии с требованием времени ассортимент разработанных Центром изделий динамично обновляется. Широкий выбор, оптимальное сочетание преимуществ массового и мелкосерийного производства с индивидуальным изготовлением позволяет ФГУП «МПРЦ «Здоровье» удовлетворять насущные потребности населения и инвалидов в протезно-ортопедических изделиях.

1. Бюстгалтеры и полуграции для фиксации экзопротеза молочной железы	
1.1 Бюстгалтеры и полуграции для фиксации экзопротеза молочной железы (готовые изделия)	3
1.2 Бюстгалтеры и полуграции для фиксации экзопротеза молочной железы в виде полуфабрикатов	9
1.3 Комплекты: бюстгалтеры для фиксации экзопротеза молочной железы и трусы	10
2. Купальники и купальные костюмы для фиксации экзопротеза молочной железы	11
3. Бандажи ортопедические	
3.1 Бандажи ортопедические на нижние конечности	13
3.2 Бандажи ортопедические поддерживающие и фиксирующие на область живота	13
3.3 Бандажи ортопедические для подводного вытяжения позвоночника	16
3.4 Бандажи торакальные ортопедические	16
3.5 Бандажи ортопедические на верхние конечности	17
3.6 Бандажи-грация-трусы ортопедические	17
3.7 Бандажи-трусы ортопедические	17
3.8 Бандажи-пantalоны ортопедические	18
4. Бандажи грыжевые паховые и скротальные индивидуального и массового изготовления	19
5. Изделия для будущих мам	21
6. Корсеты ортопедические	23
7. Реклинаторы (корректоры осанки) для детей и взрослых	26
8. Изделия женские корсетные бытового назначения	27
9. Перчатки кожаные на кисти искусственные и естественные	29

1.1 Бюстгалтеры и полуграции для фиксации экзопротеза молочной железы

Для реабилитации женщин после мастэктомии разработана коллекция бюстгалтеров и полуграций, изготовленных из хлопчатобумажных тканей, эластичных полотен, кружевных полотен, шитья на сетке, трикотажных хлопчатобумажных полотен с лайкрой. Специальный клапан надежно фиксирует экзопротез. При разработке коллекции учтены все существующие формы экзопротезов (натуральной формы, ассиметричные, симметричные, сердцевидные, с удлиненной подмышечной частью, треугольные, накладки).

Сочетание качественных материалов, комфортной формы бюстгалтеров, полуграций и экзопротезов их современный дизайн гарантируют женщине естественную свободу движений, уверенность в любой ситуации, обеспечивает чувство полного комфорта. Коллекция охватывает все размеры и полнотные группы женской фигуры.

Полуграция ЛФ-10 (вариант ЛФ-10И)



Клапаны из трикотажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки и вставки перед из кружевного полотна дублированы ламинированным материалом. ЛФ-10И чашки и вставки перед из кружевного эластичного полотна.

Вставки перед на хлопчатобумажной подкладке. Боковые детали усилены фигурными накладками.

Область декольте средняя.

Бретели разгрузочные на мягкой прокладке из эластичного полотна и ленты бретелечной с регуляторами длины сзади.

Застежка спереди на однорядные крючки и петли на ленте.

Хлопок - 9%, ПА - 82%,
ПУ - 9%

белый
бежевый
● черный

	85	90	95	100
A	*	*	*	*
B	*	*	*	*
C	*	*	*	*
D	*	*	*	*
DD	*	*	*	*

Бюстгалтер ЛФ-20к



Клапаны из хлопчатобумажного трикотажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки из трикотажного эластичного полотна дублированы ламинированным материалом. Боковые детали из трикотажного эластичного полотна. Передняя деталь из трикотажного эластичного полотна на подкладке из трикотажного полотна. Область декольте занижена.

Бретели из ленты бретелечной с регулировкой длины спереди.

Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 20%, ПА - 70%,
ПУ - 10%

белый
бежевый
● черный

	75	80	85	90
O	*	*	*	*
AA	*	*	*	*
A	*	*	*	*
B	*	*	*	*
C	*	*	*	*

Бюстгалтер ЛФ-24к



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки из трикотажного эластичного полотна и кружева. Верхняя отрезная деталь чашек и боковые детали из эластичного полотна. Область декольте занижена.

Бретели из ленты бретелечной с регулировкой длины спереди.

Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 12%, ПА - 78%,
ПУ - 10%

белый
бежевый
● черный

	70	75	80	85	90	95	100
AA			*	*	*	*	*
A		*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*	*
C			*	*	*	*	*
D			*	*	*	*	*
DD			*	*	*	*	*

1

Бюстгалтер ЛФ-17к



Клапаны из трикотажного полотна, втачаны в чашки, бежевого цвета

Чашки и передняя деталь из кружевного эластичного полотна, на подкладке из трикотажного полотна. Область декольте занижена. Боковые детали из кружевного эластичного полотна.

Бретели из эластичного полотна на мягкой прокладке и ленты бретелечной с регулировкой длины сзади.


Застежка сзади на крючки и петли.

ПА - 88%, ПУ - 12%

белый
бежевый
● черный

	70	75	80	85	90	95
O	*	*	*	*	*	*
AA	*	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*

Бюстгалтер ЛФ-23к

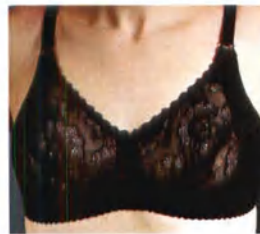

Клапаны из трикотажного полотна, бежевого цвета, втачаны в чашки.

Чашки из кружевного полотна, дублированы ламинированным материалом. Боковые отрезные детали и передняя деталь из кружевного полотна на подкладке из трикотажного полотна. Боковые детали из кружевного полотна. Область декольте занижена.

Бретели из ленты бретелечной с регулировкой длины спереди.

Застежка сзади на крючки и петли.

ПА - 85%, ПУ - 15%

белый
бежевый
● черный
● цветной

	70	75	80	85	90	95
O	*	*	*	*	*	*
AA	*	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*

Бюстгалтер ЛФ-25к



Клапаны комбинированные из трикотажного хлопчатобумажного полотна и трикотажного полотна.

Чашки из вышитого кружева дублированы ламинированным материалом. Передняя деталь из эластичного полотна на подкладке из трикотажного полотна. Боковые детали из эластичного полотна. Область декольте занижена.

Бретели из ленты эластичной образованы петлями спереди и лентой бретелечной с регулировкой длины сзади.


Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 6%, ПА - 84%,
ПУ - 10%

белый
бежевый
● черный

	70	75	80	85	90	95
O	*	*	*	*	*	*
AA	*	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-27к

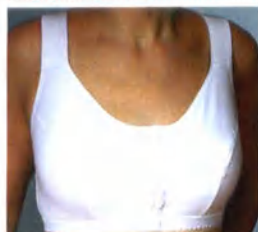


В виде топа, рекомендуется в раннем послеоперационном периоде.
Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна.
Чашки из трикотажного хлопчатобумажного полотна.
Спинка из трикотажного хлопчатобумажного полотна.
Бретели из трикотажного хлопчатобумажного полотна на мягкой прокладке. Область декольте завышена.
Застежка спереди на крючки и петли.

Хлопок - 95%, ПУ - 5%

белый
 бежевый
 ● черный

	70	75	80	85	90	95
AA	*	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*
C		*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-29к (вариант ЛФ-29кИ)

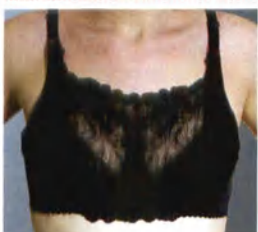

Хлопок - 15%, ПА -76%,
 ПУ-9%

белый
 бежевый
 ● черный

Клапаны из трикотажного полотна, втачаны в чашки.
Чашки дублированы ламинированным материалом. Верхняя отрезная и верхняя боковая детали чашек, а также передняя деталь и вставка из вышивки на сетке.
 В ЛФ-29кИ верхняя отрезная и верхняя боковая детали чашек, а также передняя деталь и вставка из эластичного кружева.
Область декольте завышена.
Бретели из ленты бретельной с регулируемой длины спереди.
Застежка сзади на крючки и петли.

	75	80	85	90	95
AA	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-40к



Хлопок - 63%, ПА-30%,
 ПУ - 7%

белый
 бежевый
 ● черный

Клапаны из хлопчатобумажного трикотажного полотна, втачаны в чашки.
Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани, нижние детали чашек на хлопчатобумажной подкладке. Боковые отрезные детали чашек и боковые детали из эластичного полотна.
 Вставки в области завышенного декольте из эластичного полотна.
Область декольте завышена.
Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди крючками и петлями.
Застежка сзади на крючки и петли.

	85	90	95	100	105	110
A			*	*	*	*
B		*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*
D	*	*	*	*	*	*
DD	*	*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-28к



ПА -85% , ПУ-15%

белый
 бежевый
 ● черный
 ● цветные

Клапаны из трикотажного полотна втачаны в чашки.
Чашки из кружевного полотна, дублированы ламинированным материалом. Область декольте занижена.
Бретели из кружевного полотна на мягкой прокладке.
Застежка сзади на крючки и петли.

	75	80	85	90	95
O					
AA	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-35к (вариант ЛФ-35кИ)



Хлопок - 23%, ПА -66%,
 ПУ-11%

белый
 бежевый
 ● черный

Клапаны из трикотажного полотна, втачаны в чашки.
Чашки дублированы ламинированным материалом. Верхняя и нижняя детали чашек из полотна кружевного эластичного. Передняя и боковые детали бюстгальтера из полотна эластичного. Верхние срезы чашек украшены лентой эластичной отделочной.
Область декольте средняя.
Бретели из ленты бретельной с регулируемой длины спереди.
Застежка сзади на крючки и петли.

	70	75	80	85	90	95
O	*	*	*	*	*	*
AA	*	*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-41к



Хлопок - 26%, ПА - 64%,
 ПУ - 10%

белый
 бежевый
 ● черный
 ● цветной

Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.
Чашки и передняя деталь из кружевного эластичного полотна на подкладке из трикотажного полотна. Боковые детали и верхние отрезные детали чашек из эластичного полотна. Область декольте средняя.
Бретели из эластичного полотна, верхние отрезные детали переходят в бретели и соединяются с бретелями из ленты бретельной с регуляторами длины сзади.
Застежка сзади на крючки и петли.

	65	70	75	80	85	90	95
O		*	*	*	*	*	*
AA	*	*	*	*	*	*	*
A			*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*
C		*	*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-42к



Клапан из хлопчатобумажной ткани.
Чашки из кружевного полотна на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Передняя и боковые детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.
Для лучшего удержания экзопротеза чашка уплотнена косой бейкой.
Бретели из ленты эластичной бретельной с регулировкой длины спереди.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 41%, ПА - 55%,
ПУ - 4%

белый
● черный

	65	70	75	80	85	90	95	100
OO		*						
O	*	*	*					
AA	*	*	*	*	*	*	*	*
A		*	*	*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*	*
C			*	*	*	*	*	*
D				*	*			
DD				*				

Бюстгальтер ЛФ-46к



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.
Чашки из хлопчатобумажной вышитой ткани, нижние детали чашек на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Передние, боковые детали из эластичного полотна. Область декольте завышена.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди, на бретелях 5-тью параллельными закрепками настрочена бретельная лента, за которую пристегиваются пряжки, закрепленные на уступах чашек.

Застежка сзади на 4 крючка и петли, спереди на 7 крючков и петель.

Хлопок - 75%, ПА - 21%,
ПУ - 4% бежевый
белый ● черный

	85	90	95	100	105
A			*	*	*
B		*	*	*	
C	*	*	*		
D	*	*			
DD	*				

Бюстгальтер ЛФ-49кС



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, бежевого цвета, втачаны в чашки.

Чашки из шитья на сетке и трикотажного полотна. Боковые детали из эластичного полотна. Область декольте занижена.

Бретели из вышитого кружева на мягкой прокладке и ленты бретельной с регулировкой длины сзади.

Застежка сзади на крючки и петли.

ПА - 85%, ПУ - 15%
белый
бежевый
● черный
● цветная вышивка

	70	75	80	85	90	95
AA		*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*
C		*	*	*		

Бюстгальтер ЛФ-45к



Клапан из хлопчатобумажной ткани.
Чашки из кружевного полотна на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Передняя и боковые детали из эластичного полотна. Передняя деталь на подкладке из трикотажного полотна. Область декольте средняя.
Для лучшего удержания экзопротеза чашка уплотнена косой бейкой.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются крючками и петлями.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 37%, ПА - 59%,
ПУ - 4%

белый
бежевый
● черный

	85	90	95	100	105	110
A			*	*	*	*
B		*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*
D	*	*	*	*	*	
DD	*	*	*	*		

Бюстгальтер ЛФ-49к



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки из вышитого кружева. Боковые детали из эластичного полотна. Область декольте занижена.

Бретели из вышитого кружева на мягкой прокладке и ленты бретельной с регулировкой длины сзади.

Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 25%, ПА - 68%,
ПУ - 7%

белый
бежевый
● черный

	70	75	80	85	90	95
AA		*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	
C		*	*	*		

Бюстгальтер ЛФ-49кД



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, бежевого цвета, втачаны в чашки.

Чашки из двухцветного кружева и трикотажного полотна. Боковые детали из эластичного полотна. Область декольте занижена.

Бретели из вышитого кружева на мягкой прокладке и ленты бретельной с регулировкой длины сзади.

Застежка сзади на крючки и петли.



ПА - 85%, ПУ - 15%

белый ● черный
бежевый ● цветная вышивка

	70	75	80	85	90	95
AA		*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	
C		*	*	*		

Полуграция ЛФ-60



Клапан из хлопчатобумажной ткани.
Чашки и передние детали из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Верхние отрезные детали чашек и боковые детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.
Бретели из ленты бретельной с регуляторами длины спереди.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 12%, ПА - 78%,
ПУ - 10%
белый
бежевый
● черный

	75	80	85	90
A	*	*		*
B	*	*	*	
C	*			

Полуграция ЛФ-63



Клапан из хлопчатобумажной ткани.
Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Верхние отрезные детали чашек и боковые детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.
Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди крючками и петлями.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 59%, ПА - 34%,
ПУ - 7%
белый
бежевый
● черный

	90	95	100	105	110
A		*	*		
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*
D				*	

Бюстгальтер ЛФ-67к



Клапан из хлопчатобумажной ткани.
Чашки из хлопчатобумажной вышитой ткани и хлопчатобумажной ткани. Передняя и боковые детали из хлопчатобумажной ткани, вставка из эластичного полотна. Область декольте завышена.
Бретели из хлопчатобумажной ткани с прокладкой, выстрочены и регулируются петлями и пуговицами.
Застежка спереди на петли и пуговицы.

Хлопок - 100%
белый
бежевый

	85	90	95	100	105	110
A		*	*	*		
B	*	*	*	*	*	*
C			*	*	*	*
D					*	

Бюстгальтер ЛФ-60к (вариант ЛФ-60КУ)



Клапан из хлопчатобумажной ткани.
Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке. Верхняя отрезная деталь чашек и боковые детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.
Бретели из бретельной ленты с регуляторами длины спереди.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 36%, ПА - 59%,
ПУ - 6%
белый
бежевый
● черный

	65	70	75	80	85	90	95	100
OO		*						
O	*	*	*					
AA	*	*	*	*	*	*	*	
A		*	*	*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*	*
C			*	*	*	*	*	
D				*	*			
DD				*				

Бюстгальтер ЛФ-63к (вариант ЛФ-63КУ)



Клапан из хлопчатобумажной ткани.
Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани, верхние детали отрезные и боковые детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.
Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди крючками и петлями.
Застежка сзади на крючки и петли.

ПА - 72%, ПА - 23%,
ПУ - 5%
белый
бежевый
● черный

	85	90	95	100	105	110
A			*	*	*	
B		*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*
D	*	*	*	*	*	*
DD	*	*	*	*	*	

Бюстгальтер ЛФ-72к



Клапан правого или левого исполнения из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачан в чашку.
Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Верхние, боковые отрезные детали чашек и боковые детали из хлопчатобумажного полотна.
Бретели из ленты бретельной с регулировкой длины спереди.
Застежка сзади на крючки и петли. Область декольте средняя.

Хлопок - 66%, ПА - 28%,
ПУ - 6%
белый
бежевый
● черный

	65	70	75	80	85	90	95	100
OO	*	*						
O	*	*	*					
AA	*	*	*	*	*	*	*	
A		*	*	*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*	*
C				*	*	*	*	
D				*	*			
DD				*				

Бюстгальтер ЛФ-75к



Хлопок - 35%, ПА - 57%,

ПУ - 8%

белый

бежевый

● черный

Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Чашки и передняя деталь из трикотажного полотна, боковые детали и планки чашек из эластичного полотна.

Бретели из ленты бретельной с регуляторами длины спереди.

Застежка сзади на крючки и петли. Область декольте средняя.

	65	70	75	80	85	90
О		*	*			
АА	*	*	*			
А		*	*	*	*	*
В		*	*	*	*	*

Бюстгальтер ЛФ-81к



Хлопок - 100%

белый

бежевый

● черный

Клапан из хлопчатобумажной ткани.


Чашки из хлопчатобумажной ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Передняя деталь, боковые детали и верхние отрезные детали чашек из хлопчатобумажной ткани. Боковые вставки из эластичного полотна. Область декольте средняя.

Бретели разгрузочные из хлопчатобумажной ткани и бретельной ленты с регуляторами длины сзади.

Застежка сзади на крючки и петли.

	70	75	80	85	90	95	100
АА			*	*	*		
А		*	*	*	*	*	*
В	*	*	*	*	*	*	*
С			*	*	*	*	
Д			*	*			
DD			*				

Бюстгальтер ЛФ-83к

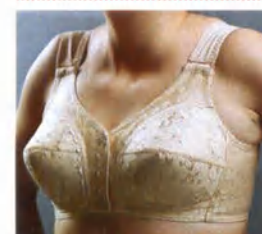

Хлопок - 74%, ПА - 21%,

ПУ - 5%

белый

бежевый

● черный

Клапан из хлопчатобумажной ткани.

Чашки из хлопчатобумажной вышитой ткани на хлопчатобумажной подкладке. Передние и боковые детали из хлопчатобумажного полотна. Вставка сзади из эластичного полотна.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди на петли и пуговицы. Область декольте средняя.

Застежка спереди на пуговицы и петли.

	85	90	95	100	105	110
А			*	*		
В		*	*	*	*	*
С	*	*	*	*	*	*
Д	*	*	*	*	*	*
DD	*	*	*	*		

Бюстгальтер ЛФ-78к



Хлопок - 86%, ПА - 12%,

ПУ - 2%

белый

бежевый

● черный

Клапан из хлопчатобумажной ткани.


Чашки из хлопчатобумажной ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Верхние отрезные детали чашек и передние детали из хлопчатобумажной ткани. Боковые детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.

Бретели из бретельной ленты с регуляторами длины спереди.

Застежка сзади на крючки и петли.

	65	70	75	80	85	90	95	100
ОО	*	*						
О		*	*					
АА	*	*	*	*	*	*		
А		*	*	*	*	*	*	*
В		*	*	*	*	*	*	*
С				*	*	*	*	
Д				*	*			
DD				*				

Бюстгальтер ЛФ-82к

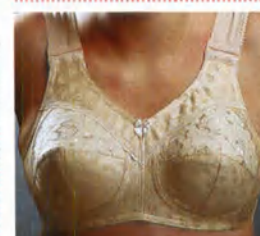

Хлопок - 83%, ПА - 14%,

ПУ - 3%

белый

бежевый

● черный

Клапан из хлопчатобумажной ткани.

Чашки из хлопчатобумажной вышитой ткани и хлопчатобумажной ткани, на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Боковые детали, передняя деталь, верхняя отрезная деталь чашки, боковая отрезная деталь из хлопчатобумажной ткани. Вставка боковой детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди крючками и петлями.

Застежка сзади на крючки и петли.

	85	90	95	100	105	110
А			*	*		
В		*	*	*	*	*
С	*	*	*	*	*	*
Д	*	*	*	*	*	*
DD	*	*	*	*		

Бюстгальтер ЛФ-88к



Хлопок - 43%, ПА - 43%,

ПУ - 14%

белый

бежевый

● черный

Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки из эластичного полотна, верхняя отрезная деталь из кружева эластичного. Область декольте завышена.

Бретели из эластичного полотна на мягкой прокладке и ленты бретельной с регулировкой длины сзади.

Застежка сзади на крючки и петли.

	75	80	85	90
А	*	*	*	*
В	*	*	*	*
С	*	*	*	*
Д		*		*

Бюстгальтер ЛФ-89к



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.
Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани, верхняя отрезная деталь чашки из эластичного полотна, переходящая в бретель, боковые детали из эластичного полотна.
Бретели разгрузочные из эластичного полотна. Область декольте средняя.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 70%, ПА - 24%,
ПУ - 6%

белый
бежевый
● черный

	65	70	75	80	85	90	95	100
O		*	*					
AA	*	*	*	*	*	*	*	
A			*	*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*	*
C			*	*	*	*	*	*
D				*	*			
DD			*					

Бюстгальтер ЛФ-92кС



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, бежевого цвета, втачаны в чашки.

Чашки из шитья на сетке и трикотажного полиамидного полотна на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Верхняя отрезная деталь чашки и боковая отрезная деталь, боковые детали из эластичного полотна. Вставка в области завышенного декольте из шитья на сетке.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна на мягкой прокладке, регулируются спереди крючками и петлями.

Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 43%, ПА - 49%,
ПУ - 8%

белый
● черный
● цветная вышивка

	85	90	95	100	105	110
A	*		*	*	*	*
B		*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*
D	*	*	*	*	*	*
DD	*	*	*	*	*	

Бюстгальтер ЛФ-95к



Клапаны из трикотажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки и передняя деталь из вышитого кружева. Боковые детали из эластичного полотна. Область декольте занижена.

Бретели широкие из вышитого кружева на мягкой прокладке и ленты бретельной с регулировкой длины сзади.


Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 31%, ПА - 64%,
ПУ - 5%

белый
бежевый
● черный

	70	75	80	85	90	95	100
AA			*	*	*	*	*
A		*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*	*
C		*	*	*	*	*	
D			*	*			
DD			*				

Бюстгальтер ЛФ-92к

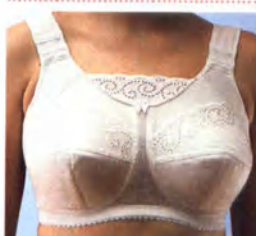

Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки из вышитого кружева на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Верхняя отрезная деталь чашки и боковая отрезная деталь, боковые детали из эластичного полотна. Вставка в области завышенного декольте из вышитого кружева.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди крючками и петлями.

Застежка сзади на крючки и петли.



Хлопок - 43%, ПА - 49%,
ПУ - 8% бежевый
белый ● черный

	85	90	95	100	105	110
A	*		*	*	*	*
B		*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*
D	*	*	*	*	*	*
DD	*	*	*	*	*	

Бюстгальтер ЛФ-94к



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, бежевого цвета, втачаны в чашки.

Чашки из эластичного полотна. Верхние отрезные детали чашек из эластичного кружева. Боковые и боковые отрезные детали из эластичного полотна. Область декольте завышена.

Бретели из эластичного кружева на мягкой прокладке и ленты бретельной с регулировкой длины сзади.

Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 29%, ПА - 59%,
ПУ - 12%

белый
бежевый
● черный

	70	75	80	85	90	95
AA		*	*	*	*	*
A	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	

Бюстгальтер ЛФ-98к



Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна, втачаны в чашки.

Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани. Верхние отрезные и боковые отрезные, боковые детали из эластичного полотна. Область декольте средняя.

Бретели из ленты бретельной с регулировкой длины спереди.

Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 74%, ПА - 20%,
ПУ - 6%

белый
бежевый
● черный

	65	70	75	80	85	90	95	100
OO		*						
O	*	*	*					
AA	*	*	*	*	*	*	*	
A		*	*	*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*	*
C			*	*	*	*	*	
D				*	*			
DD				*				

1.2 Бюстгальтеры и полуграции для фиксации экзопротеза молочной железы в виде полуфабрикатов

Данные модели бюстгальтеров и полуграций из хлопчатобумажных тканей разработаны для женщин после мастэктомии и изготавливаются центром в виде полуфабрикатов: бретели, клапан, петли и пуговицы в упаковке прикреплены к изделию. В полуфабрикатах остаются необработанными срезы под застежку, что позволяет более точно на примерке произвести подгонку изделия по фигуре, обеспечивая женщинам удобство и комфорт в носке.

Бюстгальтер ЛФ-43Пк




Хлопок - 100%
белый
бежевый
● черный

РАЗМЕРЫ - с 0 по 14

Бюстгальтер из хлопчатобумажной ткани, чашки на хлопчатобумажной подкладке.
Бретели из основной ткани с мягкой прокладкой, не притачаны.
Застежка сзади, срезы под застежку не обработаны.
Бретели, клапан, планки под застежку, петли, пуговицы или пряжки упакованы в полиэтиленовый пакет. Область декольте средняя.

Полуграция ЛФ-43П

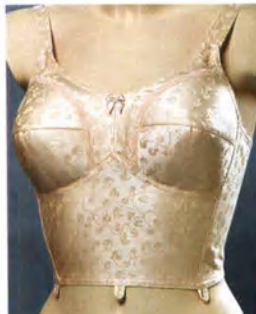

Хлопок - 100%
белый
бежевый
● черный

РАЗМЕРЫ - с 0 по 14

Полуграция из хлопчатобумажной ткани, чашки на хлопчатобумажной подкладке.
Бретели из основной ткани с мягкой прокладкой, не притачаны.
Застежка сзади, срезы под застежку не обработаны.
Бретели, клапан, планки под застежку, петли, пуговицы или пряжки упакованы в полиэтиленовый пакет. Область декольте средняя.

Бюстгальтер ЛФ-50Пк



Хлопок - 100%
белый
бежевый
● черный

РАЗМЕРЫ - с 0 по 11

Бюстгальтер из хлопчатобумажной ткани, чашки на хлопчатобумажной подкладке.
Бретели из основной ткани с прокладкой притачаны к чашкам.
Застежка спереди на петли и пуговицы.
Боковые детали сзади не стачаны.
Клапан упакован в полиэтиленовый пакет. Область декольте средняя.

Полуграция ЛФ-50П



Хлопок - 100%
белый
бежевый
● черный

РАЗМЕРЫ - с 0 по 11

Полуграция из хлопчатобумажной ткани, чашки на хлопчатобумажной подкладке.
Бретели из основной ткани с прокладкой притачаны к чашкам.
Боковые детали сзади не стачаны.
Застежка спереди на петли и пуговицы.
Клапан упакован в полиэтиленовый пакет. Область декольте средняя.

Бюстгальтер ЛФ-51Пк



Хлопок - 72%, ПА - 23%,
ПУ - 5%
белый
бежевый
● черный

	65	70	75	80	85	90	95	100
OO		*						
O	*	*	*					
AA	*	*	*	*	*	*	*	*
A		*	*	*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*	*
C				*	*	*	*	
D				*	*			
DD				*				

Бюстгальтер ЛФ-60Пк (вариант ЛФ-63Пк)



Хлопок - 72%, ПА - 23%,
ПУ - 5%
белый
бежевый
● черный

	65	70	75	80	85	90	95	100
OO		*						
O	*	*	*					
AA	*	*	*	*	*	*	*	*
A		*	*	*	*	*	*	*
B		*	*	*	*	*	*	*
C			*	*	*	*	*	
D				*	*			
DD				*				

Бюстгальтеры, см. страницу 6 ЛФ-60к, ЛФ-63к, по желанию заказчика выпускаются с разной степенью готовности — в двух вариантах.

Комплекты: бюстгалтеры для фиксации экзопротеза молочной железы и трусы 1.3

Для улучшения обслуживания потребителей и удовлетворения самого взыскательного вкуса центр «Здоровье» разработал и внедрил в производство ряд моделей бюстгалтеров и трусиков таким образом, что из них можно составить комплекты.

Бюстгалтер ЛФ-17к



Бюстгалтер: смотреть стр. №3.
Трусы из эластичного полотна, задняя деталь из трикотажного хлопчатобумажного полотна. Передние боковые вставки из кружевного эластичного полотна.
Ластовица из основного материала с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна.

ПА-86%, ПУ-14%
белый
бежевый
● черный

Размеры - с 70-95 по 95-120

Трусы ЗТ-17

1

Бюстгалтер ЛФ-20к



Бюстгалтер: смотреть стр. №3.
Трусы из эластичного полотна, задняя деталь из трикотажного хлопчатобумажного полотна.
Ластовица из основного материала с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна.

Хлопок-20%, ПА-70%, ПУ-10%
белый
бежевый
● черный

Размеры - с 70-95 по 95-120

Трусы ЗТ-20

Бюстгалтер ЛФ-28к



Бюстгалтер: смотреть стр. №4.
Трусы из трикотажного полотна, задняя деталь из трикотажного хлопчатобумажного полотна, передние вставки из эластичного кружева.
Ластовица из основного материала, подкладка ластовицы из хлопчатобумажного трикотажного полотна.

Хлопок-6%, ПА-84%, ПУ-10%
белый
бежевый
● черный
● цветные

Размеры - с 70-95 по 95-120

Трусы ЗТ-28

Бюстгалтер ЛФ-41к



Бюстгалтер: смотреть стр. №4.
Трусы из эластичного полотна, задняя деталь из трикотажного хлопчатобумажного полотна, передние вставки из кружевного эластичного полотна.
Ластовица из основного материала с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна.

Хлопок-6%, ПА-82%, ПУ-12%
белый
бежевый
● черный
● цветные

Размеры - с 65-90 по 90-115

Трусы ЗТ-41

Бюстгалтер ЛФ-49кС



Бюстгалтер: смотреть стр. №5.
Трусы из трикотажного полотна, задняя деталь из трикотажного хлопчатобумажного полотна. Передние боковые вставки из кружева на сетке могут изготавливаться из трикотажного полотна с вышивкой на сетке.
Ластовица и подкладка ластовицы из трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Хлопок-25 %, ПА-68%, ПУ-7%
белый
бежевый
● черный

Размеры - с 70-95 по 90-115

Трусы ЗТ-49С

Бюстгалтер ЛФ-75к



Бюстгалтер: смотреть стр. №7.
Трусы из эластичного полотна, задняя деталь из трикотажного хлопчатобумажного полотна. Передняя деталь отделана эластичным кружевом.
Ластовица из основного материала с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна.

Хлопок-35 %, ПА-57%, ПУ-8%
белый
бежевый
● черный

Размеры - с 70-95 по 90-115

Трусы ЗТ-75

ЛФ-49кД - с вышивкой цветными нитками на трикотажном полотне

2. Купальники и купальные костюмы для фиксации экзопротеза молочной железы

Для водных процедур разработана коллекция купальников с карманами из трикотажного полотна для фиксации экзопротезов.

В ассортименте предлагаются разнообразные модели на любую фигуру в широкой цветовой гамме. Удобная и элегантная конструкция купальников позволяет скрыть послеоперационные последствия.

Модная палитра красок эластичных трикотажных полотен, современный дизайн и эргономичная конструкция обеспечивают женщинам чувство комфорта и удобство в эксплуатации купальников.

Купальник K-01 (вариант K-01H)



Карманы с умеренной фиксацией экзопротеза.

Купальник комбинированный. Перед с рельефами, с вставками из гладкокрашенного полотна, средняя деталь переда из набивного полотна, декольте среднее. На боковых деталях фигурные вырезы. Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100

2

Купальник K-02



Карманы с умеренной фиксацией экзопротеза.

Купальник из набивного полотна. Перед с фигурным подрезом, от подреза мягкие встречные складочки, декольте среднее. На боковых деталях фигурные вырезы. Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100

Купальный костюм K-06



Карманы с умеренной фиксацией экзопротеза.

Костюм из набивного полотна, состоит из бюстгалтера и шорт. Перед бюстгалтера с рельефами, декольте среднее. Передние детали бюстгалтера и шорт отделаны вставками из гладкокрашенного полотна.

Застежка бюстгалтера сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%.
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100

Купальный костюм K-07



Карманы с умеренной фиксацией экзопротеза.

Костюм из набивного полотна, состоит из бюстгалтера и трусов. Перед бюстгалтера с рельефами, декольте среднее. Передние детали бюстгалтера и трусов отделаны вставками из гладкокрашенного полотна.

Застежка бюстгалтера сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100

Купальник K-35



Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.

Купальник из набивного полотна. Перед на кокетке фигурной формы, с втачными чашками, от швов втачивания чашек по три мягких складочки, декольте среднее.

Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120

Купальник K-50



Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.

Купальник комбинированный. Перед с рельефами, по линии рельефов фигурные вставки, декольте завышенное. Детали переда из набивного полотна, спинка и вставки из гладкокрашенного.

Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100

Купальный костюм К-54



Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.
Костюм из набивного полотна, состоит из бюстгалтера и шорт. Перед бюстгалтера с рельефами, декольте среднее.
Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100

Купальный костюм К-55




Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.
Костюм из набивного полотна, состоит из бюстгалтера и трусов. Перед бюстгалтера с рельефами, декольте среднее.
Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100

Купальник К-59




Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.
Купальник из набивного полотна. Перед с рельефами, декольте завышенное.
Застежка сзади на пряжку.

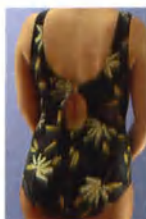

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100, 104, 108

Купальник К-60

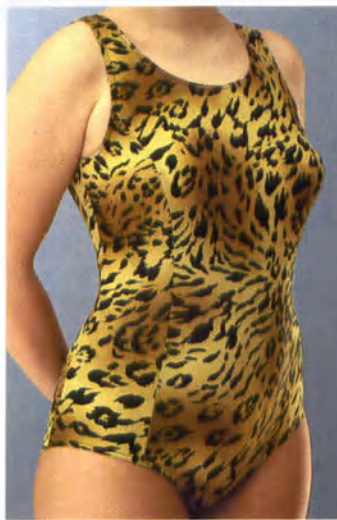

Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.
Купальник из набивного полотна. Перед с рельефами, декольте среднее. Спинка со швом посередине. Без застежки.

ПА - 80%, ПУ - 20%
РАЗМЕРЫ - 88, 92, 96, 100, 104, 108

Купальный костюм К-61



Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.
Костюм из набивного полотна, состоит из бюстгалтера и трусов. Перед бюстгалтера с вытачками, декольте завышенное.
Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%.
РАЗМЕРЫ - 96, 100, 104, 108

Купальный костюм К-62



Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза.
Костюм из набивного полотна, состоит из бюстгалтера и шорт. Перед бюстгалтера с вытачками, декольте завышенное.
Застежка сзади на пряжку.

ПА - 80%, ПУ - 20%.
РАЗМЕРЫ - 96, 100, 104, 108

3. Бандажи ортопедические

Бандажная группа изделий включает в себя бандажи ортопедические поддерживающие и фиксирующие на область живота; бандажи торакальные; на коленные и голеностопные суставы, на верхнюю конечность; комплекты для подводного вытяжения позвоночника; бандажи-пantalоны, бандажи-трусы, бандаж-грация-трусы. Они имеют различное назначение, и используются для стабилизации капсульно-связочного аппарата и мышечно-апоневротических структур в послеоперационном периоде, при опущении почек (нефроптозе) и других органов брюшной полости, с целью профилактики и устранения грыжевого дефекта и удержания мышц передней брюшной стенки в физиологически выгодном положении; после травм и операций на суставах; при артритах, бурситах и других воспалительных заболеваниях суставов; для улучшения лимфодренажной функции верхних конечностей; для снижения болевого синдрома и т.д.

Противопоказанием для применения бандажей является:

- наличие открытых ран (потертости, порезы и т.д.);
- дерматит;
- гнойничковая инфекция.
- выраженная сердечно - легочная недостаточность - для бандажей торакальных.

При производстве бандажей применяются современные ткани и эластичные полотна из смешанных, синтетических и натуральных волокон, полотна и ленты эластичные бандажные, используется современная фурнитура и отделочные материалы. Весь ассортимент выпускается на базе новейшего оборудования, по передовым технологиям и соответствует высоким стандартам качества.

Индивидуальный подбор, изготовление необходимого пациенту изделия, подгонку его по фигуре выполняют опытные врачи и техники-протезисты, владеющие теоретическими знаниями и практическими навыками обслуживания пациентов с различными видами заболеваний и патологий.

Бандаж ортопедический на коленный сустав БНЗ-03



Назначение: для фиксации коленного сустава при легкой нестабильности, артрозо-артритах, бурситах, гемартрозах.

Бандаж из ортопрена (неопрена), на шов стачивания и вытачки настроена эластичная тесьма, в подколенной области отверстия для воздухообмена.

Неопрен - 80%, нейлон - 20%
РАЗМЕРЫ - с 33 - 35 по 56 - 60

3

Бандаж ортопедический на коленный сустав БНЗ-04



Назначение: для фиксации коленного сустава при легкой нестабильности, артрозо-артритах, бурситах, гемартрозах.

Бандаж из ортопрена (неопрена), на шов стачивания и вытачки настроена эластичная тесьма, в подколенной области отверстия для воздухообмена. Разъемный.



Неопрен - 80%, нейлон - 20%.
РАЗМЕРЫ - с 33 - 35 по 56 - 60

Бандаж ортопедический на голеностопный сустав БНЗ-64



Неопрен - 80%, нейлон - 20%
РАЗМЕРЫ - с 22 - 25 по 30 - 33

Назначение: для профилактики травм во время занятия спортом, нестабильность голеностопного сустава легкой и средней степени, состояние после травм капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава, артрозы, артриты, теносиновиты, ахиллобурситы.

Бандаж из ортопрена (неопрена) разъемный. Передний шов стачан с применением эластичной тесьмы.

Застежка сзади на ленту «контакт».

Бандаж ортопедический поддерживающий (детский) БНЗ-05



Хлопок - 100%.
РАЗМЕРЫ - по меркам заказчика

Назначение: для поддержания передней брюшной стенки в послеоперационном периоде с целью предотвращения образования послеоперационной грыжи. В случае наличия грыжевых дефектов для их компенсации.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани с планшетами и шнуровкой сзади. Спереди пояс-подхват из ленты эластичной бандажной ш. 50 мм, в боках вставки из ленты эластичной бандажной. Изготавливается в индивидуальном производстве.

Застежка сбоку на бандажные петли и пуговицы.

Бандаж ортопедический поддерживающий БНЗ-12



Хлопок - 100%.
РАЗМЕРЫ - с 70 по 105

Назначение: с целью фиксации прямой кишки при ее выпадении.
Бандаж из хлопчатобумажной ткани состоит из пояса и мягкой прокладки с 2-мя подбедренниками, которые пристегиваются к поясу. На прокладку надевается чехол из полиэтиленовой пленки.
Застежка на две обметанные петли и пуговицы.

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-40



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - по меркам
заказчика, в малых размерах.

Назначение: с целью фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки при опущении органов брюшной полости, малого таза, при наличии грыж и с целью профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке с планшетами и подхватом шириной 80 мм, сзади шнуровка. По желанию пациента бандаж может комплектоваться прокладкой, подбедренниками, чулкодержателями.

Застежка сбоку (слева или справа) на бандажные петли и пуговицы.

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-45А, БНЗ-145А



Хлопок - 100%.
РАЗМЕРЫ - по меркам
заказчика

Назначение: с целью фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки. При наличии грыж области живота больших размеров (БНЗ-45) и гигантских размеров (БНЗ-145).

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке из основной ткани. Аналогичен БНЗ-41, только на более сложные, гигантские вентральные грыжи. Изделие выпускается в индивидуальном производстве. По желанию пациента изделия комплектуются прокладкой, чулкодержателями, двойным подхватом шириной 13 см.

Застежка сбоку на бандажные петли и пуговицы.

3

Бандаж ортопедический поддерживающий БНЗ-39



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - по меркам
заказчика.

Назначение: с целью фиксации области почек при их опущении, для профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке, с завышенной спинкой, с планшетами и подхватом шириной 80 мм, со шнуровкой сзади. По желанию пациента бандаж может комплектоваться прокладкой, подбедренниками, чулкодержателями.

Застежка сбоку на бандажные петли и пуговицы на тесьме.

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-41 (вариант БНЗ-41м, БНЗ-09)



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - по меркам
заказчика

Назначение: с целью фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки при опущении органов брюшной полости, малого таза, при наличии грыж и с целью их профилактики.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке из основной ткани (в БНЗ-41м - из ситца). По желанию пациента изделие комплектуется прокладкой, подбедренниками, чулкодержателями, прокладкой резиновой. Бандаж БНЗ-09 отличается тем, что в боках двойные вставки из ленты эластичной бандажной. Изделия выпускаются в индивидуальном производстве. **Застежка** сбоку на бандажные петли и пуговицы.

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-51-1



ПЭ - 50%, ПП - 50%
РАЗМЕРЫ - с 70 - 98
по 150 - 158

Назначение: для фиксации мышечно-апоневротических структур с целью устранения грыжевого дефекта, при грыжах: послеоперационных, диафрагмальных, пупочных, а также с целью предотвращения грыж в послеоперационном периоде.

Бандаж из ленты эластичной корсетной. Состоит из основной детали, на заднюю часть которой по обе стороны от середины настроена двумя рядами тесьма, под тесьму вставлены планшеты.

Застежка спереди на ленту «контакт».

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-52АР (вариант БНЗ-52А)



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - с 70 - 80
по 110 - 120

Назначение: при опущении внутренних органов, в послеоперационный период, при малых послеоперационных грыжах.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке, со шнуровкой сзади. Боковые детали из ленты эластичной корсетной. Посередине передней части пояс-подхват, планшетки. По нижнему краю пришиты пуговицы для пристегивания прокладки и чулкодержателей. Изделие комплектуется чулкодержателями и прокладкой, выпускается в массовом производстве.

Застежка сбоку (слева) на бандажные петли и пуговицы.

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-60



ПЭ - 50%, ПП - 50%
РАЗМЕРЫ - с 70 - 78
по 110 - 118
белый бежевый



Назначение: для фиксации мышечно-апоневротических структур с целью устранения грыжевого дефекта при грыжах послеоперационных, диафрагмальных, а также с целью предотвращения грыж в послеоперационном периоде.

Бандаж из ленты эластичной корсетной, задняя часть уплотнена планшетами.

Застежка спереди на ленту «контакт».

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-81-1



ПЭ - 50%, ПП - 50%
РАЗМЕРЫ - с 70 - 78
по 110 - 118

Назначение: в послеоперационный период на брюшную полость и при грыжах послеоперационных, диафрагмальных.

Бандаж из эластичной резины корсетной, задняя часть уплотнена планшетами.

Застежка спереди на ленту «контакт», протетую в рамки.

3

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-55А



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - с 69 - 89
по 117 - 137

Назначение: для фиксации тазового кольца при расхождении лонных костей, травмах костей малого таза.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке из основной ткани со шнуровкой сзади. Средняя деталь переда выстрочена с накладной деталью. Подхват двойной из основной ткани, пристегивается на ленту «контакт» через рамки.

Застежка слева на бандажные петли и пуговицы на тесьме.

Бандаж ортопедический поддерживающий БНЗ-76АР (вариант БНЗ-76А)



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - с 65 - 85
по 100 - 120

Назначение: с целью фиксации области почек при их опущении, для профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке, сзади шнуровка, посередине передней части пояс-подхват. Изделие изготавливается в массовом производстве, комплектуется эластичными подбедренниками.

Застежка слева на бандажные петли и пуговицы.

Бандаж ортопедический фиксирующий БНЗ-106А



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - по меркам
заказчика

Назначение: для предотвращения образования грыжи в области вывода искусственного ануса, а также фиксации калоприемника.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани на подкладке, со шнуровкой сзади, на передней части обработано отверстие по местоположению стомы. Посередине переда притачан пояс-подхват из ленты эластичной бандажной. По желанию пациента изделие может комплектоваться съемными чулкодержателями, прокладкой, подбедренниками, помочами. Выпускается в индивидуальном производстве.

Застежка сбоку на бандажные петли и пуговицы на тесьме.

Бандаж на нижние конечности ортопедический для подводного вытяжения позвоночника БНЗ-27А



Хлопок - 100%
РАЗМЕР - универсальный

Назначение: для подводного вытяжения позвоночника.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани, состоит из двух основных и соединительной деталей. Поперек основных деталей до середины настрочены по два отрезка ленты протезной с двумя полукольцами. Соединительная деталь с закрепленной на ней шлёмкой настрочена посередине основных деталей.

Застежка на протезную ленту через два полукольца.

Бандаж-пояс ортопедический для подводного вытяжения позвоночника БНЗ-29А



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - с 88 по 128

Назначение: для подводного вытяжения позвоночника.

Бандаж-пояс из хлопчатобумажной ткани со шнуровкой по бокам. На переднюю и заднюю части настрочена лента протезная с полукольцами.

3 Бандаж грудной ортопедический для подводного вытяжения позвоночника БНЗ-28А



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - с 88 по 128

Назначение: для подводного вытяжения позвоночника.

Бандаж из хлопчатобумажной ткани со шнуровкой по бокам. На задние детали настрочены лямки из ленты протезной с полукольцами. Застежка спереди на ленту протезную через два полукольца.

Бандаж торакальный ортопедический БНЗ-59



Хлопок - 23%, искусственное
волокно - 34%, ПА - 27%,
ПУ - 16%
РАЗМЕРЫ - с 84 по 124
белый
бежевый

Назначение: после операции на сердце, при травмах грудной клетки.

Бандаж из ленты эластичной корсетной с планшетами сзади. Помочи из ленты эластичной корсетной пристегиваются спереди на ленту «контакт»

Застежка спереди на ленту «контакт».

Бандаж торакальный ортопедический БНЗ-77



ПА - 46%, ПУ - 24%,
вискоза - 30%
РАЗМЕРЫ - с 80 по 115



Назначение: с целью фиксации реберно-мышечного каркаса после операции на грудной клетке, на сердце, при травмах грудной клетки. Бандаж из эластичного полотна с бретелями, которые пристегиваются спереди на ленту «контакт», передняя часть с «чашками» из мягкого эластичного полотна.

Застежка спереди на ленту «контакт» через две рамки.

Бандаж торакальный ортопедический БНЗ-78



ПА - 89%, ПУ - 11%
РАЗМЕРЫ - с 84 по 124
(по обхвату груди)



Назначение: с целью фиксации реберно-мышечного каркаса после операции на грудной клетке, на сердце, при травмах грудной клетки. Бандаж из ленты эластичной корсетной с рельефами спереди и планшетами сзади.

Бандаж ортопедический на верхнюю конечность БНЗ-11 и БНЗ-13



ПА - 80%, ПУ - 20%.

РАЗМЕРЫ - в индивидуальном производстве - по меркам заказчика, в массовом производстве - 00 - 6

Назначение: с целью создания компрессии на отечную руку и улучшения лимфотического оттока.

Бандаж из эластичного полотна, БНЗ-11 - с 5-тью укороченными пальцами, БНЗ-13 - с укороченным одним большим пальцем, фиксируется на плече эластичной лентой.

Бандаж-грация-трусы ортопедический БНЗ-46-1



Назначение: при опущении внутренних органов, птозировании живота, диафрагмальных грыжах, при высоких послеоперационных швах, в качестве профилактики грыжеобразования.

Бандаж из хлопчатобумажных тканей и эластичного полотна с ластовицей, пристегивающейся спереди на крючки и петли.

Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке. Боковые, задняя деталь и ластовица из эластичного полотна.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди крючками и петлями.

Хлопок - 40%, ПА - 50%,
ПУ - 10%
РАЗМЕРЫ - с 75 - 100
по 110 - 130
РОСТ - 158 - 164, 170 - 176
бежевый ● черный

	80	85	90	95	100	105	110
AA							*
A	*	*	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*	*

Бандаж-грация-трусы БНЗ-79-1



Назначение: при опущении внутренних органов, птозировании живота, диафрагмальных грыжах, при высоких послеоперационных швах (после холецистэктомии, операций на почках) в качестве профилактики грыжеобразования.

Бандаж из хлопчатобумажных тканей и эластичного полотна с ластовицей из эластичного полотна, пристегивающейся спереди на крючки и петли. Боковые детали уплотнены накладками из эластичного полотна.

Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке. Верхние отрезные детали чашек, задние и боковые детали из эластичного полотна.

Бретели из ленты бретельной с регулировкой длины спереди.

Хлопок - 40%, ПА - 50%,
ПУ - 10%
РАЗМЕРЫ - с 75 - 100
по 100 - 120
РОСТ - 158 - 164, 170 - 176
бежевый ● черный

	80	85	90	95	100
A	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*

Бандаж-грация-трусы ортопедический БНЗ-26



Назначение: при опущении внутренних органов, птозировании живота, диафрагмальных грыжах, при высоких послеоперационных швах (после холецистэктомии, операций на почках) в качестве профилактики грыжеобразования. **Бандаж** из эластичного полотна и хлопчатобумажной ткани с ластовицей, пристегивающейся спереди на крючки и петли. Передняя деталь уплотнена накладками из основного полотна. **Чашки** из эластичного полотна на подкладке из хлопчатобумажной ткани. Верхние отрезные детали чашек, задние и передние детали из эластичного полотна. **Бретели** из ленты бретельной с регулировкой длины спереди.

Хлопок - 5%, ПА - 60%, ПУ - 35%.
рост - 158 - 164, 170 - 176

РАЗМЕРЫ - с 75 - 100 по 100 - 120

бежевый ● черный ● цветная вышивка

	80	85	90	95	100
A	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*

Бандаж-грация-трусы БНЗ-75-1




Назначение: при опущении внутренних органов, птозировании живота, диафрагмальных грыжах, при высоких послеоперационных швах (после холецистэктомии, операций на почках) в качестве профилактики грыжеобразования.

Бандаж из эластичного полотна с ластовицей, пристегивающейся к нижнему срезу спереди на крючки и петли. Передние и задние детали уплотнены накладками из эластичного полотна.

Бретели из ленты бретельной с регулировкой длины спереди.

Застежка спереди на замок «молнию», крючки и петли.

Хлопок - 20%, ПА - 59%,
ПУ - 21%
РАЗМЕРЫ - с 75 - 100
по 95 - 115
РОСТ - 158 - 164, 170 - 176
бежевый ● черный

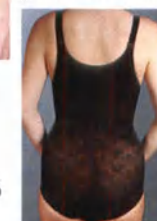

Бандаж-трусы ортопедический БНЗ-48-1



Хлопок - 20%, ПА - 59%,
ПУ - 21%
РАЗМЕРЫ - с 65 - 70
по 110 - 130
бежевый



Назначение: с целью фиксации области почек при их опущении, для профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде и грыжах белой линии живота.

Бандаж из эластичного полотна с ластовицей, пристегивающейся на крючки и петли. Подхваты из основной ткани фигурной формы, застегиваются на крючки и петли. Средняя деталь спинки и передняя двойные, боковые - с накладками из основной ткани; в боковых швах и на спинке мягкие планшеты.

Бандаж-трусы ортопедический БНЗ-48-2У



Хлопок - 20%, ПА - 60%,
ПУ - 20%

РАЗМЕРЫ - с 65 - 90 по
85 - 110

бежевый ● черный

Назначение: с целью фиксации области почек, мышечно-апоневрических структур передней брюшной стенки, при опущении органов брюшной полости, малого таза, при наличии грыж а также с целью профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде.

Бандаж из эластичного полотна с ластовицей, пристегивающейся к нижнему срезу на крючки и петли. Средние детали переда и спинки - двойные. На боковые детали переда и спинки настроены двойные подхваты, застегивающиеся на крючки и петли. Дополнительный подхват сверху позволяет усилить прилегание бандажа в области почек. По бокам и на средней детали спинки вставлены мягкие планшеты. Боковые детали переда и спинки уплотнены накладками из основной ткани.

Застежка на левой боковой детали переда на крючки и петли.



Бандаж-трусы ортопедический БНЗ-62-1



Хлопок - 25%, ПА - 70%,
ПУ - 5%

РАЗМЕРЫ - с 75 - 95
по 120 - 135

бежевый

Назначение: для элевации опущенного живота, при ослаблении мышц брюшной стенки живота и для реабилитации в послеоперационный период на органах брюшной полости.

Бандаж из эластичного полотна и трикотажного хлопчатобумажного полотна, с ластовицей на подкладке, пристегивающейся к нижнему срезу на крючки и петли. Детали переда и спинки завязаны.

Застежка спереди на замок «молния» и крючки и петли.



Бандаж-панталоны ортопедический БНЗ-57-1 (вариант БНЗ-57-1У)



хлопок - 20%, ПА - 59%,
ЕА - 21%

РАЗМЕРЫ - с 75 - 100
по 115 - 135

бежевый

Назначение: с целью фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки, малого таза в послеоперационный период, при послеоперационных и пупочных грыжах.

Бандаж из эластичного полотна с фигурными накладками спереди. Подхват из двух частей застегивается на крючки и петли. Передняя часть подхвата крепится к переду на ленту «контакт», задняя - настроена.

БНЗ-57-1У - с увеличенными накладками спереди.

Бандаж-трусы ортопедический БНЗ-56-1



ПА - 82%, ПУ - 18%

РАЗМЕРЫ - с 65 - 90
по 115 - 135

бежевый ● черный

Назначение: при опущении органов малого таза, в послеоперационный период, при наличии послеоперационных грыж и пупочных малых размеров.

Бандаж из эластичного полотна с притачной ластовицей. Ластовица уплотнена дополнительной деталью. Передняя деталь - фигурными накладками из основной ткани.

Бандаж-трусы ортопедический БНЗ-74-1 (вариант БНЗ-74-1У)



ПА - 82%, ПУ - 18%

РАЗМЕРЫ - с 75 - 100

по 115 - 135, полноты II, III
бежевый

Назначение: опущение органов брюшной полости, послеоперационный период, при послеоперационных, пупочных грыжах.

Бандаж-трусы из эластичного полотна, все детали двойные. Подхват из ленты эластичной бандажной из 2-х частей, которые застегиваются между собой на крючки и петли. Передняя часть подхвата крепится к переду на ленту «контакт», задняя - настроена.

БНЗ-74-1У - застежка ластовицы спереди на крючки и петли.

Бандаж-панталоны ортопедический БНЗ-71к-1



Назначение: в раннем послеоперационном периоде, при пупочных и послеоперационных грыжах малых размеров и опущении органов малого таза.

Бандаж из эластичного полотна с ластовицей. На изнаночной стороне передней и задней детали настроены фигурные накладки из основного материала. По нижним срезам - узкое кружево.



ПА - 84%, ПУ - 16%
РАЗМЕРЫ - с 70 - 95
по 115 - 140

бежевый ● черный

Бандаж-пantalоны ортопeдический БНЗ-73-1



Назначение: при опущении внутренних органов, в послеоперационный период, при грыжах: послеоперационных, белой линии живота, пупочных.

Бандаж из эластичного полотна с широким эластичным кружевом по нижним срезам. Задняя деталь двойная. Подхваты из основной ткани двойные, фигурной формы, застегиваются на крючки и петли.

Хлопок - 20%, ПА - 59%,
ПУ - 21%
РАЗМЕРЫ - с 75 - 100 по
115 - 135
бежевый

3

Бандаж-пantalоны ортопeдический БНЗ-82-1



Назначение: опущение органов брюшной полости, малого таза в послеоперационный период, при послеоперационных, белой линии живота, пупочных грыжах.

Бандаж-пantalоны из эластичного полотна. Подхват из ленты эластичной бандажной застегивается на крючки и петли. Передняя часть подхвата крепится к переду на ленту «контакт», задняя настрочена.

ПА - 82%, ПУ - 18%
РАЗМЕРЫ - с 75 - 100
по 115 - 135, полноты II, III
бежевый ● черный



4. Бандажи грыжевые

Бандажи грыжевые применяются при вправляемых паховых, пахово-мошоночных грыжах, при наличии противопоказаний к оперативному лечению. Бандажи являются паллиативным средством, улучшающим состояние больного, препятствующим дальнейшему развитию заболевания. Бандажи способствуют удержанию грыжевого дефекта при помощи пелота, закрывающего грыжевое кольцо.

Центром «Здоровье» выпускается разнообразный ассортимент бандажных изделий широкого размерного ряда. Бандажи грыжевые изготавливаются: односторонние и двусторонние, правые и левые, на мягком или жестком поясе; различаются по конструкции пелотов, пружин. В зависимости от назначения и конструктивных особенностей пелотов и пружин, бандажи подразделяются на паховые, скротальные и комбинированные.

При невправляемых паховых, пахово-мошоночных грыжах носить бандажи грыжевые паховые категорически запрещается, также противопоказанием является ущемление грыжи. Бандаж запрещается использовать в положении «лежа» (в т.ч. во время сна).

При наличии невправляемых пахово-мошоночных грыжах, а также при заболеваниях мошонки, яичек и их оболочек используются бандажи-суспензории различных моделей.

В отделе медицинской реабилитации проводит индивидуальный прием пациента врач-хирург, который после осмотра рекомендует бандаж по медицинским показаниям.

Новейшие технологии производства бандажей грыжевых с использованием современных материалов и усовершенствованных конструкций позволяют достичь отличного качества, обеспечивают потребителю удобство в носке и легкий гигиенический уход за изделием.

Весь этот комплекс мер обеспечивает максимальный терапевтический эффект при лечении заболеваний области паха и мошонки.

Бандаж грыжевой паховый с пружиной, односторонний БН1-01



Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из кожи хромовой и замши, представляет собой пояс, внутри вставлена металлическая пружина с крышкой для пелота. На одном конце пояса пелот овальной формы,

на другом конце штрипка. На пояс надет подбедренник.

Застежка. Пояс бандажа и подбедренник застегиваются отверстиями штрипка на кнопки пелота. Натуральная кожа.

4

Бандаж грыжевой скротальный с пружиной, односторонний БН1-02



Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из кожи хромовой и замши, представляет собой пояс, внутри металлическая пружина. На одном конце пояса пелот треугольной формы с подбедренником и

штрипкой, на другом конце - штрипка. На пояс надет подпряжнич с металлической пряжкой.

Застежка. Подбедренник пристегивается к пряжке на отверстие штрипки. В конце пояса втачана штрипка, которая застегивается на кнопку пелота. Натуральная кожа.

Бандаж грыжевой паховый с пружинами, двусторонний БН1-05



Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из кожи хромовой и замши, представляет собой пояс из двух частей, соединенных между собой штрипкой и металлической пряжкой, на место соединения надета мягкая подушка. В каждой части

пояса металлическая пружина. На концах пояса - пелоты овальной формы, которые фиксируются штрипкой. На пояс надеты 2-а подбедренника.

Застежка. Пояс бандажа и подбедренники застегиваются отверстиями штрипок на кнопки пелотов. Натуральная кожа.

Бандаж грыжевой комбинированный двусторонний БН1-08



Размеры по меркам заказчика

Бандаж из кожи хромовой, замши, представляет собой пояс из двух частей, соединенных между собой штрипкой и пряжкой, на место соединения надета мягкая подушка. В каждой части пояса металлическая

пружина. На концах пояса закреплены пелоты овальной и треугольной формы.

Застежка. Пояс бандажа застегивается отверстиями штрипки на кнопки пелотов.

Натуральная кожа.

Бандаж грыжевой паховый на эластичном поясе, двусторонний БН1-10



Хлопок - 70%, латекс - 30%
Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из ленты эластичной протезной, представляет собой пояс с двумя пелотами и крючком для застегивания. На пояс надеты два подбедренника с крючками, на пелоты - трико-

тажные чехлы.

Застежка крючком на отверстие в крышке пелота.

Бандаж грыжевой скротальный на двойном эластичном поясе, двусторонний БН1-14



Хлопок - 70%, латекс - 30%
Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из ленты эластичной протезной, представляет собой двойной пояс с двумя пелотами треугольной формы и крючком для застегивания. На пояс на-

деты два подбедренника с

крючками, на пелоты - трикотажные чехлы.

Застежка крючком на отверстие в крышке пелота.

Бандаж грыжевой скротальный с пружинами, двусторонний БН1-06



Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из кожи хромовой, замши, представляет собой пояс из двух частей, соединенных между собой штрипкой и металлической пряжкой, на место соединения надета мягкая подушка. В каждой части пояса металлическая пружина.

На концах пояса пелоты треугольной формы с подбедренником и штрипкой. Пелоты фиксируются штрипкой. На пояс надеты два подбедренника с металлической пряжкой.

Застежка. Пояс бандажа застегивается отверстиями штрипки на кнопки пелотов. Натуральная кожа.

Бандаж грыжевой паховый на эластичном поясе, односторонний БН1-09



Хлопок - 70%, латекс - 30%
Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из ленты эластичной, представляет собой пояс с пелотом овальной формы на одном конце и крючком для застегивания - на другом. На пояс надет подбедренник с

крючком, на пелот - трикотажный чехол.

Застежка крючком на отверстие в крышке пелота.

Бандаж грыжевой скротальный на двойном эластичном поясе, односторонний БН1-13




Хлопок - 70%, латекс - 30%
Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из ленты эластичной протезной, представляет собой пояс с пелотом треугольной формы на одном конце и крючком для застегивания - на другом. На пояс надет

подбедренник с крючком, на пелот - трикотажный чехол.

Застежка крючком на отверстие в крышке пелота.

Бандаж грыжевой паховый на двойном эластичном поясе, односторонний и двусторонний БН1-17, БН1-18

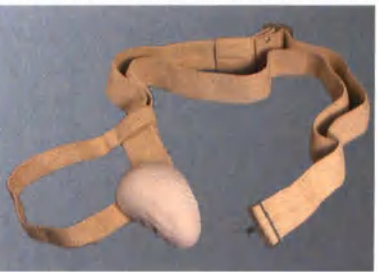

Хлопок - 70%, латекс - 30%
Размеры - с 75 по 105
по меркам заказчика

Бандаж из ленты эластичной протезной, представляет собой двойной пояс с пелотом овальной формы (в БН1-18 - два пелота) на одном конце и крючком для застегивания - на

другом. На пояс надет подбедренник (в БН1-18 - 2 подбедренника) с крючком, на пелот - трикотажный чехол (2 чехла).

Застежка крючком на отверстие в крышке пелота.

Бандаж грыжевой паховый на эластичном поясе, односторонний и двусторонний БН1-19, БН1-20



Хлопок - 23%, вискоза - 34%,
ПА - 27%, ПУ - 16%
Размеры - с 75 по 105

Бандаж из ленты эластичной корсетной, нижняя передняя часть фигурной формы. Внутренняя передняя часть бандажа на уровне крепления пелотов уплотнена капроно-веретеной тесьмой. Пелот (в БН1-20 - два пелота) крепится к бандажу с помощью ленты «контакт». Подбедренники из ленты эластичной протезной сзади, пришиты к бандажу с боков пристегиваются на ленту «контакт».

Застежка только на ленту «контакт».

Бандаж грыжевой комбинированный на двойном эластичном поясе, двусторонний БН1-23



Размеры по меркам заказчика

Бандаж из ленты эластичной протезной, представляет собой пояс, концы которого продеты в пазы металлических крышек. В крышке вставлены пелоты - скротальный и паховый, овальный и треугольной формы.

Застежка - на металлический крючок и отверстие в крышке пелота.

Хлопок 70%, латекс 30%.

Бандаж-суспензорий ПИ-04



Хлопок - 28%, ПА - 53%,
ПУ - 19%
Размеры - с 80-90 по 105 - 115

Бандаж из эластичного полотна. Передняя деталь на подкладке из хлопчатобумажного трикотажного полотна. Нижние части передних боковых деталей с накладками из основной ткани. Верхние и нижние срезы бандажа обработаны лентой эластич-

ной.

4. Бандаж грыжевой паховый на эластичном поясе, односторонний и двусторонний БН1-21, БН1-22 (вариант БН1-19У, БН1-20У)



Хлопок - 23%, вискоза - 34%,
ПА - 27%, ПУ - 16%
Размеры - с 75 по 105

Бандаж из ленты эластичной корсетной, состоит из двойной основной детали, нижняя передняя часть которой фигурной формы. С внутренней стороны к передней части крепится с помощью ленты «контакт» пелот (в БН1-22 - два пелота). На пелот надет чехол из хлопчатобумажного трикотажного полотна. Подбедренники из ленты эластичной протезной настрочены на бандаж по бокам, а спереди пристегиваются с помощью ленты «контакт».

Застежка с левой стороны на ленту «контакт» через рамку.

Бандаж-суспензорий ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03



Хлопок - 100%
Размеры ПИ-03 в массовом изготовлении 1, 2, 3, 4, 5 и ПИ-01, ПИ-02 индивидуального изготовления - по меркам заказчика

Бандаж из хлопчатобумажной ткани, состоит из кокетки, к левой и правой сторонам которой притачивается чехол и пояс из двух частей узкий (ПИ-01), широкий (ПИ-02).

Подбедренники пришиты к нижней части чехла и пристегиваются к поясу на воздушные петли и пуговицы.

Застежка на обметанные петли и пуговицы.

Бандаж-суспензорий ПИ-05



Хлопок - 28%, ПА - 53%,
ПУ - 19%
Размеры - с 85-95 по 105 - 115

Бандаж из эластичного полотна. Передняя деталь на подкладке из хлопчатобумажного трикотажного полотна. Фиксация спереди на ленту «контакт». Верхний срез обработан лентой эластичной. Нижние срезы обработаны лентой эластичной окантовочной.

5. Изделия для будущих мам

Для будущих мам центр изготавливает бандажи, применяемые в дородовом и послеродовом периодах, которые изготавливаются из хлопчатобумажных тканей и эластичных полотен с содержанием натуральных волокон.

Бандаж дородовой назначается со второй половины беременности, предохраняет брюшную стенку от перерастяжения, апоневроза живота. Бандаж поддерживает матку, снимает нагрузку с живота и нижней части спины, способствует сохранению правильного положения плода, обеспечивает его нормальное кровообращение. Для определения размера дородового бандажа необходимо произвести измерения по обхвату бедер.

Дородовая группа изделий включает в себя бюстгальтер дородовой для поддержания молочной железы в период беременности.

Бандаж послеродовой назначается в послеродовой период, способствует более быстрому сокращению мышц брюшного пресса и тазового дна. За счет конструктивных особенностей бандаж создает необходимую компрессию мышц живота, обеспечивая элевацию передней брюшной стенки, предотвращает опущение органов брюшной полости и малого таза. Для определения размера послеродового бандажа необходимо произвести измерения по обхвату талии и бедер.

Послеродовая группа изделий включает в себя также бюстгальтер для поддержания молочной железы в период грудного вскармливания.

Применение изделий центра способствуют сохранению здоровья в дородовой, и скорейшему восстановлению в послеродовой периоды, позволяя женщинам быстрее вернуться к полноценной жизни.

Центр «Здоровье» постоянно обновляет, улучшает и расширяет ассортимент изделий дородового и послеродового назначения, и, таким образом, вносит свой вклад в реализацию национальных проектов не только по здравоохранению населения, но и улучшению демографической ситуации в стране.

Бандаж дородовой БН2-01



Хлопок - 100%.
РАЗМЕРЫ - по меркам
заказчика

Бандаж из хлопчатобумажной ткани с застежкой сбоку на бандажные петли и пуговицы. Спереди пояс-подхват. Шнуровка спереди и сзади, в боках вставки из ленты эластичной бандажной.

Бандаж-трусы дородовой БН2-08



Хлопок - 25%, ПА - 75%.
РАЗМЕРЫ - с 90 по 105

Бандаж-трусы из эластичного и трикотажного хлопчатобумажных полотен, по низу верхней передней детали пришит подхват.


Бандаж-трусы послеродовой БН2-09



Хлопок - 25%, ПА - 42%,
ПУ - 33%.
РАЗМЕРЫ - с 65 - 90
по 90 - 115

Бандаж-трусы из эластичного полотна с застежкой по бокам и по нижнему срезу на крючки и петли. Перед уплотнен накладной деталью из отделочного полотна.

Бюстгальтер дородовой ЛФ-30к

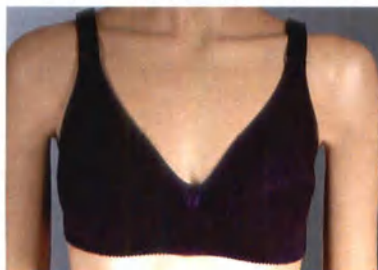

Хлопок - 47%, ПА - 34%,
ПУ - 19%

	75	80	85	90	95
A	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*
D	*	*	*	*	*
DD		*	*	*	

Бюстгальтер из эластичного полотна и трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Чашки состоят из двух деталей. Нижние детали чашек усилены прокладкой.

Бретели из бретельной ленты с регулировкой длины сзади.

Застежка сзади на крючки и петли.

Бандаж дородовой БН2-11



Хлопок - 100%.
РАЗМЕРЫ - с 85 по 115

Бандаж из хлопчатобумажной ткани с застежкой сбоку на воздушные петли и пуговицы. Спереди пояс-подхват. Шнуровка спереди и сзади.

Бандаж послеродовой БН2-04



Хлопок - 100%.
РАЗМЕРЫ - по меркам
заказчика

Бандаж из хлопчатобумажной ткани с застежкой сбоку на бандажные петли и пуговицы, и шнуровкой сзади. Средняя деталь переда уплотнена фигурной и выстроченной накладкой, в боках резиновые уголки из ленты эластичной бандажной.

Бандаж послеродовой БН2-23



Хлопок - 100%.
РАЗМЕРЫ - с 73 - 96
по 97 - 120

Бандаж из хлопчатобумажной ткани с застежкой сбоку на воздушные петли и пуговицы, и шнуровкой сзади. Средняя деталь переда двойная.

Бюстгальтер послеродовой ЛФ-33к



Хлопок - 93%, ПА - 6%,
ПУ - 1%

	75	80	85	90	95
A	*	*	*	*	*
B	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*
D	*	*	*	*	*
DD	*	*	*	*	

Бюстгальтер из хлопчатобумажных тканей и эластичного полотна, отделан узким кружевом и двумя бантиками.

Чашки из вышитой ткани на хлопчатобумажной подкладке.

Клапан верхней детали пристегивается на пряжку. Отстегивающаяся деталь клапана обеспечивает дополнительные удобства женщинам в период грудного вскармливания.

Бретели из бретельной ленты с регулировкой длины спереди.

Застежка сзади на крючки и петли.

6. Корсеты ортопедические

На предприятии разработан широкий ассортимент корсетных изделий с разной степенью жесткости, для чего применяются современные ленты эластичные корсетные, эластичные полотна из смешанных, синтетических и натуральных волокон, высокотехнологичные материалы - ортопрен (неопрен); используется разнообразная фурнитура, в том числе ребра жесткости в виде металлических пластин или витых плоских пружин.

Индивидуальный подход к каждому пациенту позволяет обслужить его наилучшим образом и подобрать необходимую модель корсета по его медицинским показаниям.

Применение современных материалов обеспечивает потребителю удобство в носке и легкий гигиенический уход за изделием, а качество, современный дизайн и презентабельный вид способны удовлетворить самый взыскательный вкус.

Корсеты применяются в комплексном лечении заболеваний позвоночника, в период восстановительного лечения после травм позвоночника, операций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Корсеты дозированно фиксируют и разгружают позвоночник, снижают болевой синдром, предотвращают патологические изменения в позвоночнике.

Корсеты назначаются при травмах позвоночника, и заболеваниях позвоночника, как ниже-грудного, так и пояснично-крестцового отделов, например: остеохондрозе, спондилолистезе, радикулите, и т.д.

Корсеты рекомендованы мужчинам и женщинам в качестве профилактического средства во время физической нагрузки (на производстве, в быту, на даче, во время занятий спортом), и всем, кто занят на малоподвижной работе.

Текстильные корсеты не применяют в случае, когда необходима жесткая стабильная фиксация. Осторожно применяют при вентральных и диафрагмальных грыжах.

Для подбора корсета по размеру необходимо измерить обхват талии в сантиметрах. Размер 70-78 означает, что данный размер подходит для человека с талией от 70 до 78 сантиметров. Диапазон между размерами составляет 8 см.

Корсет ортопедический КР0-14А



Корсет из хлопчатобумажной ткани на подкладке из основной ткани, состоит из двух половинок - левой и правой. Каждая половина состоит из шести деталей, укреплена тремя ребрами жесткости и усилена четырьмя мягкими ребрами жесткости. Корсет спереди и сзади на шнуровке с клапанами из основной ткани.



Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - по меркам заказчика с 69-103 по 117-151

Корсет ортопедический КР0-115



Корсет из ортопрена (неопрена) застегивается спереди на ленту «контакт». Задняя часть укреплена пятью ребрами жесткости.

Подхват из ленты эластичной бандажной из двух деталей настроен развилкой сзади и пристегивается по бокам на ленту «контакт».

Ортопрен (неопрен) - 80%, ПА - 20%.
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 158-166

6

Корсет ортопедический КР0-14-2А



Корсет из хлопчатобумажной ткани состоит из шести парных деталей, все детали на подкладке из основной ткани. Застежка слева на бандажные петли и пуговицы на тесьме.

Передняя деталь усилена тремя мягкими ребрами жесткости. Спереди двойной подхват из ленты эластичной бандажной, ш.8 см.

Задняя деталь усилена восемью ребрами жесткости и снабжена шнуровкой с клапаном.

Хлопок - 100%
РАЗМЕРЫ - по меркам заказчика в пределах размерного ряда с 69-83 по 117-131

Корсет ортопедический КР0-115-3



Корсет из ортопрена (неопрена) застегивается спереди на ленту «контакт». Задняя часть корсета усилена семью ребрами жесткости.

Подхват - два двойных подхвата (развилкой) из ленты эластичной ш. 5 см настроены на заднюю часть по центру и застегиваются сбоку на ленту «контакт».

Высокая степень фиксации.

Ортопрен (неопрен) - 80%, ПА - 20%.
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 110-118

Корсет ортопедический КР0-115У1



Корсет из ортопрена (неопрена) застегивается спереди на ленту «контакт». Задняя часть усилена 6-тью ребрами жесткости и пелотом из ламинированного материала, который крепится на ленту «контакт».

Подхват двойной из ленты эластичной ш.8 см, настроен развилкой под тесьму и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку. Передняя часть уплотнена 2-мя планшетами. Высокая степень фиксации.



Ортопрен (неопрен) - 80%,
ПА - 20%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 118-126

Корсет ортопедический КР0-115У3



Корсет из ортопрена (неопрена) застегивается спереди на ленту «контакт». Задняя часть корсета усилена 4-мя ребрами жесткости.

Подхват настроен развилкой на накладную деталь и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку. Накладная деталь уплотнена 4-мя ребрами жесткости, к внутренней стороне на ленту «контакт» крепится пелот из ламинированного материала. Высокая степень фиксации.



Ортопрен (неопрен) - 80%, ПА - 20%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 118-126

Корсет ортопедический КР0-116-3



Хлопок - 80%, латекс - 20%.
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 110-118
белый ● черный


Корсет из ленты эластичной застегивается спереди на ленту «контакт». Задняя часть корсета уплотнена шестью ребрами жесткости и усилена двумя накладными деталями из ленты эластичной, расположенными крестообразно. Подхват двойной (развилкой) из ленты эластичной ш.8 см настроен на заднюю часть по центру и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку. Высокая степень фиксации.

Корсет ортопедический КР0-115У2



Корсет из ортопрена (неопрена) застегивается спереди на ленту «контакт». Задняя часть усилена 7-мью ребрами жесткости и пелотом из ламинированного материала, который крепится на ленту «контакт».

Подхват - два двойных подхвата из ленты эластичной ш.5 см настроены на заднюю часть по центру и застегиваются спереди на ленту «контакт» через рамку. Передняя часть уплотнена 2-мя планшетами. Высокая степень фиксации.

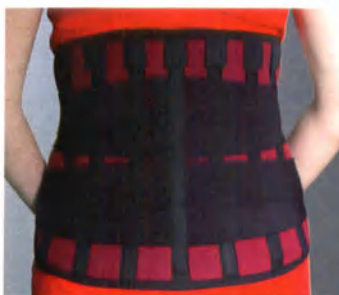

Ортопрен (неопрен) - 80%, ПА - 20%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 118-126

Корсет ортопедический КР0-116 (вариант КРО 116-У7)



Корсет из ленты эластичной с застегивкой на ленту «контакт» спереди.

Задняя часть усилена пятью ребрами жесткости и подхватом. Подхват двойной из ленты эластичной ш.8 см настроен развилкой по центру задней части и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку.

КРО 116-У7 - задняя часть усилена, 7-9 ребер жесткости в зависимости от размера.

Хлопок - 80%, латекс - 20%.
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 158-166
белый ● черный

Корсет ортопедический КР0-116-8



Передняя деталь из эластичного полотна (сетки), застегивается по центру на ленту «контакт». Задняя деталь из ленты эластичной, усилена пятью ребрами жесткости и подхватом.

Подхват двойной (развилкой) из ленты эластичной ш.8 см, настроен на заднюю деталь по центру и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку.



Хлопок - 60%, ПА - 25%, ПУ - 15%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 110-118

Корсет ортопедический КР0-116-9



Передняя деталь из эластичного полотна (сетки), застегивается по центру на ленту «контакт».


Задняя деталь из ленты эластичной, усилена пятью ребрами жесткости и подхватом.

Подхват двойной (развилкой) из ленты эластичной ш.8 см, настроен на заднюю деталь по центру и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку.



ПЭ - 60%, ПА - 30%, ПУ - 10%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 110-118

Корсет ортопедический КР0-116М

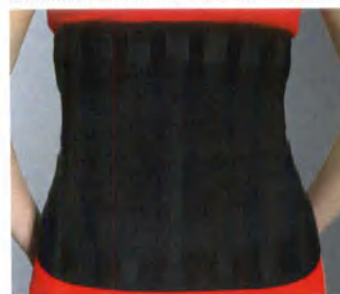

Корсет из ленты эластичной застегивается спереди на ленту «контакт». Задняя часть усилена 7-мью ребрами жесткости и пелотом из ламинированного материала, который крепится на внутреннюю часть корсета на ленту «контакт».

Подхват - два двойных подхвата из ленты эластичной ш.5 см настроены на заднюю часть по центру и застегиваются спереди на ленту «контакт» через рамку.

Передняя часть уплотнена 2-мя планшетами.

Высокая степень фиксации.



Ортопрен (неопрен) - 80%, ПА - 20%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 118-126

Корсет ортопедический КР0-135У



Передняя деталь двойная (развилкой) из ленты эластичной ш.16 см застегивается по центру на ленту «контакт».

Задняя деталь из ленты эластичной усилена пятью ребрами жесткости и подхватом.

Подхват двойной (развилкой) из ленты эластичной ш.8см, настроен на заднюю деталь, по центру и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку.

Высокая степень фиксации.



ПП-50%, ПЭ-50%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 118-126

6

Корсет ортопедический КР0-116-10



Передняя деталь двойная (развилкой) из ленты эластичной ш.14,5 см застегивается по центру на ленту «контакт».

Задняя деталь из ленты эластичной, усилена пятью ребрами жесткости и подхватом.

Подхват двойной (развилкой) из ленты эластичной ш.8см настроен на заднюю деталь по центру и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку.



ПЭ - 60%, ПА - 30%, ПУ - 10%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 110-118

Корсет ортопедический КР0-117



Корсет из ленты эластичной бандажной застегивается спереди на ленту «контакт».

Задняя часть корсета уплотнена пятью ребрами жесткости.

Подхват из ленты эластичной бандажной ш.8 см состоит из двух деталей и настроен развилкой посередине задней части и застегивается спереди на ленту «контакт» через рамку. На заднюю часть изнутри настроена утепляющая накладка.

Хлопок - 80%, латекс - 20%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 118-126

Корсет ортопедический КР0-135-2



Корсет из ленты эластичной корсетной застегивается на ленту «контакт» спереди.

Задняя часть корсета уплотнена четырьмя ребрами жесткости.

Подхват из ленты эластичной, ш.8см состоит из двух деталей, настроен развилкой посередине задней части корсета и пристегивается к передним деталям корсета на ленту «контакт».



ПА - 89%, ПУ - 11%
РАЗМЕРЫ с 70-78 по 94-102

Реклинаторы изготавливаются из хлопчатобумажных тканей или эластичных материалов. Фиксируется реклинатор на теле с помощью шнуровки или ленты «контакт», при этом осуществляется разведение плечевого пояса с приведением лопаток и действительной коррекцией грудного отдела позвоночника с целью его рекликации, разгрузки тел позвонков без включения работы мышечного аппарата.

Реклинаторы назначаются для формирования правильной осанки у взрослых, при остеохондрозе грудного отдела позвоночника, кифозе, кифосколиозе, «крыло-видной лопатке». Детям назначаются реклинаторы при нефиксированной форме сутулости верхне-грудного отдела позвоночника, для исправления искривлений позвоночника в сагиттальной плоскости тела. Рекомендуемое время носки реклинаторов составляет 3 - 4 часа в день, и особенно необходимы детям, когда они подолгу находятся в статичном сидячем положении (учеба уроков, занятия на компьютере, чтение книг, и т.д.).

Реклинатор KP1-01A



Хлопок - 100%

РАЗМЕРЫ - по меркам заказчика

Реклинатор из хлопчатобумажной ткани на подкладке из основной ткани, состоит из двух частей с наплечными петлями. Петли наплечные из замши с прокладкой из войлока, соединены сверху с основной деталью эластичной лентой, внизу притачаны. В каждую часть вставлены планшеты по размеру. Детали соединяются спереди шнуровкой. Изделие изготавливается в индивидуальном производстве. Рекомендован для детей.

7

Реклинатор KP1-01-1A



Реклинатор из хлопчатобумажной ткани с планшетами, застежкой на ленту «контакт» и рамку. Наплечные петли из основной ткани с прокладкой из войлока.



Хлопок - 100%

РАЗМЕРЫ - с 00 по 13

Реклинатор KP1-01-2A



Реклинатор из хлопчатобумажной ткани с планшетами, застежкой на ленту «контакт» и рамку. Наплечные петли из ленты эластичной протезной.



Хлопок - 100%

РАЗМЕРЫ - с 2 по 15

Реклинатор KP1-01-3



Реклинатор из ленты эластичной корсетной с планшетами. На верхнюю часть настроены тяги, к нижней крепится на ленту «контакт» пояс. Тяги и пояс из ленты эластичной шириной 40 мм застегиваются на ленту «контакт».

ПА - 89%, ПУ - 11%.

РАЗМЕРЫ - с 84 по 96

Реклинатор KP1-01-4



Реклинатор из ортопрена (неопрена) с планшетами. На верхнюю часть настроены две неэластичные, регулируемые тяги, в нижней части широкий пояс с застежкой на ленту «контакт».

Ортопрен (неопрен) - 80%,
ПА - 20%

РАЗМЕРЫ - с 84 по 96

8. Изделия женские корсетные бытового назначения

На предприятии разработана и выпускается группа швейных корсетных изделий — бюстгалтеры, полуграции, трусы для женщин с различными проблемами молочных желез и кожных покровов, таких, как:

- мастопатия,
- дерматиты,
- аллергические реакции

Специальная конструкция и технология изготовления бюстгалтеров и полуграций обеспечивают щадящую поддержку груди, не сдавливая молочные железы, и не нарушая кровотока.

При производстве бюстгалтеров, полуграций, трусов используются натуральные ткани, трикотажные хлопчатобумажные полотна, эластичные трикотажные полотна, по своим гигиеническим свойствам (гигроскопичность, воздухопроницаемость) приближенные к натуральным. Ношение этих изделий исключает возникновение заболеваний кожи, или препятствует дальнейшему развитию уже имеющегося заболевания.

Модель трусов с эластичной укрепленной передней вставкой позволяет женщинам поддерживать переднюю брюшную стенку в правильном положении, служит отличным профилактическим средством против опущения органов малого таза и корректирует фигуру, придавая ей более эстетичный вид.

Полуграция ЗП-1



Чашки состоят из хлопчатобумажной ткани на подкладке.
Бретели из основной ткани отделаны узким кружевом.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 100%

РАЗМЕРЫ - с 88 по 108, полнота III

- белый
- бежевый
- черный

Бюстгалтер ЗБ-08к



Чашки из эластичного кружевного полотна с кармашками для мягких вкладышей.

Бретели из ленты эластичной бретельной с регулировкой длины.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 15%


ПА - 75%, ПУ - 10%

- белый
- бежевый
- черный

	60	70	75	80	85	90
О	*	*	*	*	*	*
АА	*	*	*	*	*	*
А	*	*	*	*	*	*
В	*	*	*	*	*	*
С				*	*	*

8

Бюстгалтер ЗБ-07к

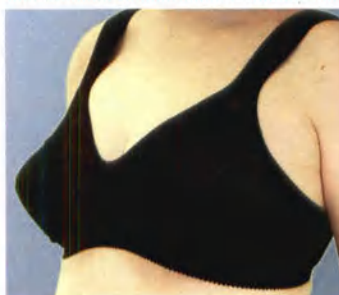

Чашки из эластичного полотна и вышитого кружева на подкладке из хлопчатобумажного трикотажа.

Бретели разгрузочные из эластичного полотна на мягкой прокладке.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 19%

ПА - 75%, ПУ - 6%

- белый
- бежевый
- черный

	80	85	90
А		*	*
В	*	*	

Бюстгалтер ЗБ-10к



Чашки из эластичного кружевного полотна, нижние детали чашек на подкладке из хлопчатобумажного трикотажа.

Боковые детали из эластичного полотна.

Бретели из ленты эластичной бретельной с регулировкой по длине.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 10%

ПА - 84%, ПУ - 6%

- белый
- бежевый
- черный

	65	70	75	80	85	90
О	*	*	*	*	*	
АА	*	*	*	*	*	
А	*	*	*	*	*	*
В	*	*	*	*	*	*
С				*	*	*
Д					*	*

Бюстгальтер 3Б-14к (вариант - 3Б-15к)

Чашки из хлопчатобумажной ткани и вышитого полотна на подкладке.
Бретели из основной ткани отделаны узким кружевом.
Застежка сзади на крючки и петли

Хлопок - 100%

РАЗМЕРЫ - с 88 по 108

белый

бежевый

● черный

Бюстгальтер 3Б-36к

Чашки из хлопчатобумажной ткани и вышитого полотна на подкладке. На срезы чашек настроено узкое кружево.

Бретели из ленты эластичной бретельной с регуляторами длины.
Застежка сзади на крючки и петли.

Хлопок - 100%

белый

бежевый

● черный

	70	75	80	85	90
A		*	*	*	*
B	*	*	*	*	
C		*	*		

Трусы 3Т-07

Трусы из полотна эластичного с передней вставкой из вышитого кружева.

Ластовица с подкладкой из трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Хлопок - 15%


ПА - 78%, ПУ - 7%

РАЗМЕРЫ - с 70 - 95 по 95 - 115

белый

бежевый

● черный

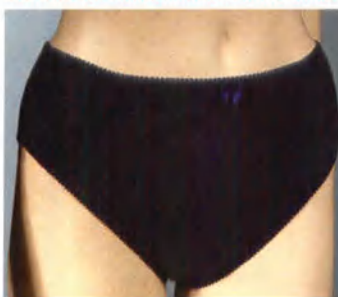Трусы 3Т-10

Трусы из трикотажного хлопчатобумажного полотна с боковыми вставками из вышитого кружева.

Ластовица из основного материала.

Хлопок - 85%

ПА - 10%, ПУ - 5%

РАЗМЕРЫ - с 65 - 90 по 100 - 125

белый

бежевый

● черный

Трусы 3Т-11

Трусы из полотна эластичного с передней накладной деталью из эластичного кружевного полотна.

Ластовица с подкладкой из трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Хлопок - 6%

ПА - 82%, ПУ - 12%

РАЗМЕРЫ - с 65 - 90 по 100 - 125

белый

бежевый

● черный

● цветной

Трусы 3Т-41

Трусы из полотна эластичного, средняя и боковые вставки переда из полотна эластичного кружевного.

Ластовица с подкладкой из трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Хлопок - 6%

ПА - 82%, ПУ - 12%

РАЗМЕРЫ - с 65 - 90 по 90 - 115

белый

бежевый

● черный

● цветной

9. Перчатки кожаные на кисти искусственные и естественные

Перчатки и рукавицы из натуральной кожи изготавливаются для инвалидов на протезы рук и здоровую кисть, и при деформации кистей рук, и разработаны для индивидуального и массового изготовления.

Перчатки изготавливаются мужские и женские без подкладки и на утепленной подкладке.

Перчатки и рукавицы предназначены для защиты протеза и кистей рук от внешних неблагоприятных воздействий, и для сокрытия косметического дефекта.

Перчатки 2П-1



Перчатки из натуральной кожи без подкладки, на искусственные кисти, манжеты на резинке.

РАЗМЕРЫ - с 4 по 6

9

Рукавицы ПР-1



Рукавицы из натуральной кожи на утепленной подкладке, манжеты на резинке.

РАЗМЕРЫ — по меркам заказчика

Перчатки П-5



Перчатки из натуральной кожи без подкладки, манжеты на резинке.

РАЗМЕРЫ - с 20 по 32
тип кисти 4, 5, 6

Перчатки П-6



Перчатки из натуральной кожи, утепленная подкладка в перчатке на естественную кисть; манжеты на резинке.

РАЗМЕРЫ - с 20 по 32,
тип кисти 4, 5, 6