

4

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Клевер»



А.М. Куницын

2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Презервативы натуральные латексные мужские по ТУ 2514-001-88868737-2012

Описание: презервативы мужские, изготовленные из натурального латекса с силиконовой смазкой.

Состав: натуральный латекс 100%.

Код ОКПД2: 22.19.71.110 «Презервативы»

Свойства:

Каждое изделие проверено электроникой. Все презервативы прошли технологические и токсикологические испытания.

Показания к применению:

Применяются для предотвращения нежелательной беременности и защиты от заболеваний, передающихся половым путем.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Способ применения:

1. Пользуйтесь презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.
2. Презерватив предназначен только для одноразового использования.
3. При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.
4. Для вскрытия презерватива поверните упаковку надписью «к себе», надорвите её.
5. Аккуратно извлеките презерватив из упаковки, избегая его повреждения.
6. Надевайте презерватив на эрегированный половой член (т.е. возбужденный половой член) до начала полового контакта. Сперма, выделяемая при начальной стадии эрекции, может содержать сперму (а также вирусы, вызывающие венерические заболевания).
7. Расположите презерватив на головке эрегированного полового члена.
8. Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить воздух. Воздух, попавший внутрь презерватива может вызвать его повреждение.
9. (Для вариантов исполнения презерватива с лентой-аппликатором) Потянув за ленту-аппликатор расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена.
10. (Для вариантов исполнения без ленты-аппликатора) Придерживая резервуар, другой рукой осторожно разверните презерватив на половом члене по всей длине.
11. Следите за тем, чтобы презерватив оставался на половом члене во время всего полового акта.

12. Сразу после эякуляции (семяизвержения) извлеките пенис, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул.
13. Аккуратно снимите презерватив, придерживая его у основания. Убедитесь в отсутствии контакта между половым членом и презервативом с телом партнера.
14. Использованный презерватив утилизируйте вместе с бытовыми отходами. Никогда не бросайте презервативы в унитаз.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на натуральный латекс. .

Взаимодействие с препаратами и смазками: применяя другие виды контрацепции, проконсультируйтесь с врачом. Не применять смазки на масляной (нефтяной) основе, вазелин, лосьоны, кулинарные и растительные жиры. При необходимости, применять смазки только на водной основе.

Меры предосторожности:

- Хранить в сухом, удаленном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 25 градусов Цельсия.
- Беречь от контакта с колюще-режущими предметами.
- Никакой метод контрацепции не гарантирует 100% защиты от нежелательной беременности или заболеваний, передающихся половым путем.
- Только для одноразового использования.
- Не используйте презерватив, если целость его упаковки нарушена, или он имеет явные дефекты.

Изделие предназначено для одноразового применения. Утилизация и уничтожение изделий осуществляется обычным путем, совместно с твердыми бытовыми отходами.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности: дата изготовления и срок годности указаны на упаковке.

Условия отпуска: без рецепта.

Произведено:

ООО «Клевер», 143441, Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково, д.11, к.107. Тел./факс: +7 499 504 1660.

ТУ 2514-001-88868737-2012

РЗН 2013/1094 от 11.11.2013

ПРОШЛО
ПРОНУМЕРОВАНО

2 ЛИСТА (ОВ)

Директор ООО «Клевер»
Куницын А.М.

