

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Урал мед.-мебель»

А.В. Личардин

«28» декабря 2023 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

УММ1.945210.ОКП. РЭ, ПС

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ»

по ТУ 9452-001-81190519-2016

Версия 1.1

История изменений документа

Изменение	Дата
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ УММ1.945210.ОКП. РЭ, ПС, Версия 1.0 Первый выпуск	05.09.2016 г.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ УММ1.945210.ОКП. РЭ, ПС, Версия 1.1 - Измнено: ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № И.УММ1.945210.001-2022.	28.12.2022г.

Содержание	2
1. Назначение изделия	3
2. Риски применения медицинского изделия	3
3. Показания к применению	9
4. Противопоказания к применению	9
5. Возможные побочные действия	9
6. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению	9
7. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия	9
8. Меры предосторожности при применении изделия	9
9. Технические характеристики	9
10. Комплектность	12
11. Подготовка к работе и порядок работы	12
12. Техническое обслуживание	12
13. Упаковка	12
14. Маркировка	13
15. Транспортирование и хранение	14
16. Гарантийные обязательства	15
17. Утилизации	15
18. Свидетельство о приемке	15
19. Гарантийный талон	16
Приложение А	17
Приложение Б	28
Приложение В	34
Приложение Г	48

1. Назначение изделия.

Набор оборудования кабинетов и палат «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016 (далее изделие), используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов, медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

2. Риски применения медицинского изделия.

Анализ рисков № ФМР.УММ1.945210.ОКП от 13.04.2022 г. для медицинского изделия «Набор оборудования кабинетов и палат «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016» содержит анализ рисков, связанных с его использованием.

Документ призван обеспечить соблюдение требований стандарта ГОСТ ISO 14791-2011.

Отчет подтверждает, что каждая идентифицированная опасность прослеживается при:

- анализе риска;
- оценивании риска;
- выполнении и верификации мер по управлению риском;
- оценивании допустимости любого(ых) остаточного(ых) риска(ов).

Методика оценки остаточного риска

Рассматриваются опасности, возникновение которых возможно при эксплуатации медицинского изделия.

Рассматриваются последовательности событий, приводящие к возникновению опасных ситуаций, и идентифицируются возникающие опасные ситуации.

Для каждой опасной ситуации оцениваются вероятности их возникновения и тяжесть последствий для пациента или пользователя, а также приемлемость.

Если риск является неприемлемым, то определяются и выполняются меры для минимизации риска.

В соответствии с принятыми критериями оценивается приемлемость остаточного риска, сохраняющегося после выполнения мер по снижению риска.

Оценка степени вероятности

Степень вероятности	Эффект последствия	Критерии
P1	Отдаленный	Не ожидаемые причины
P2	Очень низкий	Причины случаются редко
P3	Низкий	Причины случаются не часто
P4	Средний	
P5	Умеренно высокий	Причины случаются иногда
P6	Высокий	


P7	Очень высокий	Причины случаются часто
----	---------------	-------------------------

Классификация тяжести риска

Тяжесть риска	Последствие	Описание
S1	Ничтожное	Угроза здоровья пациента отсутствует или пренебрежимо мала
S2	Малое	Возможность временного некритического ухудшения физиологических функций
S3	Серьёзное	Возможность длительного некритического ухудшения физиологических функций
S4	Критическое	Возможность смерти пациента или вероятность инвалидности без немедленного вмешательства
S5	Катастрофическое	Вероятность смерти пациента без немедленного вмешательства

Вероятность нанесения ущерба	Категория	Рейтинг вероятности	Приоритетный номер риска (область)				
	P7	Очень высокий					
	P6	Высокий					
	P5	Умеренно высокий					
	P4	Средний					
	P3	Низкий					
	P2	Очень низкий					
	P1	Отдаленный					
Ранг тяжести			Ничтожное	Малое	Серьёзное	Критическое	Катастрофическое
Категория			S1	S2	S3	S4	S5
			Тяжесть ущерба				

Диаграмма определения риска

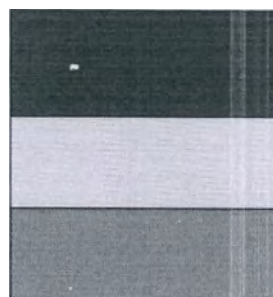

Область недопустимых значений (необходимость введения защитных мероприятий)

Пограничная зона (мероприятия по снижению рисков желательны)

Область приемлемых значений (здесь риски приемлемы)

Анализ риска

Идентификация опасности	Сопутствующие факторы	Уровень риска (до управления)	Меры по управлению риском	Идентификация требований	Уровень риска (после управления)
1.1.1	Высокая деформируемость	S3-P3 S4-P4	а) Испытание на воздействие высокого давления	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P1 S4-P2
			б) Испытание на устойчивость к деформированию	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	
1.2.1	Повреждение	S3-P3 S4-P5	а) Предупреждение о мерах предосторожности при обращении с изделием в руководстве по эксплуатации	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P1 S3-P3
			б) Проверка на наличие дефектов на поверхности	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	
1.3.1	Вибрации и падение при транспортировании	S3-P3	а) Испытание на устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P2
2.2.1	Воздействие высоких и низких температур	S3-P6	а) Контроль климатических условий в помещениях и транспорте	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P3
4.1.1	Неудовлетворительное качество материалов	S3-P4	а) Входной контроль материалов изделия	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S2-P2

Идентификация опасности	Сопутствующие факторы	Уровень риска (до управления)	Меры по управлению риском	Идентификация требований	Уровень риска (после управления)
4.1.2	Нарушение условий хранения изделий	S3-P3	а) Контроль климатических условий в помещениях	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S2-P2
4.2.1	Взаимодействие с инородными субстанциями	S5-P3	а) Контроль движения, хранения и использования кислот	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2
5.2.1	Упаковка изделия не обеспечивает сохранность изделий	S4-P4	а) Контроль упаковки изделия	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2
6.1.1	Несоответствующая конструкция	S3-P4	а) Доклиническая оценка изделия	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P2
			б) Клинические исследования	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P2
			в) Проверка габаритных размеров	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P1
6.2.1	Низкая долговечность	S4-P5	а) Испытание при валидации конструкции	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2

Идентификация опасности	Сопутствующие факторы	Уровень риска (до управления)	Меры по управлению риском	Идентификация требований	Уровень риска (после управления)
			б) Использование известных материалов с определенными свойствами	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2
			г) Испытание на устойчивость при номинальных значениях температуры от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 %.	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2
7.1.1	Недостаточные предупреждения на этикетке изделия	S5-P5	а) Вынесение на маркировку изделия всей необходимой информации	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S5-P3
7.1.2	Недостаточные предупреждения в руководство по эксплуатации	S5-P5	а) Внесение в руководство по эксплуатации изделия всей необходимой информации	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S5-P3
7.1.3	Недостаточные предупреждения в руководство по эксплуатации	S3-P5	а) Внесение в руководство по эксплуатации изделия всей необходимой информации	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P3

Идентификация опасности	Сопутствующие факторы	Уровень риска (до управления)	Меры по управлению риском	Идентификация требований	Уровень риска (после управления)
7.2.1	Недостаточные предупреждения в руководство по эксплуатации	S3-P4	а) Внесение в руководство по эксплуатации информации об ограничениях при обращении с изделием и о повторном применении	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P2
8.1.1	Недостаточные инструкции по применению	S4-P4	а) Проверка руководства по эксплуатации	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2
8.1.2	Ошибки в маркировке	S4-P5	а) Проверка маркировки этикетки	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2
8.2.1	Недостаточные инструкции по применению	S4-P4	а) Проверка руководства по эксплуатации	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S4-P2
9.1.1	Некорректные и неполные проверки размера	S3-P5	а) Предупреждение в руководстве по эксплуатации	ТУ 9452-001-81190519-2016, руководство по эксплуатации, паспорт	S3-P2
9.2.1	Некорректные рабочие инструкции	S5-P4	а) Разработка руководства по эксплуатации в соответствии с нормативными документами	ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019	S5-P3

3. Показания к применению.

Изделие предназначено для установки во врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

4. Противопоказания к применению.

Изделие не имеет задокументированных противопоказаний.

5. Возможные побочные действия.

Изделие не имеет задокументированных побочных действий.

6. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделие может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделия.

7. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

8. Меры предосторожности при применении изделия.

8.1 Не рекомендуется ставить на изделие острые, тяжелые предметы, подвергать изделие ударным нагрузкам.

8.2 Поверхности изделия необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

8.3 При эксплуатации изделия, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделия с трещиной сопряжена с риском получения травмы.

9. Технические характеристики.

9.1 Наименование, обозначение, вид медицинского изделия, габариты и масса указаны в Приложении А, таблицах 1-20.

9.2 Каркас изделия, выполнен из тонкостенных стальных труб с нанесением порошкового покрытия эпоксидно-полиэфирного по ГОСТ 9.410-88. Двери из металла, стекла или древесноволокнистой плиты. Фасад ящиков выполнен из материала, используемого для нижних дверей.

9.3 Изделие устойчиво стоит на горизонтальной поверхности. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 2 мм.

9.4 Трансформируемые, выдвижные и раздвижные элементы изделия имеют свободный ход без заеданий и перекосов.

- 9.5 Ящики выдвигаются по направляющим и имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса. Усилия при выдвигании ящиков не более 50 Н.
- 9.6 Замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на изделиях. Открывание и закрывание замка должно осуществляться легко, без заеданий.
- 9.7 Напольные тумбы оснащены винтовыми опорами для выставления изделия на поверхности.
- 9.8 Столешницы, полки и ящики изделия выдерживают равномерно распределенную нагрузку (15 ± 1) кг.
- 9.9 Двери шкафа открываются и закрываются плавно, без перекосов с усилием не более 20 Н (2 кгс).
- 9.10 Крепление дверцы выдерживают нагрузку не менее 200 Н.
- 9.11 Долговечность крепления дверей, долговечность ящиков соответствует ГОСТ 16371-2014.
- 9.12 Стол передвижной, стол проктологический, кушетки, столы массажные выдерживают равномерно распределенную двукратную номинальную нагрузку.
- 9.13 Усилие для передвижения изделия на колесах с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности не более 120 Н.
- 9.14 Подъем и опускание регулируемой головной секции проводится вручную при помощи механизма «Rastomat».
- 9.15 Усилие, прилагаемое к головной секции быть не более 150 Н.
- 9.16 Обивочный материал плотно (без морщин и складок) натянут на мягком элементе и основании ложа и подголовника.
- 9.17 Категория мягкости мягких элементов не менее III по ГОСТ 19917-2014.
- 9.18 Металлические и неметаллические неорганические покрытия – по ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-88 для группы условий эксплуатации 1.
- 9.19 Лакокрасочные покрытия выполнены по ГОСТ 9.104-78 для группы условий эксплуатации 4. Наружные поверхности изделий имеют покрытия не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI по ГОСТ 9.032-74.
- Покрытие не имеют отслоений от основного материала и стойкие к истиранию и к воздействию удара.
- Цвет лакокрасочных покрытий изделий, изготовленных по одному заказу, одного цветового ряда.
- 9.20 Наружные поверхности изделий, контактирующие с пациентом, устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113-98 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5-процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.
- 9.21 Средний срок службы изделий до списания не менее 6 лет. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления его работоспособности достигает 50% стоимости нового изделия.

9.22 Изделия при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов для условий хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69, но для температур от минус 20 до плюс 40°C.

9.23 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

9.24 Покупные изделия соответствуют требованиям действующих на них нормативных документов.

9.25 Для изготовления изделий используются материалы и покрытия разрешенные Минздравом РФ и имеющие гигиенические заключения и документы о подтверждении их соответствия:

«пр» - прокат ГОСТ 1050, ГОСТ 7417;

«м» - прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08 пс-6, по ГОСТ 16523, ГОСТ 19904;

«мт» - трубы стальные электросварные профильные ГОСТ 8639, 13663, Группа В;

«нт» - труба из коррозионностойкой стали, марки AISI 430, по ГОСТ 11068;

«н» - плоский прокат из нержавеющей стали, листы марки AISI 430;

«ма» - профиль прессованный из алюминиевых сплавов с анодно-окисным покрытием для ограждений конструкций;

«д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 32289;

«дк» - плиты древесно-волоконистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32687;

«пф» - плиты древесностружечные облицованные тип «Постформинг», тип «Профильное ламинирование» по ТУ 5534-002-46242352-2009;

«ф» - фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, марки ФСФ, класса эмиссии Е1 ГОСТ 3916.1;

«пн» - пенополиуретан эластичный по СТО 50615505.601-2020;

«в» - винилискожа- типы ТР, Т, НТ «Классик», ТУ 8714-003-1270478-2013 изв.№1
Винилискожа ТР «Классик» монолитная;

«п» - листы из поливинилхлорида свободновспененные по ТУ 2246-001-14658737-2004 с изм. №1-6;

«т» - порошковая краска, торговой марки «Iba Kimja».

«с» - стекло листовое бесцветное марок М0, М1, М4 в ассортименте толщин 1,8-4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм. «Стекло листовое бесцветное Технические условия» ГОСТ 111.

10. Комплектность.

Комплект поставки указана в Приложение Б, таблице 21.

11. Подготовка к работе и порядок работы.

11.1 После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделие должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

11.2 Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

11.3 Ознакомьтесь с устройством изделия и порядком сборки, указанными в приложенной схеме сборки:

- соберите изделие согласно прилагаемой схемы сборки;
- установить изделие в кабинете и палате в необходимом месте;
- если изделие имеет регулируемые опоры, провести регулировку опор для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются;
- произвести дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98.

11.4 В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

12. Техническое обслуживание.

12.1 Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

12.2 Периодический осмотр изделия включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

12.3 В случае ослабления резьбовых соединений изделия необходимо их затянуть.

13. Упаковка.

13.1 Упаковка изделий – по ГОСТ Р 50444-2020 и ГОСТ 16371-2014.

13.2 Перед упаковкой металлические части изделий должны быть обезжирены и законсервированы по группе II-1 ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

13.3 Изделие должно быть уложено в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или обрешетку по ГОСТ 12082-82 или в ящик по ГОСТ 5959-80, выложенные внутри влагонепроницаемой бумагой ГОСТ 8828-89.

13.4 Неустановленные на изделия детали (колеса, крепеж) должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8273-75 или ГОСТ 2228-81, перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308-88 или помещены в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82.

13.5 Эксплуатационная, товаросопроводительная документация, комплектующие узлы и детали должны быть помещены в полиэтиленовый пакет и закреплены на изделии.

13.6 Допускается применение других упаковочных материалов обеспечивающих сохранность изделий.

14. Маркировка.

14.1 Маркировка изделия должна соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 и конструкторской документации:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование, юридический адрес и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- гарантии изготовителя;
- информация об утилизации;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения и дату его выдачи;
- заводской номер;
- месяц и год изготовления изделия.

ООО «Урал мед.-мебель» Россия, 624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Октябрьская, д.6 корп. А, кв.1
Набор оборудования для кабинетов и палат «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016 ПУ РЗН2017/5546 от 31.07.2017
Зав № _____ Гарантийный срок эксплуатации _____ Средний срок службы 6 лет Отходы класса А безопасные отходы Дата изготовления: _____

Этикетка маркировки изделия

14.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96. На ящик должны быть нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям:

«Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».


14.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96. На транспортную тару должны быть нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Верх», «Беречь от влаги», «Законсервировано до ...».

14.4

Предприятие-изготовитель ООО «Урал мед.-мебель» Россия 624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Октябрьская, 6А-1 тел. (343) 345-34-18
Набор оборудования для кабинетов и палат «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016 РУ РЗН2017/5546 от 31.07.2017
_____ Зав № _____ Обозначение Количество № заказа Дата упаковки:

Этикетка транспортной упаковки

Фотографическое изображение транспортной упаковки

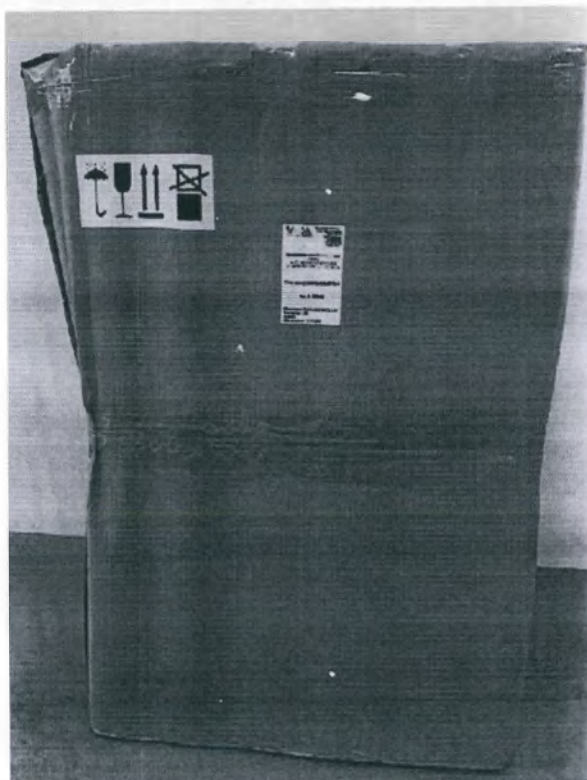

15. Транспортирование и хранение.

15.1 Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

15.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

15.3 Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (от -50°C до +50°C).

15.4 Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

15.5 Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (от +5°C до +40°C).

15.6 Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

16. Гарантийные обязательства.

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

16.2 Срок хранения – один год со дня изготовления

16.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

16.4 Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

17. Утилизации.

Утилизацию изделий проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

18. Свидетельство о приемке.

Набор оборудования кабинетов и палат «УММ», заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

М. П.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

19. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие Набор оборудования кабинетов и палат «УММ», заводской №
(наименование и тип изделия, заводской №)

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата выпуска _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на гарантийное обслуживание

Приложение А

Таблица 1. Шкаф для медикаментов (вид 139690)

Обозначение исполнения	Количество*				Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей (с лотками)/замков	Полок	Трейзеров (с полками)/замков	Ящиков/замков				
ШМ	4м/2	3м	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-50кг
ШМ.1	4м/2	3м	-	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	39кг-45кг
ШМ-1	1с	2с	-	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
	1м/1	1м	-	-				
ШМ-1.1	1с	2с	-	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
	1м/1	1м	-	-				
ШМ-2	2с	2с	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
	2м/1	1м	-	-				
ШМ -2.1	2с	2с	-	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
	2м/1	1м	-	-				
ШМп	2м/2	3м	-	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
ШМп.1	2м/2	3м	-	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
ШдМ	2м (12м)/1	5м	1м (1м)/1	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	49кг-55кг
ШдМ-1	1м(6м)/1	4м	1м/1	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
ШдМ-2	4м/2	3м	-	2м	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	49кг-55кг
ШдМ-2.1	4м/2	3м	-	2м	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
ШдМ-3	2с	2с	-	2м	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	49кг-55кг
	2м/1	1м						
ШдМ-3.1	2с	2с	-	2м	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
	2м/1	1м						
ШдМ-4	4м/2	2м	2м/2	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
ШдМ-4.1	4м/2	2м	2м/2	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	39кг-45кг
ШдМ-5	2с	2м	2м/2	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
	2м/1	1м						
ШдМ-5.1	2с	2м	2м/2	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	39кг-45кг
	2м/1	1м						
ШдМп-2	2м/2	3м	-	1м	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
ШдМп-2.1	2м/2	3м	-	1м	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
ШдМп-3	1с	2с	-	1м	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
	1м/1	1м						
ШдМп-3.1	1с	2с	-	1м	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
	1м/1	1м						

Обозначение исполнения	Количество*				Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей (с лотками)/замков	Полок	Трейзеров (с полками)/замков	Ящиков/замков				
ШдМп-4	2м/2	2м	1м/1	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
ШдМп-4.1	2м/2	2м	1м/1	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35 кг
ШдМп-5	1с	1м	1м/1	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
	1м/1	1м						
ШдМп-5.1	1с	1м	1м/1	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
	1м/1	1м						

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный);

«с» - стекло листовое бесцветное.

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 2. Шкаф для материалов (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*				Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей (с лотками)	Полок	Трейзеров /замков	Ящиков				
МА-12	2с	4с	-	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	33кг-45кг
МА-13	1с	2с	-	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	34кг-40кг
	1дк	2дк						
МА-14	2с	2с	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	49кг-55кг
	2дк	2дк						
МА-15	4с	4с	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	49кг-55кг
МА-16	2дк	4дк	-	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	34кг-40кг
МА-17	4дк	4дк	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	49кг-50кг
МА-18	1с	2с	1дк/1	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	34кг-40кг
	1дк	1дк						
МА-19	4дк	3дк	-	2дк	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	44кг-50кг

* «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками, «с» - стекло листовое бесцветное;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 3. Стеллаж - стойка для инструментов, материалов (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Колес	Полок				
СП	4	4м	500мм-700мм	300мм-500мм	1300мм-1500мм	20кг-30кг

С	-	5м	800мм- 1000мм	300мм- 500мм	1800мм- 2000мм	40кг-50кг
---	---	----	------------------	-----------------	-------------------	-----------

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный);

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 3кг.

Таблица 4. Стеллаж-стойка для приборов (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса,***
	Полок	Ящиков				
СПя-2	1м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	700мм-900мм	24кг-30кг
СПя-3	2м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
СПя-4	3м	2м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
СПя-5	3м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
ТЭ	3м	-	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
ТЭ.1	3м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
ТЭ-1	4м	-	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
ТЭ-1.1	4м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
СПя-6	3м	-	600мм-800мм	400мм-500мм	900мм-1100мм	30кг-40кг
СП-6.1	3м	1м	600мм-800мм	400мм-500мм	900мм-1100мм	30кг-40кг
СММ	3м	-	400мм-600мм	400мм-500мм	700мм-900мм	25кг-35кг
СММ.1.1	3м	1м	400мм-600мм	400мм-500мм	700мм-900мм	25кг-35кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный);

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 5. Стол инструментальный (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Колес	Ящиков /замков, полок				
СИ-2н	4	-	470мм-670мм	400мм-500мм	700мм-900мм	10кг-18кг
		2м				
СИо	4	-	470мм-670мм	400мм-500мм	700мм-900мм	10кг-18кг
		2н				
СИН	4	-	470мм-670мм	400мм-500мм	700мм-900мм	10кг-18кг
		2н				
СИ-2с	4	-	470мм-670мм	400мм-500мм	700мм-900мм	10кг-18кг
		2с				
СИя-2н	4	1м	470мм-670мм	400мм-500мм	700мм-900мм	12кг-20кг
		2н				
СИН-2н	4	1н	470мм-670мм	400мм-500мм	700мм-900мм	10кг-20кг
		2н				

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Колес	Ящиков /замков, полок				
МА-Сия-2	4	1дк	470мм-	300мм-	700мм-	11кг-15кг
		1с	670мм	500мм	900мм	
СИ-3н	4	-	470мм-	400мм-	700мм-	10кг-20кг
		3н	670мм	500мм	900мм	
СИ-3с	4	-	470мм-	400мм-	700мм-	10кг-20кг
		3с	670мм	500мм	900мм	
Ти-1	4	-	470мм-	400мм-	700мм-	12кг-20кг
		3м	670мм	500мм	900мм	
Ти-2	4	-	470мм-	400мм-	700мм-	12кг-20кг
		3с	670мм	500мм	900мм	
СиП-2	4	2м	470мм-	400мм-	700мм-	12кг-20кг
		2м	670мм	500мм	900мм	
МА-СИ-3	4	-	470мм-	400мм-	700мм-	10кг-20кг
		3с	670мм	500мм	900мм	
СМ-2	4	-	600мм-	400мм-	70мм-	10кг- 18кг
		2н	800мм	550мм	900мм	
СМ-3	4	-	600мм-	400мм-	700мм-	10кг-18кг
		3н	800мм	550мм	900мм	
СМя-3	4	1м/1	600мм-	400мм-	700мм-	10кг-20кг
		3н	800мм	550мм	900мм	

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «с» - стекло листовое бесцветное, «н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 6. Стол инструментальный надкроватный (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Колес	Сто-лешниц				
СНг	4	1н	600мм-800мм	400мм-500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	9кг-15кг
СН	4	1пф	600мм-800мм	400мм-500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	12кг-20кг
СН-1	4	1д	600мм-800мм	400мм-500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	12кг-20кг
СН-2	4	1дк	600мм-800мм	400мм-500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	12кг -20кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «пф» - плиты древесностружечные облицованные тип «Постформинг»;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 7. Стол манипуляционный (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*			Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Колес	Две-рок/замков, полок	Ящиков/замков, столешниц				

СИо-1я	4	-	1м	600мм- 800мм	350мм- 550мм	750мм- 950мм	12кг-20кг
		2н	-				
СИо-2я	4	-	2м	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	14кг-22кг
		2н	-				
СиП-1	4	-	3м	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	15кг-25кг
		2с, 1н	-				
СИА-1	4	2м	4м/1	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
		-	-				
СИА-2	4	2м/1	2м	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
		-	-				
СИА-3	4	-	3м	550мм- 650мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
		-	1н				
СИА-3.н	4	-	3н/1	550мм- 650мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	32кг-40кг
		-	1м				
СИА-4	4	1м/1	4м/1	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
		-	1н				
СИА-4н	4	1н/1	4н/1	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	32кг-40кг
		-	1н				
СИА-5	4	1м/1	4м, 2 полки	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
		3м	1н				

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «с» - стекло листовое бесцветное;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 8. Стол передвижной (вид 156900)

Обозначение исполнения	Нагрузка, кг, ± 1 кг	Диаметр колес, мм	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
СИБ	100	100	1300мм- 1500мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	25кг-35кг
СИБ (1)	100	100	1000мм- 1200мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	25кг-35кг
СИБ-1	100	100	1800мм- 2000мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	30кг-40кг
СПП	120	125	1800мм- 2000мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	30кг-40кг
СПН	120	125	1800мм- 2000мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	30кг-40кг

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 9. Стол проктологический (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество секций	Нагрузка, кг, ± 1 кг	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
СПр	3	200	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	700мм- 900мм	30кг-40кг

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 10. Стол для инъекций (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Столешница, столик	Спинок, сидений				
СМР	1в	-	500мм-700мм	300мм-500мм	600мм-800мм	11кг-15кг
	-					
СМР-2	1в	1в	900мм-	500мм-	800мм-	13кг-25кг
	1с	1в	1000мм	600мм	900мм	

* «с» - стекло листовое бесцветное, «в» - винилискожа;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг

Таблица 11. Тумба подкатная для материалов (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей	Ящиков				
ТП-1	1д	-	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-13кг
ТП-1.1	1д	-	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
ТП-2	1д	-	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-13кг
ТП-2.1	1д	-	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм - 600мм	7кг-11кг
ТП-3	-	3д	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-15кг
ТП-3.1	-	3д	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм - 600мм	7кг-11кг
ТП-4	1д	1д	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-15кг
ТП-4.1	1д	1д	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
ТП-5	-	4д	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
ТП-5.1	-	4д	300мм-400мм	350мм-450мм	650мм-750мм	8кг-14кг
ТП-5.2	-	5д	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
ТП-6.1	-	6д	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
ТМ-1	1м	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-13кг
ТМ-1.1	1м	-	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
ТМ-2	-	2м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
ТМ-2.1	-	2м	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	8кг-14кг
ТМ-3	-	3м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
ТМ-3.1	-	3м	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	8кг-14кг
ТМ-4	1м	1м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей	Ящиков				
ТМ-4.1	1м	1м	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	8кг-14кг
ТМ-5	-	5м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
ТМ-6	-	6м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
МА-8	1дк	1дк	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
МА-8.1	1дк	1дк	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
МА-9	1дк	2дк	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
МА-9.1	1дк	2дк	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
МА-10	-	4дк	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
МА-10.1	-	4дк	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	10кг-16кг
МА-11	1дк	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
МА-23	1дк	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
МА-23.1	1дк	-	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
ТПМ	1д	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
ТПМ-4	-	4д	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	10кг-16кг
ТМ	1м	1м	400мм-500мм	400мм-500мм	750 мм-850 мм	10кг-16кг
ТПМ-2	1д	-	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
ТМя-2	-	2м	400мм-500мм	400 мм-500 мм	750мм-850мм	14кг-20кг
ТМя-2.1	-	2м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	14кг-20кг
ТМя-2.2	-	2м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	14кг-20кг
ТМя-3	-	3м	400мм-500мм	400 мм-500 мм	750 мм-850 мм	16кг-22кг
ТМя-3.1	-	3м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	16кг-22кг
ТМя-3.2	-	3м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	16кг-22кг
ТМя-4	-	4м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	19кг-25кг
ТМя-5	-	5м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	19кг-25кг

* «М» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 12. Тумба подкатная с регулируемой столешницей (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей	Ящиков				
ТПМ-1	1д		500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	14кг-20кг
ТПМ-3	-	2д	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	16кг-22кг
ТПМ-3/1	-	2д	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	17кг-23кг
ТПМ-5	1д	-	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	12кг-18кг
ТПМ-6	1д	1д	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	14кг-20кг

* «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 13. Тумбы стационарные для материалов (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей	Ящиков				
СЛ-11	2д	-	800мм-1002мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
СЛ-11.1	2д	-	600мм-800мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
СЛ-11/2	2д	2д	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	26кг-32кг
СЛ-11/2.1	2д	2д	600мм-800мм	400мм-600мм	650мм-850мм	26кг-32кг
СЛ-11/2.2	2д	4д	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	28кг-34кг
СЛ-11/2.3	-	6д	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	30кг-36кг
СЛ-12	3д	-	1200мм-1400мм	400мм-600мм	650мм-850мм	39кг-45кг
СЛМ-4	2м	-	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
СЛМ-4.1	2м	-	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
СЛМ-4.2	2м	2м	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	26кг-32кг
СЛМ-4.3	2м	4м	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	28кг-34кг
СЛМ-4.4	-	6м	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	30кг-36кг
СЛМ-5	3м	-	1200мм-1400мм	400мм-600мм	650мм-850мм	39кг-45кг
МА-25	1дк	4дк	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	20кг-30кг
МА-25.1	2дк	-	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	20кг-30кг
МА-25.2	2дк	2дк	800мм-	400мм-	650мм-	20кг-30кг

			1000мм	600мм	850мм	
МА-25.3	2дк	4дк	800мм- 1000мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	22кг-32кг
МА-25.4	-	6дк	800мм- 1000мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	26кг-36кг
МА-21	1дк	4дк, 1дк полка	1000мм- 1200мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	22кг-32кг
ТП-6	2д	-	600мм- 800мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	20кг-30кг
ТП-6/1	1д	3д, 1д пол- ка	1000мм- 1200мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	30кг-40кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками.

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 14. Тумбы стационарные узкие для материалов (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей	Ящиков				
ТС-1	1д	-	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	11кг-15кг
ТС-3	1д	2д	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	12кг-18кг
ТС-4	1д	1д	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	11кг-17кг
ТмС-1	1м	-	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	12кг-18кг
ТмС-3	1м	2м	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	12кг-18кг
ТмС-4	1м	1м	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	12кг-18кг
МА-8.1	1дк	1дк	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	11кг-17кг
МА-9.1	1дк	2дк	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	10кг-18кг
МА-10.1	-	1дк	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	12кг-20кг
МА-23.1	1дк	-	350мм- 450мм	400мм- 600мм	650мм- 850мм	11кг-15кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 15. Кушетка смотровая (вид 116990)

Обозначение исполнения	Количество*		Нагруз- ка, кг, ± 1 кг	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Секций, Тумб	Регулируемых секций,					
КС	1в	1в	200	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 600мм	24кг-30кг

КС-1	1в	-	200	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 600мм	24кг-30кг
КС-2	1в	1в	200	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 600мм	24кг-30кг
КС/2	1в	1в	200	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 600мм	24кг-30кг
	1д						
КС-3	1в	1в	200	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 600мм	24кг-30кг
КФТ	1в	1в	200	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 600мм	24кг-30кг

* «в» - винилискожа, «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 16. Столы массажные (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Нагруз- ка, кг, ± 1 кг	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Секций	Регулируе- мых секций					
СМ-1	1в	-	240	1800мм- 2000мм	600 - 800мм	550мм- 750мм	24кг-30кг
СМ-2	1в	1в	240	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 750мм	24кг-30кг
СМ-3	3в	2в	240	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 750мм	24кг-30кг
СМ-4	1в	-	240	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 750мм	24кг-30кг
СМ-5	5в	4в	240	1800мм- 2000мм	730мм- 930мм	500мм- 750мм	24кг-30кг
СМ-7	7в	6в	240	1800мм- 2000мм	900мм- 1100мм	500мм- 750мм	24кг-30кг
СМС-1	1в	-	240	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 750мм	24кг-30кг
СМС-2	2в	-	240	1800мм- 2000мм	600мм- 800мм	500мм- 750мм	24кг-30кг

* «в» - винилискожа;

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 3кг.

Таблица 17. Ширмы медицинские (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Колес	Секций				
Ш-1	4	1п	600мм- 700мм	300мм- 400мм	1700мм- 1800мм	11кг-13кг
Ш-2	5	2п	1200мм- 1400мм	300мм- 400мм	1700мм- 1800мм	11кг-15кг
Ш-3	7	3п	1800мм- 2100мм	300мм- 400мм	1700мм- 1800мм	14кг-18кг

* «п» - поливинилхлорид;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 18. Модуль с мойкой (вид 156900)

Обозначение	Количество*	Длина,	Ширина,	Высота,	Масса,
-------------	-------------	--------	---------	---------	--------

исполнения	Дверей, ящиков	Полок	Чашей мойки	**	**	**	***
СТм-1	2д	-	1н	500мм-600мм	500мм-600мм	800мм-850мм	16кг-20кг
	-						
СТм-2	2д	-	2н	600мм-800мм	500мм-600мм	800мм-850мм	24кг-30кг
	-						
ТМм-1	1м	-	1н	500мм-600мм	500мм-600мм	800мм-850мм	16кг-20кг
	-						
ТМм-2	2м	-	2н	600мм-800мм	500мм-600мм	800мм-850мм	24кг-30кг
	-						
МА-6	2дк	-	1н	500мм-600мм	500мм-600мм	800мм-850мм	16кг-20кг
	-						
МА-7	2дк	-	2н	600мм-800мм	500мм-600мм	800мм-850мм	16кг-20кг
	-						
МА-7/1	2дк	-	2н	600мм-800мм	500мм-600мм	800мм-850мм	16кг-20кг
	-						
МА-20	3дк	-	2н	1100мм-1300мм	455мм-655мм	800мм-850мм	24кг-30кг
	-						
МА-21.1	1дк	1	1н	1100мм-1300мм	455мм-655мм	800мм-850мм	24кг-30кг
	4дк						

«м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 19. Стол пеленальный (вид 303440)

Обозначение исполнения	Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
	Дверей, ящиков	Полок				
СППМ	-	1д	800мм-1000мм	600мм-800мм	750мм-950мм	15кг-25кг
СППМ-1	-	1д	800мм-1000мм	600мм-800мм	750мм-950мм	15кг-25кг
СППМ-2	2д	-	800мм-1000мм	600мм-800мм	750мм-950мм	15кг-25кг
	2д					

* «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Таблица 20. Подставки для таза (вид 156900)

Обозначение исполнения	Количество колес	Объем таза, л	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
ПТ	-	9	400мм-500мм	400мм-500мм	(715мм-815мм)/ (1100мм-1300мм)	6кг-10кг
ПТ-1	4	9	400мм-500мм	400мм-500мм	(715мм-815мм)/ (1100мм-1300мм)	8кг-12кг
ПТн	-	9	400мм-500мм	400мм-500мм	(715мм-815мм)/ (1100мм-1300мм)	6кг-10кг
ПТн-1	4	9	400мм-500мм	400мм-500мм	(715мм-815мм)/ (1100мм-1300мм)	6кг-10кг

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

Приложение Б

Комплект поставки должен соответствовать Таблице 21.

№	Наименование	Обозначение	Количество шт.
Набор оборудования кабинетов и палат		УММ1.945210.ОКП	
I. Набор оборудования для кабинетов:			
1.	Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ШК1	
1.1.	ШМ;	УММ1.945210.ШК1.01	1
1.2.	ШМ.1;	УММ1.945210.ШК1.02	1
1.3.	ШМ-1;	УММ1.945210.ШК1.03	1
1.4.	ШМ-1.1;	УММ1.945210.ШК1.04	1
1.5.	ШМ-2;	УММ1.945210.ШК1.05	1
1.6.	ШМ-2.1;	УММ1.945210.ШК1.06	1
1.7.	ШМп;	УММ1.945210.ШК1.07	1
1.8.	ШМп.1;	УММ1.945210.ШК1.08	1
1.9.	ШдМ;	УММ1.945210.ШК1.09	1
1.10.	ШдМ-1;	УММ1.945210.ШК1.10	1
1.11.	ШдМ-2;	УММ1.945210.ШК1.11	1
1.12.	ШдМ-2.1;	УММ1.945210.ШК1.12	1
1.13.	ШдМ-3;	УММ1.945210.ШК1.13	1
1.14.	ШдМ-3.1;	УММ1.945210.ШК1.14	1
1.15.	ШдМ-4;	УММ1.945210.ШК1.15	1
1.16.	ШдМ-4.1;	УММ1.945210.ШК1.16	1
1.17.	ШдМ-5;	УММ1.945210.ШК1.17	1
1.18.	ШдМ-5.1;	УММ1.945210.ШК1.18	1
1.19.	ШдМп-2;	УММ1.945210.ШК1.19	1
1.20.	ШдМп-2.1;	УММ1.945210.ШК1.20	1
1.21.	ШдМп-3;	УММ1.945210.ШК1.21	1
1.22.	ШдМп-3.1;	УММ1.945210.ШК1.22	1
1.23.	ШдМп-4;	УММ1.945210.ШК1.23	1
1.24.	ШдМп-4.1;	УММ1.945210.ШК1.24	1
1.25.	ШдМп-5;	УММ1.945210.ШК1.25	1
1.26.	ШдМп-5.1. (при необходимости)	УММ1.945210.ШК1.26	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ШК1.ПС	1*
2.	Шкаф для материалов, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ШК3	
2.1.	МА-12;	УММ1.945210.ШК3.01	1
2.2.	МА-13;	УММ1.945210.ШК3.02	1
2.3.	МА-14;	УММ1.945210.ШК3.03	1
2.4.	МА-15;	УММ1.945210.ШК3.04	1
2.5.	МА-16;	УММ1.945210.ШК3.05	1
2.6.	МА-17;	УММ1.945210.ШК3.06	1
2.7.	МА-18;	УММ1.945210.ШК3.07	1
2.8.	МА-19. (при необходимости)	УММ1.945210.ШК3.08	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ШК3.ПС	1*
3.	Стеллаж - стойка для инструментов, материалов, в вариантах:	УММ1.945210.СС7	
3.1.	СП;	УММ1.945210.СС7.01	1
3.2.	С. (при необходимости)	УММ1.945210.СС7.02	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ШК7.ПС	1*
4.	Стеллаж-стойка для приборов, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СТ8	

4.1.	СПя-2;	УММ1.945210.СТ8.01	1
4.2.	СПя-3;	УММ1.945210.СТ8.02	1
4.3.	СПя-4;	УММ1.945210.СТ8.03	1
4.4.	СПя-5;	УММ1.945210.СТ8.04	1
4.5.	ТЭ;	УММ1.945210.СТ8.05	1
4.6.	ТЭ.1;	УММ1.945210.СТ8.06	1
4.7.	ТЭ-1;	УММ1.945210.СТ8.07	1
4.8.	ТЭ-1.1;	УММ1.945210.СТ8.08	1
4.9.	СПя-6;	УММ1.945210.СТ8.09	1
4.10.	СП-6.1;	УММ1.945210.СТ8.10	1
4.11.	СММ;	УММ1.945210.СТ8.11	1
4.12.	СММ.1.1. (при необходимости)	УММ1.945210.СТ8.12	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СТ8.ПС	1*
5.	Стол инструментальный, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СИ12	
5.1.	СИ-2н;	УММ1.945210.СИ12.01	1
5.2.	СИо;	УММ1.945210.СИ12.02	1
5.3.	СИН;	УММ1.945210.СИ12.03	1
5.4.	СИ-2с;	УММ1.945210.СИ12.04	1
5.5.	СИя-2н;	УММ1.945210.СИ12.05	1
5.6.	СИН-2н;	УММ1.945210.СИ12.06	1
5.7.	МА-Сия-2;	УММ1.945210.СИ12.07	1
5.8.	СИ-3н;	УММ1.945210.СИ12.08	1
5.9.	СИ-3с;	УММ1.945210.СИ12.9	1
5.10.	Ти-1;	УММ1.945210.СИ12.10	1
5.11.	Ти-2;	УММ1.945210.СИ12.11	1
5.12.	СиП-2;	УММ1.945210.СИ12.12	1
5.13.	МА-СИ-3;	УММ1.945210.СИ12.13	1
5.14.	СМ-2;	УММ1.945210.СИ12.14	1
5.15.	СМ-3;	УММ1.945210.СИ12.15	1
5.16.	СМя-3. (при необходимости)	УММ1.945210.СИ12.16	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СИ12.ПС	1*
6.	Стол инструментальный надкроватный, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СН13	
6.1.	СНг;	УММ1.945210.СН13.01	1
6.2.	СН;	УММ1.945210.СН13.02	1
6.3.	СН-1;	УММ1.945210.СН13.03	1
6.4.	СН-2. (при необходимости)	УММ1.945210.СН13.04	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СН13.ПС	1*
7.	Стол манипуляционный, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СМ14	1
7.1.	СИо-1я;	УММ1.945210.СМ14.01	1
7.2.	СИо-2я;	УММ1.945210.СМ14.02	1
7.3.	СиП-1;	УММ1.945210.СМ14.03	1
7.4.	СИА-1;	УММ1.945210.СМ14.04	1
7.5.	СИА-2;	УММ1.945210.СМ14.05	1
7.6.	СИА-3;	УММ1.945210.СМ14.06	1
7.7.	СИА-3.н;	УММ1.945210.СМ14.07	1
7.8.	СИА-4;	УММ1.945210.СМ14.08	1
7.9.	СИА-4н;	УММ1.945210.СМ14.09	1
7.10.	СИА-5. (при необходимости)	УММ1.945210.СМ14.10	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СМ14.ПС	1*
8.	Стол проктологический, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СП16	

8.1.	СПр. (при необходимости)	УММ1.945210.СП16.01	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СП16.ПС	1*
9.	Стол для инъекций, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СИ17	
9.1.	СМР;	УММ1.945210.СИ17.01	1
9.2.	СМР-2. (при необходимости)	УММ1.945210.СИ17.02	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СИ17.ПС	1*
10.	Тумба подкатная для материалов, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ТМ18	1
10.1.	ТП-1;	УММ1.945210.ТМ18.01	1
10.2.	ТП-1.1;	УММ1.945210.ТМ18.02	1
10.3.	ТП-2;	УММ1.945210.ТМ18.03	1
10.4.	ТП-2.1;	УММ1.945210.ТМ18.04	1
10.5.	ТП-3;	УММ1.945210.ТМ18.05	1
10.6.	ТП-3.1;	УММ1.945210.ТМ18.06	1
10.7.	ТП-4;	УММ1.945210.ТМ18.07	1
10.8.	ТП-4.1;	УММ1.945210.ТМ18.08	1
10.9.	ТП-5;	УММ1.945210.ТМ18.09	1
10.10.	ТП-5.1;	УММ1.945210.ТМ18.10	1
10.11.	ТП-5.2;	УММ1.945210.ТМ18.11	1
10.12.	ТП-6.1;	УММ1.945210.ТМ18.12	1
10.13.	ТМ-1;	УММ1.945210.ТМ18.13	1
10.14.	ТМ-1.1;	УММ1.945210.ТМ18.14	1
10.15.	ТМ-2;	УММ1.945210.ТМ18.15	1
10.16.	ТМ-2.1;	УММ1.945210.ТМ18.16	1
10.17.	ТМ-3;	УММ1.945210.ТМ18.17	1
10.18.	ТМ-3.1;	УММ1.945210.ТМ18.18	1
10.19.	ТМ-4;	УММ1.945210.ТМ18.19	1
10.20.	ТМ-4.1;	УММ1.945210.ТМ18.20	1
10.21.	ТМ-5;	УММ1.945210.ТМ18.21	1
10.22.	ТМ-6;	УММ1.945210.ТМ18.22	1
10.23.	МА-8;	УММ1.945210.ТМ18.23	1
10.24.	МА-8.1;	УММ1.945210.ТМ18.24	1
10.25.	МА-9;	УММ1.945210.ТМ18.25	1
10.26.	МА-9.1;	УММ1.945210.ТМ18.26	1
10.27.	МА-10;	УММ1.945210.ТМ18.27	1
10.28.	МА-10.1;	УММ1.945210.ТМ18.28	1
10.29.	МА-11;	УММ1.945210.ТМ18.29	1
10.30.	МА-23;	УММ1.945210.ТМ18.30	1
10.31.	МА-23.1;	УММ1.945210.ТМ18.31	1
10.32.	ТПМ;	УММ1.945210.ТМ18.32	1
10.33.	ТПМ-4;	УММ1.945210.ТМ18.33	1
10.34.	ТМ;	УММ1.945210.ТМ18.34	1
10.35.	ТПМ-2;	УММ1.945210.ТМ18.35	1
10.36.	ТМя-2;	УММ1.945210.ТМ18.36	1
10.37.	ТМя-2.1;	УММ1.945210.ТМ18.37	1
10.38.	ТМя-2.2;	УММ1.945210.ТМ18.38	1
10.39.	ТМя-3;	УММ1.945210.ТМ18.39	1
10.40.	ТМя-3.1;	УММ1.945210.ТМ18.40	1
10.41.	ТМя-3.2;	УММ1.945210.ТМ18.41	1
10.42.	ТМя-4;	УММ1.945210.ТМ18.42	1
10.43.	ТМя-5. (при необходимости)	УММ1.945210.ТМ18.43	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ТМ18.ПС	1*

11.	Тумба подкатная с регулируемой столешницей, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ТС19	
11.1.	ТПМ-1;	УММ1.945210.ТС19.01	1
11.2.	ТПМ-3;	УММ1.945210.ТС19.02	1
11.3.	ТПМ-3/1;	УММ1.945210.ТС19.03	1
11.4.	ТПМ-5;	УММ1.945210.ТС19.04	1
11.5.	ТПМ-6. (при необходимости)	УММ1.945210.ТС19.05	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ТС19.ПС	1*
12.	Тумбы стационарные для материалов, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ТМ20	
12.1.	СЛ-11;	УММ1.945210.ТМ20.01	1
12.2.	СЛ-11.1;	УММ1.945210.ТМ20.02	1
12.3.	СЛ-11/2;	УММ1.945210.ТМ20.03	1
12.4.	СЛ-11/2.1;	УММ1.945210.ТМ20.04	1
12.5.	СЛ-11/2.2;	УММ1.945210.ТМ20.05	1
12.6.	СЛ-11/2.3;	УММ1.945210.ТМ20.06	1
12.7.	СЛ-12;	УММ1.945210.ТМ20.07	1
12.8.	СЛМ-4;	УММ1.945210.ТМ20.08	1
12.9.	СЛМ-4.1;	УММ1.945210.ТМ20.09	1
12.10.	СЛМ-4.2;	УММ1.945210.ТМ20.10	1
12.11.	СЛМ-4.3;	УММ1.945210.ТМ20.11	1
12.12.	СЛМ-4.4;	УММ1.945210.ТМ20.12	1
12.13.	СЛМ-5;	УММ1.945210.ТМ20.13	1
12.14.	МА-25;	УММ1.945210.ТМ20.14	1
12.15.	МА-25.1;	УММ1.945210.ТМ20.15	1
12.16.	МА-25.2;	УММ1.945210.ТМ20.16	1
12.17.	МА-25.3;	УММ1.945210.ТМ20.17	1
12.18.	МА-25.4;	УММ1.945210.ТМ20.18	1
12.19.	МА-21;	УММ1.945210.ТМ20.19	1
12.20.	ТП-6;	УММ1.945210.ТМ20.20	1
12.21.	ТП-6/1. (при необходимости)	УММ1.945210.ТМ20.21	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ТМ20.ПС	1*
13.	Тумбы стационарные узкие для материалов:	УММ1.945210.ТМ21	
13.1.	ТС-1;	УММ1.945210.ТМ21.01	1
13.2.	ТС-3;	УММ1.945210.ТМ21.02	1
13.3.	ТС-4;	УММ1.945210.ТМ21.03	1
13.4.	ТмС-1;	УММ1.945210.ТМ21.04	1
13.5.	ТмС-3;	УММ1.945210.ТМ21.05	1
13.6.	ТмС-4;	УММ1.945210.ТМ21.06	1
13.7.	МА-8.1;	УММ1.945210.ТМ21.07	1
13.8.	МА-9.1;	УММ1.945210.ТМ21.08	1
13.9.	МА-10.1;	УММ1.945210.ТМ21.09	1
13.10.	МА-23.1. (при необходимости)	УММ1.945210.ТМ21.10	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ТМ21.ПС	1*
14.	Кушетка смотровая, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.КС23.	
14.1.	КС;	УММ1.945210.КС23.01	1
14.2.	КС-1;	УММ1.945210.КС23.02	1
14.3.	КС-2;	УММ1.945210.КС23.03	1
14.4.	КС/2;	УММ1.945210.КС23.04	1
14.5.	КС-3;	УММ1.945210.КС23.05	1
14.6.	КФТ.	УММ1.945210.КС23.06	1
-	Паспорт	УММ1.945210.КС23.ПС	1

15.	Столы массажные, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СМ25	
15.1.	СМ-1;	УММ1.945210.СМ25.01	1
15.2.	СМ-2;	УММ1.945210.СМ25.02	1
15.3.	СМ-3;	УММ1.945210.СМ25.03	1
15.4.	СМ-4;	УММ1.945210.СМ25.04	1
15.5.	СМ-5;	УММ1.945210.СМ25.05	1
15.6.	СМ-7;	УММ1.945210.СМ25.06	1
15.7.	СМС-1;	УММ1.945210.СМ25.07	1
15.8.	СМС-2. (при необходимости)	УММ1.945210.СМ25.08	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СМ25 ПС	1*
16.	Ширмы медицинские, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ШМ32	
16.1.	Ш-1;	УММ1.945210.ШМ32.01	1
16.2.	Ш-2;	УММ1.945210.ШМ32.02	1
16.3.	Ш-3.3.	УММ1.945210.ШМ32.03	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ШМ32.ПС	1
II. Набор оборудования для палат:			
1.	Стол передвижной, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СП15	
1.1.	СИБ;	УММ1.945210.СП15.01	1
1.2.	СИБ (1);	УММ1.945210.СП15.02	1
1.3.	СИБ-1;	УММ1.945210.СП15.03	1
1.4.	СПП;	УММ1.945210.СП15.04	1
1.5.	СПН. (при необходимости)	УММ1.945210.СП15.05	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СП15.ПС	1*
2.	Модуль с мойкой, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ММ22.	
2.1.	СТм-1;	УММ1.945210.ММ22.01	1
2.2.	СТм-2;	УММ1.945210.ММ22.02	1
2.3.	ТМм-1;	УММ1.945210.ММ22.03	1
2.4.	ТМм-2;	УММ1.945210.ММ22.04	1
2.5.	МА-6;	УММ1.945210.ММ22.05	1
2.6.	МА-7;	УММ1.945210.ММ22.06	1
2.7.	МА-7/1;	УММ1.945210.ММ22.07	1
2.8.	МА-20;	УММ1.945210.ММ22.08	1
2.9.	МА-21.1.	УММ1.945210.ММ22.09	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ММ22.ПС	1
3.	Стол пеленальный, в вариантах исполнения:	УММ1.945210.СП26	
3.1.	СППМ;	УММ1.945210.СП26.01	1
3.2.	СППМ-1;	УММ1.945210.СП26.02	1
3.3.	СППМ-2.	УММ1.945210.СП26.03	1
-	Паспорт	УММ1.945210.СП26 ПС	1
4.	Подставки для таза в вариантах исполнения:	УММ1.945210.ПТ33	
4.1.	ПТ;	УММ1.945210.ПТ33.01	1
4.2.	ПТ-1;	УММ1.945210.ПТ33.02	1
4.3.	ПТн;	УММ1.945210.ПТ33.03	1
4.4.	ПТн-1. (при необходимости)	УММ1.945210.ПТ33.04	1
-	Паспорт	УММ1.945210.ПТ33.ПС	1*
	Руководство по эксплуатации, паспорт Набор оборудования кабинетов и палат «УММ»	УММ1.945210.ОКП.РЭ,ПС	1*

Тара потребительская Шкаф для медикаментов;	УММ1.945210.ШК1.ТП	1*
Тара потребительская Шкаф для материалов;	УММ1.945210.ШК3.ТП	1*
Тара потребительская Стеллаж - стойка для инструментов, материалов;	УММ1.945210.ШК7.ТП	1*
Тара потребительская Стеллаж-стойка для приборов;	УММ1.945210.СТ8.ТП	1*
Тара потребительская Стол инструментальный;	УММ1.945210.СИ12.ТП	1*
Тара потребительская Стол инструментальный надкроватный;	УММ1.945210.СН13.ТП	1*
Тара потребительская Стол манипуляционный;	УММ1.945210.СМ14.ТП	1*
Тара потребительская Стол передвижной;	УММ1.945210.СП15.ТП	1*
Тара потребительская Стол проктологический;	УММ1.945210.СП16.ТП	1*
Тара потребительская Стол для инъекций;	УММ1.945210.СИ17.ТП	1*
Тара потребительская Тумба подкатная для материалов;	УММ1.945210.ТМ18.ТП	1*
Тара потребительская Тумба подкатная с регулируемой столешницей;	УММ1.945210.ТС19.ТП	1*
Тара потребительская Тумбы стационарные для материалов;	УММ1.945210.ТМ20.ТП	1*
Тара потребительская Тумбы стационарные узкие для материалов;	УММ1.945210.ТМ21.ТП	1*
Тара потребительская Модуль с мойкой;	УММ1.945210.ММ22.ТП	1
Тара потребительская Стол пеленальный;	УММ1.945210.СП26.ТП	1
Тара потребительская Кушетка смотровая;	УММ1.945210.КС23.ТП	1
Тара потребительская Столы массажные;	УММ1.945210.СМ25.ТП	1*
Тара потребительская Ширмы медицинские;	УММ1.945210.ШМ32.ТП	1
Тара потребительская Подставки для таза	УММ1.945210.ПТ33.ТП	1*

* - определяется при необходимости.

Изделия, входящие в состав вариантов исполнения (в том числе в отношении модели и (или) количества) поставляются по выбору заказчика.

Приложение В
(справочное)

Набор оборудования кабинетов и палат

I. Набор оборудование для кабинетов:

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в кабинетах врачей-специалистов.

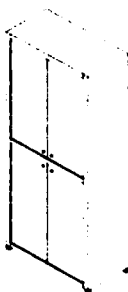
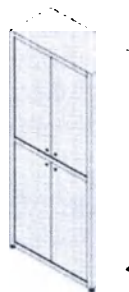
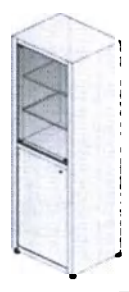
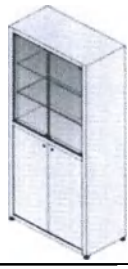
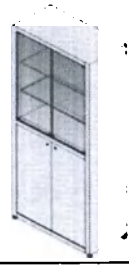
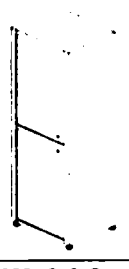
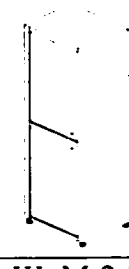
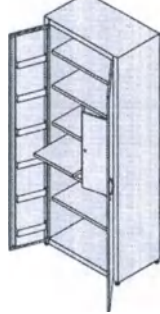
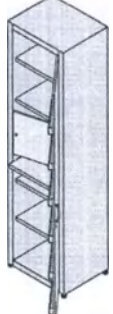
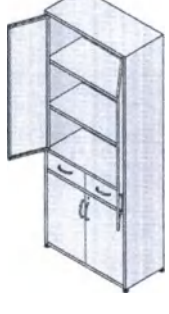
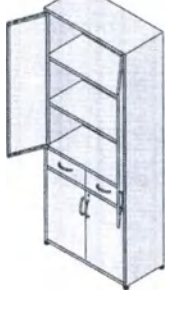
Показания к применению. Размещение, хранение и перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

Рис. I.1.

1 Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения: 1.1. ШМ; 1.2. ШМ.1; 1.3. ШМ-1; 1.4. ШМ-1.1; 1.5. ШМ-2; 1.6. ШМ-2.1; 1.7. ШМп; 1.8. ШМп.1; 1.9. ШдМ; 1.10. ШдМ-1; 1.11. ШдМ-2; 1.12. ШдМ-2.1; 1.13. ШдМ-3; 1.14. ШдМ-3.1; 1.15. ШдМ-4; 1.16. ШдМ-4.1; 1.17. ШдМ-5; 1.18. ШдМ-5.1; 1.19. ШдМп-2; 1.20. ШдМп-2.1; 1.21. ШдМп-3; 1.22. ШдМп-3.1; 1.23. ШдМп-4; 1.24. ШдМп-4.1; 1.25. ШдМп-5; 1.26. ШдМп-5.1. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов.

Показания к применению. Размещение и хранение лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

ШМ 	ШМ.1 	ШМ-1 	ШМ-1.1 
ШМ-2 	ШМ-2.1 	ШМп 	ШМп.1 
ШдМ 	ШдМ-1 	ШдМ-2 	ШдМ-2.1 

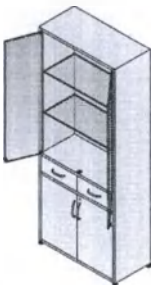
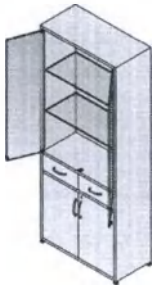
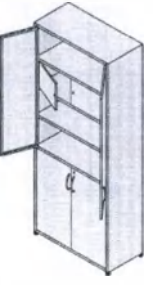
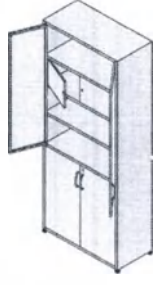
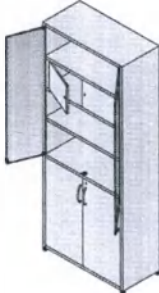
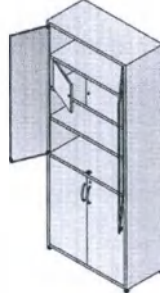
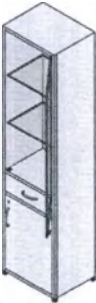
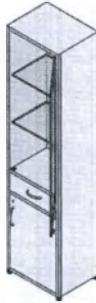
ШдМ-3 	ШдМ-3.1 	ШдМ-4 	ШдМ-4.1 
ШдМ-5 	ШдМ-5.1 	ШдМп-2 	ШдМп-2.1 
ШдМп-3 	ШдМп-3.1 	ШдМп-4 	ШдМп-4.1 
ШдМп-5 	ШдМп-5.1 		

Рис. 1.2

2. Шкаф для материалов, в вариантах исполнения: 2.1. МА-12; 2.2. МА-13; 2.3. МА-14; 2.4. МА-15; 2.5. МА-16; 2.6. МА-17; 2.7. МА-18; 2.8. МА-19. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов.

Показания к применению.

Размещение и хранение лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

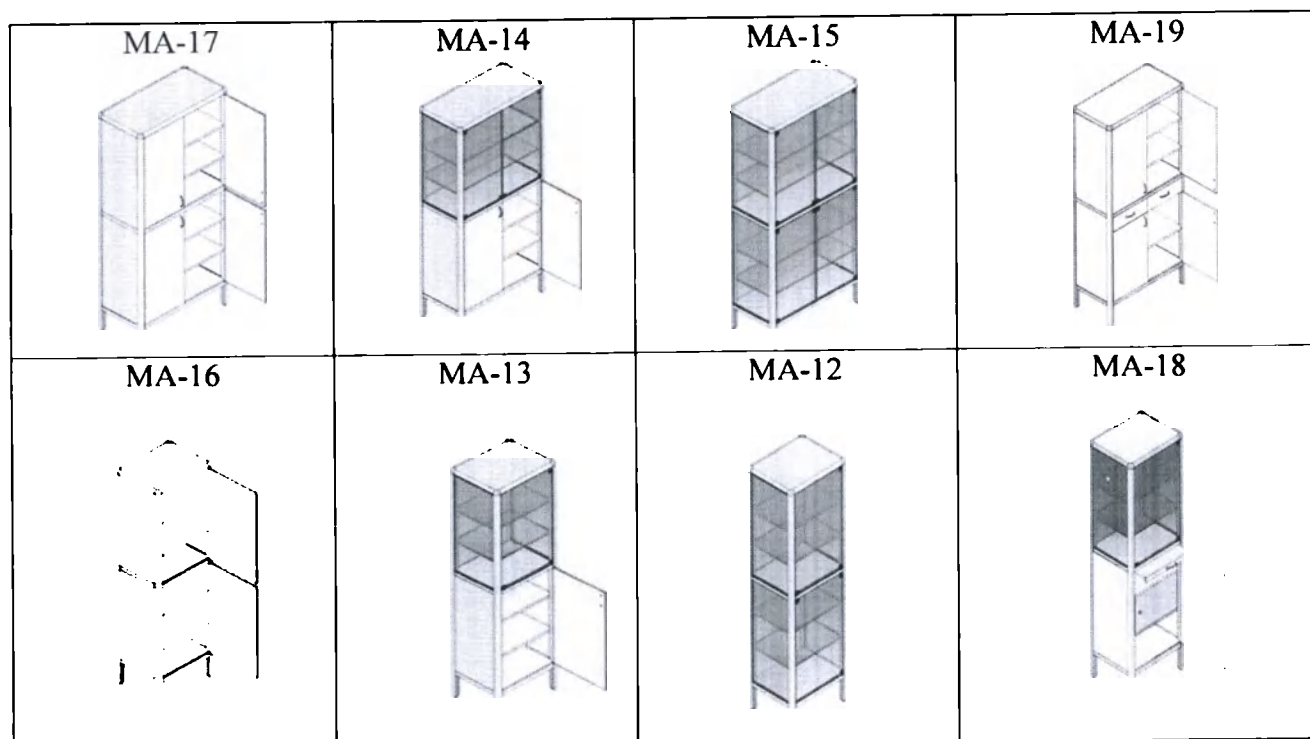


Рис. 1.3

3. Стеллаж - стойка для инструментов, материалов, в вариантах исполнения: 3.1. СП; 3.2. С. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

Показания к применению. Размещение хранения и быстрого доступа инструментов, материалов для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

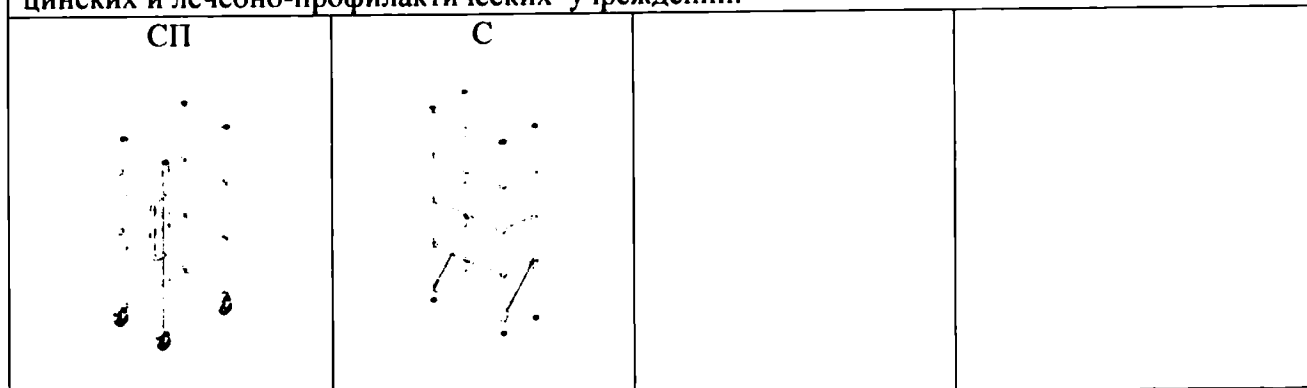


Рис. 1.4

4. Стеллаж-стойка для приборов, в вариантах исполнения: 4.1. СПя-2; 4.2. СПя-3; 4.3. СПя-4; 4.4. СПя-5; 4.5. ТЭ; 4.6. ТЭ.1; 4.7. ТЭ-1; 4.8. ТЭ-1.1; 4.9. СПя-6; 4.10. СП-6.1; 4.11. СММ; 4.12. СММ.1.1. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения и перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

Показания к применению. Размещение хранения и быстрого доступа инструментов, материалов для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

СПя-5 	СПя-4 	СПя-3 	СПя-2 
ТЭ 	ТЭ.1 	ТЭ-1 	ТЭ-1.1 
СПя-6 	СП-6.1 	СММ 	СММ.1.1 

Рис. I.5

5. Стол инструментальный, в вариантах исполнения: 5.1. СИ-2н; 5.2. СИо; 5.3. СИн; 5.4. СИ-2с; 5.5. СИя-2н; 5.6. СИн-2н; 5.7. МА-Сия-2; 5.8. СИ-3н; 5.9. СИ-3с; 5.10. Ти-1; 5.11. Ти-2; 5.12. СиП-2; 5.13. МА-СИ-3; 5.14. СМ-2; 5.15. СМ-3; 5.16. СМя-3. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов

Показания к применению. Для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в предоперационном, операционном отделении больницы, процедурных кабинетах и кабинетах врачей-специалистов.

СИ-2н 	СИо 	СИн 	СИ-2с 
Сия-2н	СИН-2н	МА-Сия-2	СИ-3н

			
СИ-3с	ТИ-1	ТИ-2	СИП-2
			
МА-СИ-3	СМ-2	СМ-3	СМЯ-3

Рис. I.6

6. Стол инструментальный надкроватный, в вариантах исполнения: 6.1. СНг; 6.2. СН; 6.3. СН-1; 6.4. СН-2. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов

Показания к применению. Для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, лабораториях клиник и пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

СНг	СН	СН-1	СН-2
			

Рис. I.7

7. Стол манипуляционный, в вариантах исполнения: 7.1. СИо-1я; 7.2. СИо-2я; 7.3. СИП-1; 7.4. СИА-1; 7.5. СИА-2; 7.6. СИА-3; 7.7. СИА-3.н; 7.8. СИА-4; 7.9. СИА-4н; 7.10. СИА-5. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

Показания к применению. Для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских

приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в предоперационном, операционном отделении больницы, процедурных кабинетах и кабинетах врачей-специалистов.

СИо-1я 	СИо-2я 	СиП-1 	СИА-1 
СИА-2 	СИА-3 	СИА-3н 	СИА-4 
СИА-4н 	СИА-5 		

Рис. I.8



8. Стол проктологический, в вариантах исполнения: 8.1. СПр. (при необходимости).
Назначение медицинского изделия. Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.
Показания к применению. Для размещения пациентов, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

СПр 			
--	--	--	--

Рис. I.9

9. Стол для инъекций, в вариантах исполнения: 9.1. СМР; 9.2. СМР-2. (при необходимости).
Назначение медицинского изделия. Для размещения пациентов, проведения процедур, инъекций.
Показания к применению. Для размещения пациентов, проведения процедур инъекций, осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

СМР	СМР-2		
			
Рис. I.10 10. Тумба подкатная для материалов, в вариантах исполнения: 10.1. ТП-1; 10.2. ТП-1.1; 10.3. ТП-2; 10.4. ТП-2.1; 10.5. ТП-3; 10.6. ТП-3.1; 10.7. ТП-4; 10.8. ТП-4.1; 10.9. ТП-5; 10.10. ТП-5.1; 10.11. ТП-5.2; 10.12. ТП-6.1; 10.13. ТМ-1; 10.14. ТМ-1.1; 10.15. ТМ-2; 10.16. ТМ-2.1; 10.17. ТМ-3; 10.18. ТМ-3.1; 10.19. ТМ-4; 10.20. ТМ-4.1; 10.21. ТМ-5; 10.22. ТМ-6; 10.23. МА-8; 10.24. МА-8.1; 10.25. МА-9; 10.26. МА-9.1; 10.27. МА-10; 10.28. МА-10.1; 10.29. МА-11; 10.30. МА-23; 10.31. МА-23.1; 10.32. ТПМ; 10.33. ТПМ-4; 10.34. ТМ; 10.35. ТПМ-2; 10.36. ТМя-2; 10.37. ТМя-2.1; 10.38. ТМя-2.2; 10.39. ТМя-3; 10.40. ТМя-3.1; 10.41. ТМя-3.2; 10.42. ТМя-4; 10.43. ТМя-5. (при необходимости). Назначение медицинского изделия. Для размещения и перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей. Показания к применению. Размещение, хранение, перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.			
ТП-1	ТП-1.1	ТП-2	ТП-2.1
			
ТП-3	ТП-3.1	ТП-4	ТП-4.1
			
ТП-5	ТП-5.1	ТП-5.2	ТП-6.1
			

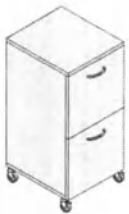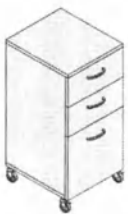TM-1 	TM-1.1 	TM-2 	TM-2.1 
TM-3 	TM-3.1 	TM-4 	TM-4.1 
TM-5 	TM-6 	MA-8 	MA-8.1 
MA-9 	MA-9.1 	MA-10 	MA-10.1 
MA-11 	MA-23 	MA-23.1 	TIIM 

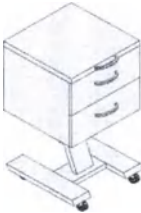
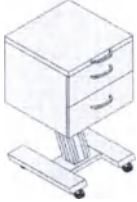
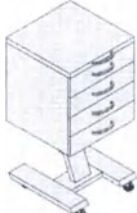
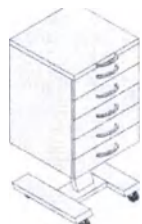
ТПМ-4	ТМ	ТПМ-2	ТМя-2
			
ТМя-2.1	ТМя-2.2	ТМя-3	ТМя-3.1
			
ТМя-3.2	ТМя-4	ТМя-5	
			

Рис. I.11

11. Тумба подкатная с регулируемой столешницей, в вариантах исполнения: 11.1. ТПМ-1; 11.2. ТПМ-3; 11.3. ТПМ-3/1; 11.4. ТПМ-5; 11.5. ТПМ-6. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения и перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

Показания к применению. Размещение, хранение, перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

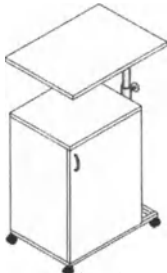
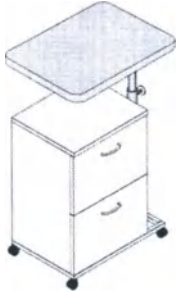
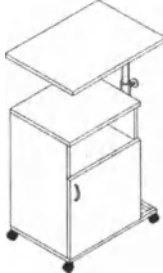
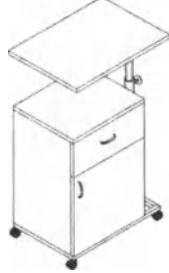
ТПМ-1	ТПМ -3/1	ТПМ-5	ТПМ-6
			
ТПМ-3			
			

Рис. I.12

12. Тумбы стационарные для материалов в вариантах исполнения: 12.1. СЛ-11; 12.2. СЛ-11.1; 12.3. СЛ-11/2; 12.4. СЛ-11/2.1; 12.5. СЛ-11/2.2; 12.6. СЛ-11/2.3; 12.7. СЛ-12; 12.8. СЛМ-4; 12.9. СЛМ-4.1; 12.10. СЛМ-4.2; 12.11. СЛМ-4.3; 12.12. СЛМ-4.4; 12.13. СЛМ-5; 12.14. МА-25; 12.15. МА-25.1; 12.16. МА-25.2; 12.17. МА-25.3; 12.18. МА-25.4; 12.19. МА-21; 12.20. ТП-6; 12.21. ТП-6/1. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для материалов размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

Показания к применению. Размещение и хранение лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

СЛ-11 	СЛ-11.1 	СЛ-11/2 	СЛ-11/2.1 
СЛ-11/2.2 	СЛ-11/2.3 	СЛ-12 	СЛМ-4 
СЛМ-4.1 	СЛМ-4.2 	СЛМ-4.3 	СЛМ-4.4 
СЛМ-5 	МА-25 	МА-25.1 	МА-25.2 
МА-25.3 	МА-25.4 	МА-21 	ТП-6 

ТП-6/1 			
---	--	--	--

Рис. I.13

13. Тумбы стационарные узкие для материалов в вариантах исполнения: 13.1. ТС-1; 13.2. ТС-3; 13.3. ТС-4; 13.4. ТмС-1; 13.5. ТмС-3; 13.6. ТмС-4; 13.7. МА-8.1; 13.8. МА-9.1; 13.9. МА-10.1; 13.10. МА-23.1. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для материалов размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

Показания к применению. Размещение и хранение лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

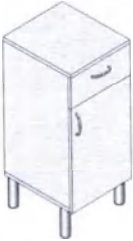
ТС-1 	ТС-4 	ТС-3 	ТмС-1 
ТмС-4 	ТмС-3 	МА-23.1 	МА-8.1 
МА-9.1 	МА-10.1 		

Рис. I.14

14. Кушетка смотровая в вариантах исполнения: 14.1. КС; 14.2. КС-1; 14.3. КС-2; 14.4. КС/2; 14.5. КС-3; 14.6. КФТ.

Назначение медицинского изделия. Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

Показания к применению. Для размещения пациентов, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

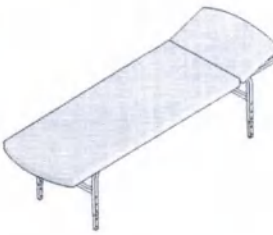
КС	КС-1	КС-2	КС/2
			
КС-3	КФТ		
			

Рис. I.15

15. Столы массажные в вариантах исполнения: 15.1. СМ-1; 15.2. СМ-2; 15.3. СМ-3; 15.4. СМ-4. 15.5. СМ-5; 15.6. СМ-7; 15.7. СМС-1; 15.8. СМС-2. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения пациентов, проведения процедур, массажа.

Показания к применению. Для размещения пациентов, проведения процедур массажа, осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

СМ-1	СМ-4	СМ-2	СМ-3
			
СМ-5	СМ-7	СМС-1	СМС-2
			

Рис. I.16

16. Ширмы медицинские в вариантах исполнения: 16.1. Ш-1; 16.2. Ш-2; 16.3. Ш-3.

Назначение медицинского изделия. Для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

Показания к применению. Для размещения пациентов, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

Ш-1	Ш-2	Ш-3	
			

II. Набор оборудования для палат:

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов

Показания к применению. Для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (смотровых кабинетах, больничных палатах, в процедурных кабинетах и лабораториях клиник) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

Рис. II.1

1. Стол передвижной в вариантах исполнения: 1.1. СИБ; 1.2. СИБ (1); 1.3. СИБ-1; 1.4. СПП; 1.5. СПН. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов

Показания к применению. Для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в процедурных кабинетах, больничных палатах и лабораториях медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

СИБ	СИБ (1)	СИБ-1	СПП
			
СПН			
			

Рис. II.2

2. Модуль с мойкой в вариантах исполнения: 2.1. СТм-1; 2.2. СТм-2; 2.3. ТМм-1; 2.4. ТМм-2; 2.5. МА-6; 2.6. МА-7; 2.7. МА-7/1; 2.8. МА-20; 2.9. МА-21.1.

Назначение медицинского изделия. Для дезинфекция рук врачей-специалистов при проведении процедур осмотра и обследования пациентов.

Показания к применению. Дезинфекция рук врачей-специалистов при проведении процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

СТм-1	СТм-2	ТМм-1	ТМм-2
			

МА-6 	МА-7 	МА-7/1 	МА-20 
МА-21.1 			

Рис. II.3

3. Стол пеленальный в вариантах исполнения: 3.1. СППМ; 3.2. СППМ-1; 3.3. СППМ-2.

Назначение медицинского изделия. Для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

Показания к применению. Для размещения, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

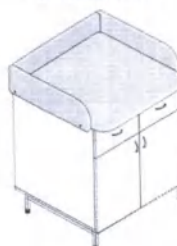
СППМ 	СППМ-1 	СППМ-2 	
---	--	---	--

Рис. II.4

4. Подставки для таза в вариантах исполнения: 4.1. ПТ; 4.2. ПТ-1; 4.3. ПТн; 4.4. ПТн-1. (при необходимости).

Назначение медицинского изделия. Для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

Показания к применению. Для проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

ПТ 	ПТ-1 	ПТн 	ПТн-1 
---	---	---	--

9.Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10.Гарантийные обязательства.

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

10.2 Срок хранения – один год со дня изготовления

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11.Свидетельство о приемке.

Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения: ☐ ШМ; ☐ ШМ.1; ☐ ШМ-1; ☐ ШМ-1.1; ☐ ШМ-2; ☐ ШМ-2.1; ☐ ШМп; ☐ ШМп1; ☐ ШдМ; ☐ ШдМ-1; ☐ ШдМ-2; ☐ ШдМ-2.1; ☐ ШдМ-3; ☐ ШдМ-3.1; ☐ ШдМ-4; ☐ ШдМ-4.1; ☐ ШдМ-5; ☐ ШдМ-5.1; ☐ ШдМп-2; ☐ ШдМп-2.1; ☐ ШдМп-3; ☐ ШдМп-3.1; ☐ ШдМп-4; ☐ ШдМп-4.1; ☐ ШдМп-5; ☐ ШдМп-5.1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения: ☐ ШМ; ☐ ШМ.1; ☐ ШМ-1; ☐ ШМ-1.1; ☐ ШМ-2; ☐ ШМ-2.1; ☐ ШМп; ☐ ШМп1; ☐ ШдМ; ☐ ШдМ-1; ☐ ШдМ-2; ☐ ШдМ-2.1; ☐ ШдМ-3; ☐ ШдМ-3.1; ☐ ШдМ-4; ☐ ШдМ-4.1; ☐ ШдМ-5; ☐ ШдМ-5.1; ☐ ШдМп-2; ☐ ШдМп-2.1; ☐ ШдМп-3; ☐ ШдМп-3.1; ☐ ШдМп-4; ☐ ШдМп-4.1; ☐ ШдМп-5; ☐ ШдМп-5.1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____ (дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на обслуживание _____ (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016

Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

☐ ШМ; ☐ ШМ.1; ☐ ШМ-1; ☐ ШМ-1.1; ☐ ШМ-2; ☐ ШМ-2.1; ☐ ШМп; ☐ ШМп1; ☐ ШдМ; ☐ ШдМ-1; ☐ ШдМ-2; ☐ ШдМ-2.1; ☐ ШдМ-3; ☐ ШдМ-3.1; ☐ ШдМ-4; ☐ ШдМ-4.1; ☐ ШдМ-5; ☐ ШдМ-5.1; ☐ ШдМп-2; ☐ ШдМп-2.1; ☐ ШдМп-3; ☐ ШдМп-3.1; ☐ ШдМп-4; ☐ ШдМп-4.1; ☐ ШдМп-5; ☐ ШдМп-5.1.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.ШК1.01; ☐ УММ1.945210.ШК1.02; ☐ УММ1.945210.ШК1.03;
☐ УММ1.945210.ШК1.04; ☐ УММ1.945210.ШК1.05; ☐ УММ1.945210.ШК1.06;
☐ УММ1.945210.ШК1.07; ☐ УММ1.945210.ШК1.08; ☐ УММ1.945210.ШК1.09;
☐ УММ1.945210.ШК1.10; ☐ УММ1.945210.ШК1.11; ☐ УММ1.945210.ШК1.12;
☐ УММ1.945210.ШК1.13; ☐ УММ1.945210.ШК1.14; ☐ УММ1.945210.ШК1.15;
☐ УММ1.945210.ШК1.16; ☐ УММ1.945210.ШК1.17; ☐ УММ1.945210.ШК1.18;
☐ УММ1.945210.ШК1.19; ☐ УММ1.945210.ШК1.20; ☐ УММ1.945210.ШК1.21;
☐ УММ1.945210.ШК1.22; ☐ УММ1.945210.ШК1.23; ☐ УММ1.945210.ШК1.24;
☐ УММ1.945210.ШК1.25; ☐ УММ1.945210.ШК1.26.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения: ШМ; ШМ.1; ШМ-1; ШМ-1.1; ШМ-2; ШМ-2.1; ШМп; ШМп.1; ШдМ; ШдМ-1; ШдМ-2; ШдМ-2.1; ШдМ-3; ШдМ-3.1; ШдМ-4; ШдМ-4.1; ШдМ-5; ШдМ-5.1; ШдМп-2; ШдМп-2.1; ШдМп-3; ШдМп-3.1; ШдМп-4; ШдМп-4.1; ШдМп-5; ШдМп-5.1. (далее – изделие) используется для размещения и хранения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

1.1 Изделие предназначено для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов, медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в кабинетах врачей-специалистов.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*				Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Дверей (с лотками)/замков	Полок	Трейзеров (с полками)/замков	Ящиков/замков				
□	ШМ	4м/2	3м	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-50кг
□	ШМ.1	4м/2	3м	-	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	39кг-45кг
□	ШМ-1	1с	2с	-	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
		1м/1	1м	-	-				
□	ШМ-1.1	1с	2с	-	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
		1м/1	1м	-	-				
□	ШМ-2	2с	2с	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
		2м/1	1м	-	-				
□	ШМ-2.1	2с	2с	-	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
		2м/1	1м	-	-				
□	ШМп	2м/2	3м	-	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
□	ШМп.1	2м/2	3м	-	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
□	ШдМ	2м (12м)/1	5м	1м (1м)/1	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	49кг-55кг
□	ШдМ-1	1м(6м)/1	4м	1м/1	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг

□	ШдМ-2		3м	-	2м	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	49кг-55кг
□	ШдМ-2.1	4м/2	3м	-	2м	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
□	ШдМ-3	2с	2с	-	2м	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	49кг-55кг
□	ШдМ-3.1	2с	2с	-	2м	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
		2м/2	1м						
□	ШдМ-4	4м/2	2м	2м/2	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
□	ШдМ-4.1	4м/2	2м	2м/2	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	39кг-5кг
□	ШдМ-5	2с	2м	2м/2	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-0кг
		2м/1	1м						
□	ШдМ-5.1	2с	2м	2м/2	-	500мм-700мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	39кг-5кг
		2м/1	1м						
□	ШдМп-2	2м/2	3м	-	1м	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
□	ШдМп-2.1	2м/2	3м	-	1м	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
□	ШдМп-3	1с	2с	-	1м	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	44кг-50кг
		1м/1	1м						
□	ШдМп-3.1	1с	2с	-	1м	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
		1м/1	1м						
□	ШдМп-4	2м/2	2м	1м/1	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
□	ШдМп-4.1	2м/2	2м	1м/1	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35 кг
□	ШдМп-5	1с	1м	1м/1	-	400мм-500мм	300мм-500мм	1700мм-1900мм	34кг-40кг
		1м/1	1м						
□	ШдМп-5.1	1с	1м	1м/1	-	300мм-400мм	250мм-300мм	1700мм-1900мм	29кг-35кг
		1м/1	1м						

* «М» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный);

«с» - стекло листовое бесцветное.

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Шкаф для медикаментов, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98.раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для материалов, в вариантах исполнения: ☐МА-12; ☐МА-13; ☐МА-14;
☐МА-15; ☐МА-16; ☐МА-17; ☐МА-18; ☐МА-19,

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен

(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на
обслуживание

(дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ **«УММ»** **по ТУ 9452-001-81190519-2016**

Шкаф для материалов, в вариантах исполнения:

☐МА-12; ☐МА-13; ☐МА-14; ☐МА-15; ☐МА-16; ☐МА-17; ☐МА-18; ☐МА-19.

ПАСПОРТ

☐УММ1.945210.ШК3.01; ☐УММ1.945210.ШК3.02; ☐УММ1.945210.ШК3.03;

☐УММ1.945210.ШК3.04; ☐УММ1.945210.ШК3.05; ☐УММ1.945210.ШК3.06;

☐УММ1.945210.ШК3.07; ☐УММ1.945210.ШК3.08

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Шкаф для материалов, в вариантах исполнения: МА-12; МА-13; МА-14; МА-15; МА-16; МА-17; МА-18; МА-19 (далее – изделие) используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов.

1.1 Изделие предназначено для размещения и хранения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*				Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
За-каза	Испол-нения	Две-рей (с лот-ками)	По-лок	Тре-йзе-ров /зам-ков	Ящи-ков				
☐	МА-12	2с	4с	-	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	33кг-45кг
☐	МА-13	1с	2с	-	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	34кг-40кг
		1дк	2дк						
☐	МА-14	2с	2с	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	49кг-55кг
		2дк	2дк						
☐	МА-15	4с	4с	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	49кг-55кг
☐	МА-16	2дк	4дк	-	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	34кг-40кг
☐	МА-17	4дк	4дк	-	-	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	49кг-50кг
☐	МА-18	1с	2с	1дк /1	-	300мм-500мм	300мм-450мм	1700мм-1800мм	34кг-40кг
		1дк	1дк						
☐	МА-19	4дк	3дк	-	2дк	700мм-900мм	300мм-500мм	1700мм-1800мм	44кг-50кг

* «ДК» - плить

бесцветное; лесно-волоконистые, облицованные пленками, «с» - стекло листовое

бесцветное;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Шкаф для материалов, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Шкаф для материалов, в вариантах исполнения: ☐ МА-12; ☐ МА-13; ☐ МА-14; ☐ МА-15; ☐ МА-16; ☐ МА-17; ☐ МА-18; ☐ МА-19,

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стеллаж-стойка для инструментов, материалов, в вариантах исполнения: СП; С.
заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«УММ»
по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стеллаж-стойка для инструментов, материалов,
в вариантах исполнения:

☐ СП; ☐ С.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.CC7.01; ☐ УММ1.945210.CC7.02.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стеллаж-стойка для инструментов, материалов, в вариантах исполнения: СП; С (далее – изделие) используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

1.1 Изделие предназначено для размещения, хранения и быстрого доступа инструментов, материалов для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Колес	Полок				
☐	СП	4	4м	500мм-700мм	300мм-500мм	1300мм-1500мм	20кг-30кг
☐	С	-	5м	800мм-1000мм	300мм-500мм	1800мм-2000мм	40кг-50кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный);

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 3кг.

6. Комплектность.

Стеллаж-стойка для инструментов, материалов, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

10.4 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

10.5 Срок хранения – один год со дня изготовления.

10.6 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стеллаж-стойка для инструментов, материалов, в вариантах исполнения: ☐ СП; ☐ С заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

11. Свидетельство о приемке.

Стеллаж-стойка для инструментов, материалов, в вариантах исполнения: ☐ Спя-2;
☐ Спя-3; ☐ Спя-4; ☐ Спя-5; ☐ ТЭ; ☐ ТЭ.1; ☐ ТЭ-1; ☐ ТЭ-1.1; ☐ Спя-6; ☐ Спя-6.1; ☐ СММ; ☐ СММ.1.1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и призна-
но годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стеллаж-стойка для приборов, в вариантах исполнения: ☐ Спя-2; ☐ Спя-3; ☐ Спя-4;
☐ Спя-5; ☐ ТЭ; ☐ ТЭ.1; ☐ ТЭ-1; ☐ ТЭ-1.1; ☐ Спя-6; ☐ Спя-6.1; ☐ СММ; ☐ СММ.1.1;

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стеллаж-стойка для приборов, в вариантах исполнения:

☐ Спя-2; ☐ Спя-3; ☐ Спя-4; ☐ Спя-5; ☐ ТЭ; ☐ ТЭ.1;
☐ ТЭ-1; ☐ ТЭ-1.1; ☐ Спя-6; ☐ Спя-6.1; ☐ СММ; ☐ СММ.1.1;

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.СТ8.01; ☐ УММ1.945210.СТ8.02; ☐ УММ1.945210.СТ8.03;
☐ УММ1.945210.СТ8.04; ☐ УММ1.945210.СТ8.05; ☐ УММ1.945210.СТ8.06;
☐ УММ1.945210.СТ8.07; ☐ УММ1.945210.СТ8.08; ☐ УММ1.945210.СТ8.09;
☐ УММ1.945210.СТ8.10; ☐ УММ1.945210.СТ8.11; ☐ УММ1.945210.СТ8.12.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стеллаж-стойка для приборов, в вариантах исполнения: СПя-5, СПя-4, СПя-3, СПя-2, ТЭ, ТЭ.1 ТЭ-1, ТЭ-1.1 СП-6, СП-6.1, СММ, СММ.1.1 (далее – изделие) используется для размещения и перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

1.1 Изделие предназначено для размещения хранения и быстрого доступа инструментов, материалов для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетов, и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Полок	Ящиков				
□	СПя-2	1м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	700мм-900мм	24кг-30кг
□	СПя-3	2м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
□	СПя-4	3м	2м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
□	СПя-5	3м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
□	ТЭ	3м	-	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
□	ТЭ.1	3м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
□	ТЭ-1	4м	-	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
□	ТЭ-1.1	4м	1м	400мм-600мм	400мм-600мм	1500мм-1700мм	25кг-35кг
□	СПя-6	3м	-	600мм-800мм	400мм-500мм	900мм-1100мм	30кг-40кг

□	СП6.1	3	1м	600мм-800мм	400мм-500мм	900мм-1100мм	30кг-40кг
□	СММ	3м	-	400мм-600мм	400мм-500мм	700мм-900мм	25кг-35кг
□	СММ.1.1	3м	1м	400мм-600мм	400мм-500мм	700мм-900мм	25кг-35кг

* «М» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный);

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Стеллаж-стойка для приборов, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

10. Гарантийные обязательства.

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

10.2 Срок хранения – один год со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стол инструментальный, в вариантах исполнения: ☐СИ-2н; ☐СИо; ☐СИн; ☐СИ-2с; ☐Сия-2н; ☐СИН-2н; ☐МА-Сия-2; ☐СИ-3н; ☐СИ-3с; ☐Ти-1; ☐Ти-2; ☐СИП-2; ☐МА-СИ-3; ☐СМ-2; ☐СМ-3; ☐СМя-3.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол инструментальный, в вариантах исполнения: ☐СИ-2н; ☐СИо; ☐СИн; ☐СИ-2с; ☐Сия-2н; ☐СИН-2н; ☐МА-Сия-2; ☐СИ-3н; ☐СИ-3с; ☐Ти-1; ☐Ти-2; ☐СИП-2; ☐МА-СИ-3; ☐СМ-2; ☐СМ-3; ☐СМя-3.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на обслуживание _____
(дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.б, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стол инструментальный,
в вариантах исполнения:

☐СИ-2н; ☐СИо; ☐СИн; ☐СИ-2с; ☐Сия-2н; ☐СИН-2н; ☐МА-Сия-2; ☐СИ-3н;
☐СИ-3с; ☐Ти-1; ☐Ти-2; ☐СИП-2; ☐МА-СИ-3; ☐СМ-2; ☐СМ-3; ☐СМя-3.

ПАСПОРТ

☐УММ1.945210.СИ12.01; ☐УММ1.945210.СИ12.02; ☐УММ1.945210.СИ12.03;
☐УММ1.945210.СИ12.04; ☐УММ1.945210.СИ12.05; ☐УММ1.945210.СИ12.06;
☐УММ1.945210.СИ12.07; ☐УММ1.945210.СИ12.08; ☐УММ1.945210.СИ12.09;
☐УММ1.945210.СИ12.10; ☐УММ1.945210.СИ12.11; ☐УММ1.945210.СИ12.12;
☐УММ1.945210.СИ12.13; ☐УММ1.945210.СИ12.14; ☐УММ1.945210.СИ12.15;
☐УММ1.945210.СИ12.16.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол инструментальный, в вариантах исполнения: СИ-2н; СИо; СИн; СИ-2с; Сия-2н; СИн-2н; МА-Сия-2; СИ-3н; СИ-3с; Ти-1; Ти-2; СИП-2; МА-СИ-3; СМ-2; СМ-3; СМя-3; (далее – изделие) используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в предоперационном, операционном отделении больницы, процедурных кабинетах и кабинетах врачей-специалистов.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Колес	Ящиков /замков, полок				
□	СИ-2н	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-18кг
			2м				
□	СИо	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-18кг
			2м				
□	СИН	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-18кг
			2м				
□	СИ-2с	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-18кг
			2с				
□	Сия-2н	4	1м	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	12кг-20кг
			2м				
□	СИН-2н	4	1м	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-20кг
			2м				
□	МА-Сия-2	4	1д	470мм- 670мм	300мм- 500мм	700мм- 900мм	11кг-15кг
			1с				
□	СИ-3н	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-20кг
			3м				
□	СИ-3с	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-20кг
			3с				

□	Ти-1		-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	12кг-20кг
			3м				
□	Ти-2	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	12кг-20кг
			3с				
□	СИП-2	4	2м	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	12кг-20кг
			2м				
□	МА-СИ-3	4	-	470мм- 670мм	400мм- 500мм	700мм- 900мм	10кг-20кг
			3с				
□	СМ-2	4	-	600мм- 800мм	400мм- 550мм	70мм- 900мм	10кг- 18кг
			2м				
□	СМ-3	4	-	600мм- 800мм	400мм- 550мм	700мм- 900мм	10кг-18кг
			3м				
□	СМя-3	4	1м/1	600мм- 800мм	400мм- 550мм	700мм- 900мм	10кг-20кг
			3м				

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «с» - стекло листовое бесцветное, «н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «дк» - плиты древесноволокнистые, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Стол инструментальный, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1 шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

8.1 Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.2 Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

12. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол инструментальный надкроватный, в вариантах исполнения: ☐ СНг; ☐ СН;

☐ СН-1; ☐ СН-2.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен

(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на
обслуживание

(дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.б, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ **«УММ»** **по ТУ 9452-001-81190519-2016**

Стол инструментальный надкроватный,
в вариантах исполнения:
☐ СНг; ☐ СН; ☐ СН-1; ☐ СН-2.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.СИ13.01; ☐ УММ1.945210.СИ13.02; ☐ УММ1.945210.СИ13.03;
☐ УММ1.945210.СИ13.04.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол инструментальный надкроватный, в вариантах исполнения: СНг; СН; СН-1; СН-2 (далее – изделие) используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, лабораториях клиник и пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота,**	Масса, ***
За- каза	Исполне- ния	Колес	Сто- лешниц				
☐	СНг	4	1н	600мм- 800мм	400мм- 500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	9кг-15кг
☐	СН	4	1пф	600мм- 800мм	400мм- 500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	12кг-20кг
☐	СН-1	4	1д	600мм- 800мм	400мм- 500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	12кг-20кг
☐	СН-2	4	1дк	600мм- 800мм	400мм- 500мм	(550мм-750мм)/ (1000мм/1200мм)	12кг-20кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «пф» - плиты древесностружечные облицованные тип «Постформинг»;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Стол инструментальный надкроватный, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе рядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделие должно быть выдержано в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стол инструментальный надкроватный, в вариантах исполнения: ☐ СНг; ☐ СН; ☐ СН-1; ☐ СН-2.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол манипуляционный, в вариантах исполнения: ☐СИо-1я; ☐СИо-2я; ☐СиП-1;
☐СИА-1; ☐СИА-2; ☐СИА-3; ☐СИА-3.н; ☐СИА-4; ☐СИА-4н; ☐СИА-5.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен

(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на
обслуживание

(дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стол манипуляционный в вариантах исполнения:

☐ СИо-1я; ☐ СИо-2я; ☐ СиП-1; ☐ СИА-1; ☐ СИА-2;
☐ СИА-3; ☐ СИА-3.н; ☐ СИА-4; ☐ СИА-4н; ☐ СИА-5.

ПАСПОРТ

☐УММ1.945210.СИ14.01; ☐УММ1.945210.СИ14.02; ☐УММ1.945210.СИ14.03;
☐УММ1.945210.СИ14.04; ☐УММ1.945210.СИ14.05; ☐УММ1.945210.СИ14.06;
☐УММ1.945210.СИ14.07; ☐УММ1.945210.СИ14.08; ☐УММ1.945210.СИ14.09;
☐УММ1.945210.СИ14.10.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол манипуляционный, в вариантах исполнения: СИо-1я; СИо-2я; СИП-1; СИА-1; СИА-2; СИА-3; СИА-3.н; СИА-4; СИА-4н; СИА-5 (далее – изделие) используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в предоперационном, операционном отделении больницы, процедурных кабинетах и кабинетах врачей-специалистов.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*			Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Колес	Дверок/з амков, полок	Ящиков/ замков, столешн иц				
□	СИо-1я	4	-	3м	600мм- 800мм	350мм- 550мм	750мм- 950мм	12кг-20кг
			-	1н				
□	СИо-2я	4	-	2м	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	14кг-22кг
			2н	-				
□	СИП-1	4	-	3м	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	15кг-25кг
			2с, 1н	-				
□	СИА-1	4	2м	4м/1	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
			-	-				
□	СИА-2	4	2м/1	2м	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
			-	-				
□	СИА-3	4	-	3м	550мм- 650мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
			-	1н				
□	СИА-3.н	4	-	3н/1	550мм- 650мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	32кг-40кг
			-	1м				
□	СИА-4	4	1м/1	4м/1	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
			-	1н				

□	СИА-4н	4	1н/1	4н/1	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	32кг-40кг
			-	1н				
□	СИА-5	4	1м/1	4м, 2 полки	600мм- 800мм	400мм- 550мм	750мм- 950мм	40кг-50кг
			3м	1н				

* «М» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «Н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «С» - стекло листовое бесцветное;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Стол манипуляционный, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1 шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и ука-заний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приеме.

Стол манипуляционный, в вариантах исполнения: □СИо-1я; □СИо-2я; □СИП-1; □СИА-1; □СИА-2; □СИА-3; □СИА-3.н; □СИА-4; □СИА-4н; □СИА-5.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол передвижной, в вариантах исполнения: ☐ СИБ; ☐ СИБ (1); ☐ СИБ-1;

☐ СПП; ☐ СПН.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«УММ»
по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стол передвижной, в вариантах исполнения:
☐ СИБ; ☐ СИБ (1); ☐ СИБ-1; ☐ СПП; ☐ СПН.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.СИ15.01; ☐ УММ1.945210.СИ15.02; ☐ УММ1.945210.СИ15.03;
☐ УММ1.945210.СИ15.04; ☐ УММ1.945210.СИ15.05.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол передвижной, в вариантах исполнения: СИБ; СИБ (1); СИБ-1; СПП; СПН (далее – изделие) используется для лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов

1.1 Изделие предназначено для размещения и перемещения медицинским персоналом лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а также для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в процедурных кабинетах, больничных палатах и лабораториях медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Нагрузка, кг, ± 1 кг	Диаметр колес, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Заказа	Исполнения						
☐	СИБ	100	100	1300мм- 1500мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	25кг-35кг
☐	СИБ (1)	100	100	1000мм- 1200мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	25кг-35кг
☐	СИБ-1	100	100	1800мм- 2000мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	30кг-40кг
☐	СПП	120	125	1800мм- 2000мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	30кг-40кг
☐	СПН	120	125	1800мм- 2000мм	500мм- 700мм	700мм- 900мм	30кг-40кг

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Стол передвижной, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1 шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стол передвижной, в вариантах исполнения: ☐ СИБ; ☐ СИБ (1); ☐ СИБ-1; ☐ СПП; ☐ СПН.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол проктологический, в вариантах исполнения: ☐ СПр.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен

(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на
обслуживание

(дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.б, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«УММ»
по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стол проктологический, в вариантах исполнения:
☐ СПр.

ПАСПОРТ
☐ УММ1.945210.СП16.01.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол проктологический, в вариантах исполнения: СПр (далее – изделие) используется для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для размещения пациентов, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество секций	Нагрузка, кг, ± 1 кг	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, **
Заказа	Исполнения						
☐	СПР	3	200	1800мм-2000мм	600мм-800мм	700мм-900мм	30кг-40кг

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Стол проктологический, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стол проктологический, в вариантах исполнения: ☐ СПр заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол для инъекций, в вариантах исполнения: ☐ СМР; ☐ СМР-2.
заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«УММ»
по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стол для инъекций, в вариантах исполнения:
☐ СМР; ☐ СМР-2. ТУ 9452-001-81190519-2016

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.СИ17.01; ☐ УММ1.945210.СИ17.01 .

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол для инъекций, в вариантах исполнения: СМР; СМР-2 (далее – изделие) используется для размещения пациентов, проведения процедур, инъекций.

1.1 Изделие предназначено для размещения пациентов, проведения процедур инъекций, осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Столешница, столик	Спинки, сидений				
☐	СМР	1в	-	500мм- 700мм	300мм- 500мм	600мм- 800мм	11кг-15кг
		-					
☐	СМР-2	1в	1в	900мм- 1000мм	500мм- 600мм	800мм- 900мм	13кг-25кг
		1с	1в				

* «с» - стекло листовое бесцветное, «в» - винилискожа;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг

6. Комплектность.

Стол для инъекций, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1 шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы. После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч. Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стол для инъекций, в вариантах исполнения: ☐ СМР; ☐ СМР-2.
заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

9.Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Срок годности изделия составляет 10 лет.

10.Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения — один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

11.Свидетельство о приемке.

Тумба подкатная для материалов, в вариантах исполнения: ☐ ТП-1; ☐ ТП-1.1; ☐ ТП-2; ☐ ТП-2.1; ☐ ТП-3; ☐ ТП-3.1 ☐ ТП-4; ☐ ТП-4.1; ☐ ТП-5; ☐ ТП-5.1; ☐ ТП-5.2; ☐ ТП-6.1 ☐ ТМ-1; ☐ ТМ-1.1; ☐ ТМ-2; ☐ ТМ-2.1; ☐ ТМ-3; ☐ ТМ-3.1; ☐ ТМ-4; ☐ ТМ-4.1; ☐ ТМ-5; ☐ ТМ-6; ☐ МА-8; ☐ МА-8.1; ☐ МА-9; ☐ МА-9.1; ☐ МА-10; ☐ МА-10.1; ☐ МА-11; ☐ МА-23; ☐ МА-23.1; ☐ ТПМ; ☐ ТПМ-4; ☐ ТМ; ☐ ТПМ-2; ☐ ТМя-2; ☐ ТМя-2.1; ☐ ТМя-2.2; ☐ ТМя-3; ☐ ТМя-3.1; ☐ ТМя-3.2; ☐ ТМя-4; ☐ ТМя-5.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тумба подкатная для материалов, в вариантах исполнения: ☐ ТП-1; ☐ ТП-1.1; ☐ ТП-2; ☐ ТП-2.1; ☐ ТП-3; ☐ ТП-3.1 ☐ ТП-4; ☐ ТП-4.1; ☐ ТП-5; ☐ ТП-5.1; ☐ ТП-5.2; ☐ ТП-6.1 ☐ ТМ-1; ☐ ТМ-1.1; ☐ ТМ-2; ☐ ТМ-2.1; ☐ ТМ-3; ☐ ТМ-3.1; ☐ ТМ-4; ☐ ТМ-4.1; ☐ ТМ-5; ☐ ТМ-6; ☐ МА-8; ☐ МА-8.1; ☐ МА-9; ☐ МА-9.1; ☐ МА-10; ☐ МА-10.1; ☐ МА-11; ☐ МА-23; ☐ МА-23.1; ☐ ТПМ; ☐ ТПМ-4; ☐ ТМ; ☐ ТПМ-2; ☐ ТМя-2; ☐ ТМя-2.1; ☐ ТМя-2.2; ☐ ТМя-3; ☐ ТМя-3.1; ☐ ТМя-3.2; ☐ ТМя-4; ☐ ТМя-5.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ **«УММ»** **по ТУ 9452-001-81190519-2016**

Тумба подкатная для материалов, в вариантах исполнения:

☐ ТП-1; ☐ ТП-1.1; ☐ ТП-2; ☐ ТП-2.1; ☐ ТП-3; ☐ ТП-3.1 ☐ ТП-4; ☐ ТП-4.1;
☐ ТП-5; ☐ ТП-5.1; ☐ ТП-5.2; ☐ ТП-6.1 ☐ ТМ-1; ☐ ТМ-1.1; ☐ ТМ-2; ☐ ТМ-2.1;
☐ ТМ-3; ☐ ТМ-3.1; ☐ ТМ-4; ☐ ТМ-4.1; ☐ ТМ-5; ☐ ТМ-6; ☐ МА-8; ☐ МА-8.1;
☐ МА-9; ☐ МА-9.1; ☐ МА-10; ☐ МА-10.1; ☐ МА-11; ☐ МА-23; ☐ МА-23.1;
☐ ТПМ; ☐ ТПМ-4; ☐ ТМ; ☐ ТПМ-2; ☐ ТМя-2; ☐ ТМя-2.1; ☐ ТМя-2.2; ☐ ТМя-3;
☐ ТМя-3.1; ☐ ТМя-3.2; ☐ ТМя-4; ☐ ТМя-5.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.ТМ18.01; ☐ УММ1.945210.ТМ18.02; ☐ УММ1.945210.ТМ18.03;
☐ УММ1.945210.ТМ18.04; ☐ УММ1.945210.ТМ18.05; ☐ УММ1.945210.ТМ18.06;
☐ УММ1.945210.ТМ18.07; ☐ УММ1.945210.ТМ18.08; ☐ УММ1.945210.ТМ18.09;
☐ УММ1.945210.ТМ18.10; ☐ УММ1.945210.ТМ18.11; ☐ УММ1.945210.ТМ18.12;
☐ УММ1.945210.ТМ18.13; ☐ УММ1.945210.ТМ18.14; ☐ УММ1.945210.ТМ18.15;
☐ УММ1.945210.ТМ18.16; ☐ УММ1.945210.ТМ18.17; ☐ УММ1.945210.ТМ18.18;
☐ УММ1.945210.ТМ18.19; ☐ УММ1.945210.ТМ18.20; ☐ УММ1.945210.ТМ18.21;
☐ УММ1.945210.ТМ18.22; ☐ УММ1.945210.ТМ18.23; ☐ УММ1.945210.ТМ18.24;
☐ УММ1.945210.ТМ18.25; ☐ УММ1.945210.ТМ18.26; ☐ УММ1.945210.ТМ18.27;
☐ УММ1.945210.ТМ18.28; ☐ УММ1.945210.ТМ18.29; ☐ УММ1.945210.ТМ18.30;
☐ УММ1.945210.ТМ18.31; ☐ УММ1.945210.ТМ18.32; ☐ УММ1.945210.ТМ18.33;
☐ УММ1.945210.ТМ18.34; ☐ УММ1.945210.ТМ18.35; ☐ УММ1.945210.ТМ18.36;
☐ УММ1.945210.ТМ18.37; ☐ УММ1.945210.ТМ18.38; ☐ УММ1.945210.ТМ18.39;
☐ УММ1.945210.ТМ18.40; ☐ УММ1.945210.ТМ18.41; ☐ УММ1.945210.ТМ18.42;
☐ УММ1.945210.ТМ18.43;

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Тумба подкатная для материалов, в вариантах исполнения: ТП-1; ТП-1.1; ТП-2; ТП-2.1; ТП-3; ТП-3.1 ТП-4; ТП-4.1; ТП-5; ТП-5.1; ТП-5.2; ТП-6.1 ТМ-1; ТМ-1.1; ТМ-2; ТМ-2.1; ТМ-3; ТМ-3.1; ТМ-4; ТМ-4.1; ТМ-5; ТМ-6; МА-8; МА-8.1; МА-9; МА-9.1; МА-10; МА-10.1; МА-11; МА-23; МА-23.1; ТПМ; ТПМ-4; ТМ; ТПМ-2; ТМя-2; ТМя-2.1; ТМя-2.2; ТМя-3; ТМя-3.1; ТМя-3.2; ТМя-4; ТМя-5 (далее – изделие) используется для размещения и перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

1.1 Изделие предназначено для размещения, хранения, перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Дверей	Ящиков				
□	ТП-1	1д	-	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-13кг
□	ТП-1.1	1д	-	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
□	ТП-2	1д	-	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-13кг
□	ТП-2.1	1д	-	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
□	ТП-3	-	3д	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-15кг
□	ТП-3.1	-	3д	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
□	ТП-4	1д	1д	400мм-500мм	300мм-500мм	550мм-750мм	9кг-15кг
□	ТП-4.1	1д	1д	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
□	ТП-5	-	4д	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
□	ТП-5.1	-	4д	300мм-400мм	350мм-450мм	650мм-750мм	8кг-14кг
□	ТП-5.2	-	5д	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
□	ТП-6.1	-	6д	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
□	ТМ-1	1м	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-13кг
□	ТМ-1.1	1м	-	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	7кг-11кг
□	ТМ-2	-	2м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
□	ТМ-2.1	-	2м	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	8кг-14кг
□	ТМ-3	-	3м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
□	ТМ-3.1	-	3м	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	8кг-14кг

□	ТМ-4		1м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
□	ТМ-4.1	1м	1м	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	8кг-14кг
□	ТМ-5	-	5м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
□	ТМ-6		6м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
□	МА-8	1дк	1дк	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
□	МА-8.1	1дк	1дк	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
□	МА-9	1дк	2дк	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
□	МА-9.1	1дк	2дк	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
□	МА-10	-	4дк	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
□	МА-10.1	-	4дк	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	10кг-16кг
□	МА-11	1дк	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
□	МА-23	1дк	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
□	МА-23.1	1дк	-	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
□	ТПМ	1д	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
□	ТПМ-4	-	4д	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
□	ТМ	1м	1м	300мм-400мм	350мм-450мм	450мм-600мм	8кг-14кг
□	ТПМ-2	1д	-	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
□	ТМя-2	-	2м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
□	ТМя-2.1	-	2м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг
□	ТМя-2.2	-	2м	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
□	ТМя-3	-	3м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	10кг-16кг
□	ТМя-3.1	-	3м	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	9кг-13кг
□	ТМя-3.2	-	3м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	12кг-18кг
□	ТМя-4	-	4м	300мм-400мм	400мм-500мм	650мм-750мм	10кг-16кг
□	ТМя-5	-	5м	400мм-500мм	400мм-500мм	750мм-850мм	9кг-15кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Тумба подкатная для материалов, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания. Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

12. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тумба подкатная с регулируемой столешницей, в вариантах исполнения: ☐ ТПМ-1; ☐ ТПМ-3; ☐ ТПМ-3/1; ☐ ТПМ-5; ☐ ТПМ-6.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016

**Тумба подкатная с регулируемой столешницей,
в вариантах исполнения:**
☐ ТПМ-1; ☐ ТПМ-3; ☐ ТПМ-3/1; ☐ ТПМ-5; ☐ ТПМ-6.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.ТС19.01; ☐ УММ1.945210.ТС19.02; ☐ УММ1.945210.ТС19.03;
☐ УММ1.945210.ТС19.04.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Тумба подкатная с регулируемой столешницей, в вариантах исполнения: ТПМ-1; ТПМ-3; ТПМ-3/1; ТПМ-5; ТПМ-6 (далее – изделие) используется для размещения и перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

1.1 Изделие предназначено для размещения, хранения, перемещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество *		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Дверей	Ящиков				
☐	ТПМ-1	1д	-	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	14кг-20кг
☐	ТПМ-3	-	2д	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	16кг-22кг
☐	ТПМ-3/1	-	2д	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	17кг-23кг
☐	ТПМ-5	1д	-	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	12кг-18кг
☐	ТПМ-6	1д	1д	500мм-600мм	400мм-500мм	(650мм-850мм)/ (1000мм-1200мм)	14кг-20кг

* «д» - плиты дверные, стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Тумба подкатная с регулируемой столешницей, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Тумба подкатная с регулируемой столешницей, в вариантах исполнения: ☐ ТПМ-1; ☐ ТПМ-3; ☐ ТПМ-3/1; ☐ ТПМ-5; ☐ ТПМ-6.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

9.Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10.Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11.Свидетельство о приемке.

Тумбы стационарные для материалов, в вариантах исполнения: ☐СЛ-11; ☐СЛ-11.1; ☐СЛ-11/2; ☐СЛ-11/2.1; ☐СЛ-11/2.2; ☐СЛ-11/2.3; ☐СЛ-12; ☐СЛМ-4; ☐СЛМ-4.1; ☐СЛМ-4.2; ☐СЛМ-4.3; ☐СЛМ-4.4; ☐СЛМ-5; ☐МА-25; ☐МА-25.1; ☐МА-25.2; ☐МА-25.3; ☐МА-25.4 ☐МА-21; ☐ТП-6; ☐ТП-6/1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тумбы стационарные для материалов, в вариантах исполнения: ☐СЛ-11; ☐СЛ-11.1; ☐СЛ-11/2; ☐СЛ-11/2.1; ☐СЛ-11/2.2; ☐СЛ-11/2.3; ☐СЛ-12; ☐СЛМ-4; ☐СЛМ-4.1; ☐СЛМ-4.2; ☐СЛМ-4.3; ☐СЛМ-4.4; ☐СЛМ-5; ☐МА-25; ☐МА-25.1; ☐МА-25.2; ☐МА-25.3; ☐МА-25.4 ☐МА-21; ☐ТП-6; ☐ТП-6/1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ **«УММ»** **по ТУ 9452-001-81190519-2016**

Тумбы стационарные для материалов, в вариантах исполнения:

☐СЛ-11; ☐СЛ-11.1; ☐СЛ-11/2; ☐СЛ-11/2.1; ☐СЛ-11/2.2; ☐СЛ-11/2.3; ☐СЛ-12;
☐СЛМ-4; ☐СЛМ-4.1; ☐СЛМ-4.2; ☐СЛМ-4.3; ☐СЛМ-4.4; ☐СЛМ-5; ☐МА-25;
☐МА-25.1; ☐МА-25.2; ☐МА-25.3; ☐МА-25.4 ☐МА-21; ☐ТП-6; ☐ТП-6/1.

ПАСПОРТ

☐УММ1.945210.ТМ20.01; ☐УММ1.945210.ТМ20.02; ☐УММ1.945210.ТМ20.03;
☐УММ1.945210.ТМ20.04; ☐УММ1.945210.ТМ20.05; ☐УММ1.945210.ТМ20.06;
☐УММ1.945210.ТМ20.07; ☐УММ1.945210.ТМ20.08; ☐УММ1.945210.ТМ20.09;
☐УММ1.945210.ТМ20.10; ☐УММ1.945210.ТМ20.11; ☐УММ1.945210.ТМ20.12;
☐УММ1.945210.ТМ20.13; ☐УММ1.945210.ТМ20.14; ☐УММ1.945210.ТМ20.15;
☐УММ1.945210.ТМ20.16; ☐УММ1.945210.ТМ20.17; ☐УММ1.945210.ТМ20.18;
☐УММ1.945210.ТМ20.19; ☐УММ1.945210.ТМ20.19; ☐УММ1.945210.ТМ20.20;
☐УММ1.945210.ТМ20.21.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Тумбы стационарные для материалов, в вариантах исполнения: СЛ-11; СЛ-11.1; СЛ-11/2; СЛ-11/2.1; СЛ-11/2.2; СЛ-11/2.3; СЛ-12; СЛМ-4; СЛМ-4.1; СЛМ-4.2; СЛМ-4.3; СЛМ-4.4; СЛМ-5; МА-25; МА-25.1; МА-25.2; МА-25.3; МА-25.4 МА-21; ТП-6; ТП-6/1 (далее – изделие) используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

1.1 Изделие предназначено для размещения и хранения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Дверей	Ящиков				
☐	СЛ-11	2д	-	800мм-1002мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
☐	СЛ-11.1	2д	-	600мм-800мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
☐	СЛ-11/2	2д	2д	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	26кг-32кг
☐	СЛ-11/2.1	2д	2д	600мм-800мм	400мм-600мм	650мм-850мм	26кг-32кг
☐	СЛ-11/2.2	2д	4д	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	28кг-34кг
☐	СЛ-11/2.3	-	6д	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	30кг-36кг
☐	СЛ-12	3д	-	1200мм-1400мм	400мм-600мм	650мм-850мм	39кг-45кг
☐	СЛМ-4	2м	-	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
☐	СЛМ-4.1	2м	-	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	24кг-30кг
☐	СЛМ-4.2	2м	2м	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	26кг-32кг
☐	СЛМ-4.3	2м	4м	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	28кг-34кг
☐	СЛМ-4.4	-	6м	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	30кг-36кг

☐	СЛМ-5	-	-	1200мм-1400мм	400мм-600мм	650мм-850мм	39кг-45кг
☐	МА-25	1дк	4дк	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	20кг-30кг
☐	МА-25.1	2дк	-	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	20кг-30кг
☐	МА-25.2	2дк	2дк	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	20кг-30кг
☐	МА-25.3	2дк	4дк	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	22кг-32кг
☐	МА-25.4	-	6дк	800мм-1000мм	400мм-600мм	650мм-850мм	26кг-36кг
☐	МА-21	1дк	4дк, 1дк полка	1000мм-1200мм	400мм-600мм	650мм-850мм	22кг-32кг
☐	ТП-6	2д	-	600мм-800мм	400мм-600мм	650мм-850мм	20кг-30кг
☐	ТП-6/1	1д	3д, 1д полка	1000мм-1200мм	400мм-600мм	650мм-850мм	30кг-40кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «дк» - плиты древесно-волокистые, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками.

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Тумба стационарная для материалов, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания. Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

12. Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тумбы стационарные узкие для материалов, в вариантах исполнения: ☐ТС-1;
☐ТС-3; ☐ТС-4; ☐ТМС-1; ☐ТМС-3; ☐ТМС-4; ☐МА-8.1; ☐МА-9.1; ☐МА-10.1;
☐МА-23.1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на
обслуживание _____
(дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016

**Тумбы стационарные узкие для материалов,
в вариантах исполнения:**
☐ТС-1; ☐ТС-3; ☐ТС-4; ☐ТМС-1; ☐ТМС-3; ☐ТМС-4; ☐МА-8.1;
☐МА-9.1; ☐МА-10.1; ☐МА-23.1.

ПАСПОРТ

☐УММ1.945210.ТМ21.01; ☐УММ1.945210.ТМ21.02; ☐УММ1.945210.ТМ21.03;
☐УММ1.945210.ТМ21.04; ☐УММ1.945210.ТМ21.05; ☐УММ1.945210.ТМ21.06;
☐УММ1.945210.ТМ21.07; ☐УММ1.945210.ТМ21.08; ☐УММ1.945210.ТМ21.09;
☐УММ1.945210.ТМ21.10.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Тумбы стационарные узкие для материалов, в вариантах исполнения: ТС-1; ТС-3; ТС-4; ТмС-1; ТмС-3; ТмС-4; МА-8.1; МА-9.1; МА-10.1; МА-23.1. (далее – изделие) используется для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей.

1.1 Изделие предназначено для размещения и хранения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей в кабинетах врачей-специалистов (терапевтов, кардиологов, неврологов и т.п.) в больницах, поликлиниках и иных ЛПУ.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Дверей	Ящиков				
☐	ТС-1	1д	-	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	11кг-15кг
☐	ТС-3	1д	2д	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	12кг-18кг
☐	ТС-4	1д	1д	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	11кг-17кг
☐	ТмС-1	1м		350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	12кг-18кг
☐	ТмС-3	1м	2м	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	12кг-18кг
☐	ТмС-4	1м	1м	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	12кг-18кг
☐	МА-8.1	1дк	1дк	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	11кг-17кг
☐	МА-9.1	1дк	2дк	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	10кг-18кг
☐	МА-10.1	-	1дк	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	12кг-20кг
☐	МА-23.1	1дк	-	350мм-450мм	400мм-600мм	650мм-850мм	11кг-15кг

* «м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «дк» - плиты древесно-волоконные, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерн д с шагом 10мм;

*** Типоразмер....., ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Тумба стационарная узкая для материалов, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Тумбы стационарные узкие для материалов, в вариантах исполнения: ☐ТС-1; ☐ТС-3; ☐ТС-4; ☐ТмС-1; ☐ТмС-3; ☐ТмС-4; ☐МА-8.1; ☐МА-9.1; ☐МА-10.1; ☐МА-23.1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка смотровая, в вариантах исполнения: ☐ КС; ☐ КС-1; ☐ КС-2; ☐ Кс/2; ☐ КС-3; ☐ КФТ

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ **«УММ»** **по ТУ 9452-001-81190519-2016**

Кушетка смотровая, в вариантах исполнения:
☐ КС; ☐ КС-1; ☐ КС-2; ☐ Кс/2; ☐ КС-3; ☐ КФТ.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.ТМ23.01; ☐ УММ1.945210.ТМ23.02; ☐ УММ1.945210.ТМ23.03;
☐ УММ1.945210.ТМ23.04; ☐ УММ1.945210.ТМ23.05; ☐ УММ1.945210.ТМ23.06.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Кушетка смотровая, в вариантах исполнения: КС; КС-1; КС-2; Кс/2; КС-3; КФТ (далее – изделие) используется для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для размещения пациентов, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Нагрузка, кг, ± 1 кг	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Секций Тумб	Регулируемых секций					
☐	КС	1в	1в	200	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-600мм	24кг-30кг
☐	КС-1	1в	-	200	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-600мм	24кг-30кг
☐	КС-2	1в	1в	200	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-600мм	24кг-30кг
☐	КС/2	1в	1в	200	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-600мм	24кг-30кг
		1д						
☐	КС-3	1в	1в	200	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-600мм	24кг-30кг
☐	КФТ	1в	1в	200	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-600мм	24кг-30кг

* «в» - винилискожа, «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Кушетка смотровая, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1 шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Кушетка смотровая, в вариантах исполнения: ☐ КС; ☐ КС-1; ☐ КС-2; ☐ Кс/2; ☐ КС-3; ☐ КФТ.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол массажный, в вариантах исполнения: ☐ СМ-1; ☐ СМ -2; ☐ СМ -3; ☐ СМ-4;
☐ СМ-5; ☐ СМ-6; ☐ СМ-7; ☐ СМС-1; ☐ СМС-2.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ **«УММ»** **по ТУ 9452-001-81190519-2016**

Стол массажный, в вариантах исполнения:

☐ СМ-1; ☐ СМ -2; ☐ СМ -3; ☐ СМ-4; ☐ СМ-5; ☐ СМ-7;
☐ СМС-1; ☐ СМС-2.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.СМ25.01; ☐ УММ1.945210.СМ25.02; ☐ УММ1.945210.СМ25.03;
☐ УММ1.945210.СМ25.04; ☐ УММ1.945210.СМ25.05; ☐ УММ1.945210.СМ25.06;
☐ УММ1.945210.СМ25.07; ☐ УММ1.945210.СМ25.08.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол массажный, в вариантах исполнения: СМ-1; СМ -2; СМ -3; СМ-4; СМ-5; СМ-6; СМ-7; СМС-1; СМС-2 (далее – изделие) используется для размещения пациентов, проведения процедур, массажа.

1.1 Изделие предназначено для размещения пациентов, проведения процедур массажа, осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Нагрузка, кг, ± 1 кг	Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Секций	Регулируемых секций					
☐	СМ-1	1в	-	240	1800мм-2000мм	600 - 800мм	550мм-750мм	24кг-30кг
☐	СМ-2	1в	1в	240	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-750мм	24кг-30кг
☐	СМ-3	3в	2в	240	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-750мм	24кг-30кг
☐	СМ-4	1в	-	240	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-750мм	24кг-30кг
☐	СМ-5	5в	4в	240	1800мм-2000мм	730мм-930мм	500мм-750мм	24кг-30кг
☐	СМ-7	7в	6в	240	1800мм-2000мм	900мм-1100мм	500мм-750мм	24кг-30кг
☐	СМС-1	1в	-	240	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-750мм	24кг-30кг
☐	СМС-2	2в	-	240	1800мм-2000мм	600мм-800мм	500мм-750мм	24кг-30кг

* «в» - винилискожа;

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 3кг.

6. Комплектность.

Стол массажный, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стол массажный, в вариантах исполнения: ☐ СМ-1; ☐ СМ -2; ☐ СМ -3; ☐ СМ-4; ☐ СМ-5; ☐ СМ-6; ☐ СМ-7; ☐ СМС-1; ☐ СМС-2

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Ширмы медицинские, в вариантах исполнения: ☐ Ш-1; ☐ Ш-2; ☐ Ш-3.
заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«УММ»
по ТУ 9452-001-81190519-2016

Ширмы медицинские, в вариантах исполнения:
☐ Ш-1; ☐ Ш-2; ☐ Ш-3.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.СМ25.01; ☐ УММ1.945210.СМ25.02; ☐ УММ1.945210.СМ25.03;
☐ УММ1.945210.СМ25.04; ☐ УММ1.945210.СМ25.05; ☐ УММ1.945210.СМ25.06;
☐ УММ1.945210.СМ25.07; ☐ УММ1.945210.СМ25.08.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Ширмы медицинские, в вариантах исполнения: Ш-1; Ш-2; Ш-3 (далее – изделие) используется для размещения пациентов, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для размещения пациентов, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (врачебных, смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник пр.) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Колес	Секций				
☐	Ш-1	4	1п	600мм-700мм	300мм-400мм	1700мм-1800мм	11кг-13кг
☐	Ш-2	5	2п	1200мм-1400мм	300мм-400мм	1700мм-1800мм	11кг-15кг
☐	Ш-3	7	3п	1800мм-2100мм	300мм-400мм	1700мм-1800мм	14кг-18кг

* «п» - поливинилхлорид

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Ширма медицинская, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1 шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Ширмы медицинские, в вариантах исполнения: ☐ Ш-1; ☐ Ш-2; ☐ Ш-3.
заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

10.Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11.Свидетельство о приемке.

Модуль с мойкой, в вариантах исполнения: ☐ СТм-1; ☐ СТм-2; ☐ ТМм-1; ☐ ТМм-2; ☐ МА-6; ☐ МА-7; ☐ МА-7/1; ☐ МА-20; ☐ МА-21.1

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Модуль с мойкой, в вариантах исполнения: ☐ СТм-1; ☐ СТм-2; ☐ ТМм-1; ☐ ТМм-2; ☐ МА-6; ☐ МА-7; ☐ МА-7/1; ☐ МА-20; ☐ МА-21.1.

заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.б, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ «УММ» по ТУ 9452-001-81190519-2016

Модуль с мойкой, в вариантах исполнения:

☐ СТм-1; ☐ СТм-2; ☐ ТМм-1; ☐ ТМм-2; ☐ МА-6;
☐ МА-7; ☐ МА-7/1; ☐ МА-20; ☐ МА-21.1.

ПАСПОРТ

☐УММ1.945210.ММ22.01; ☐УММ1.945210.ММ22.02; ☐УММ1.945210.ММ22.03;
☐УММ1.945210.ММ22.04; ☐УММ1.945210.ММ22.05; ☐УММ1.945210.ММ22.06;
☐УММ1.945210.ММ22.07; ☐УММ1.945210.ММ22.08; ☐УММ1.945210.ММ22.09.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Модуль с мойкой, в вариантах исполнения: СТм-1; СТм-2; ТМм-1; ТМм-2; МА-6; МА-7; МА-7/1; МА-20; МА-21.1 (далее – изделие) используется для дезинфекции рук врачей-специалистов при проведении процедур осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для дезинфекции рук врачей-специалистов при проведении процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*			Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказ	Исполнения	Дверей, ящиков	Полок	Ча- шей мойки				
☐	СТм-1	2д -	-	1н	500мм- 600мм	500мм- 600мм	800мм- 850мм	16кг-20кг
☐	СТм-2	2д -	-	2н	600мм- 800мм	500мм- 600мм	800мм- 850мм	24кг-30кг
☐	ТМм-1	1м -	-	1н	500мм- 600мм	500мм- 600мм	800мм- 850мм	16кг-20кг
☐	ТМм-2	2м -	-	2н	600мм- 800мм	500мм- 600мм	800мм- 850мм	24кг-30кг
☐	МА-6	2дк -	-	1н	500мм- 600мм	500мм- 600мм	800мм- 850мм	16кг-20кг
☐	МА-7	2дк -	-	2н	600мм- 800мм	500мм- 600мм	800мм- 850мм	16кг-20кг
☐	МА-7/1	2дк -	-	2н	600мм- 800мм	500мм- 600мм	800мм- 850мм	16кг-20кг
☐	МА-20	3дк -	-	2н	1100мм- 1300мм	455мм- 655мм	800мм- 850мм	24кг-30кг
☐	МА- 21.1	1дк 4дк	1	1н	1100мм- 1300мм	455мм- 655мм	800мм- 850мм	24кг-30кг

«м» - металл с порошковым покрытием (прокат листовой холоднокатаный), «н» - металл (плоский прокат из нержавеющей стали), «дк» - плиты древесно-волоконистые, облицованные пленками; «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Модуль с мойкой, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1 шт

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол пеленальный, в вариантах исполнения: ☐ СППМ; ☐ СППМ-1; ☐ СППМ-2.
заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.6, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«УММ»
по ТУ 9452-001-81190519-2016

Стол пеленальный, в вариантах исполнения:
☐ СППМ; ☐ СППМ-1; ☐ СППМ-2.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.СП26.01; ☐ УММ1.945210.СП26.02; ☐ УММ1.945210.СП26.03.

Версия 1.1

1. Назначение изделия.

Стол пеленальный, в вариантах исполнения: СППМ; СППМ-1; СППМ-2 (далее – изделие) используется для размещения, проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для размещения, проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2. Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3. Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5. Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, **	Ширина, **	Высота, **	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Дверей, ящиков	Полок				
☐	СППМ	-	1д	800мм- 1000мм	600мм- 800мм	750мм- 950мм	15кг-25кг
☐	СППМ-1	-	1д	800мм- 1000мм	600мм- 800мм	750мм- 950мм	15кг-25кг
☐	СППМ-2	2д	-	800мм- 1000мм	600мм- 800мм	750мм- 950мм	15кг-25кг
		2д					

* «д» - плиты древесно-стружечные, облицованные пленками;

** Типоразмерный ряд с шагом 50мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6. Комплектность.

Стол пеленальный, в варианте исполнения: 1 шт.
Паспорт 1шт.

7. Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9. Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Стол пеленальный, в вариантах исполнения: ☐ СППМ; ☐ СППМ-1; ☐ СППМ-2. заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

12.Гарантийный талон.

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Подставки для таза, в вариантах исполнения: ☐ ПТ; ☐ ПТ-1; ☐ ПТн; ☐ ПТн-1.
заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016

Дата изготовления: _____

Приобретен _____
(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Принят на _____
обслуживание (дата, подпись, штамп организации)

ООО «Урал мед.-мебель»
Россия, 624070, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, д.б, корп. А, кв.1

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«УММ»
по ТУ 9452-001-81190519-2016

Подставки для таза, в вариантах исполнения:
☐ ПТ; ☐ ПТ-1; ☐ ПТн; ☐ ПТн-1.

ПАСПОРТ

☐ УММ1.945210.ПТ33.01; ☐ УММ1.945210. ПТ33.02; ☐ УММ1.945210. ПТ33.03;
☐ УММ1.945210. ПТ33.04.

Версия 1.1

...изделия.

Подставки для таза, в вариантах исполнения: ПТ; ПТ-1; ПТн; ПТн-1 (далее – изделие) используется для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

1.1 Изделие предназначено для проведения процедур осмотра и обследования пациентов в специализированных помещениях (смотровых кабинетах, больничных палатах и лабораториях клиник) медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

2.Преднамеренная эксплуатация изделия не по назначению.

Несоблюдение рекомендованных изготовителем требований эксплуатации изделия может привести к побочным последствиям. Необходимо предусмотреть соответствующие меры для безопасной эксплуатации изделий.

3.Нежелательное влияние при продолжительной эксплуатации изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно, руководства по эксплуатации, побочные действия отсутствуют.

4. Меры предосторожности при применении изделия.

Не рекомендуется ставить на изделия острые, тяжелые предметы, подвергать изделия ударным нагрузкам.

5.Технические характеристики.

Обозначение		Количество*		Длина, ..	Ширина, ..	Высота, ..	Масса, ***
Заказа	Исполнения	Колес. л	Объем таза				
☐	ПТ	-	9	400мм- 500мм	400мм- 500мм	1100мм- 1300мм	6кг-10кг
☐	ПТ-1	4	9	400мм- 500мм	400мм- 500мм	1100мм- 1300мм	8кг-12кг
☐	ПТн	-	9	400мм- 500мм	400мм- 500мм	1100мм- 1300мм	6кг-10кг
☐	ПТн-1	4	9	400мм- 500мм	400мм- 500мм	1100мм- 1300мм	6кг-10кг

** Типоразмерный ряд с шагом 10мм;

*** Типоразмерный ряд с шагом 2кг.

6.Комплектность.

Подставка для таза, в варианте исполнения: 1 шт.

Паспорт 1 шт.

7.Подготовка к работе и порядок работы.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Произведите дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113-98. раствором перекиси водорода ГОСТ 177-88-98 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96.

8. Техническое обслуживание.

Изделие имеет простую, надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости регулировка опор, дверей, проверка резьбовых соединений.

9.Транспортирование и хранение.

Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в упакованном виде в вертикальном положении.

Средний срок службы изделия до списания не менее 6 лет.

10.Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок хранения – один год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

11.Свидетельство о приемке.

Подставки для таза, в вариантах исполнения: ☐ ПТ; ☐ ПТ-1; ☐ ПТн; ☐ ПТн-1. заводской № _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-81190519-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

