



ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ СН-36.12

«Айболит»



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

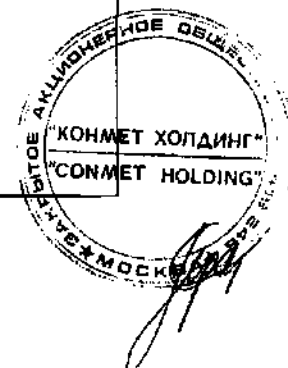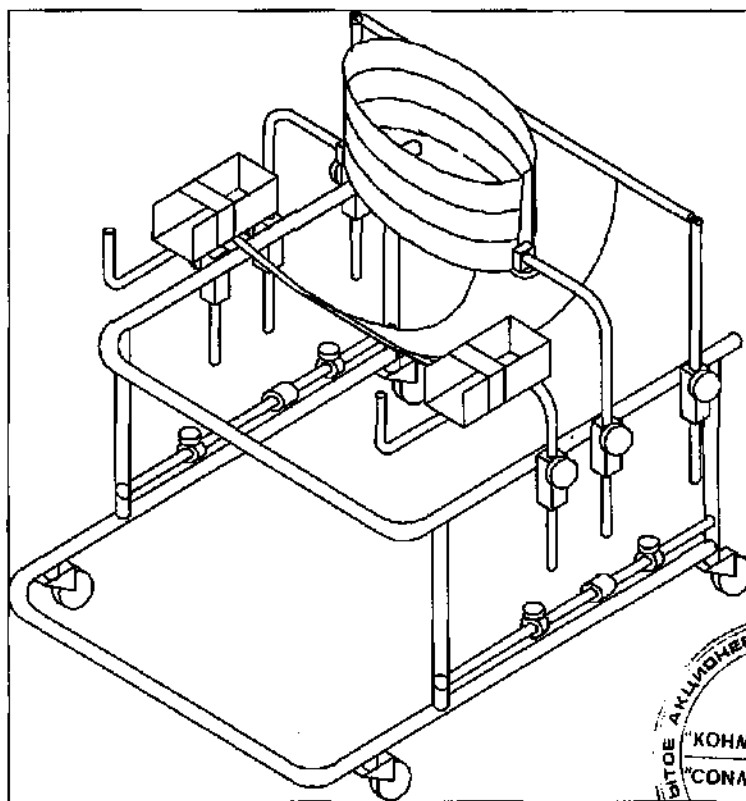

Назначение

Ходунки модель «Айболит» представляют собой комплекс устройств, необходимых для поэтапной реабилитации больного с нарушениями опорно-двигательного аппарата, связанными с церебральными патологиями, травмами, постинсультными нарушениями.

Ходунки предназначены для выработки и тренировки равновесия, правильной походки с полной или частичной фиксацией пациента, при стоянии и ходьбе.

Конструкция ходунков выполнена по модульному принципу, легко перекомпоновывается с учетом нарушений опорно-двигательного аппарата пациента и предписаниями методики реабилитации. Важной особенностью предлагаемых ходунков является возможность их использования как для лечебных медицинских целей в больницах, реабилитационных центрах, клиниках, так и в домашних условиях для обеспечения нормальной жизнедеятельности пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические параметры

	CH-36.12.01	CH-36.12.02	CH-36.12.03
Ширина, м	0,6	0,6	0,65
Длина, м	0,55	0,8	0,9
Высота ходовой части, м	0,4	0,5	0,6
Высота подлокотников, м	0,4...0,54	0,54...0,8	0,75...0,9
Высота охватывающего	0,4...0,54	0,54...0,8	0,75...0,9
Ширина охватывающего	0,15...0,21	0,21...0,3	0,27...0,35
Масса ходовой части, кг	3,5	4,5	5,5
Масса полная, кг	11	13	15

Тип	Рост
CH-36.12.01	70-90
CH-36.12.02	90-115
CH-36.12.03	115-150



CH-36.12 РЭ

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гераскина		
Пров.		Верходанов		
Т. контр.				
Нач. гр.				
Н. контр		Вайло		

Ходунки на колесиках
CH-36.12
«Айболит»
Руководство по эксплуатации

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов 7	
КОММЕТ  ХОЛДИНГ		

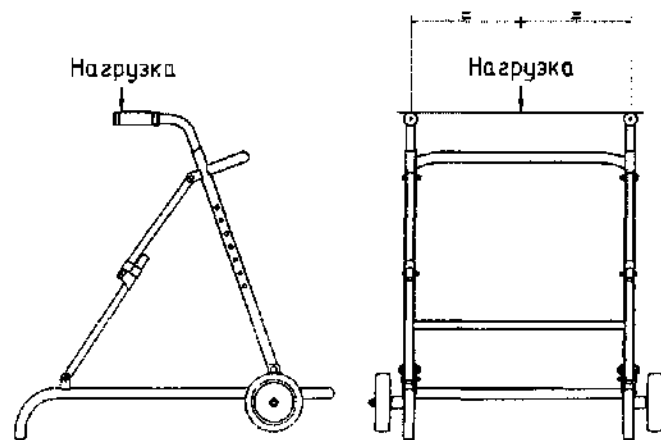


Рис.2

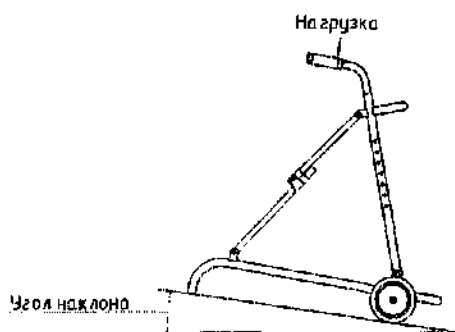


Рис.3

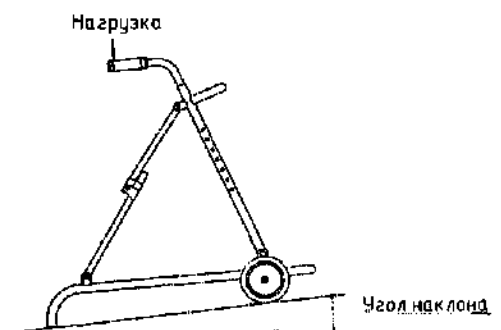


Рис.4


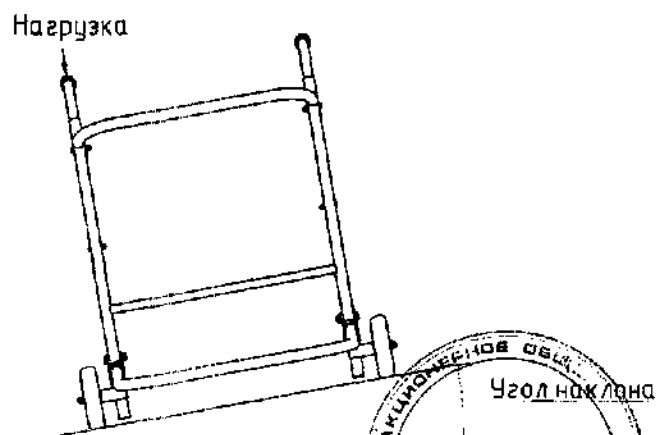


Рис.5

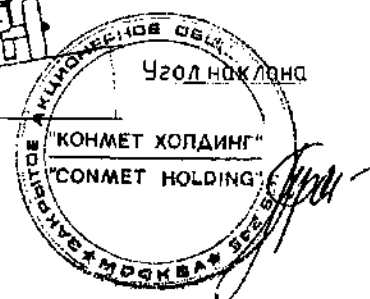

ТУ 9451-010-40259145-02

Лист

16