

Тележка медицинская универсальная СПЗ-01-«ЕЛАТ» по ТУ 9451-009-24320270-2002

Руководство по эксплуатации

Тележка медицинская универсальная СПЗ-01-«ЕЛАТ» по ТУ 9451-009-24320270-2002 (далее - тележка) предназначена для размещения и перевозок различных хирургических инструментов, медикаментов в операционных, процедурных, перевязочных кабинетах медицинских организаций.

Область применения: медицинские организации.

Показания к применению: для размещения и перевозок различных хирургических инструментов, медикаментов в операционных, процедурных, перевязочных кабинетах медицинских организаций.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1. Тележка выдерживает номинальную нагрузку не более 45 кг, не более 15 кг на полку.

При загрузке каждой полки нагрузкой (15±0,3) кг, равномерно распределенной, прогиб полки - не более 3 мм.

1.2. Масса тележки, кг: 6,0±0,6.

1.3. Габаритные размеры тележки, (длина х ширина х высота) мм: (675х420х855)±10%.

Размеры полки, (длина х ширина) мм: (607х388)±10%.

2. Характеристики

2.1. Календарный срок службы тележки - 5 лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность их восстановления.

2.2. Усилие, необходимое для перемещения тележки равномерно распределённой по столешницам 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не превышает 100 Н.

2.3. В заторможенном положении тележка не опрокидывается от усилия менее 100Н.

2.4. Тормоза колёс включаются при приложении на педаль усилия не более 150 Н.

2.5. Тележка при эксплуатации устойчива к воздействию механических факторов для группы 3 ГОСТ Р 50444-2020. При эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 - 2020 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

2.6. Тележка устойчива к дезинфекции химическим методом в соответствии с МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или 1% раствором хлорамина по ТУ9392-031-00203306-2003.

2.7. В конструкции предусмотрены 3 пластиковых несъемных полки. Для удобного управления во время перемещения тележки в конструкции предусмотрена ручка. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплектность

Тележка медицинская универсальная СПЗ-01-«ЕЛАТ» - 1 шт.;

Руководство по эксплуатации со схемой сборки - 1шт.;

Транспортная упаковка - 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3. Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя - в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 9451-009-24320270-2002 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

5.3. Гарантийный срок хранения - 60 месяцев с даты упаковки.

6. Техническое обслуживание и ремонт

6.1. Техническое обслуживание изделия включает в себя:

- поддержание технического состояния тележек в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений внешних поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекции поверхностей тележек путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

6.2. Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность изделия.

7. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в качестве эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовались изделия, по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

8. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная СПЗ-01-«ЕЛАТ» по ТУ 9451-009-24320270-2002 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-009-24320270-2002 и признана годной для эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Не использовать изделие при обнаружении повреждений и дефектов. В случае обнаружения повреждений и дефектов обратиться к предприятию изготовителю или его представителю.

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13214 от _____

 **ЕЛАМЕД**

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район,

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт: lpu.elamed.com

ОМ № 23.409.00
20.06.2022г.


Стойка-01



Стойка-02




Стойка-03

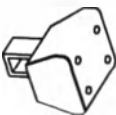

Ключ шестигранный



СХЕМА СБОРКИ

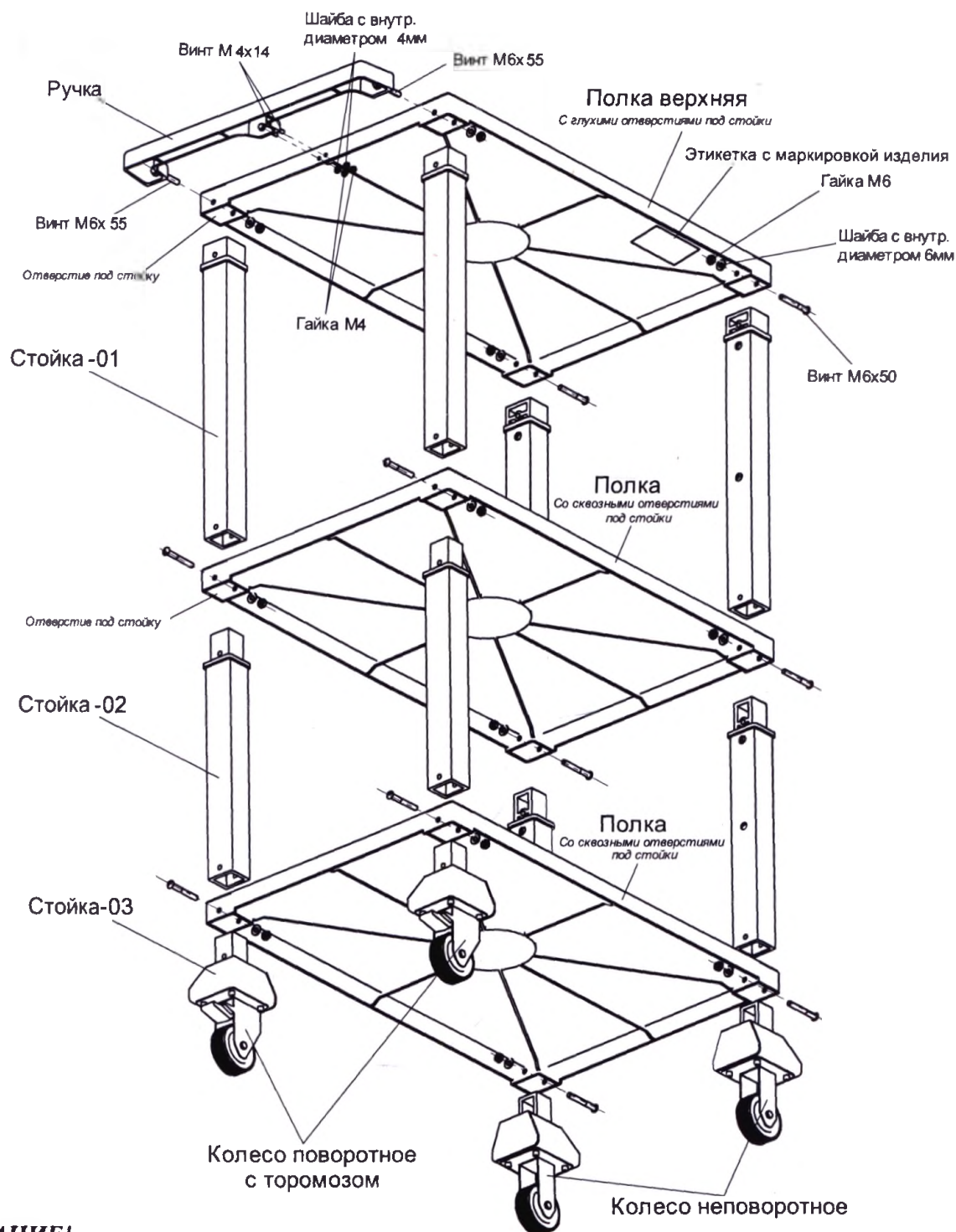

ВНИМАНИЕ!

С целью обеспечения жесткости изделия, при его сборке, возможно, потребуется приложить дополнительные усилия для установки винтов М6х55 и М6х50 в отверстия.

Прочитано и пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Никитина Т.Н.

09 20 22

