

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»



ГРАНУЛЫ Состав: соли ацилированного хитозана 25%,
карбоксиметилкрахмал 75%

Масса: 35 г

<EAN-13>

Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условия. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Нанесите несколько слоев гранул на рану до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. **Стерильно:** радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: **Серия:**

ТУ 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



РЗН 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

Вложения:

image-01-09-22-03-53.jpeg

254 КБ

image-01-09-22-03-53-1.jpeg

257 КБ

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»


Бинт многослойный

Состав: соли ацелированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,

бинт (материал нетканый – спанлейс; вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)

1 бинт 8x100 см

<EAN-13>

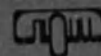

Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Прижмите к ране Средство (бинт) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. **Стерильно:** радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: Серия:

ТУ 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



РЗН 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

— image-01-09-22-03-53-10.jpeg —



СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

Салфетка многослойная

Состав: соли ацелированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,
бинт (материал нетканый – спанлейс: вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)

1 бинт 8x10 см

<EAN-13>



Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Прижмите к ране Средство (салфетку) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: Серия:

ТУ 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



РЗН 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

— image-01-09-22-03-53-8.jpeg —




СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

Бинт однослойный

Состав: соли ацелированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,
бинт (материал нетканый – спанлейс: вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)
1 бинт 8x100 см

<EAN-13>

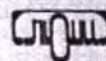

Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Прижмите к ране Средство (бинт) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: **Серия:**

ТУ 9393-003-33129878-2016

РЗН 2017/5945

ШТРИХ-КОД



Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г.
Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С




СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

Салфетка однослойная

Состав: соли ацилированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,
бинт (материал нетканый – спанлейс: вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)

1 бинт 8x10 см

<EAN-13>

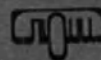

Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Прижмите к ране Средство (салфетку) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления:

Серия:

TU 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



PZN 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

image-01-09-22-03-53-3.jpeg



СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»
гранулы в устройстве - аппликатор



Состав: соли ацилированного хитозана 25%,
карбоксиметилкрахмал 75%

Масса: 6 г

<EAN-13>

Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Снимите крышку/пробку с одного конца цилиндра, наполненного Средством, вставьте поршень, расположить крестообразное рассечение на другом конце цилиндра над раной и надавить на поршень для подачи Средства в область раны. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: **Серия:**

TU 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



P3H 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ЛЮМИ»
А.Е. Федотов




_____ 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Средство гемостатическое стерильное «ГЕПОГЛОС»
по ТУ 9393 – 003 – 33129878 – 2016
производства: Россия, 191023, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, оф. №402.

2022

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

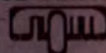

ГРАНУЛЫ Состав: соли ацелированного хитозана 25%,
карбоксиметилкрахмал 75%

Масса: 35 г

<EAN-13>

Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Нанесите несколько слоев гранул на рану до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: Серия:

TU 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД




РЗН 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г.
Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»
гранулы в устройстве - аппликатор

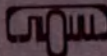

Состав: соли ацелированного хитозана 25%,
карбоксиметилкрахмал 75%

Масса: 6 г

<EAN-13>

Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условия. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Снимите крышку/пробку с одного конца цилиндра, наполненного Средством, вставьте поршень, расположите крестообразное рассечение на другом конце цилиндра над раной и надавить на поршень для подачи Средства в область раны. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: Серия:

ТУ 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



РЗН 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г.
Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

Бинт однослойный

Состав: соли ацелированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,
бинт (материал нетканый – спандейс: вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)

1 бинт 8x100 см

<EAN-13>



Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Прижмите к ране Средство (бинт) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: Серия:

TU 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



R3N 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г.

Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

Средство гемостатическое стерильное «Гепоглос» на салфетке однослойной

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

Салфетка однослойная

Состав: соли водированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,

бинт (материал нетканый – спанлейс: вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)

1 бинт 8x10 см

<EAN-13>



Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Прижмите к ране Средство (салфетку) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: Серия:

TU 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



R3N 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

Средство гемостатическое стерильное «ГЕПОГЛОС» на бинте многослойном

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

Бинт многослойный

Состав: соли ацелированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,

бинт (материал нетканый – спандейс: вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)

1 бинт 8х100 см

<EAN-13>



Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в поллевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения. Прижмите к ране Средство (бинт) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Условия хранения:** хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. **Стерильно:** радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления: Серия:

ТУ 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



РЗН 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г.

Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

Средство гемостатическое стерильное «Гепоглос» на салфетке многослойной

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ГЕПОГЛОС»

Салфетка многослойная

Состав: соли ацелированного хитозана 25%, карбоксиметилкрахмал 75%,

бинт (материал нетканый – спанбелс: вискоза – 20%, полиэфир – 80 %)

1 бинт 8x10 см

<EAN-13>



Назначение: Средство предназначено для остановки поверхностного наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых и в домашних условиях. **Способ применения:** Для наружного применения. Перед нанесением рана должна быть очищена от механических включений. Вскройте упаковку. Расположите, по возможности, горизонтально область кровотечения.

Прижмите к ране Средство (салфетку) до остановки кровотечения. Наложите на область нанесения средства марлевую повязку, прижмите и зафиксируйте. После применения Средства на область раны не следует наносить жидкие препараты, мази и другие вещества. При необходимости после применения Средства следует обратиться в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения: хранить в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять после окончания указанного срока годности. Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Стерильно: радиационный метод по ГОСТ ISO 11137-2 Поглощенная доза 7,0 кГр.

Срок годности: 5 лет

Дата изготовления:

Серия:

ТУ 9393-003-33129878-2016

ШТРИХ-КОД



РЗН 2017/5945

Производитель: ООО «ЛЮМИ», Россия, 191227, г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом. 7-Н, офис №402

Место производства: ООО «ЛЮМИ», Россия, 620100, Свердловская область, г.

Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 49, лит. Л, Н, П, С

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 листов

Ген.директор ООО «ЛЮМИ»
Федотов А.Е.

