

01 ИЮН 2010

Город Самара, Российская Федерация.

Я, Заярина Марина Вячеславовна, нотариус города Самары, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1610

Взыскано по тарифу: 10р

Нотариус



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Marina Vyacheslavovna Zayrina.

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Столик надкроватный предназначен для самообслуживания и ухода за лежащим в кровати инвалидом в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.
- 1.2. Столик выполняется в 2-х вариантах:
- СН-010 - с двумя столешницами, регулируемыми по высоте и углу наклона большой столешницы, оснащен 4-мя колесами (Фото1).
 - СН-012 – с двумя столешницами, регулируемыми по высоте и углу наклона большой столешницы, оснащен 2-мя колесами и 2-мя ножками (Фото 2).
- В обоих вариантах исполнений большая столешница – поворотная, в диапазоне от 0° до 90° с шагом 30° в вертикальной плоскости, малая столешница – неповоротная.

Фото 2



Столик надкроватный СН-012

Фото 1



Столик надкроватный СН-010



КОПИЯ ВЕРНА

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП "Самарское ГРОП" Минздрава России)

Зав. канц. Азар.



Зав. Канц. Азар. - 3 -

2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры столика (для исполнений СН-010, СН-012):

- длина, мм – 825;
- ширина, мм – 420;
- высота, при горизонтальном положении столешниц, мм – 840-1140;
- размер столешниц, мм:
 - большой – 610x410,
 - малой – 410x210.
- толщина столешницы, мм – 16.

2.2. Масса столика СН-010 не более 9,6 кг, СН-012 – не более 9,2 кг.

2.3. Максимально допустимая распределенная нагрузка на столик – 20,0 кг.

2.4. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравсоцразвития России.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки столика входят:

- столик в сборе – 1 шт., этикетка – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта. Изделия должны быть надежно закреплены от перемещения. Допускается укладывать столики друг на друга стопкой до 2-х шт., в коробках – до 5-ти шт.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, - каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища).

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

5.1. Освободить столик от упаковки.

5.2. Промыть изделие теплой водой с добавлением моющих средств.

5.3. Установить столешницы на нужной высоте; большую столешницу - под необходимым углом.

6. Порядок эксплуатации

6.1. Убедиться, что надежно затянуты специальные винты регулировки высоты столика и регулировки угла большой столешницы.

6.2. После установки столика в нужное положение, необходимо зафиксировать пару колес стояночными тормозами.

7. Обслуживание и уход

7.1. Мыть столик теплой водой с добавлением моющих средств. Не допускается применение кислот и органических растворителей.

7.2. Дезинфекцию проводить 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина.

7.3. Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми и острыми

8. Требования безопасности

- 8.1. Запрещается эксплуатировать столик, установленный на наклонной поверхности, а также при наличии зазора под одним из колес более 3мм.
- 8.2. Запрещено эксплуатировать столик с незафиксированными регулировочными (специальными) винтами.
- 8.3. Запрещено осуществлять регулировку столика, а также подтяжку узлов при наличии предметов на столешницах.
- 8.4. Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

9. Свидетельство о приемке

Столик надкроватный
(наименование изделия) (обозначение варианта исполнения изделия)
соответствует требованиям ТУ 9452-904-03151254-2010 и признан годным к эксплуатации.
М.П. Дата выпуска _____
(отметка ОКК)

10. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня выдачи изделия потребителю.

В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока предприятие – изготовитель при обращении по адресу:

443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47

обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

11. Отметка о выдаче товара потребителю

М.П. торговой организации

Подпись продавца _____ Дата _____

(без печати не действительно)

12. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

№ п/п	Описание дефекта, дата	Устранение дефекта, дата	Отметка ОКК	Примечание

Просим Ваши замечания и отзывы о нашей продукции направлять по вышеуказанному адресу.



ФГУП «Самарское ПрОП»
Минздравсоцразвития
России

СТОЛИК НАДКРОВАТНЫЙ

СН-010; СН-012

ТУ 9452-904-03151254-2010

П А С П О Р Т



Зав. конст.

