

Руководство по эксплуатации

НАКОЛЕННИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ПИО-04, ПИО-05, ПИО-06, ПИО-07, ПИО-08
/серийное производство/

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Наколенники ортопедические (далее – наколенники), предназначены для ортезирования детей и взрослых при повреждениях и заболеваниях коленного сустава. Наколенники назначаются с целью фиксации коленного сустава, разгрузки капсулы и боковых связок коленного сустава в реабилитационный период после травм и оперативных вмешательств на суставе, а также при его хронических заболеваниях.

Наколенники выпускаются следующих типов:

- ▶ **наколенник** эластичный неразъемный **ПИО-04;**
- ▶ **наколенник** эластичный полуразъемный **ПИО-05;**
- ▶ **наколенник** эластичный разъемный **ПИО-06;**
- ▶ **наколенник** эластичный разъемный с шарнирами **ПИО-07;**
- ▶ **наколенник** эластичный полуразъемный с шарнирами **ПИО-08;**

- 1.1. Наколенники ортопедические состоят из эластичных воздухопроницаемых приемных гильз из неопрена.
- 1.2. Наколенники изготавливаются серийно шести типоразмеров: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
- 1.3. Способ фиксации гильз наколенников (кроме ПИО-04) на нижней конечности пациента – застежка текстильная.
- 1.4. Наколенники ПИО-04, ПИО-05 имеют в своей конструкции пружинные ребра жесткости, наколенники ПИО-07, ПИО-08 – полицентрические шарниры.
- 1.5. Наколенники ПИО-07, ПИО-08 снабжены дополнительными фиксирующими ремнями.

2. НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ НАКОЛЕННИКОВ

- 2.1. Наколенник **ПИО-04** надевается сидя, на слегка вытянутую ногу, при этом силиконовое кольцо ориентируется вокруг коленной чашечки. Складки разглаживаются во избежание избыточного давления на мягкие ткани.
- 2.2. Наколенник **ПИО-05** надевается сидя, на слегка вытянутую ногу, равномерно распределяется в области колена и фиксируется на бедре текстильной застежкой. Складки разглаживаются во избежание избыточного давления на мягкие ткани.
- 2.3. Наколенник **ПИО-06** надевается сидя, на слегка вытянутую ногу, равномерно распределяется в области колена и фиксируется на бедре и голени текстильной застежкой. Складки разглаживаются во избежание избыточного давления на мягкие ткани.

- 2.4. Наколенник **ПНО-07** надевается сидя, на слегка вытянутую ногу, равномерно распределяется в области колена, фиксируется на бедре и голени текстильной застежкой и дополнительно фиксируется эластичными ремнями на бедре и голени, не допуская при этом избыточного давления на мягкие ткани.
- 2.5. Наколенник **ПНО-08** надевается сидя, на слегка вытянутую ногу, равномерно распределяется в области колена, фиксируется на бедре текстильной застежкой и дополнительно фиксируется эластичными ремнями на бедре и голени, не допуская при этом избыточного давления на мягкие ткани.
- 2.6. Для снятия наколенника необходимо все действия произвести в обратном порядке.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАКОЛЕННИКА

- 3.1. Режим и длительность пользования наколенником определяется лечащим врачом, назначившим изделие.
- 3.2. Утилизацию наколенника проводить, как бытовые отходы.

4. УХОД ЗА НАКОЛЕННИКОМ

- 4.1. Материалы наколенника должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке нейтральным раствором моющих средств по ГОСТ 25644-96 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546-2002.
- 4.2. Изделие нельзя замачивать, выкручивать, гладить утюгом.
- 4.3. При сушке избегать воздействия прямого солнечного света.

При соблюдении правил эксплуатации гарантийный срок носки наколенников составляет **3 месяца** со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Директор



Е. Я. Никифоров



Собрано (2)

лист 2

Директор

Е. Я. Никифоров