

8. Требования безопасности

- 8.1. Запрещается эксплуатировать подставку, установленную на наклонной и неровной поверхности, при наличии зазора под одной из опор более 3мм.
- 8.2. Запрещается эксплуатировать подставку, не выполнив предварительно требований раздела 6 настоящего паспорта.
- 8.3. Запрещается эксплуатировать подставку лицам массой более 150 кг.
- 8.4. Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

9. Свидетельство о приемке

Подставка к ванне

ПВ-01

(наименование изделия)

(обозначение)

соответствует требованиям ТУ 9452-909-03151254-2012 и признано годным к эксплуатации.

М.П. _____ Дата выпуска _____
(отметка ОКК)

10. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выдачи изделия потребителю.

В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока предприятие – изготовитель при обращении по адресу:

443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47

обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

11. Отметка о выдаче товара потребителю


М.П. торговой организации

Подпись продавца _____ Дата _____
(без печати не действительно)

12. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

№ п/п	Описание дефекта, дата	Устранение дефекта, дата	Отметка ОКК	Примечание

Просим Ваши замечания и отзывы по нашей продукции направлять по вышеуказанному адресу

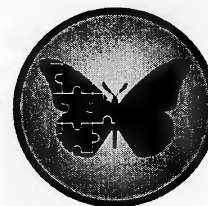

ФГУП «Самарское ПрОП»
Минтруда России

ПОДСТАВКА К ВАННЕ

ПВ-01

ТУ 9452-909-03151254-2012

П А С П О Р Т



Копия верна *[Signature]*
Зав. канцелярией Азаркевич А.Н.
« 29 » апреля 2013 г.

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Подставка к ванне ПВ-01 (далее – подставка, рис. 1) предназначена для облегчения преодоления борта ванны инвалидам и престарелым гражданам (с целью принятия гигиенических процедур) в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.
- 1.2. Подставка изготавливается в виде 2-х ступенек на ножках с противоскользящим покрытием, одна из которых способна складываться под другую опрокидыванием. Подставка комплектуется съемным поручнем, фиксирующимся к ванне и служащим элементом опоры в момент подъема по ступенькам и преодоления борта ванны. Поручень может быть установлен на левой или правой стороне подставки.

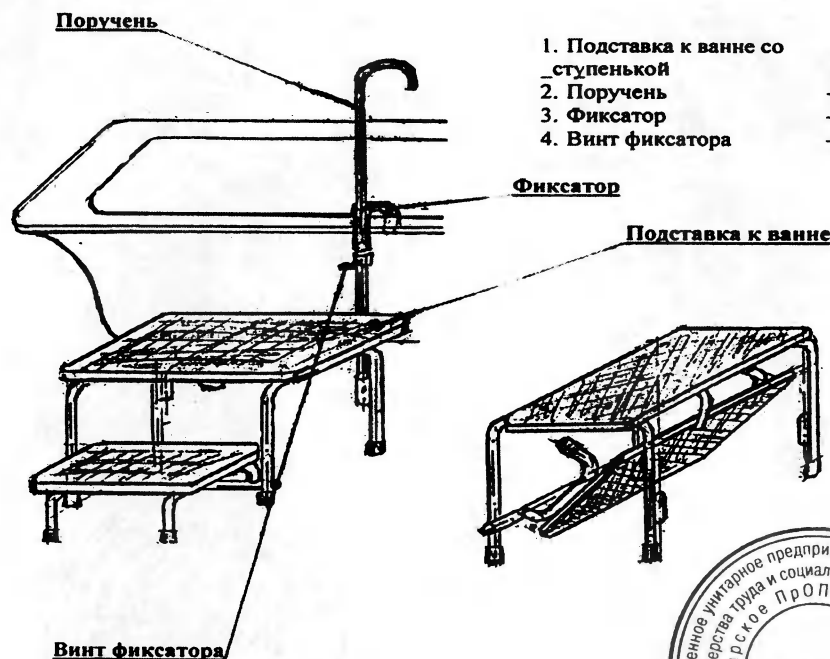


Рис. 1

Подставка к ванне ПВ-01
(в рабочем положении и в сложенном виде)



2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры подставки в рабочем положении

- высота с поручнем, мм – 1000;
- высота без поручня, мм – 360;
- длина, мм – 500;
- ширина, мм – 450;
- ширина нижней ступени, мм – 250;
- ширина верхней ступени, мм – 250;
- высота нижней ступени от пола, мм – 150;
- высота верхней ступени от пола, мм – 360.

2.2. Масса подставки - 7,5 кг.

2.3. Максимально допустимая масса пользователя – 150 кг.

2.4. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки изделия входят:

- ступени в сборе – 1 компл.;
- поручень с узлом фиксации и стопорным винтом – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование подставки допускается всеми видами закрытого транспорта.

Изделия должны быть надежно закреплены от перемещения. Допускается укладывать подставки друг на друга стопкой до 4-х шт., в коробках – до 12-ти шт.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых складских помещениях при температуре воздуха от минус 15 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха от 50 до 80 % на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных и нагревательных приборов. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

5.1. Освободить подставку от упаковки.

5.2. Промыть изделие теплой водой с добавлением моющих средств.

6. Порядок эксплуатации

6.1. Подставку установить к ванне согласно рисунку 1.

6.2. При установке поручня (поз.2) на подставку необходимо, чтобы кнопочный фиксатор поручня вошел в предназначенное для него отверстие во втулке подставки до щелчка.

6.3. Фиксатор (поз.3), находящийся на поручне, установленном на бортике ванны, должен быть застопорен от перемещения винтом фиксатора (поз.4).

7. Обслуживание и уход

7.1. Мыть подставку теплой водой с добавлением моющих средств. Не допускается применение кислот и органических растворителей.

7.2. Дезинфекцию проводить раствором 1%-го монохлорамина ХБ с добавлением моющих средств, применяемых при чистке и дезинфекции.

7.3. Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми и острыми предметами.



8. Требования безопасности

- 8.1. Запрещается эксплуатировать подставку, установленную на наклонной и неровной поверхности, при наличии зазора под одной из опор более 3мм.
- 8.2. Запрещается эксплуатировать подставку, не выполнив предварительно требований раздела 6 настоящего паспорта.
- 8.3. Запрещается эксплуатировать подставку лицам массой более 150 кг.
- 8.4. Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

9. Свидетельство о приемке

Подставка к ванне

ПВ-03

(наименование изделия)

(обозначение)

соответствует требованиям ТУ 9452-909-03151254-2012 и признано годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

(отметка ОКК)

10. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выдачи изделия потребителю.

В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока предприятие – изготовитель при обращении по адресу:

443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47

обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

11. Отметка о выдаче товара потребителю

М.П. торговой организации

Подпись продавца


Дата

(без печати не действительно)

12. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

№ п/п	Описание дефекта, дата	Устранение дефекта, дата	Отметка ОКК	Примечание

Просим Ваши замечания и отзывы о нашей продукции направлять по вышеуказанному адресу

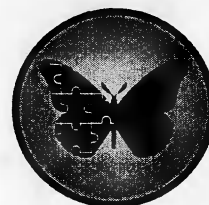

ФГУП «Самарское ПрОП»
Минтруда России

ПОДСТАВКА К ВАННЕ

ПВ-03

ТУ 9452-909-03151254-2012


ПАСПОРТ



Копия верна
Зав. канцелярией Азаркевич А.Н.
«19» апреля 2013 г.

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Подставка к ванне ПВ-03 (далее – подставка, рис. 1) предназначена для облегчения преодоления борта ванны инвалидам и престарелым гражданам (с целью принятия гигиенических процедур) в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.
- 1.2. Подставка изготавливается в виде 2-х сборно-разборных ступенек на ножках с противоскользящим покрытием, нижняя из которых способна складываться под верхнюю опрокидыванием. Подставка комплектуется съемным поручнем, фиксирующимся к ванне и служащим элементом опоры в момент подъема по ступенькам и преодоления борта ванны. Поручень может быть установлен на левой или правой стороне подставки.

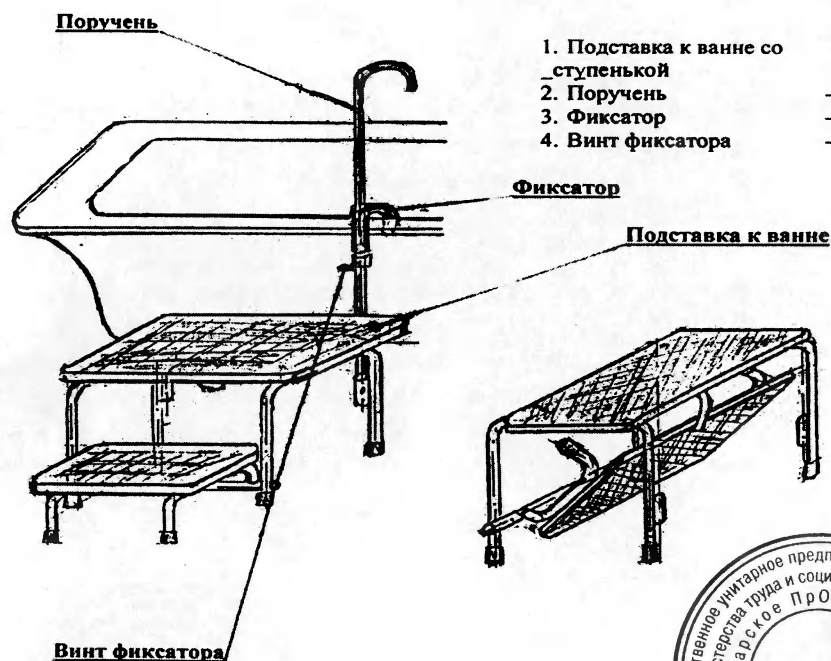

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Подставка к ванне со ступенькой | - 1 шт.; |
| 2. Поручень | - 1 шт.; |
| 3. Фиксатор | - 1 шт.; |
| 4. Винт фиксатора | - 1 шт.; |

Рис. 1

Подставка к ванне ПВ-03
(в рабочем положении и в сложенном виде)



Копия верна
Зав. канцелярией Азаркевич А.Н.
19 апреля 2013 г.

2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры подставки в рабочем положении

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - высота с поручнем, мм | -- 1000; |
| - высота без поручня, мм | -- 360; |
| - длина, мм | -- 500; |
| - ширина, мм | -- 450; |
| - ширина нижней ступени, мм | -- 250; |
| - ширина верхней ступени, мм | -- 250; |
| - высота нижней ступени от пола, мм | -- 150; |
| - высота верхней ступени от пола, мм | -- 360. |

2.2. Масса подставки - 7,5 кг.

2.3. Максимально допустимая масса пользователя – 150 кг.

2.4. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки изделия входят:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - нижняя ступень – 1 шт.; | - верхняя ступень – 1 шт.; |
| - поручень с узлом фиксации и стопорным винтом – 1 шт.; | |
| - болтовой крепеж | -- 2 комп.; |
| - паспорт – 1 шт.; | - руководство по эксплуатации – 1 шт. |

4. Транспортирование и хранение

- 4.1. Транспортирование подставки допускается всеми видами закрытого транспорта. Изделия должны быть надежно закреплены от перемещения. Допускается укладывать подставки друг на друга стопкой до 4-х шт., в коробках – до 12-ти шт.
- 4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых складских помещениях при температуре воздуха от минус 15 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха от 50 до 80 % на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных и нагревательных приборов. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

- 5.1. Освободить подставку от упаковки.
- 5.2. Промыть изделие теплой водой с добавлением моющих средств.

6. Порядок эксплуатации

- 6.1. Подставку установить к ванне согласно рисунку 1.
- 6.2. При установке поручня (поз.2) на подставку необходимо, чтобы кнопочный фиксатор поручня вошел в предназначенное для него отверстие во втулке подставки до щелчка.
- 6.3. Фиксатор (поз.3), находящийся на поручне, установленном на бортике ванны, должен быть застопорен от перемещения винтом фиксатора (поз.4).

7. Обслуживание и уход

- 7.1. Мыть подставку теплой водой с добавлением моющих средств. Не допускается применение кислот и органических растворителей.
- 7.2. Дезинфекцию проводить раствором 1%-го монохлорамина ХБ с добавлением моющих средств, применяемых при чистке и дезинфекции.
- 7.3. Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми и острыми предметами.



I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Подставка к ванне ПВ-02 (далее – подставка, рис. 1) предназначена для облегчения преодоления борта ванны инвалидам и престарелым гражданам (с целью принятия гигиенических процедур) в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.
- 1.2. Подставка изготавливается в виде 2-х сборно-разборных ступенек на ножках с противоскользящим покрытием, нижняя из которых способна убираться под верхнюю задвиганием. Подставка комплектуется съемным поручнем, фиксирующимся к ванне и служащим элементом опоры в момент подъема по ступенькам и преодоления борта ванны. Поручень может быть установлен на левой или правой стороне подставки.

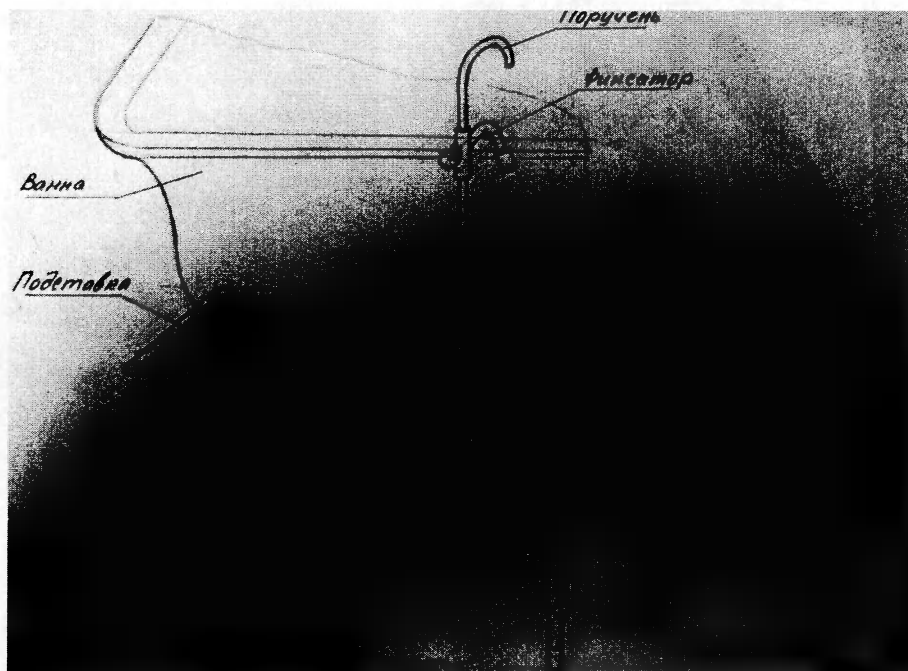


Рис. 1
Подставка к ванне ПВ-02
(в рабочем положении и в сложенном виде)



2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры подставки в рабочем положении

- высота с поручнем, мм -- 1000;
- высота без поручня, мм -- 360;
- длина, мм -- 500;
- ширина, мм -- 450;
- ширина нижней ступени, мм -- 250;
- ширина верхней ступени, мм -- 250;
- высота нижней ступени от пола, мм -- 150;
- высота верхней ступени от пола, мм -- 360.

2.2. Масса подставки - 7,0 кг.

2.3. Максимально допустимая масса пользователя – 150 кг.

2.4. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки изделия входят:

- нижняя ступень – 1 шт.;
- верхняя ступень – 1 шт.;
- поручень с узлом фиксации и стопорным винтом – 1 шт.;
- болтовой крепеж – 2 комп.;
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование подставки допускается всеми видами закрытого транспорта. Изделия должны быть надежно закреплены от перемещения. Допускается укладывать подставки друг на друга стопкой до 4-х шт., в коробках – до 12-ти шт.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых складских помещениях при температуре воздуха от минус 15 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха от 50 до 80 % на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных и нагревательных приборов. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

5.1. Освободить подставку от упаковки.

5.2. Промыть изделие теплой водой с добавлением моющих средств.

6. Порядок эксплуатации

6.1. Подставку установить к ванне согласно рисунку 1.

6.2. При установке поручня (поз.2) на подставку необходимо, чтобы кнопочный фиксатор поручня вошел в предназначенное для него отверстие во втулке подставки до щелчка.

6.3. Фиксатор (поз.3), находящийся на поручне, установленном на бортике ванны, должен быть застопорен от перемещения винтом фиксатора (поз.4).

7. Обслуживание и уход

7.1. Мыть подставку теплой водой с добавлением моющих средств. Не допускается применение кислот и органических растворителей.

7.2. Дезинфекцию проводить раствором 1%-го монохлорамина ХБ с добавлением моющих средств, применяемых при чистке и дезинфекции.



8. Требования безопасности

- 8.1. Запрещается эксплуатировать подставку, установленную на наклонной и неровной поверхности, при наличии зазора под одной из опор более 3мм.
- 8.2. Запрещается эксплуатировать подставку, не выполнив предварительно требований раздела 6 настоящего паспорта.
- 8.3. Запрещается эксплуатировать подставку лицам массой более 150 кг.
- 8.4. Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

9. Свидетельство о приемке

Подставка к ванне (наименование изделия)	ПВ-02 (обозначение)
соответствует требованиям ТУ 9452-909-03151254-2012 и признано годным к эксплуатации.	

М.П. _____ Дата выпуска _____
(отметка ОКК)

10. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выдачи изделия потребителю.

В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока предприятие – изготовитель при обращении по адресу:

443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47

обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

11. Отметка о выдаче товара потребителю

М.П. торговой организации


Подпись продавца _____ Дата _____
(без печати не действительно)

12. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

№ п/п	Описание дефекта, дата	Устранение дефекта, дата	Отметка ОКК	Примечание

Просим Ваши замечания и отзывы о нашей продукции направлять по вышеуказанному адресу.

Копия верна
Зав. канцелярией Азаркевич А.Н.
"19" апреля 2013 г.

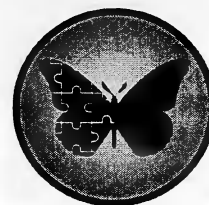

ФГУП «Самарское ПрОП»
Минтруда России

ПОДСТАВКА К ВАННЕ

ПВ-02

ТУ 9452-909-03151254-2012

ПАСПОРТ



Копия верна
Зав. канцелярией Азаркевич А.Н.
"19" апреля 2013 г.