

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «АБ Мед»



Савельева И.С.

2022 г.

**СТОЛ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ,  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ «АВАНТА»**

**ПО ТУ 32.50.30-007-92135860-2022**

**Руководство по эксплуатации**

**АШМП.324155.007 РЭ**

**с изменениями от 01.12.2022 г.**

**г. Москва**

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 2 из 64            |

## СОДЕРЖАНИЕ

|    |                                                                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....                                                                    | 4  |
| 2  | ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....                                                                                    | 5  |
| 3  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....                                                                                | 7  |
| 4  | ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....                                                                              | 22 |
| 5  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....                                                                          | 23 |
| 6  | ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....                                                      | 25 |
| 7  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ .....                                                                    | 26 |
| 8  | УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                                                                             | 28 |
| 9  | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....                                                                         | 28 |
| 10 | ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....                                                      | 29 |
| 11 | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ .....                                                                              | 30 |
| 12 | СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....                                                                         | 30 |
| 13 | СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....                                                                               | 31 |
| 14 | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....                                                                                | 32 |
| 15 | СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НА ЖИВОТНЫХ .....                                                                 | 35 |
| 16 | СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ЖИВОТНОГО<br>ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ..... | 35 |
| 17 | СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ<br>МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ .....                           | 35 |
| 18 | СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ .....                                                                              | 35 |
|    | ПРИЛОЖЕНИЕ А. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....                                                         | 36 |
|    | ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....                                                                                          | 38 |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 3 из 64            |

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» по ТУ 32.50.30-007-92135860-2022, в вариантах исполнения (далее – Стол), предназначенный для организации рабочего места при проведении хирургических операций, в условиях кабинета хирургической стоматологии, а также для хранения инструментов, материалов и заготовок, связанных с проведением этих работ.

 Информация, важная для безопасного применения стола отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал, детально изучивший настоящее Руководство по эксплуатации.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

 Ремонт изделия может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров.

По всем вопросам, касающимся использования стола, необходимо обращаться к производителю:

Общество с ограниченной ответственностью «АБ Мед» (ООО «АБ Мед»).

Адрес: 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30, пом.106, 107.

Тел.: +7 4952550125, +7 8115236854.

E-mail: [direktor.abmed@gmail.com](mailto:direktor.abmed@gmail.com).

Место производства:

Общество с ограниченной ответственностью «АБ Мед» (ООО «АБ Мед»).

Адрес: 181350, Россия, Псковская область, г. Остров, ул. Большая Пионерская, 45 А.

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 4 из 64            |

## 1 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В зависимости от потенциального риска применения стол относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям стол относится к виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, для работы в следующих условиях:

- температура воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С;
- относительная влажность до 80% при 25 °С;
- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа. (от 650 до 800 мм рт. ст.).

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации стол относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

По требованиям безопасности стол соответствует ГОСТ Р 50444.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем документе, приведен в приложении А.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.106, ГОСТ Р 2.601, ГОСТ Р 2.610.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 5 из 64            |

## 2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 2.1 Назначение и условия применения

Стол предназначен для организации рабочего места при проведении хирургических операций, в условиях кабинета хирургической стоматологии, а также для хранения инструментов, материалов и заготовок, связанных с проведением этих работ.

Сфера применения: в условиях лечебно-профилактических учреждений.

### 2.2 Потенциальные потребители

Обслуживающий медицинский персонал детально изучивший Руководство по эксплуатации.

### 2.3 Показания к применению

Изделие применяется для организации рабочего места при проведении хирургических операций, в условиях кабинета хирургической стоматологии, а также для хранения инструментов, материалов и заготовок, связанных с проведением этих работ.

### 2.4 Противопоказания

Отсутствуют при соблюдении требований руководства по эксплуатации.

### 2.5 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований прилагаемого руководства по эксплуатации и показаний к применению.

### 2.6 Меры предосторожности

#### **Внимание!**

- Используйте стол только в соответствии с данным руководством.
- Персонал допускается к работе со столом только после детального изучения настоящего руководства по эксплуатации и прохождения вводного инструктажа о соблюдении мер безопасности.
- Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей стола.
- Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то эксплуатация стола должна быть прекращена.
- При работе со столом персонал должен использовать индивидуальные средства защиты (перчатки).
- Уход за столом осуществлять в соответствии с данным руководством.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 6 из 64            |

- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за столом.
- Не следует ставить на поверхность стола горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Запрещается использовать стол для хранения активных химических веществ и реагентов не используемых при работе врача (или основном применении стола).
- Не допускается ударов жесткими предметами.

## 2.7 Расшифровка символов

| Символ                                                                              | Обозначение                                                                        | Место нанесения маркировки |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Перед использованием прочтите Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям | Стол                       |
|    | Наименование и адрес производителя                                                 | Упаковка/ Стол             |
|   | Дата изготовления                                                                  | Стол                       |
|  | Серийный (заводской) номер                                                         | Стол                       |
|  | Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация                            | Стол                       |
|  | Беречь от влаги                                                                    | Упаковка                   |
|  | Верх                                                                               | Упаковка                   |
|  | Хрупкое. Осторожно                                                                 | Упаковка                   |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 7 из 64            |

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### 3.1 Основные параметры и характеристики

3.1.1 Стол соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, технических условий и комплекту конструкторской документации АШМП.324155.007, утвержденной в установленном порядке.

3.1.2 Характеристики стола, его частей соответствуют значениям, указанным в таблице 1. Предельное отклонение габаритных размеров не превышает  $\pm 5$  мм. Предельное отклонение массы не превышает  $\pm 5$  %.

Таблица 1 – Характеристики стола

| Наименование изделия, его частей | Глубина,<br>мм. | Ширина,<br>мм. | Высота,<br>мм. | Масса<br>нетто, кг. | № Рисунка |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
| Стол - АС-011                    | 768             | 495            | 467            | 15,7                | Рис.Б.1   |
| Стол - АС-012                    | 768             | 495            | 467            | 22,0                | Рис.Б.2   |
| Стол - АС-013                    | 768             | 495            | 467            | 25,6                | Рис.Б.3   |
| Стол - АК-013                    | 768             | 495            | 467            | 26,3                | Рис.Б.4   |
| Стол - АК-014                    | 768             | 495            | 467            | 27,4                | Рис.Б.5   |
| Стол - АК-13                     | 802             | 501            | 628            | 30,7                | Рис.Б.6   |
| Стол - АК-14                     | 802             | 501            | 628            | 32,6                | Рис.Б.7   |
| Стол - АП-013                    | 766             | 530            | 467            | 28,3                | Рис.Б.8   |
| Стол - АП-014                    | 766             | 530            | 467            | 29,4                | Рис.Б.9   |
| Стол - АВ-14                     | 802             | 532            | 628            | 39,2                | Рис.Б.10  |
| <b>Вставка в ящик ВСМ</b>        |                 |                |                |                     |           |
| ВСМ — 011                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.11  |
| Размер ячеек                     | 330             | 396            | -              | -                   |           |
| ВСМ — 021                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.12  |
| Размер ячеек                     | 330             | 192            | -              | -                   |           |
|                                  | 330             | 192            | -              | -                   |           |
| ВСМ — 041                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.13  |
| Размер ячеек                     | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |
|                                  | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |
|                                  | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |
|                                  | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |
| ВСМ — 051                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.14  |
| Размер ячеек                     | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 105            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 250            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 135            | -              | -                   |           |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 8 из 64            |

| Наименование изделия, его частей | Глубина,<br>мм. | Ширина,<br>мм. | Высота,<br>мм. | Масса<br>нетто, кг. | № Рисунка |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
| ВСМ — 052                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.15  |
| Размер ячеек                     | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 160             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 260            | -              | -                   |           |
|                                  | 160             | 125            | -              | -                   |           |
| ВСМ — 061                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.16  |
| Размер ячеек                     | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 105            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 105            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 135            | -              | -                   |           |
| ВСМ — 062                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.17  |
| Размер ячеек                     | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 125            | -              | -                   |           |
| ВСМ — 081                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.18  |
| Размер ячеек                     | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 105            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 105            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
| ВСМ — 082                        | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.19  |
| Размер ячеек                     | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 57,5           | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 57,5           | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 57,5           | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 57,5           | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 57,5           | -              | -                   |           |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 9 из 64            |

| Наименование изделия, его частей                                | Глубина,<br>мм. | Ширина,<br>мм. | Высота,<br>мм. | Масса<br>нетто, кг. | № Рисунка |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
|                                                                 | 100             | 57,5           | -              | -                   |           |
| ВСМ — 101                                                       | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.20  |
| Размер ячеек                                                    | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                                                 | 220             | 105            | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 135            | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 105            | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
| ВСМ — 141                                                       | 360             | 425            | 45             | 0,5                 | Рис.Б.21  |
| Размер ячеек                                                    | 220             | 105            | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 105             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 105            | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
|                                                                 | 100             | 62,5           | -              | -                   |           |
| Примечание: Толщина кромки: 15 мм. Толщина перегородки – 10 мм. |                 |                |                |                     |           |
| Вставка в ящик ВСС                                              |                 |                |                |                     |           |
| ВСС — 011                                                       | 360             | 425            | 136            | 0,6                 | Рис.Б.22  |
| Размер ячеек                                                    | 330             | 395            | -              | -                   |           |
| ВСС — 021                                                       | 360             | 425            | 136            | 0,6                 | Рис.Б.23  |
| Размер ячеек                                                    | 330             | 192,5          | -              | -                   |           |
|                                                                 | 330             | 192,5          | -              | -                   |           |
| ВСС — 041                                                       | 360             | 425            | 136            | 0,6                 | Рис.Б.24  |
| Размер ячеек                                                    | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |
|                                                                 | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |
|                                                                 | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 10 из 64           |

| Наименование изделия, его частей | Глубина,<br>мм. | Ширина,<br>мм. | Высота,<br>мм. | Масса<br>нетто, кг. | № Рисунка |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
|                                  | 160             | 192,5          | -              | -                   |           |
| ВСС — 052                        | 360             | 425            | 136            | 0,6                 | Рис.Б.25  |
| Размер ячеек                     | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 260            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 125            | -              | -                   |           |
| ВСС — 061                        | 360             | 425            | 136            | 0,6                 | Рис.Б.26  |
| Размер ячеек                     | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 105            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 135            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 105            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 135            | -              | -                   |           |
| ВСС — 062                        | 360             | 425            | 136            | 0,6                 | Рис.Б.27  |
| Размер ячеек                     | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 220             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 125            | -              | -                   |           |
|                                  | 100             | 125            | -              | -                   |           |

*Примечание: Толщина кромки: 15 мм. Толщина перегородки – 10 мм.*

*Примечание:*

- 1. Высота от уровня пола до верхней кромки рабочей поверхности.*
- 2. Ширина по кромкам рабочей поверхности.*
- 3. Глубина от задней кромки рабочей поверхности до переднего края декоративной накладки. (ручки ящиков в размер не входят).*
- 4. Вес изделий без замков.*

3.1.3 Конструкция и внешний вид стола соответствуют рисункам Б.1 – Б.27, приложения Б.

3.1.4 Каркас стола имеет сварную конструкцию, полностью выполненную из сложносогнутого стального профиля.

3.1.5 Фасады стола изготавливаются из оцинкованной стали, окрашенной полиэфирной порошковой краской или окрашенной оцинкованной стали с панелью из закаленного стекла. Толщина фасадов  $20,5 \pm 1,0$  мм.

3.1.6 Боковые и задние стенки стола изготавливаются из листовой холоднокатанной стали толщиной 0,5-0,8 мм и окрашиваются полиэфирной порошковой краской.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 11 из 64           |

3.1.7 Рабочая поверхность стола изготовлена из нержавеющей стали и имеет сплошную поверхность, без технологических щелей, пазов, крепежных элементов.

3.1.8 Рабочая поверхность стола и дно пластиковых вставок в ящик выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на рабочую поверхность стола  $10 \pm 1,0$  кг;
- на дно пластиковой вставки в ящик  $5 \pm 0,5$  кг.

3.1.9 Ящики стола имеет устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

3.1.10 Ящики стола имеют свободный ход с полным выдвижением, без заеданий и перекосов, с усилием выдвижения не более 30 Н.

3.1.11 На изделия могут устанавливаться замки на ящики в следующем составе:

- АС-011 - замок на ящик;
- АС-012 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АС-013 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АК-013 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АК-014 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АК-13 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АК-14 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АП-013 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АП-014 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок;
- АВ-14 - отдельный замок на каждый ящик или центральный замок.

3.1.11.1 Замок на каждый ящик устанавливается на внутренней стороне фасада ящика, цилиндр замка с замочной скважиной располагается по центру наружного фасада.

3.1.11.2 Центральный замок на ящики столиков запирает одновременно все ящики столика. Цилиндр замка с замочной скважиной находится с правой стороны декоративной накладке, расположенной над верхним ящиком. Запорный механизм замка, состоящий из штанг и рычагов установлен над верхним ящиком и за задними стенками ящиков. Блокировка открывания ящиков осуществляется за счет зацепления запирающих деталей со скобами на задней стенке ящиков.

3.1.12 Стол устойчиво стоит на опорах.

3.1.13 Столы оснащены четырьмя колесами со следующими характеристиками:

- Диаметр колес  $50 \pm 5$  мм., для варианта исполнения АВ-14 диаметр колес  $75 \pm 5$  мм.;
- Два из четырех колес имеют тормозные устройства;
- Усилие срабатывания тормозного устройства не более 30 Н.
- Усилие перемещения при снятых тормозах не более 120 Н.
- Усилие, вызывающее начало движения, при включенных тормозах не менее 400 Н.

3.1.14 Стол устойчив при приложении нагрузки на выдвинутый ящик не более 75 Н.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 12 из 64           |

3.1.15 На видимой поверхности стола не допускаются дефекты: сколы, отслоения, пузыри под облицовкой, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

3.1.16 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей деталей из металла по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 для изделий группы условий 1.

3.1.17 Наружные поверхности должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 (3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства типа «Лотос» ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003).

3.1.18 В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям столы, в процессе эксплуатации относятся к виду климатического исполнения УХЛ 4.2 в соответствии с ГОСТ 15150.

3.1.19 Столы при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов 15150 при транспортировании для условий хранения 5; при хранении для условий хранения 2.

3.1.20 При эксплуатации столы устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

3.1.21 При транспортировании столы устойчивы к механическим воздействиям для группы 1 по ГОСТ Р 50444.

## 3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

3.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении стола, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

3.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве стола, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

3.2.3 Для изготовления стола допускается применение материалов изготовителя, после прохождения необходимых испытаний, а также при условии неизменности конструктивных и функциональных характеристик, требований безопасности.

3.2.4 Контакт изделия с кожей пользователя не предусмотрен. При работе с изделием, пользователю необходимо использовать средства индивидуальной защиты в виде перчаток.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 13 из 64           |

### 3.3 Требования к надежности

3.3.1 Средняя наработка на отказ (To) - 10000 часов.

3.3.2 Срок службы стола составляет 10 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям. Решение о дальнейшей эксплуатации после достижения этого срока принимается потребителем после проведения технического обслуживания, исходя из экономической целесообразности и состояния стола.

### 3.4 Комплектность

#### 3.4.1 Комплект поставки:

Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» по ТУ 32.50.30-007-92135860-2022, в вариантах исполнения:

#### I. Варианты исполнения:

1 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АС-011, в составе:

- 1.1 Стол - АС-011- 1 шт.;
- 1.2 Вставка в ящик ВСС — 011 – 1 шт. (при необходимости);
- 1.3 Вставка в ящик ВСС — 021 – 1 шт. (при необходимости);
- 1.4 Вставка в ящик ВСС — 041 – 1 шт. (при необходимости);
- 1.5 Вставка в ящик ВСС — 052 – 1 шт. (при необходимости);
- 1.6 Вставка в ящик ВСС — 061 – 1 шт. (при необходимости);
- 1.7 Вставка в ящик ВСС — 062 – 1 шт. (при необходимости);
- 1.8 Замок на ящик – 1 шт. (при необходимости);
- 1.9 Руководство по эксплуатации.

2 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АС-012, в составе:

- 2.1 Стол - АС-012 – 1 шт.;
- 2.2 Вставка в ящик ВСС — 011 – 2 шт. (при необходимости);
- 2.3 Вставка в ящик ВСС — 021 – 2 шт. (при необходимости);
- 2.4 Вставка в ящик ВСС — 041 – 2 шт. (при необходимости);
- 2.5 Вставка в ящик ВСС — 052 – 2 шт. (при необходимости);
- 2.6 Вставка в ящик ВСС — 061 – 2 шт. (при необходимости);
- 2.7 Вставка в ящик ВСС — 062 – 2 шт. (при необходимости);
- 2.8 Замок на ящик – 2 шт. (при необходимости);
- 2.9 Центральный замок – 1 шт. (при необходимости);
- 2.10 Руководство по эксплуатации.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 14 из 64           |

**3 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АС-013, в составе:**

- 3.1 Стол - АС-013 – 1 шт.;
- 3.2 Вставка в ящик ВСМ — 011 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.3 Вставка в ящик ВСМ — 021 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.4 Вставка в ящик ВСМ — 041 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.5 Вставка в ящик ВСМ — 051 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.6 Вставка в ящик ВСМ — 052 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.7 Вставка в ящик ВСМ — 061 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.8 Вставка в ящик ВСМ — 062 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.9 Вставка в ящик ВСМ — 081 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.10 Вставка в ящик ВСМ — 082 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.11 Вставка в ящик ВСМ — 101 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.12 Вставка в ящик ВСМ — 141 – 1 шт. (при необходимости);
- 3.13 Вставка в ящик ВСС — 011 – 2 шт. (при необходимости);
- 3.14 Вставка в ящик ВСС — 021 – 2 шт. (при необходимости);
- 3.15 Вставка в ящик ВСС — 041 – 2 шт. (при необходимости);
- 3.16 Вставка в ящик ВСС — 052 – 2 шт. (при необходимости);
- 3.17 Вставка в ящик ВСС — 061 – 2 шт. (при необходимости);
- 3.18 Вставка в ящик ВСС — 062 – 2 шт. (при необходимости);
- 3.19 Замок на ящик – 3 шт. (при необходимости);
- 3.20 Центральный замок – 1 шт. (при необходимости).
- 3.21 Руководство по эксплуатации.

**4 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АК-013, в составе:**

- 4.1 Стол - АК-013 - 1 шт.;
- 4.2 Вставка в ящик ВСМ — 011 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.3 Вставка в ящик ВСМ — 021 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.4 Вставка в ящик ВСМ — 041 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.5 Вставка в ящик ВСМ — 051 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.6 Вставка в ящик ВСМ — 052 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.7 Вставка в ящик ВСМ — 061 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.8 Вставка в ящик ВСМ — 062 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.9 Вставка в ящик ВСМ — 081 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.10 Вставка в ящик ВСМ — 082 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.11 Вставка в ящик ВСМ — 101 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.12 Вставка в ящик ВСМ — 141 – 1 шт. (при необходимости);
- 4.13 Вставка в ящик ВСС — 011 – 2 шт. (при необходимости);

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 15 из 64           |

- 4.14 Вставка в ящик ВСС — 021 — 2 шт. (при необходимости);
  - 4.15 Вставка в ящик ВСС — 041 — 2 шт. (при необходимости);
  - 4.16 Вставка в ящик ВСС — 052 — 2 шт. (при необходимости);
  - 4.17 Вставка в ящик ВСС — 061 — 2 шт. (при необходимости);
  - 4.18 Вставка в ящик ВСС — 062 — 2 шт. (при необходимости);
  - 4.19 Замок на ящик — 3 шт. (при необходимости);
  - 4.20 Центральный замок — 1 шт. (при необходимости).
  - 4.21 Руководство по эксплуатации.
- 5 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АК-014, в составе:
- 5.1 Стол - АК-014 - 1 шт.;
  - 5.2 Вставка в ящик ВСМ — 011 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.3 Вставка в ящик ВСМ — 021 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.4 Вставка в ящик ВСМ — 041 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.5 Вставка в ящик ВСМ — 051 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.6 Вставка в ящик ВСМ — 052 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.7 Вставка в ящик ВСМ — 061 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.8 Вставка в ящик ВСМ — 062 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.9 Вставка в ящик ВСМ — 081 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.10 Вставка в ящик ВСМ — 082 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.11 Вставка в ящик ВСМ — 101 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.12 Вставка в ящик ВСМ — 141 — 3 шт. (при необходимости);
  - 5.13 Вставка в ящик ВСС — 011 — 1 шт. (при необходимости);
  - 5.14 Вставка в ящик ВСС — 021 — 1 шт. (при необходимости);
  - 5.15 Вставка в ящик ВСС — 041 — 1 шт. (при необходимости);
  - 5.16 Вставка в ящик ВСС — 052 — 1 шт. (при необходимости);
  - 5.17 Вставка в ящик ВСС — 061 — 1 шт. (при необходимости);
  - 5.18 Вставка в ящик ВСС — 062 — 1 шт. (при необходимости);
  - 5.19 Замок на ящик — 4 шт. (при необходимости);
  - 5.20 Центральный замок — 1 шт. (при необходимости);
  - 5.21 Руководство по эксплуатации.
- 6 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АК-13, в составе:
- 6.1 Стол - АК-13 - 1 шт.;
  - 6.2 Вставка в ящик ВСС — 011 — 3 шт. (при необходимости);
  - 6.3 Вставка в ящик ВСС — 021 — 3 шт. (при необходимости);
  - 6.4 Вставка в ящик ВСС — 041 — 3 шт. (при необходимости);
  - 6.5 Вставка в ящик ВСС — 052 — 3 шт. (при необходимости);

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 16 из 64           |

- 6.6 Вставка в ящик ВСС — 061 — 3 шт. (при необходимости);
- 6.7 Вставка в ящик ВСС — 062 — 3 шт. (при необходимости);
- 6.8 Замок на ящик — 3 шт. (при необходимости);
- 6.9 Центральный замок — 1 шт. (при необходимости);
- 6.10 Руководство по эксплуатации.
- 7 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АК-14, в составе:
  - 7.1 Стол - АК-14- 1 шт.;
  - 7.2 Вставка в ящик ВСМ — 011 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.3 Вставка в ящик ВСМ — 021 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.4 Вставка в ящик ВСМ — 041 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.5 Вставка в ящик ВСМ — 051 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.6 Вставка в ящик ВСМ — 052 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.7 Вставка в ящик ВСМ — 061 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.8 Вставка в ящик ВСМ — 062 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.9 Вставка в ящик ВСМ — 081 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.10 Вставка в ящик ВСМ — 082 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.11 Вставка в ящик ВСМ — 101 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.12 Вставка в ящик ВСМ — 141 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.13 Вставка в ящик ВСС — 011 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.14 Вставка в ящик ВСС — 021 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.15 Вставка в ящик ВСС — 041 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.16 Вставка в ящик ВСС — 052 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.17 Вставка в ящик ВСС — 061 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.18 Вставка в ящик ВСС — 062 — 2 шт. (при необходимости);
  - 7.19 Замок на ящик — 4 шт. (при необходимости);
  - 7.20 Центральный замок — 1 шт. (при необходимости);
  - 7.21 Руководство по эксплуатации.
- 8 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АП-013, в составе:
  - 8.1 Стол - АП-013- 1 шт.;
  - 8.2 Вставка в ящик ВСМ — 011 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.3 Вставка в ящик ВСМ — 021 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.4 Вставка в ящик ВСМ — 041 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.5 Вставка в ящик ВСМ — 051 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.6 Вставка в ящик ВСМ — 052 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.7 Вставка в ящик ВСМ — 061 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.8 Вставка в ящик ВСМ — 062 — 1 шт. (при необходимости);

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 17 из 64           |

- 8.9 Вставка в ящик ВСМ — 081 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.10 Вставка в ящик ВСМ — 082 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.11 Вставка в ящик ВСМ — 101 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.12 Вставка в ящик ВСМ — 141 — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.13 Вставка в ящик ВСС — 011 — 2 шт. (при необходимости);
  - 8.14 Вставка в ящик ВСС — 021 — 2 шт. (при необходимости);
  - 8.15 Вставка в ящик ВСС — 041 — 2 шт. (при необходимости);
  - 8.16 Вставка в ящик ВСС — 052 — 2 шт. (при необходимости);
  - 8.17 Вставка в ящик ВСС — 061 — 2 шт. (при необходимости);
  - 8.18 Вставка в ящик ВСС — 062 — 2 шт. (при необходимости);
  - 8.19 Замок на ящик — 3 шт. (при необходимости);
  - 8.20 Центральный замок — 1 шт. (при необходимости);
  - 8.21 Руководство по эксплуатации.
- 9 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АП-014, в составе:
- 9.1 Стол - АП-014 - 1 шт.;
  - 9.2 Вставка в ящик ВСМ — 011 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.3 Вставка в ящик ВСМ — 021 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.4 Вставка в ящик ВСМ — 041 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.5 Вставка в ящик ВСМ — 051 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.6 Вставка в ящик ВСМ — 052 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.7 Вставка в ящик ВСМ — 061 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.8 Вставка в ящик ВСМ — 062 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.9 Вставка в ящик ВСМ — 081 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.10 Вставка в ящик ВСМ — 082 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.11 Вставка в ящик ВСМ — 101 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.12 Вставка в ящик ВСМ — 141 — 3 шт. (при необходимости);
  - 9.13 Вставка в ящик ВСС — 011 — 1 шт. (при необходимости);
  - 9.14 Вставка в ящик ВСС — 021 — 1 шт. (при необходимости);
  - 9.15 Вставка в ящик ВСС — 041 — 1 шт. (при необходимости);
  - 9.16 Вставка в ящик ВСС — 052 — 1 шт. (при необходимости);
  - 9.17 Вставка в ящик ВСС — 061 — 1 шт. (при необходимости);
  - 9.18 Вставка в ящик ВСС — 062 — 1 шт. (при необходимости);
  - 9.19 Замок на ящик — 4 шт. (при необходимости);
  - 9.20 Центральный замок — 1 шт. (при необходимости);
  - 9.21 Руководство по эксплуатации.
- 10 Стол для хирургических инструментов, стоматологический «АВАНТА» - АВ-14, в составе:

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 18 из 64           |

- 10.1 Стол - АВ-14 - 1 шт.;
- 10.2 Вставка в ящик ВСМ — 011 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.3 Вставка в ящик ВСМ — 021 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.4 Вставка в ящик ВСМ — 041 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.5 Вставка в ящик ВСМ — 051 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.6 Вставка в ящик ВСМ — 052 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.7 Вставка в ящик ВСМ — 061 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.8 Вставка в ящик ВСМ — 062 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.9 Вставка в ящик ВСМ — 081 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.10 Вставка в ящик ВСМ — 082 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.11 Вставка в ящик ВСМ — 101 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.12 Вставка в ящик ВСМ — 141 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.13 Вставка в ящик ВСС — 011 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.14 Вставка в ящик ВСС — 021 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.15 Вставка в ящик ВСС — 041 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.16 Вставка в ящик ВСС — 052 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.17 Вставка в ящик ВСС — 061 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.18 Вставка в ящик ВСС — 062 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.19 Замок на ящик – 4 шт. (при необходимости);
- 10.20 Центральный замок – 1 шт. (при необходимости);
- 10.21 Руководство по эксплуатации.

*Примечание: исполнение стола, тип замка (на ящик и/или центральный замок и тип вставок в ящик, должны определяться при заказе по согласованию с заказчиком.*

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 19 из 64           |

### 3.5 Маркировка

3.5.1 Маркировка стола соответствует ГОСТ Р 50444 и технических условий.

3.5.2 Маркировка наносится на верхний левый угол задней стенки стола, в виде самоклеящихся этикеток.

3.5.3 Не допускается нанесение маркировки на съемных панелях и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

3.5.4 Торговый знак «AVANTA» в виде самоклеящейся наклейки наносится на одну из фасадных поверхностей в соответствии с дизайном изделия.

3.5.5 На каждом изделии нанесена маркировка (рисунок 1), на которой указано:

- Наименование изделия, его исполнение;
- Обозначение настоящих технических условий;
- Номер регистрационного удостоверения;
- Заводской номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя;
- Товарный знак «AVANTA»;
- Наименование и местонахождение завода-изготовителя;
- Символ «Ознакомиться с руководством по эксплуатации»;
- Дата изготовления: месяц и год;
- Условия применения;
- Гарантийный срок эксплуатации;
- Срок службы;
- Символ «Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация».



|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 20 из 64           |

### 3.5.6 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка (рисунок 2), нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару должны быть нанесена маркировка, содержащая сведения (рисунок – 2) и манипуляционные знаки (рисунок – 3), соответствующие значениям:

- Наименование изделия, его исполнение;
- Обозначение настоящих технических условий;
- Товарный знак «AVANTA»;
- Номер регистрационного удостоверения;
- Масса брутто;
- Габаритный размеры;
- Условия транспортирования;
- Условия хранения;
- Символ «Хрупкое. Осторожно»;
- Символ «Беречь от влаги»;
- Символ «Верх».



|                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| <b>Стол для хирургических инструментов,<br/>стоматологический «АВАНТА»<br/>по ТУ 32.50.30-007-92135860-2022</b>                                                                                          |            |                     |                    |
| Вариант исполнения: _____                                                                                                                                                                                |            |                     |                    |
| Дата изготовления:                                                                                                                                                                                       |            | ПУ № XXX XXXX/XXXXX |                    |
| Заводской номер:                                                                                                                                                                                         |            | от XX.XX.XXXX       |                    |
| Гарантийный срок эксплуатации:                                                                                                                                                                           | 12 месяцев |                     |                    |
| Срок службы:                                                                                                                                                                                             | 10 лет     |                     |                    |
| ООО «АБ МЕД», 109388, г.Москва, ул.Гурьянова, д.30,пом.106,107.<br>Место производства: Россия,Псковская область, г.Остров,<br>ул.Большая Пионерская,45А.                                                 |            |                     | АШМП.324155.007 РЭ |
| <b>Условия эксплуатации:</b><br>- температура воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С;<br>- относительная влажность до 80% при 25 °С;<br>- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа. (от 650 до 800мм рт.ст.). |            |                     |                    |

Рисунок 1 – шаблон маркировки

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 21 из 64           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стол для хирургических инструментов,<br/>стоматологический «АВАНТА»<br/>по ТУ 32.50.30-007-92135860-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |  |
| Вариант исполнения: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                     |
| Масса брутто: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | РУ № XXX XXXX/XXXXX<br>от XX.XX.XXXX |                                                                                     |
| Габаритные размеры: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                     |
| ООО «АБ МЕД», 109388, г.Москва, ул.Гурьянова, д.30, пом. 106,107.<br>Место производства: Россия, Псковская область, г. Остров, ул. Большая Пионерская, 45А.                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                     |
| Условия транспортирования стола: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100% при температуре плюс 25 °С.<br>Условия хранения стола: в транспортной упаковке на складах при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 25 °С. |                                      |                                                                                     |

**Рисунок 2 – шаблон транспортной маркировки**



**Рисунок 3 – манипуляционные знаки**

### **3.6 Упаковка**

**3.6.1 Упаковка** соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

**3.6.2 Изделие** поставляется в собранном виде, дополнительных действий по монтажу и наладке со стороны потребителя не требуется.

**3.6.3 Изделие** плотно упаковано с помощью полиэтиленовой пленки, уложено и укреплено внутри упаковочной тары.

**3.6.4 Стол** уложен в транспортную тару: ящик типа V по ГОСТ 2991 или типа III по ГОСТ 12082 и закреплен от перемещения с помощью упругого материала ППС 17 или ППС 25 по ГОСТ 15588 или деревянными упорами в соответствии с инструкцией на упаковку каждого вида изделий.

**3.6.5 Упаковочные** картонные коробки заклеены и стянуты полипропиленовой лентой. По согласованию с потребителем, для транспортировки картонная упаковка изделий может быть установлена в деревянную обрешетку.

**3.6.6 Эксплуатационная** документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, герметично закрыта и уложена совместно с изделием в транспортную тару.

**3.6.7 В** каждую транспортную тару вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444, на котором должно быть указано:

|                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | <b>Документ: АШМП.324155.007 РЭ</b> |
|                                                                                                      | <b>Версия: 1.2</b>                  |
|                                                                                                      | <b>Страница: 22 из 64</b>           |

- наименование предприятия изготовителя;
- наименование изделия, вариант его исполнения;
- заводской номер;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По безопасности стол должен соответствовать ГОСТ Р 50444, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 23 из 64           |

## 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 5.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством стола.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния комплектующих стола, чтобы убедиться в отсутствии различных вмятин, сколов, порезов и повреждений от ударов. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

### 5.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности, предусмотренного п.3.4 настоящего руководства по эксплуатации.

Аккуратно распакуйте стол и его принадлежности, выбросьте упаковочный материал.

Перед началом использования стола убедитесь, что отсутствуют повреждения каких-либо частей, нарушения целостности соединительных элементов.

#### **Внимание!**

**Стол поставляется потребителю в собранном виде.**

Во избежание повреждений при транспортировке, колеса стола должны устанавливаться непосредственно перед началом эксплуатации.

Для установки колес на стол необходимо произвести следующие действия:

- Положить стол на заднюю стенку (фасадами вверх). Во избежание повреждений покрытия стола, поверхность должна не должна быть твердой.
- Закрутите крепежные штыри колес в резьбовые отверстия в основании стола.
- Поставьте стол на колеса. Стол готов к эксплуатации.

**Внимание!** Перед началом работы необходимо! отрегулировать зазоры между фасадами ящиков, а так же относительно декоративных накладок и наружных декоративных боковин, выставив зазор 2 мм. В противном случае неверная регулировка приведёт к преждевременному изнашиванию (за счёт истирания, обиванию и т.п.).

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 24 из 64           |

### 5.3 Порядок работы с изделием

 Перед первым использованием стола рекомендуется осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями раздела 7.2.

Используйте стол в соответствии с его функциональным назначением.

*Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке.*

Последовательность действий при работе со столом:

- Подготовьте стол к работе согласно разделу 5.2;
- Завершение работы со столом:
  - убрать рабочее место;
  - очистить начисто рабочее место и вкладыш в ящик от остатков рабочего процесса и осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями раздела 7.2.

|                                                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ<br>Версия: 1.2<br>Страница: 25 из 64 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В этой главе представлен перечень возможных неисправностей (таблица 2) при подготовке к работе и использовании по назначению стола, а также возможные причины их возникновения и рекомендации по действиям при возникновении неисправностей. Если после выполнения всех шагов по устранению неисправность осталась, пожалуйста, обратитесь в сервисный отдел.

 **Внимание!** Запрещается самостоятельный ремонт неквалифицированным персоналом.

Таблица 2 – Перечень возможных неисправностей стола при использовании по назначению

| Неисправность                                              | Возможные причины                                                 | Рекомендации по устранению                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Во время работы стола раздается скрип, шатание             | Стол установлен на неровной поверхности.                          | Проверьте, установлен ли стол на ровной поверхности.                                      |
| Ящики не закрываются полностью с или закрываются перекосом | Не отрегулированы и направляющие ящиков.                          | Произведите регулировку подвижных элементов или обратитесь к специалисту.                 |
| Столик не передвигается, колеса не двигаются               | 1. Включен стопорный механизм колес.<br>2. Колеса вышли из строя. | 1. Снять стопорный механизм.<br>2. Обратится в сервисный центр для диагностики и ремонта. |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 26 из 64           |

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

### 7.1 Техническое обслуживание

При эксплуатации стол не требует особого технического обслуживания. Тем не менее, для продления среднего срока эксплуатации и безопасной работы необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений частей стола при внешнем осмотре.

Так же необходимо обеспечивать очистку и дезинфекцию частей стола согласно разделу 7.2 настоящего Руководства.

### 7.2 Уход и дезинфекция

Проводить дезинфекцию стола после каждого применения по назначению в независимости от дальнейшего использования.

Удаляйте следы загрязнений при помощи влажной тряпки.

Внешние и внутренние доступные поверхности стола протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3 % раствор перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644, 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003 или иными средствами согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за столом.

 Не следует ставить на поверхность стола горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

### 7.3 Ремонт

Если в процессе подготовки стола к работе, эксплуатации или обслуживания выявлены дефекты или неполадки, которые не удастся устранить согласно разделу 6 (*Возможные неисправности и способы их устранения*) настоящего Руководства, то необходимо обратиться к Изготовителю или в ближайший сервисный центр для проверки, ремонта или замены частей стола.

 Во время ремонта должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в данном Руководстве по эксплуатации.

Персоналу сервисного центра необходимо заносить в таблицу 3 сведения о проведенном ремонте.

[illegible]

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 28 из 64           |

## 8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование стола осуществлять в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.

8.2 Стол должен эксплуатироваться в условиях ЛПУ.

8.3 Использование стола не по назначению или с неисправными элементами запрещается.

8.4 Уход за поверхностями стола должен осуществляться регулярно, по окончании работы.

8.5 При эксплуатации стола требуется регулярно производить очистку и дезинфекцию.

8.6 Необходимо оберегать поверхности стола от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых предметов, абразивных составов, применением чрезмерных нагрузок. Не следует проводить или ударять по поверхностям твердыми и острыми предметами.

8.7 При обнаружении неисправностей, необходимо прекратить работу и обратиться в сервисную службу.

## 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование стола должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование стола может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

9.2 Условия транспортирования стола должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100 % при температуре плюс 25 °С.

9.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 25 °С).

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АЦМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 29 из 64           |

## 10 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, СанПиН 2.1.3684-21.

10.2 Согласно СанПиН 2.1.3684-21 стол относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

10.3 Перед утилизацией стол должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ 287-113.

10.4 Стол должен подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

10.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.



|                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | <b>Документ: АШМП.324155.007 РЭ</b> |
|                                                                                                      | <b>Версия: 1.2</b>                  |
|                                                                                                      | <b>Страница: 31 из 64</b>           |

### 13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 32 из 64           |

## 14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

14.3 Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления.

14.4 В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт изделия или вышедшей из строя составной части (детали, вставки в ящик).

14.5 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие или его части, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 33 из 64           |

### Гарантийный талон

Гарантийный талон заполняется при покупке стола. Без предъявления заполненного талона или при неправильном его заполнении претензии по качеству не принимаются.

Вариант исполнения \_\_\_\_\_, в составе:

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации: \_\_\_\_\_

Штамп торговой организации и подпись продавца: \_\_\_\_\_

Претензий к приобретённому столу не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен:

\_\_\_\_\_ Подпись покупателя

Сервисный центр расположен по адресу:

Адрес: 181350, Псковская область, город Остров, улица Б. Пионерская, д. 45А.

Тел. +7 (81152) 36-854.

Покупатель \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

**Заполняется в сервисном центре**

### Уважаемые покупатели!

Просим Вас ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания.

1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев. Течение гарантийного срока начинается с момента получения изделия Покупателем.

2. При доставке изделия и получении его от перевозчика Покупатель обязан убедиться в целостности упаковки, отсутствии деформации у картонных коробок. Картонная упаковка и деревянная тара должны сохраняться у Покупателя до принятия полученной продукции по качеству.

3. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание, ремонт и замену деталей, вышедших из строя в связи с естественным износом.

4. Для оказания гарантийных услуг Покупатель должен письменно уведомить Продавца об обнаружении любых дефектов, устраняемых по гарантийному обслуживанию. Приложение фотографий дефектов может существенно ускорить сроки принятия решений о проведении гарантийного обслуживания. Определение объема и характера гарантийных работ производится Продавцом по согласованию с Покупателем.

5. В случае наличия дефекта, подпадающего под гарантийный ремонт, Продавец в согласованные с Покупателем сроки осуществляет соответствующий ремонт или замену дефектного изделия (его части).

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 34 из 64           |

6. Местом осуществления гарантийных обязательств является место нахождения производства: Россия, 181350, Псковская область, город Остров, улица Б. Пионерская, д. 45А, тел. +7 (81152) 36-854.

7. Доставка изделия для осуществления гарантийного ремонта осуществляется Покупателем самостоятельно. В случае обнаружения дефектов в изделии, произошедших по вине Производителя, доставка изделия после гарантийного ремонта осуществляется за счет Производителя.

8. При обращении за гарантийным ремонтом непосредственно в сервисный центр, потребителю необходимо предъявить, кроме неисправного изделия, полностью заполненный гарантийный талон.

9. Продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных обязательств, в случае если недостатки товара возникли после передачи товара потребителю, вследствие нарушения потребителем правил пользования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц.

10. Ограничения гарантийных обязательств:

- К гарантийным обязательствам не относятся случаи, произошедшие не по вине Продавца, механической деформации поверхности изделий, сколы, царапины, а также возникающая в связи с этим ржавчина.

- Продавец не несет ответственность за ремонт его продукции, выполненный покупателем самостоятельно, без согласования с Продавцом.

- Финансовая ответственность Продавца в соответствии с гарантийными обязательствами не должна превышать объем затрат, необходимых для устранения дефекта.

- Продавец не несет ответственности за побочные потери (упущенную выгоду или снижение производительности) связанные с осуществлением гарантийных обязательств.

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 35 из 64           |

## 15 СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НА ЖИВОТНЫХ

Исследования на животных не проводились.

## 16 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

Изделие не содержит материалов животного или человеческого происхождения.

## 17 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие не включает в себя лекарственные средства для медицинского применения и фармацевтические субстанции.

## 18 СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ

Данное требование не применимо, изделие нестерильно и не должно подвергаться стерилизации.

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 36 из 64           |

## ПРИЛОЖЕНИЕ А.

### ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Таблица А.1

| Обозначение документа,<br>на который дана ссылка | Наименование документа                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                | Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012 "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий"                                                                         |
| -                                                | Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года                                                                                                                                  |
| ГОСТ 2.104-2006                                  | ЕСКД Основные надписи                                                                                                                                                                                                |
| ГОСТ 2.105-95                                    | ЕСКД Общие требования к текстовым документам                                                                                                                                                                         |
| ГОСТ 2.114-2016                                  | ЕСКД. Технические условия                                                                                                                                                                                            |
| ГОСТ 9.032-74                                    | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения                                                                                                                                          |
| ГОСТ 9.301-86                                    | ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования                                                                                                                                     |
| ГОСТ 9.302-88                                    | ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля                                                                                                                                      |
| ГОСТ 9.303-84                                    | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору                                                                             |
| ГОСТ 177-88                                      | Водорода перекись. Технические условия                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 10354-82                                    | Пленка полиэтиленовая. Технические условия                                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 14192-96                                    | Маркировка грузов                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 15150-69                                    | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 24297-2013                                  | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля                                                                                                                                          |
| ГОСТ 25644-96                                    | Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования                                                                                                                                          |
| ГОСТ Р 50444-2020                                | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования                                                                                                                                           |
| ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020                          | Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации                                                                                                           |
| МУ 287-113-98                                    | Методические указания по дезинфекции, стерилизации изделий медицинского назначения                                                                                                                                   |

|                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | <b>Документ: АШМП.324155.007 РЭ</b> |
|                                                                                                      | <b>Версия: 1.2</b>                  |
|                                                                                                      | <b>Страница: 37 из 64</b>           |

| <b>Обозначение документа,<br/>на который дана ссылка</b> | <b>Наименование документа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СанПиН 2.1.3684-21                                       | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| ТУ 9392-031-00203306-2003                                | Средство дезинфицирующее «Хлорамин Б»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**(обязательное)**

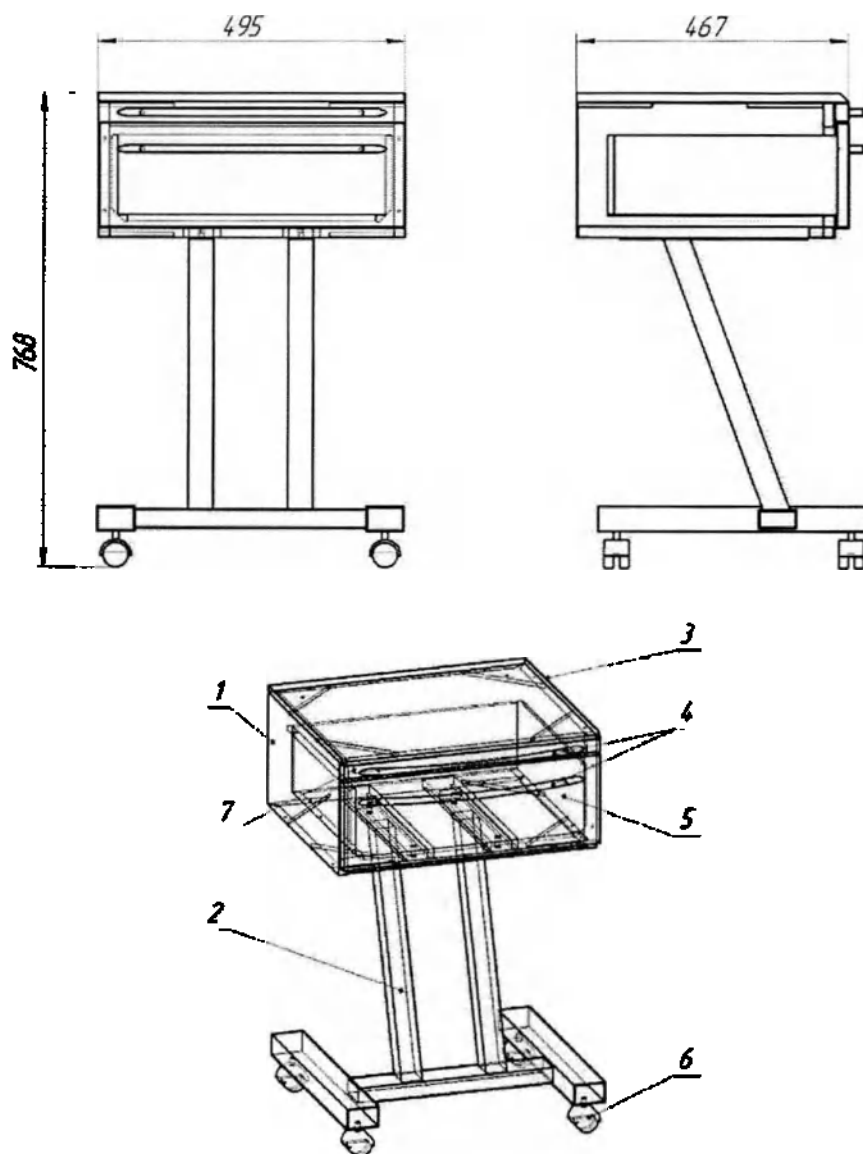

*Рисунок Б.1 – конструкция и внешний вид «Стол - АС-011»*

| Позиция | Наименование          | Кол-во |
|---------|-----------------------|--------|
| 1       | Каркас                | 1      |
| 2       | Нога                  | 1      |
| 3       | Рабочая поверхность   | 1      |
| 4       | Ручка                 | 2      |
| 5       | Ящик средний          | 1      |
| 6       | Колеса                | 4      |
| 7       | Декоративная накладка | 1      |

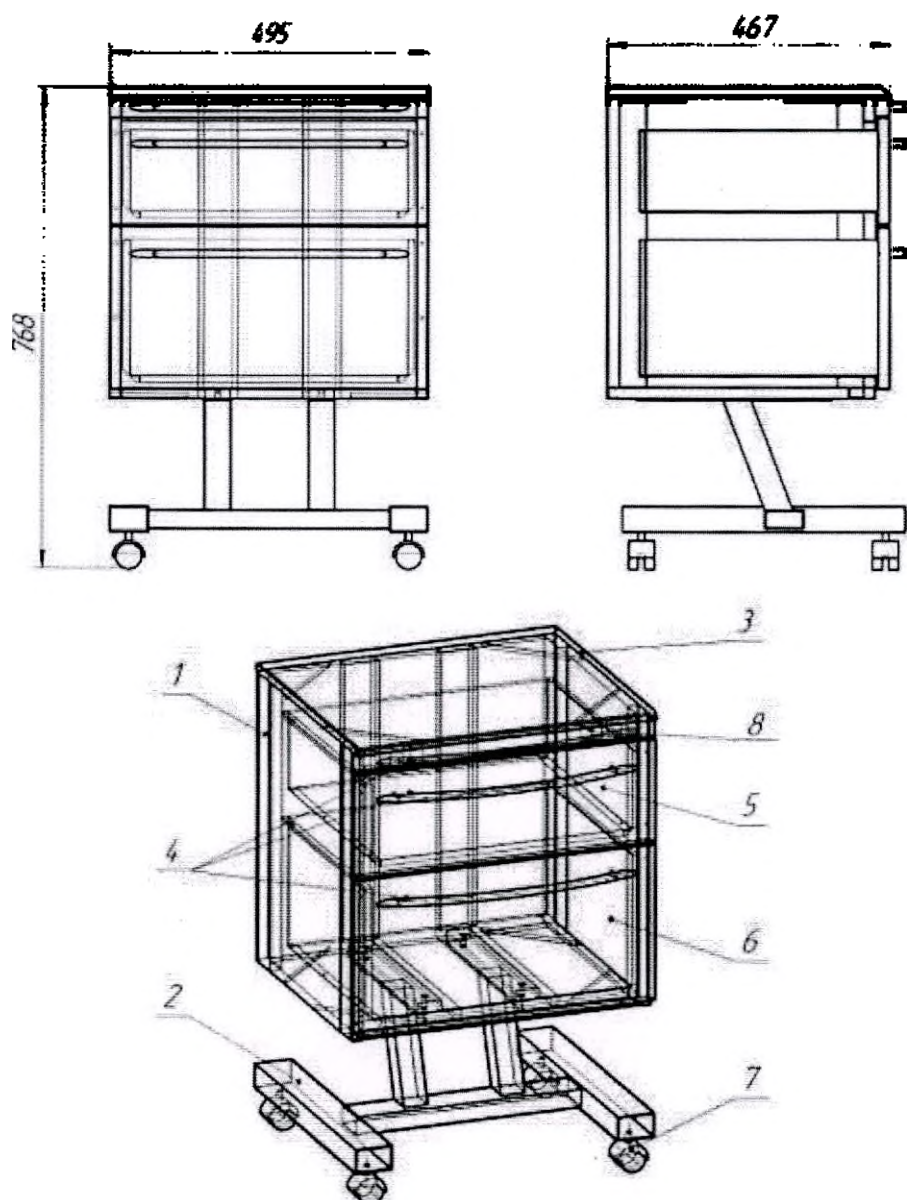


Рисунок Б.2 – конструкция и внешний вид «Стол АС-012»

| Позиция | Наименование          | Кол-во |
|---------|-----------------------|--------|
| 1       | Каркас                | 1      |
| 2       | Нога                  | 1      |
| 3       | Рабочая поверхность   | 1      |
| 4       | Ручка                 | 3      |
| 5       | Ящик средний          | 1      |
| 6       | Ящик большой          | 1      |
| 7       | Колеса                | 4      |
| 8       | Декоративная накладка | 1      |

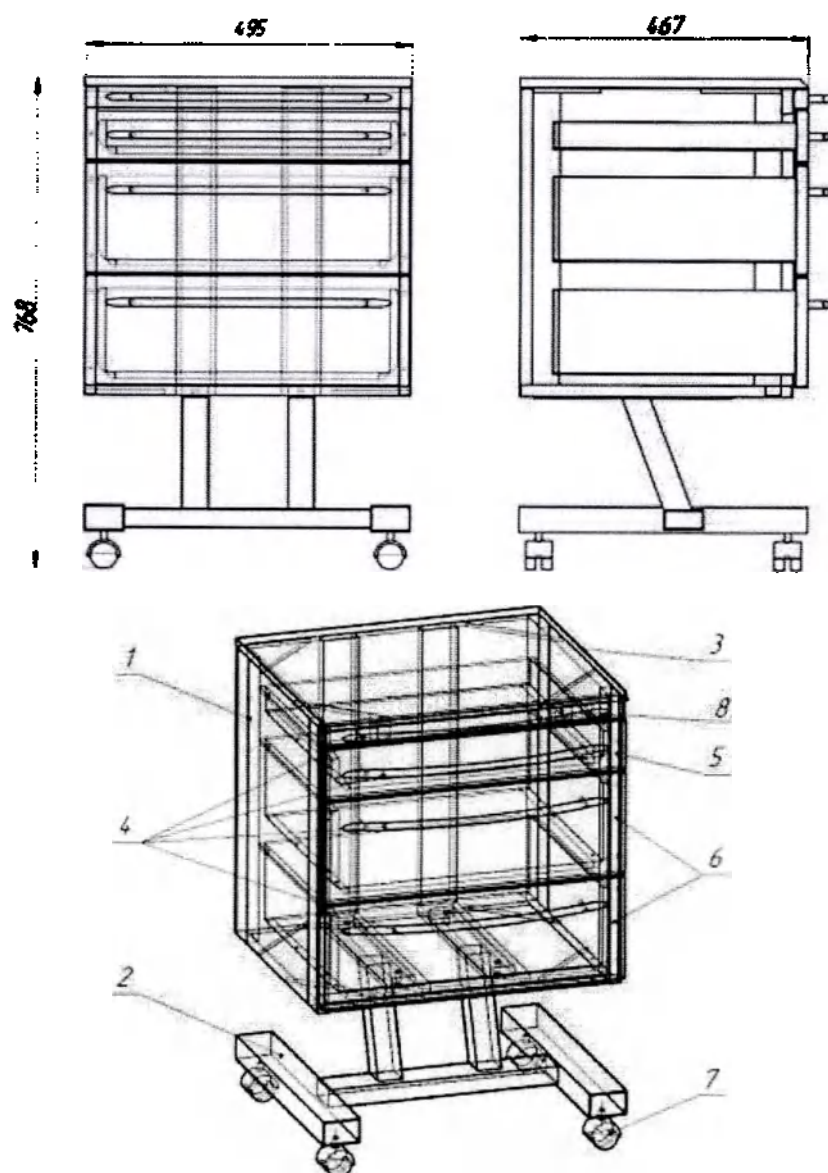


Рисунок Б.3 – конструкция и внешний вид «Стол АС-013»

| Позиция | Наименование          | Кол-во |
|---------|-----------------------|--------|
| 1       | Каркас                | 1      |
| 2       | Нога                  | 1      |
| 3       | Рабочая поверхность   | 1      |
| 4       | Ручка                 | 4      |
| 5       | Ящик мелкий           | 1      |
| 6       | Ящик средний          | 2      |
| 7       | Колеса                | 4      |
| 8       | Декоративная накладка | 1      |

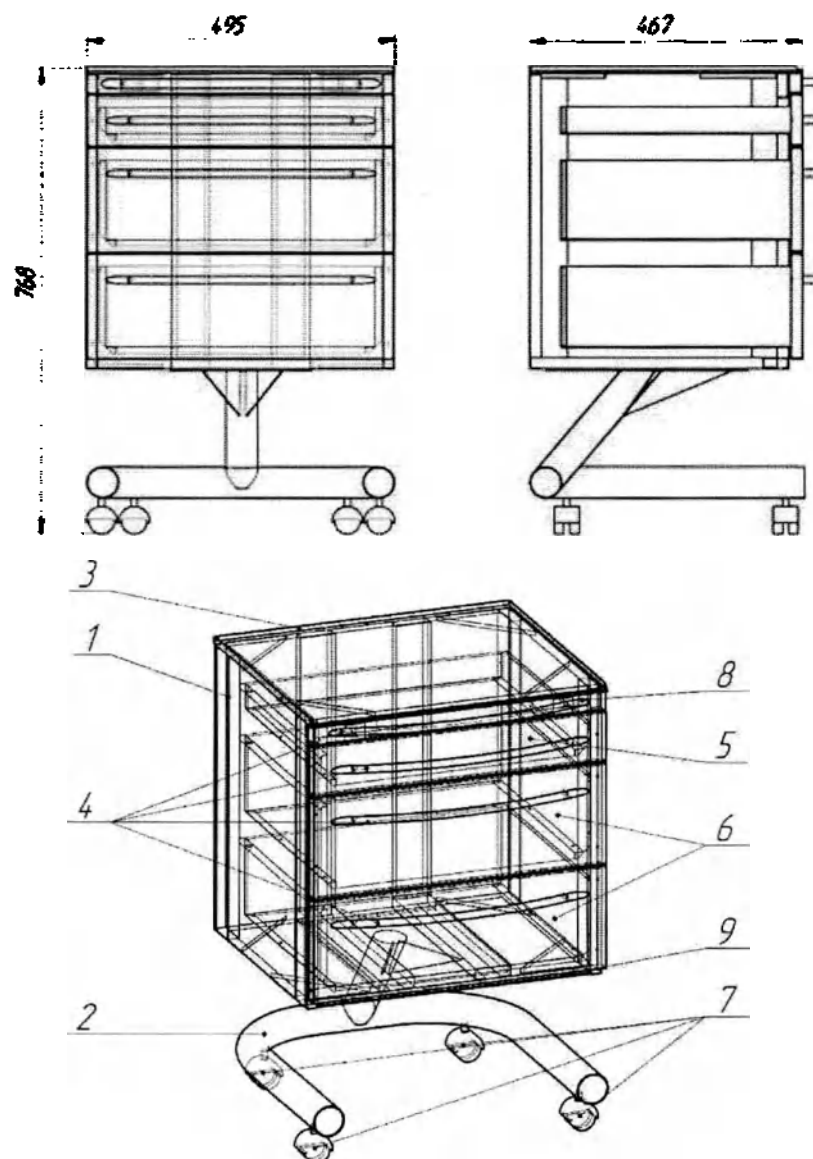


Рисунок Б.4 – конструкция и внешний вид «Стол АК-013»

| Позиция | Наименование            | Кол-во |
|---------|-------------------------|--------|
| 1       | Каркас                  | 1      |
| 2       | Нога                    | 1      |
| 3       | Рабочая поверхность     | 1      |
| 4       | Ручка                   | 4      |
| 5       | Ящик мелкий             | 1      |
| 6       | Ящик средний            | 2      |
| 7       | Колесо                  | 4      |
| 8       | Декор. накладка верхняя | 1      |
| 9       | Декор. накладка нижняя  | 1      |

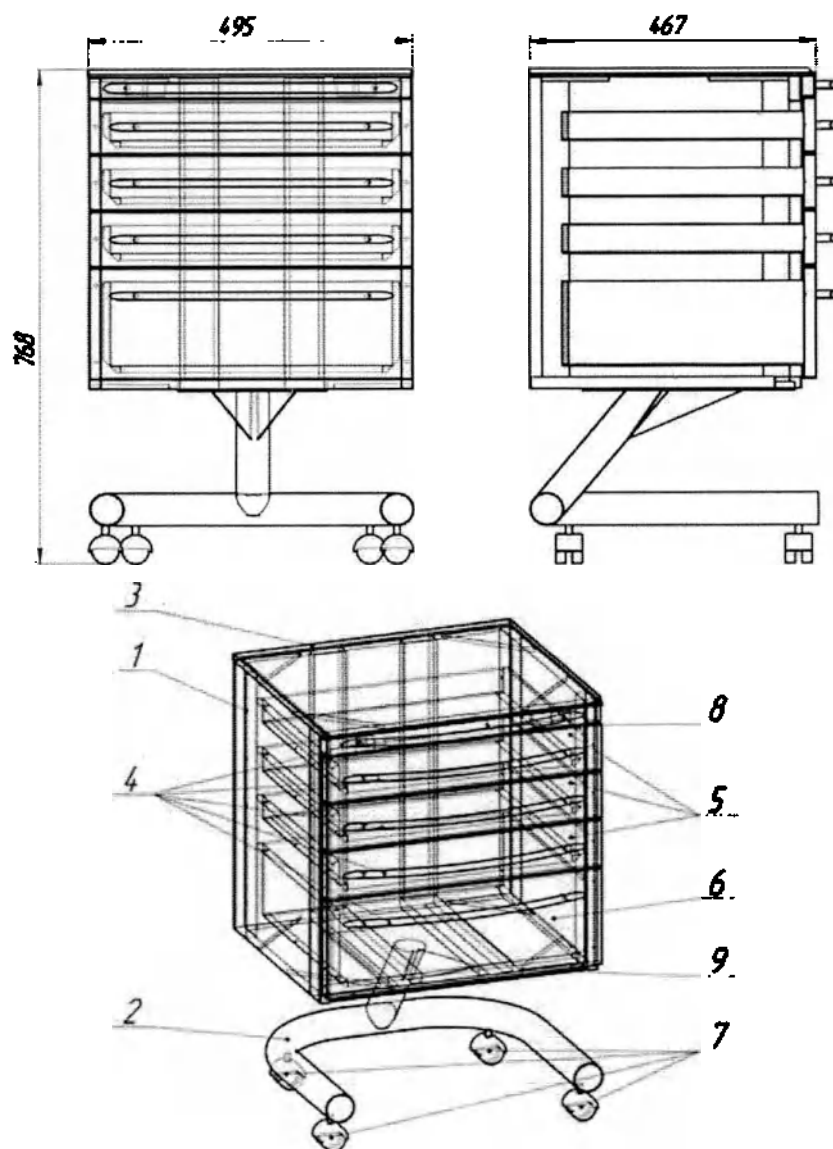


Рисунок Б.5 – конструкция и внешний вид «Стол АК-014»

| Позиция | Наименование            | Кол-во |
|---------|-------------------------|--------|
| 1       | Каркас                  | 1      |
| 2       | Нога                    | 1      |
| 3       | Рабочая поверхность     | 1      |
| 4       | Ручка                   | 5      |
| 5       | Ящик маленький          | 3      |
| 6       | Ящик средний            | 1      |
| 7       | Колесо                  | 4      |
| 8       | Декор. накладка верхняя | 1      |
| 9       | Декор. накладка нижняя  | 1      |

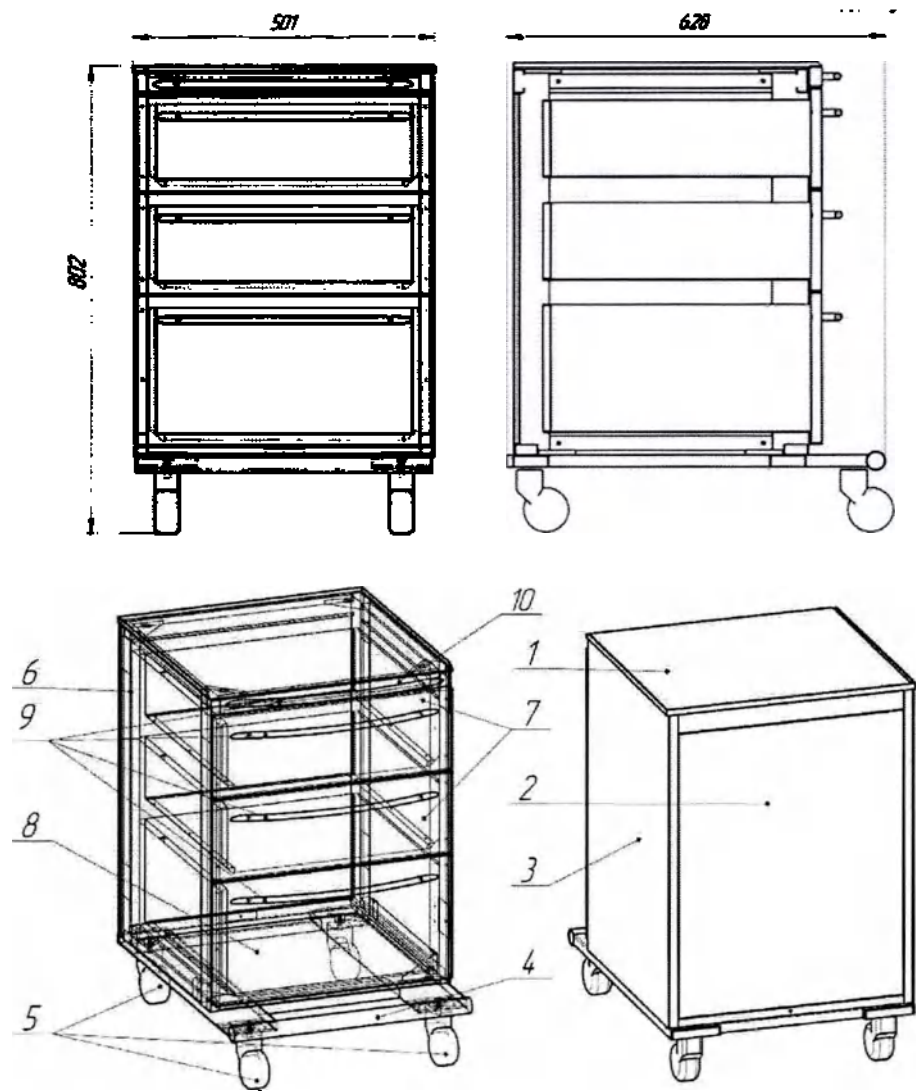


Рисунок Б.6 – конструкция и внешний вид «Стол АК-13»

| Позиция | Наименование          | Кол-во |
|---------|-----------------------|--------|
| 1       | Рабочая поверхность   | 1      |
| 2       | Задняя стенка         | 1      |
| 3       | Боковины              | 2      |
| 4       | Подставка             | 1      |
| 5       | Колеса                | 4      |
| 6       | Каркас                | 1      |
| 7       | Ящик средний          | 2      |
| 8       | Ящик большой          | 1      |
| 9       | Ручки                 | 4      |
| 10      | Декоративная накладка | 1      |

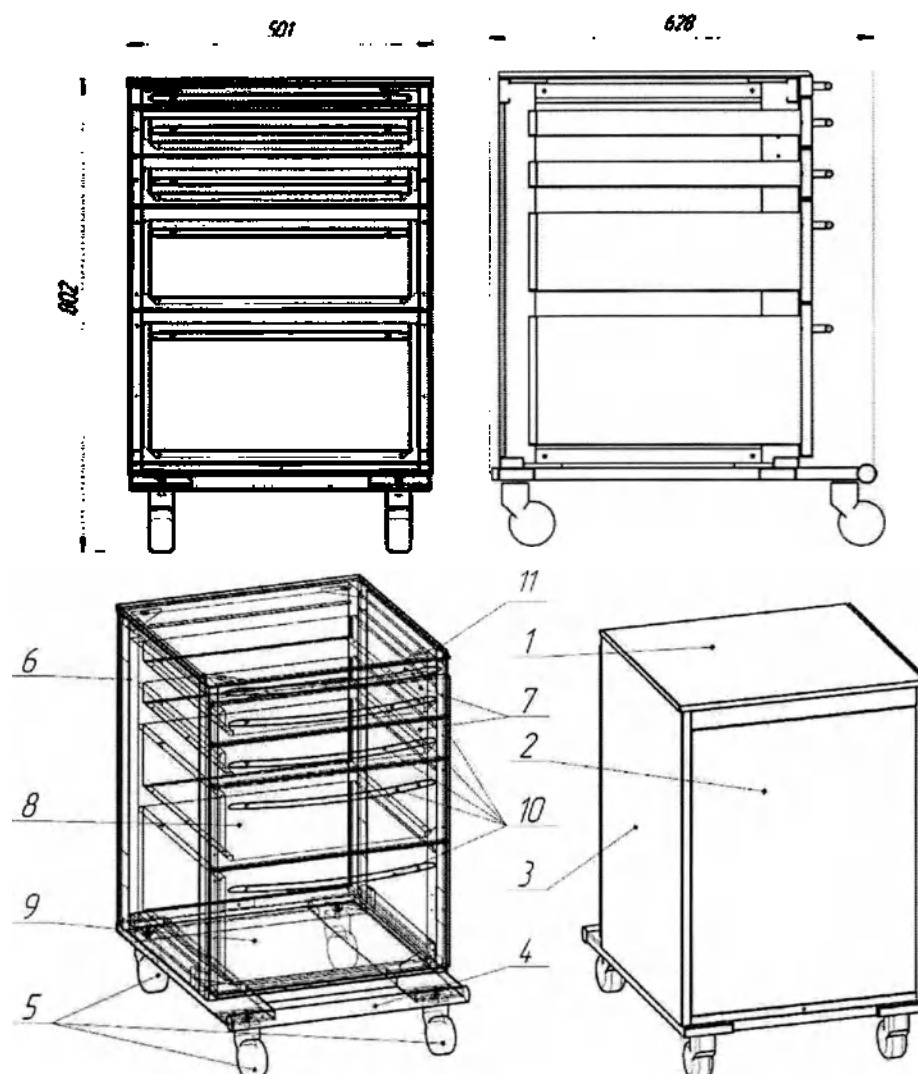


Рисунок Б.7 – конструкция и внешний вид «Стол АК-14»

| Позиция | Наименование          | Кол-во |
|---------|-----------------------|--------|
| 1       | Рабочая поверхность   | 1      |
| 2       | Задняя стенка         | 1      |
| 3       | Боковина              | 2      |
| 4       | Подставка             | 1      |
| 5       | Колеса                | 4      |
| 6       | Каркас                | 1      |
| 7       | Ящик малый            | 2      |
| 8       | Ящик средний          | 1      |
| 9       | Ящик большой          | 1      |
| 10      | Ручка                 | 5      |
| 11      | Декоративная наклейка | 1      |

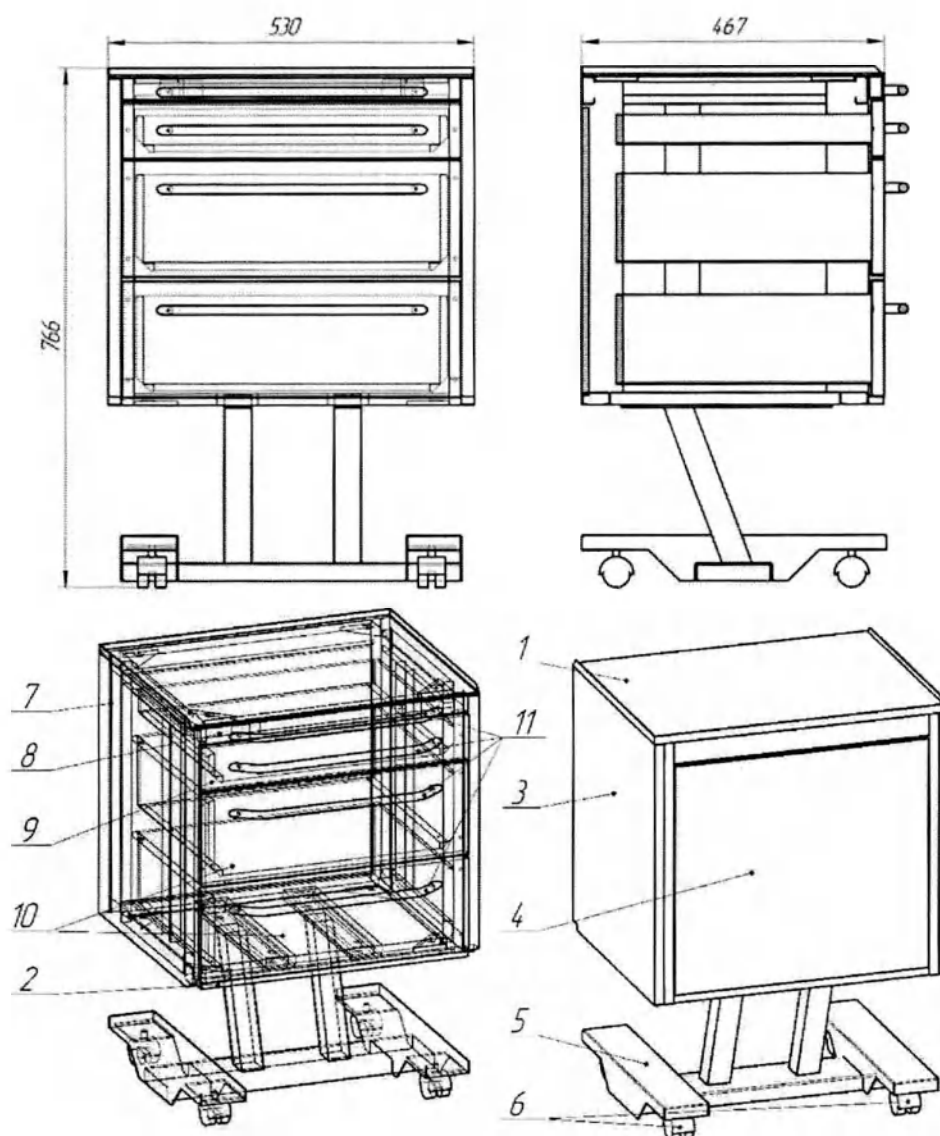


Рисунок Б.8 – конструкция и внешний вид «Стол АП-013»

| Позиция | Наименование                  | Кол-во |
|---------|-------------------------------|--------|
| 1       | Рабочая поверхность           | 1      |
| 2       | Декоративная накладка нижняя  | 1      |
| 3       | Боковина                      | 2      |
| 4       | Задняя стенка                 | 1      |
| 5       | Нога                          | 1      |
| 6       | Колесо                        | 4      |
| 7       | Каркас                        | 1      |
| 8       | Декоративная накладка верхняя | 1      |
| 9       | Ящик мелкий                   | 1      |
| 10      | Ящик средний                  | 2      |
| 11      | Ручка                         | 4      |

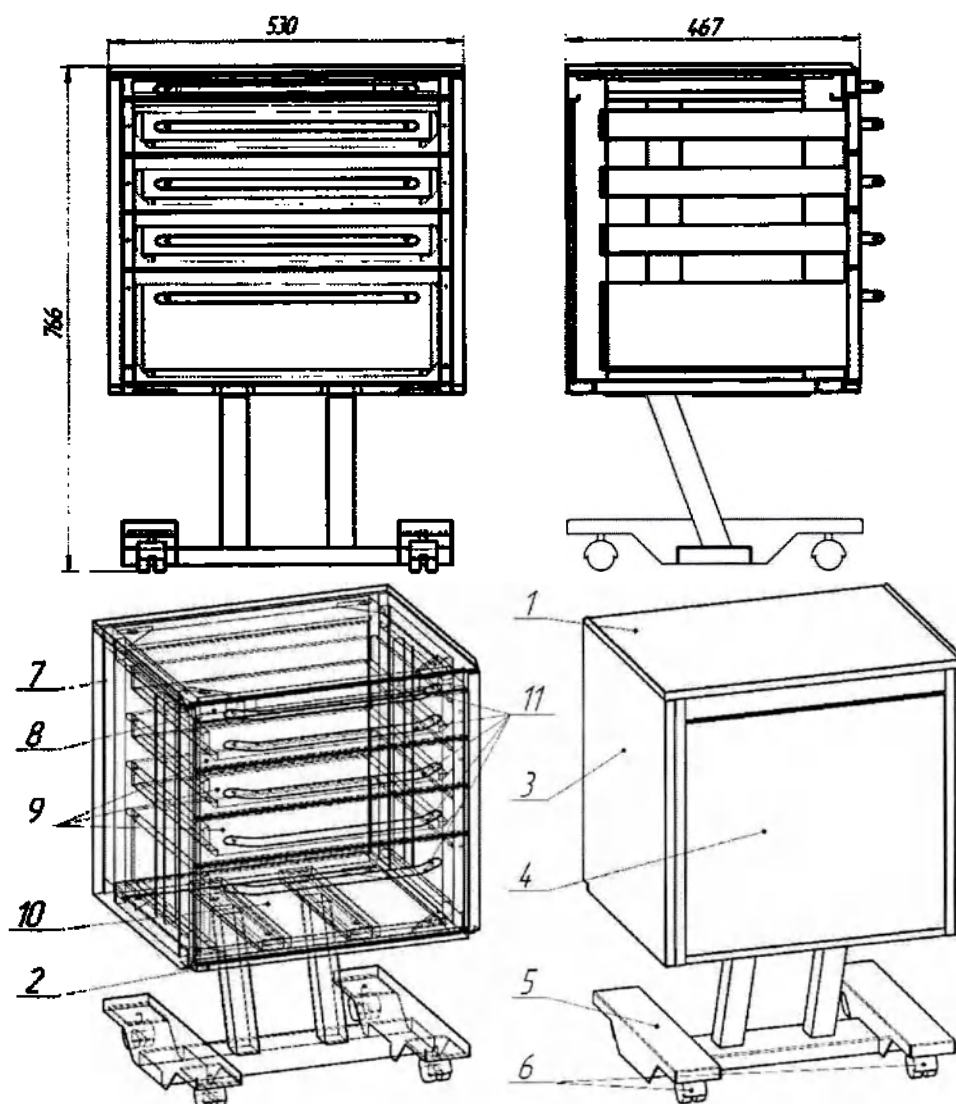


Рисунок Б.9 – конструкция и внешний вид «Стол АП-014»

| Позиция | Наименование                  | Кол-во |
|---------|-------------------------------|--------|
| 1       | Рабочая поверхность           | 1      |
| 2       | Декоративная накладка нижняя  | 1      |
| 3       | Наружная боковина             | 2      |
| 4       | Задняя стенка                 | 1      |
| 5       | Нога                          | 1      |
| 6       | Колеса                        | 1      |
| 7       | Каркас                        | 1      |
| 8       | Декоративная накладка верхняя | 1      |
| 9       | Ящик мелкий                   | 3      |
| 10      | Ящик средний                  | 1      |
| 11      | Ручка                         | 5      |

|                                                                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>ООО «АБ Мед»<br/>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br/>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25</p> | <p>Документ: АШМП.324155.007 РЭ<br/>Версия: 1.2<br/>Страница: 47 из 64</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|


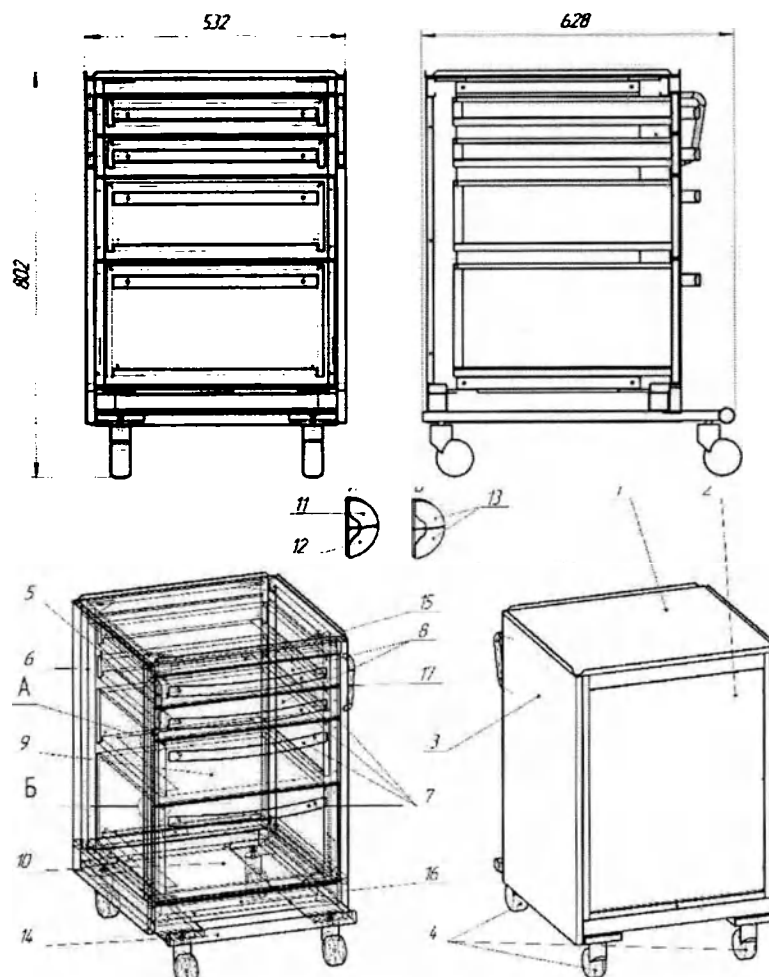


Рисунок Б.10 – конструкция и внешний вид «Стол АВ-14»

| Позиция | Наименование                  | Кол-во |
|---------|-------------------------------|--------|
| 1       | Рабочая поверхность           | 1      |
| 2       | Задняя стенка                 | 1      |
| 3       | Боковина                      | 2      |
| 4       | Колесики                      | 4      |
| 5       | Внутренняя боковина           | 2      |
| 6       | Корпус                        | 1      |
| 7       | Ручка                         | 1      |
| 8       | Ящик мелкий                   | 2      |
| 9       | Ящик средний                  | 1      |
| 10      | Ящик большой                  | 1      |
| 11      | Стекло на ящик маленькое      | 2      |
| 12      | Стекло на ящик среднее        | 1      |
| 13      | Стекло на ящик большое        | 1      |
| 14      | Подставка                     | 1      |
| 15      | Декоративная накладка верхняя | 1      |
| 16      | Декоративная накладка нижняя  | 1      |
| 17      | Ручка боковая                 | 2      |


|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 48 из 64           |

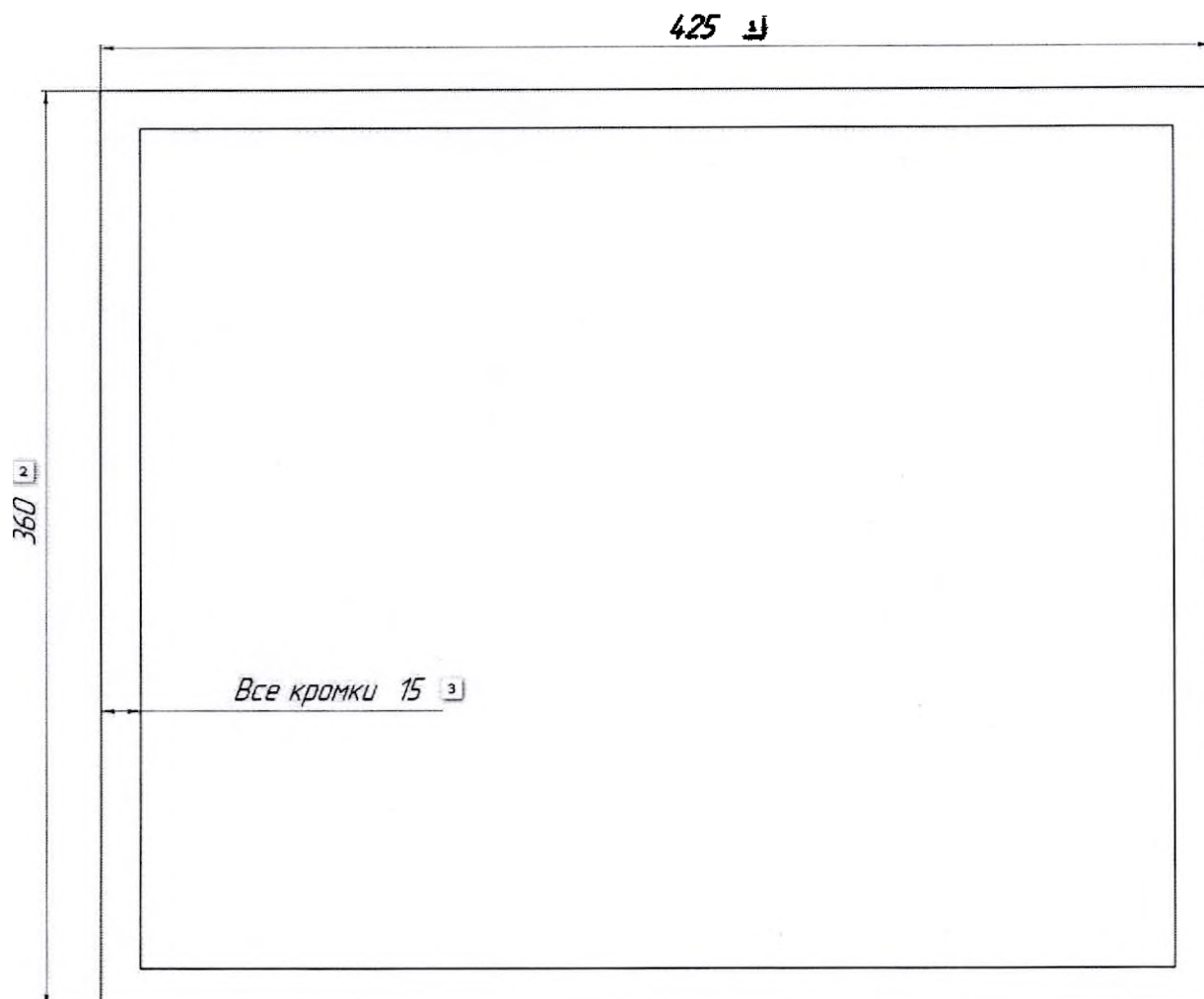

**Рисунок Б.11 – Вставка в ящик ВСМ— 011**

| Позиция | Показатель мм.,<br>±5% |
|---------|------------------------|
| 1       | 425                    |
| 2       | 360                    |
| 3       | 15                     |

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 49 из 64           |

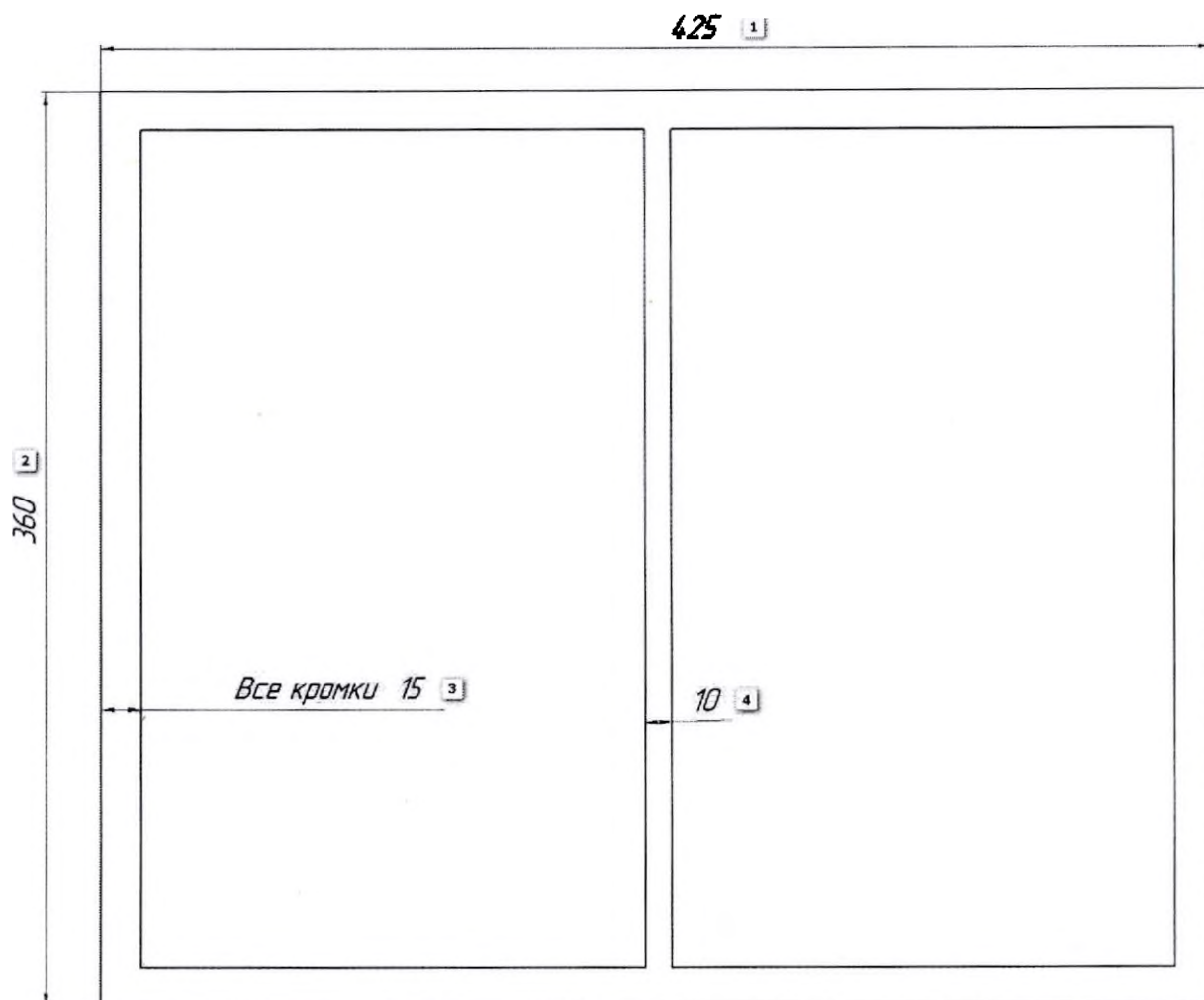

**Рисунок Б.12 -- Вставка в ящик ВСМ — 021**

| Позиция | Показатель мм.<br>±5% |
|---------|-----------------------|
| 1       | 425                   |
| 2       | 360                   |
| 3       | 15                    |
| 4       | 10                    |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 50 из 64           |

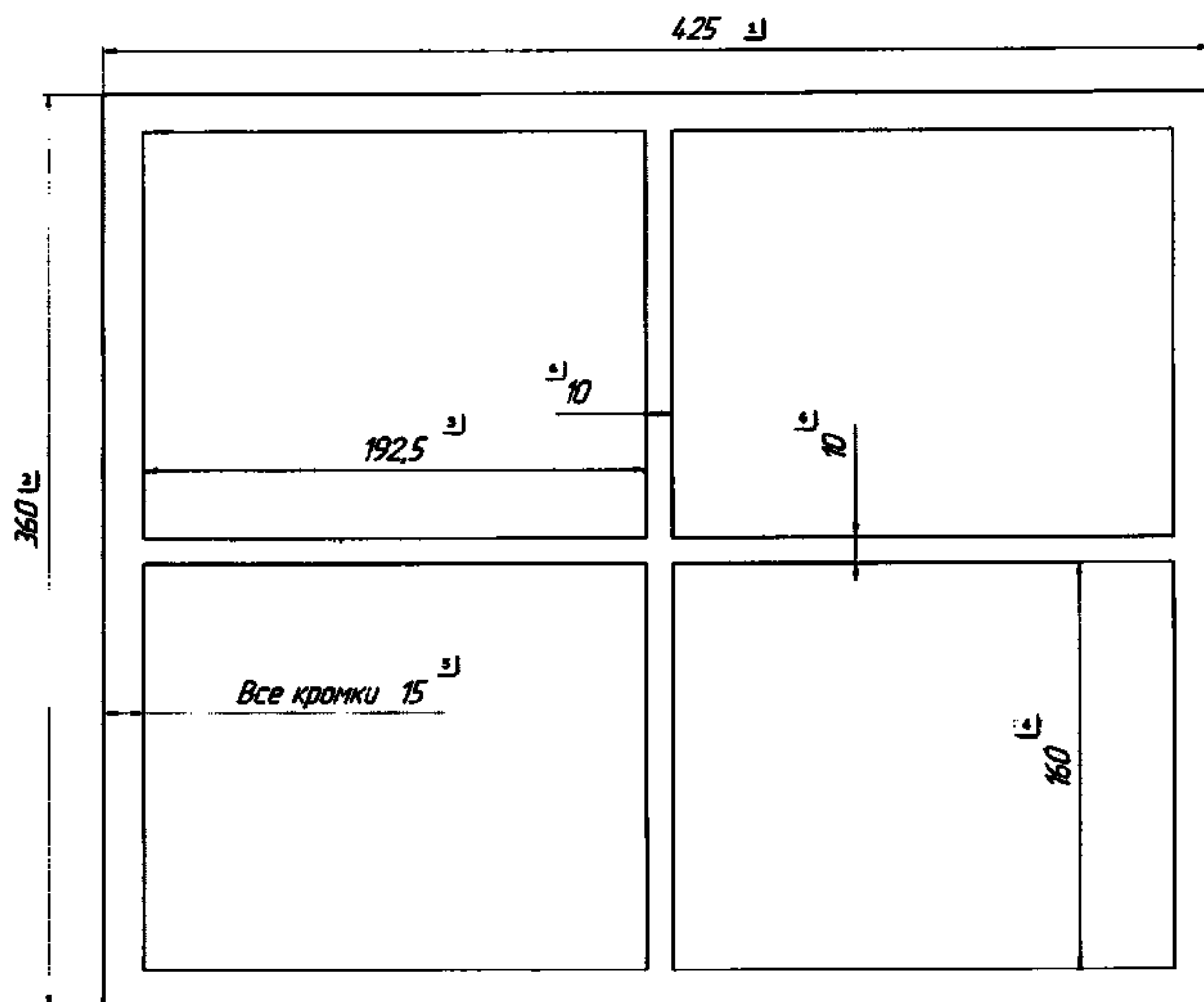


Рисунок Б.13 – Вставка в ящик ВСМ — 041

| Позиция | Пожирание мм.,<br>±5% |
|---------|-----------------------|
| 1       | 425                   |
| 2       | 360                   |
| 3       | 192,3                 |
| 4       | 160                   |
| 5       | 15                    |
| 6       | 10                    |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 51 из 64           |

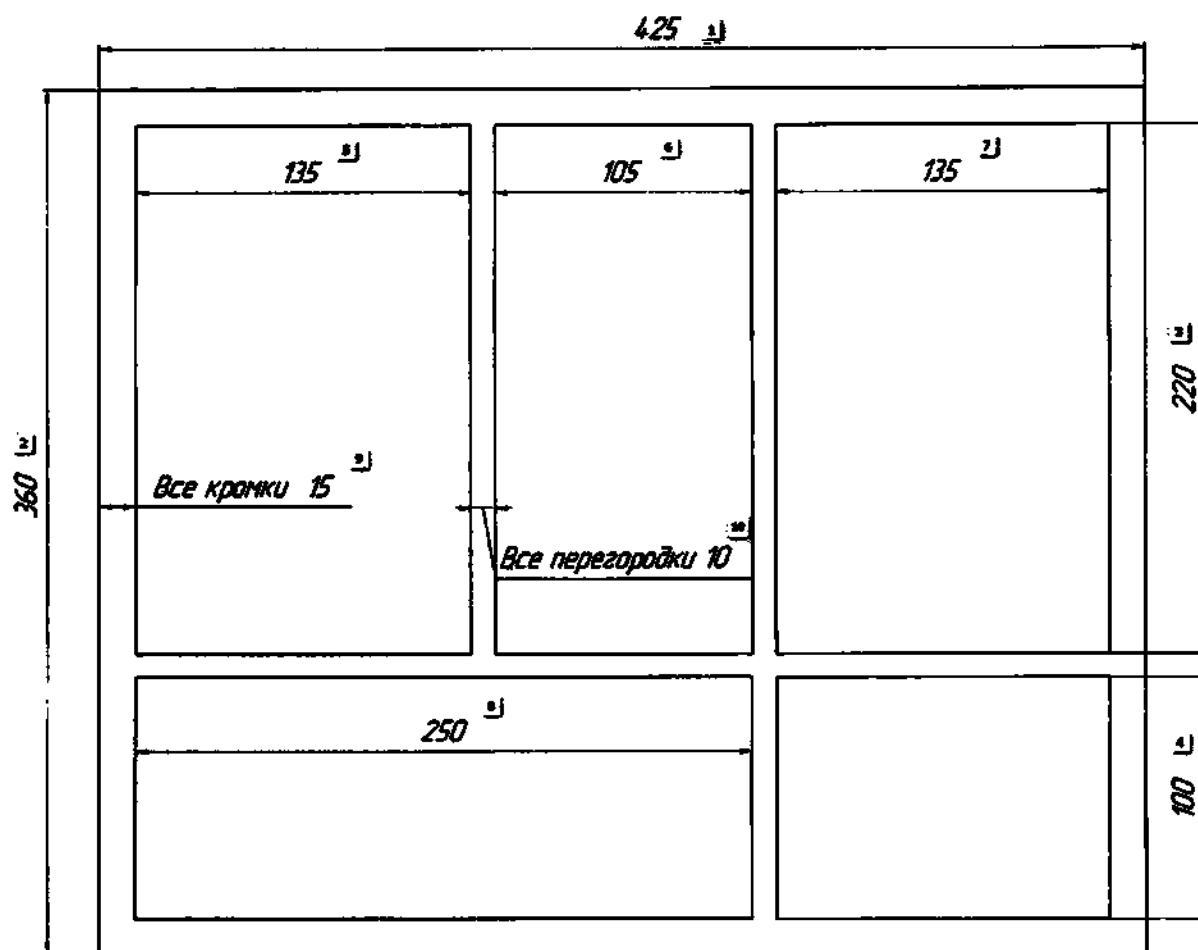


Рисунок Б.14 – Вставка в ящик ВСМ — 051

| Позиция | Положительная мм.,<br>±3% |
|---------|---------------------------|
| 1       | 425                       |
| 2       | 360                       |
| 3       | 220                       |
| 4       | 100                       |
| 5       | 135                       |
| 6       | 105                       |
| 7       | 135                       |
| 8       | 250                       |
| 9       | 15                        |
| 10      | 10                        |



ООО ЦРПМ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

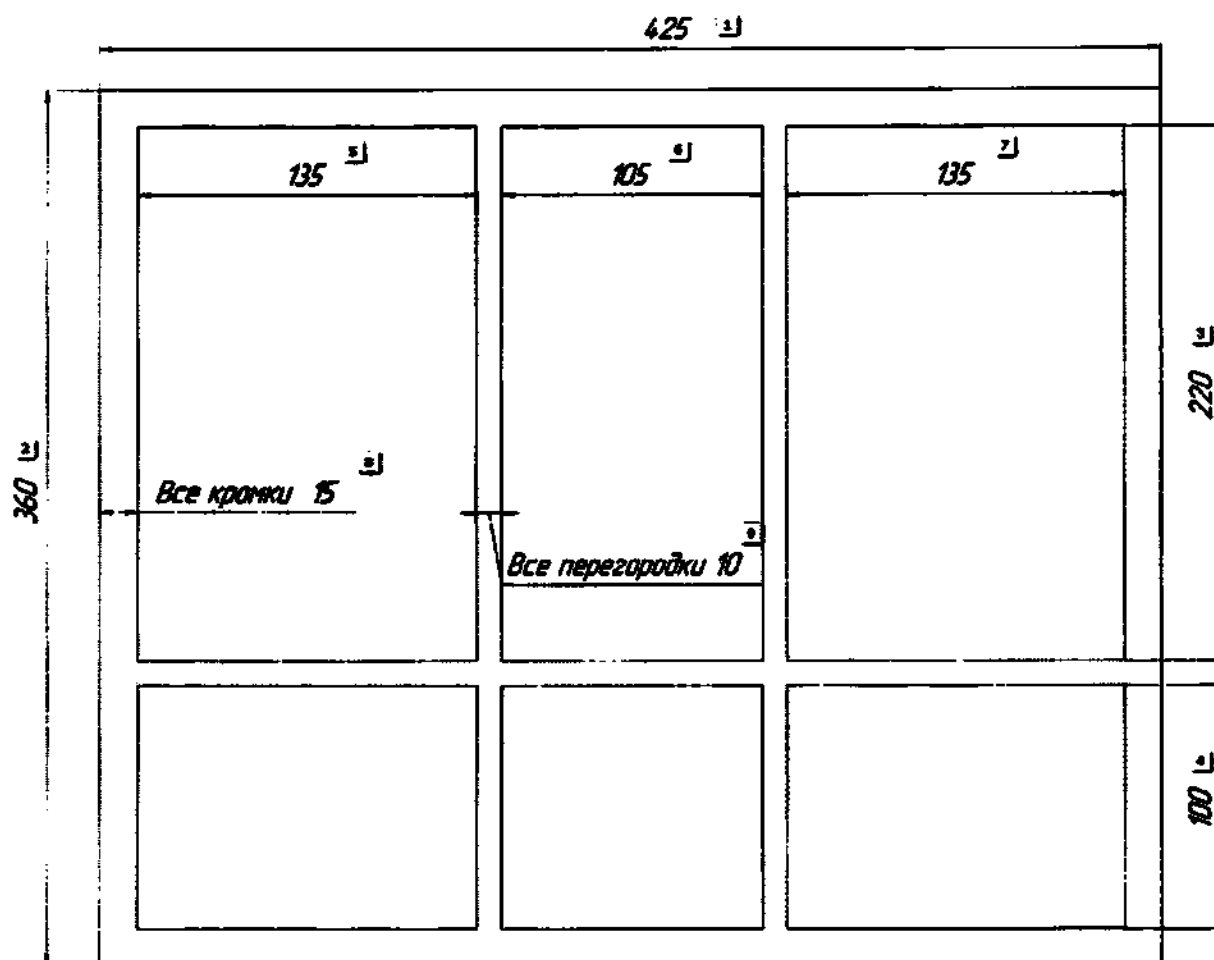


Рисунок Б.16 – Вставка в ящик ВСМ — 061

| Позиция | Показатель мм.,<br>±3% |
|---------|------------------------|
| 1       | 425                    |
| 2       | 360                    |
| 3       | 220                    |
| 4       | 100                    |
| 5       | 135                    |
| 6       | 105                    |
| 7       | 135                    |
| 8       | 15                     |
| 9       | 10                     |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 54 из 64           |

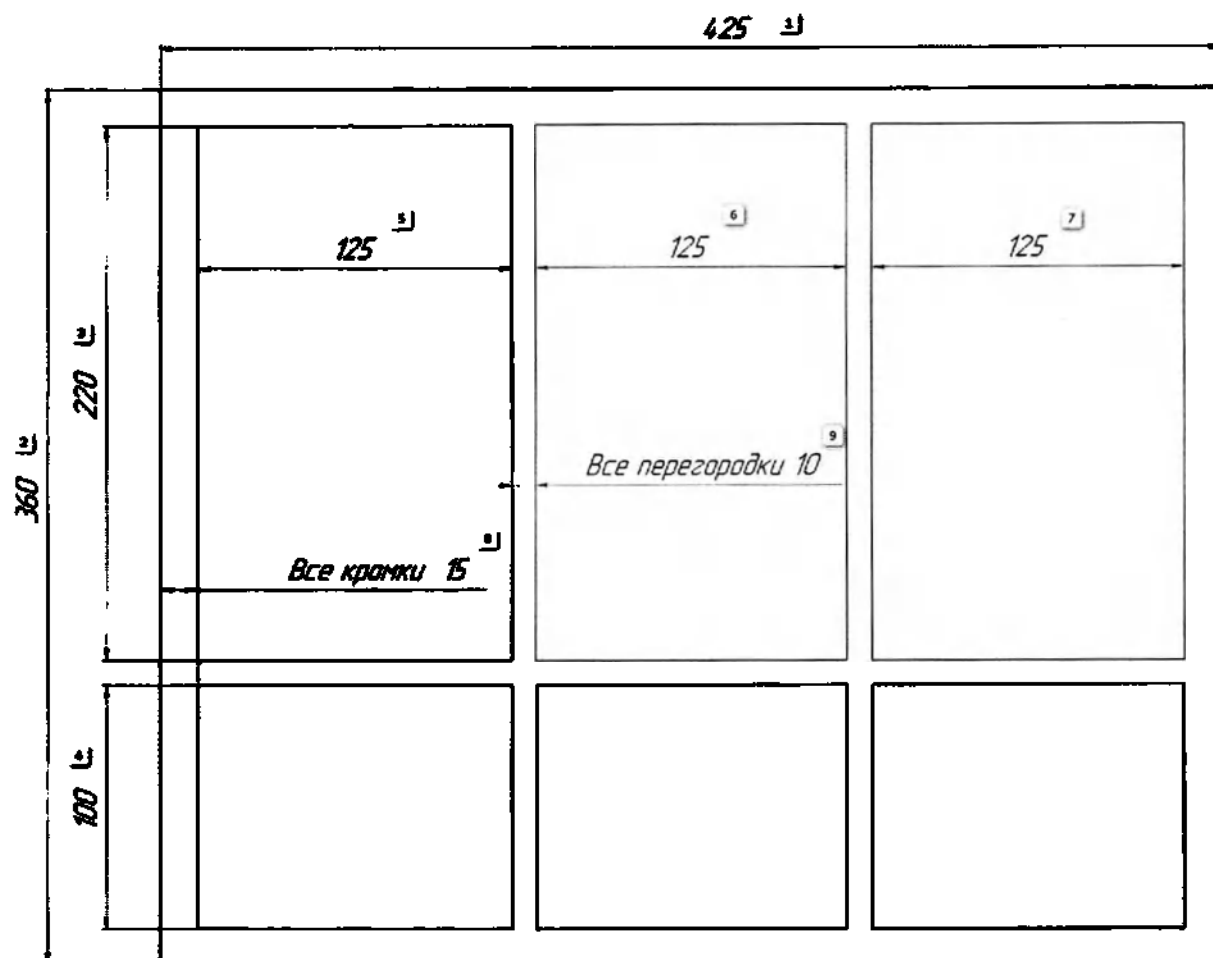


Рисунок Б.17 – Вставка в ящик ВСМ — 062

| Позиция | Положитель, мм.,<br>±5% |
|---------|-------------------------|
| 1       | 425                     |
| 2       | 360                     |
| 3       | 220                     |
| 4       | 100                     |
| 5       | 125                     |
| 6       | 125                     |
| 7       | 125                     |
| 8       | 15                      |
| 9       | 10                      |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АЦМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 55 из 64           |

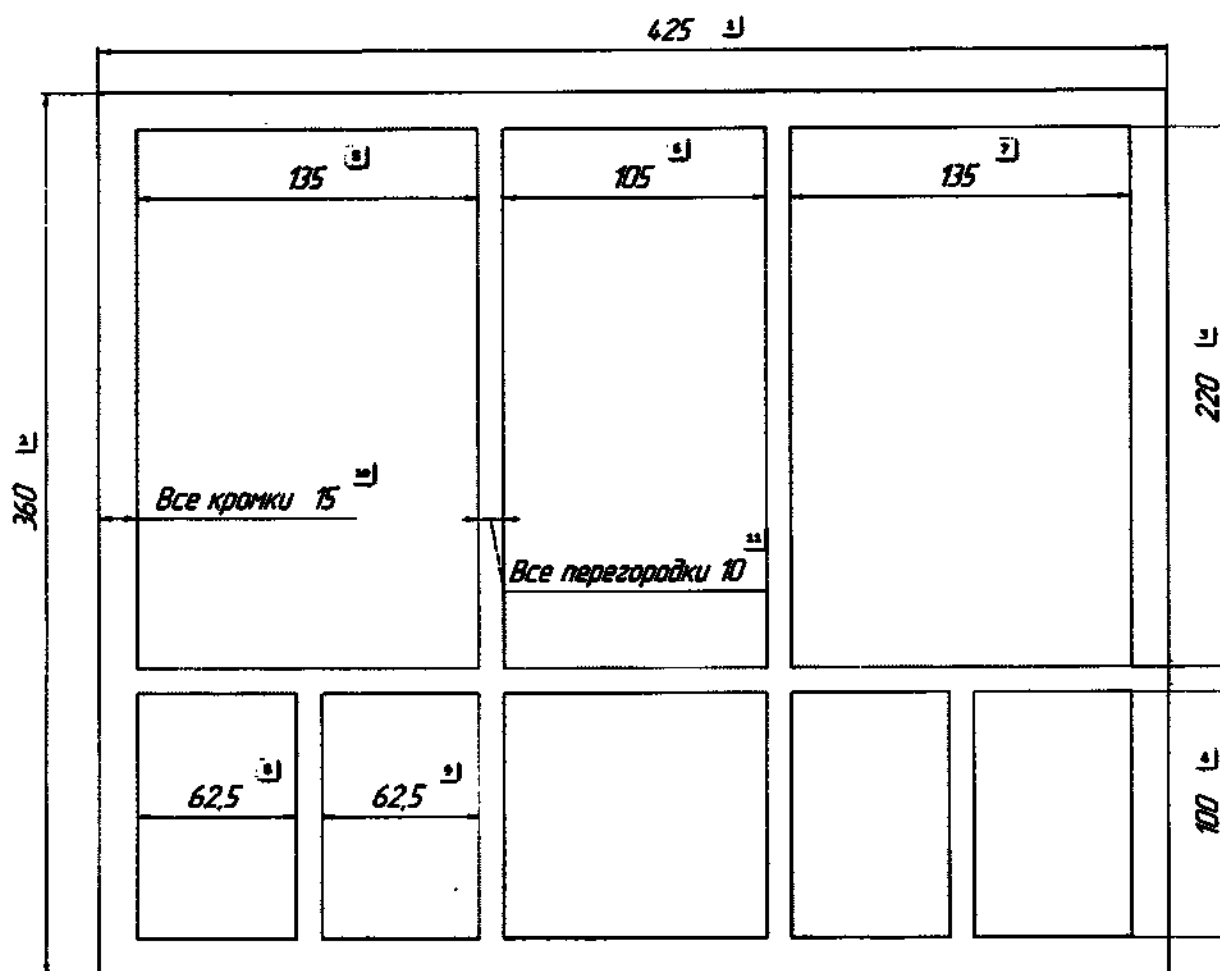


Рисунок Б.18 – Вставка в ящик ВСМ — 081

| Позиция | Позиция лог.,<br>±5% |
|---------|----------------------|
| 1       | 425                  |
| 2       | 360                  |
| 3       | 220                  |
| 4       | 100                  |
| 5       | 135                  |
| 6       | 105                  |
| 7       | 135                  |
| 8       | 62,5                 |
| 9       | 62,5                 |
| 10      | 15                   |
| 11      | 10                   |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 56 из 64           |


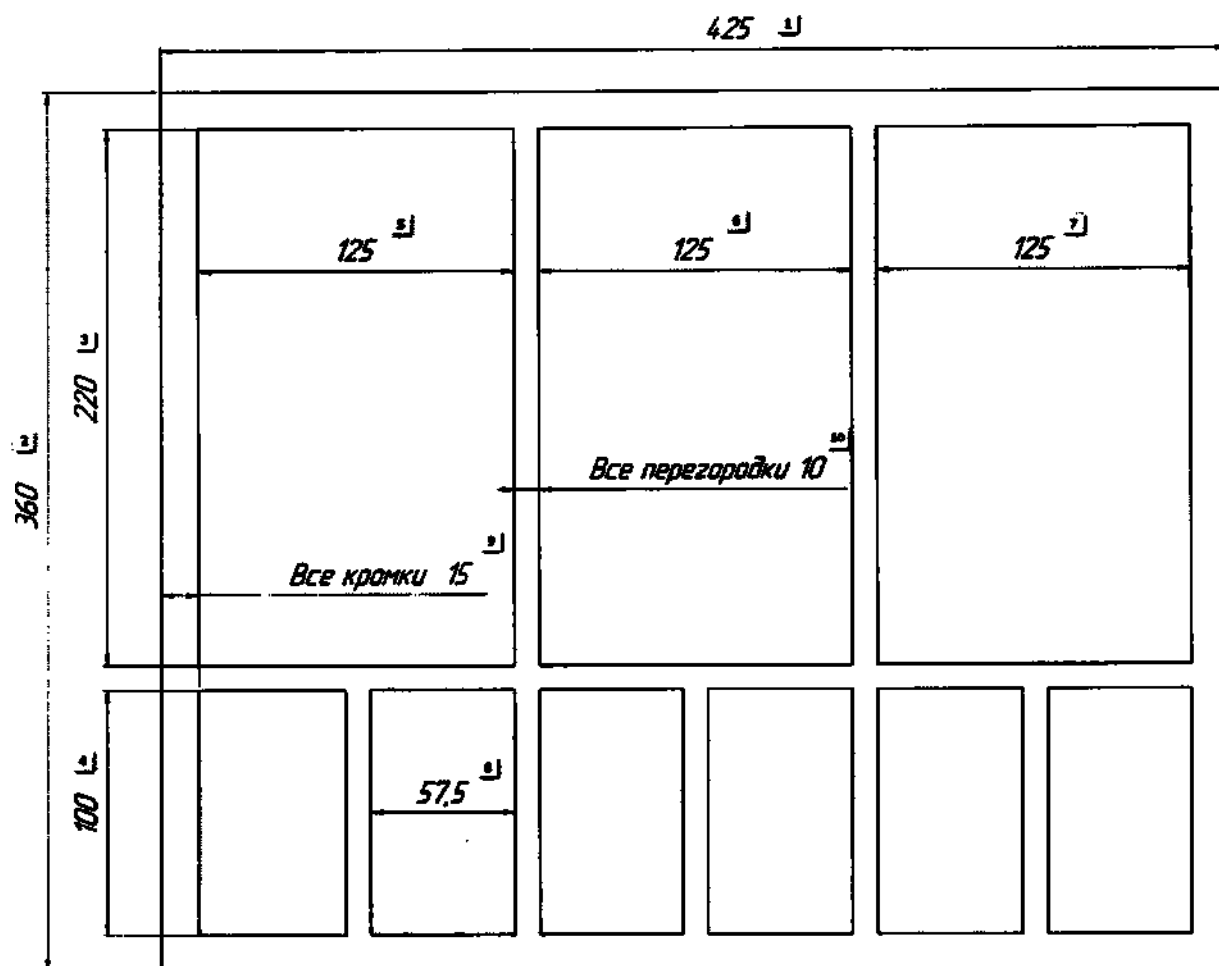


Рисунок Б.19 – Вставка в ящик ВСМ — 082

| Позиция | Показатель мм.,<br>±5% |
|---------|------------------------|
| 1       | 425                    |
| 2       | 360                    |
| 3       | 220                    |
| 4       | 100                    |
| 5       | 125                    |
| 6       | 125                    |
| 7       | 125                    |
| 8       | 57,5                   |
| 9       | 15                     |
| 10      | 10                     |

57

|                                                                                                      |                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | <b>Документ: АШМП.324155.007 РЭ</b> |                 |
|                                                                                                      | <b>Версия:</b>                      | <b>1.2</b>      |
|                                                                                                      | <b>Страница:</b>                    | <b>58 из 64</b> |

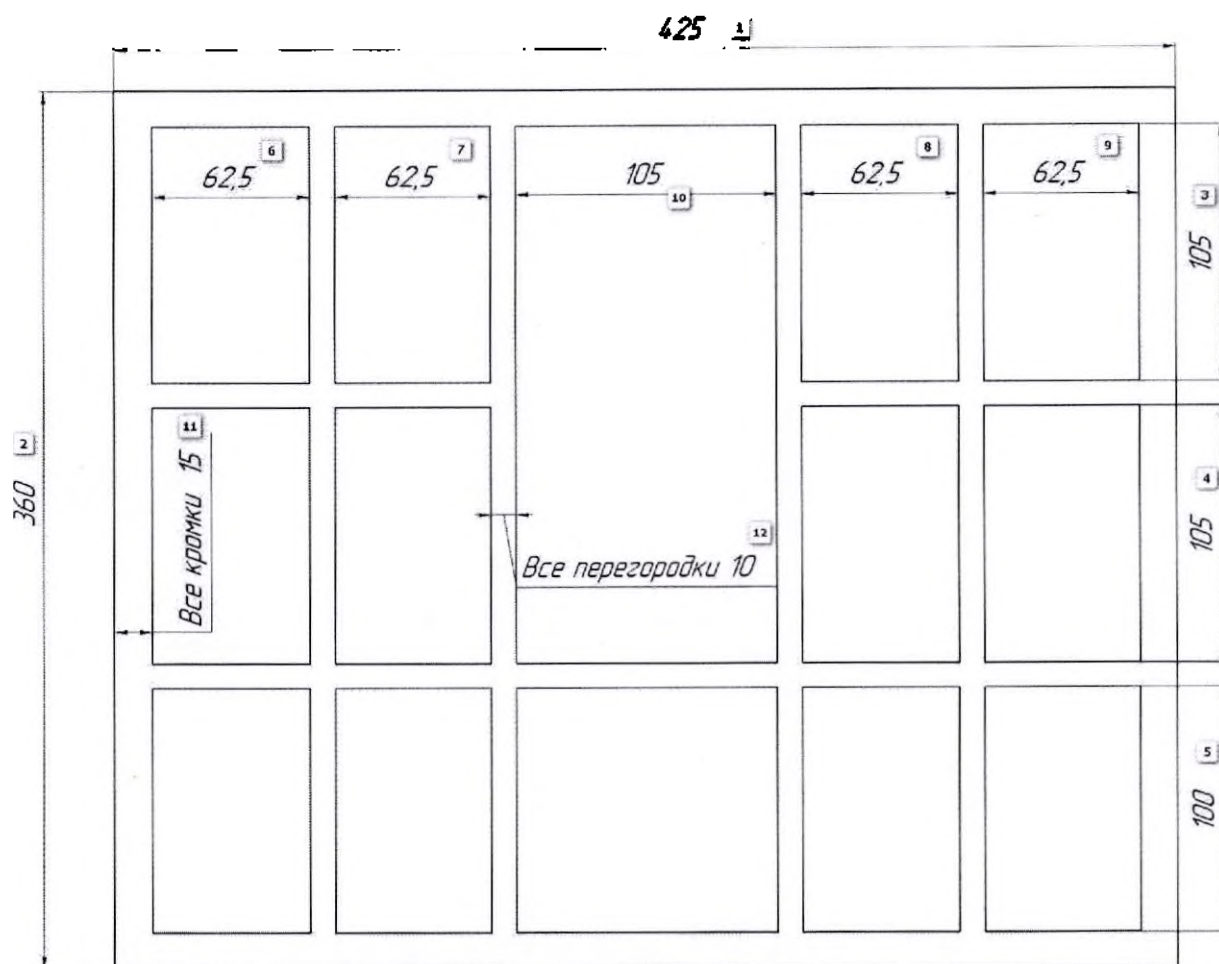

**Рисунок Б.21 – Вставка в ящик ВСМ — 141**

| <b>Позиция</b> | <b>Показатель мм.,<br/>±5%</b> |
|----------------|--------------------------------|
| 1              | 425                            |
| 2              | 360                            |
| 3              | 105                            |
| 4              | 105                            |
| 5              | 100                            |
| 6              | 62,5                           |
| 7              | 62,5                           |
| 8              | 62,5                           |
| 9              | 62,5                           |
| 10             | 105                            |
| 11             | 15                             |
| 12             | 10                             |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 59 из 64           |

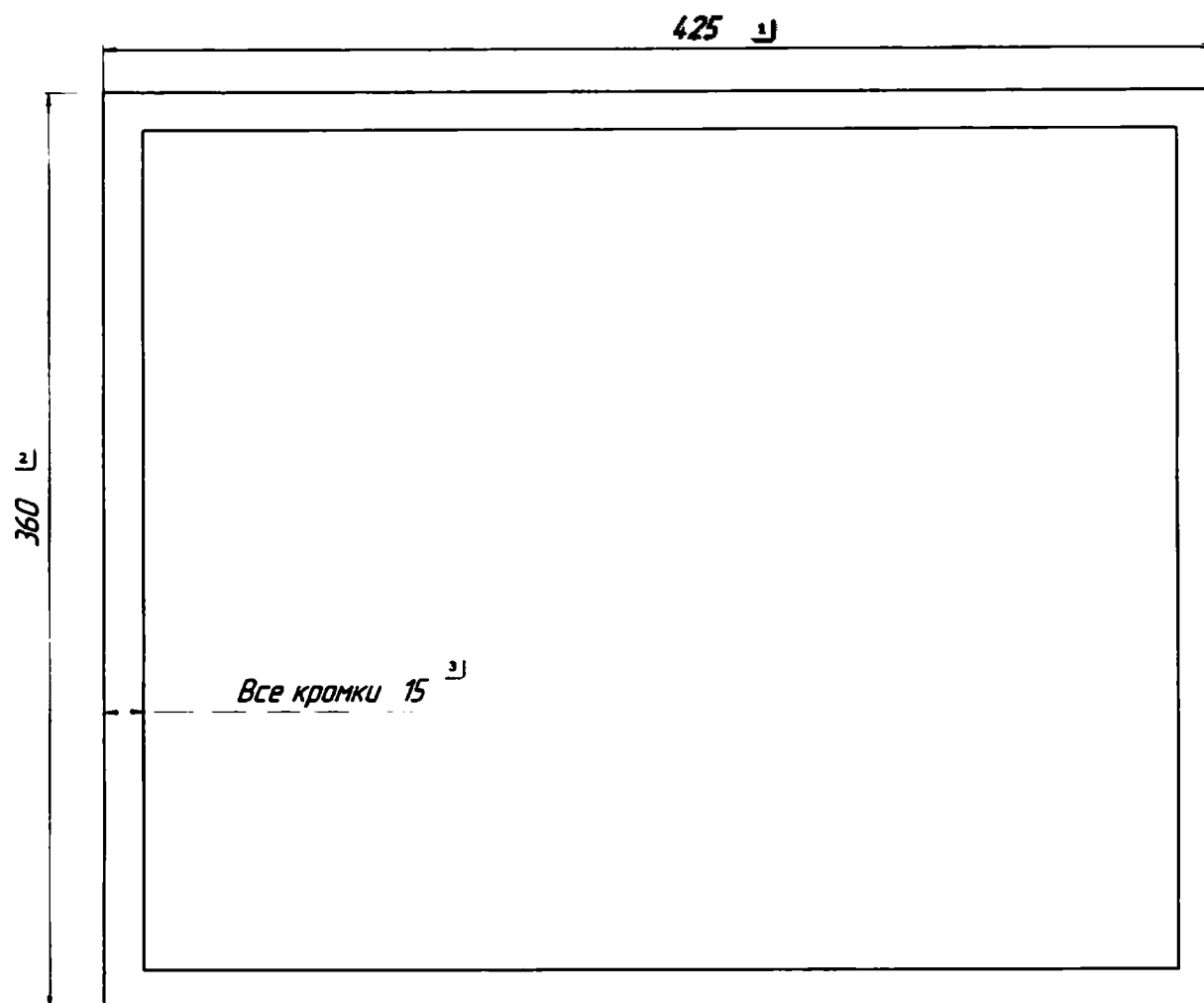


Рисунок Б.22 – Вставка в ящик ВСС — 011

| Позиция | Позиция, мм.,<br>±5% |
|---------|----------------------|
| 1       | 425                  |
| 2       | 360                  |
| 3       | 15                   |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 60 из 64           |

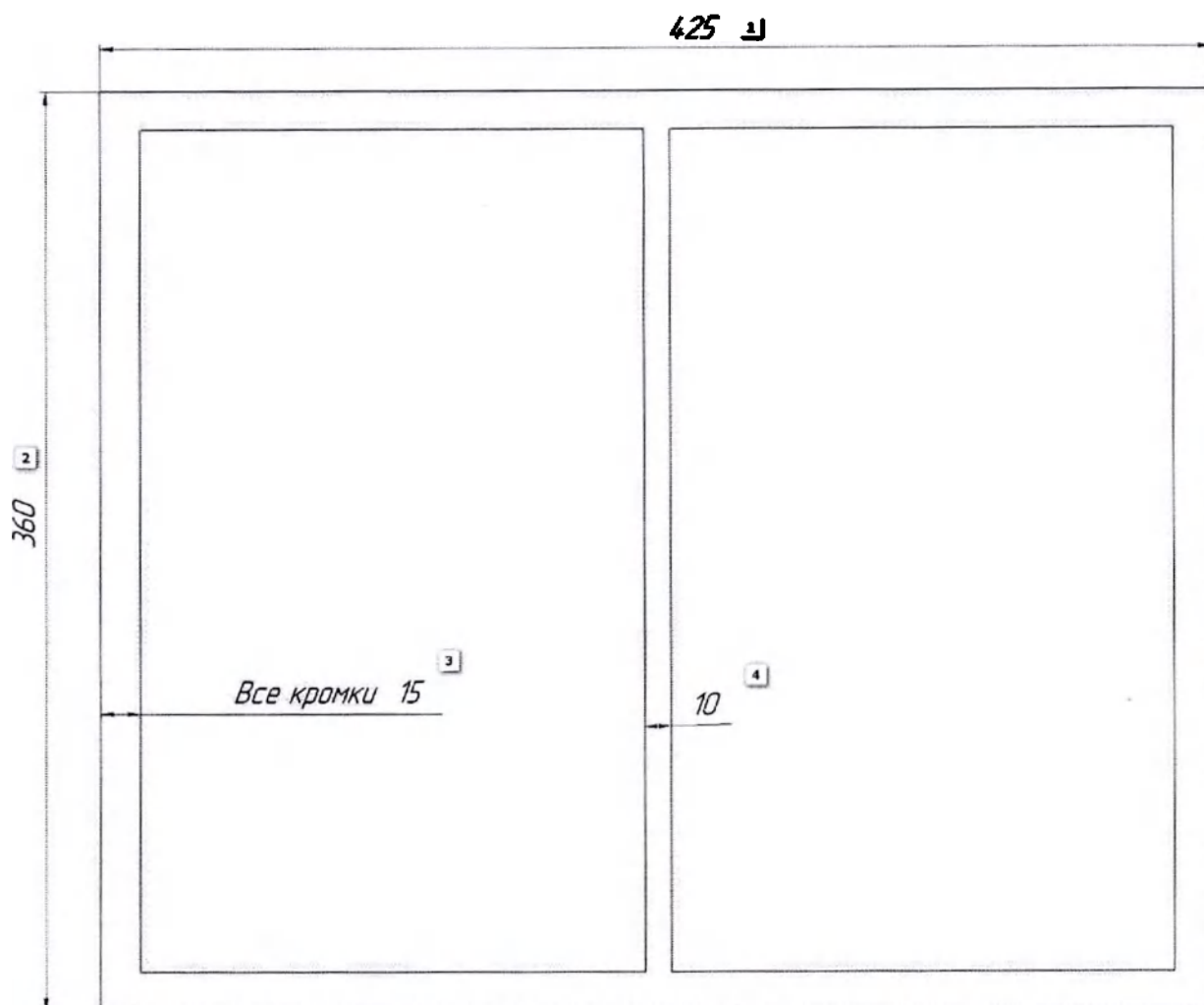


Рисунок Б.23 – Вставка в ящик ВСС — 021

| Позиция | Показатель мм. |
|---------|----------------|
| 1       | 425            |
| 2       | 360            |
| 3       | 15             |
| 4       | 10             |

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ООО «АБ Мед»</b><br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                                      | Версия: 1.2                  |
|                                                                                                      | Страница: 61 из 64           |

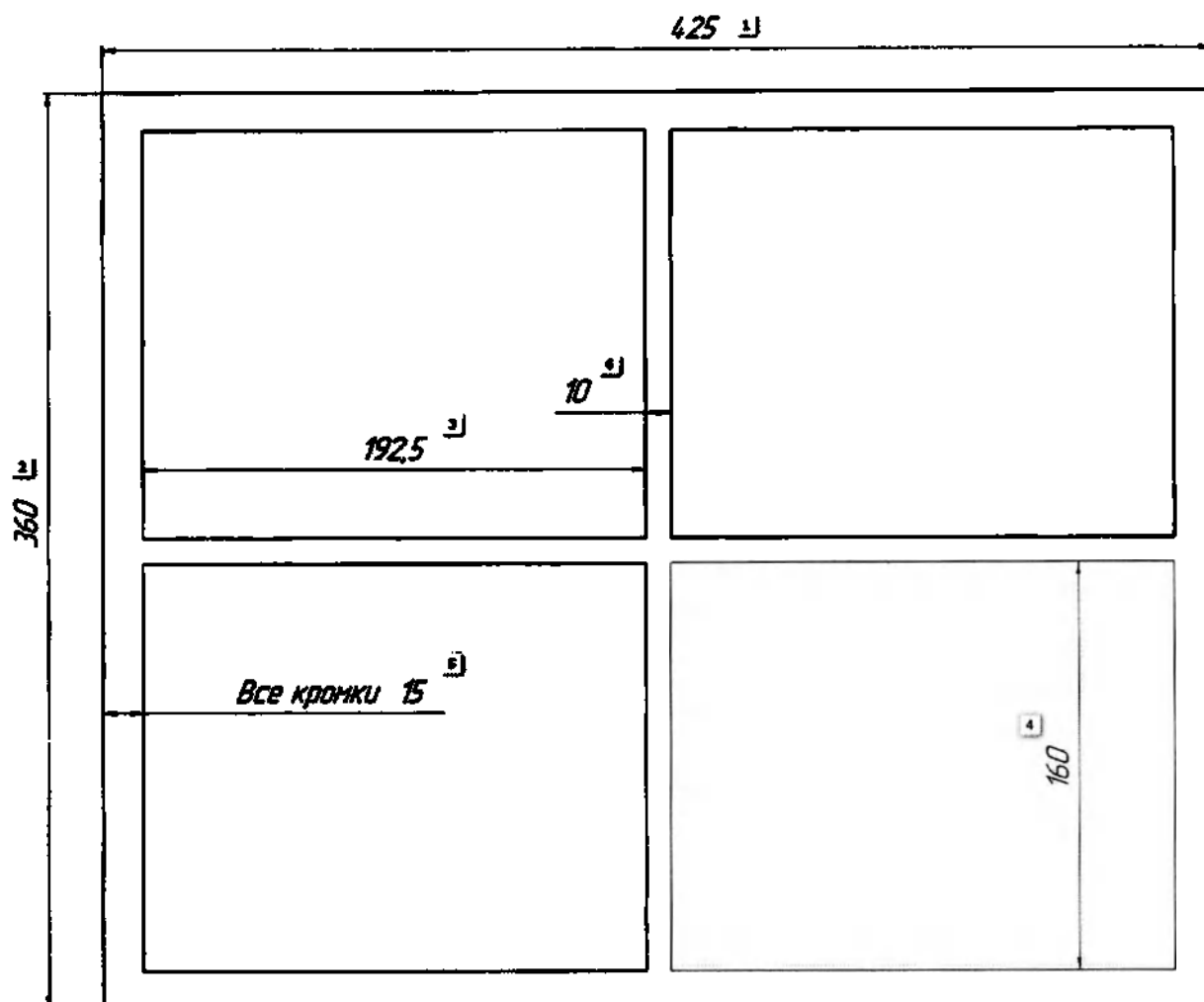


Рисунок Б.24 – Вставка в ящик ВСС — 041

| Позиция | Показатель изм.,<br>±5% |
|---------|-------------------------|
| 1       | 425                     |
| 2       | 360                     |
| 3       | 192,5                   |
| 4       | 160                     |
| 5       | 15                      |
| 6       | 10                      |

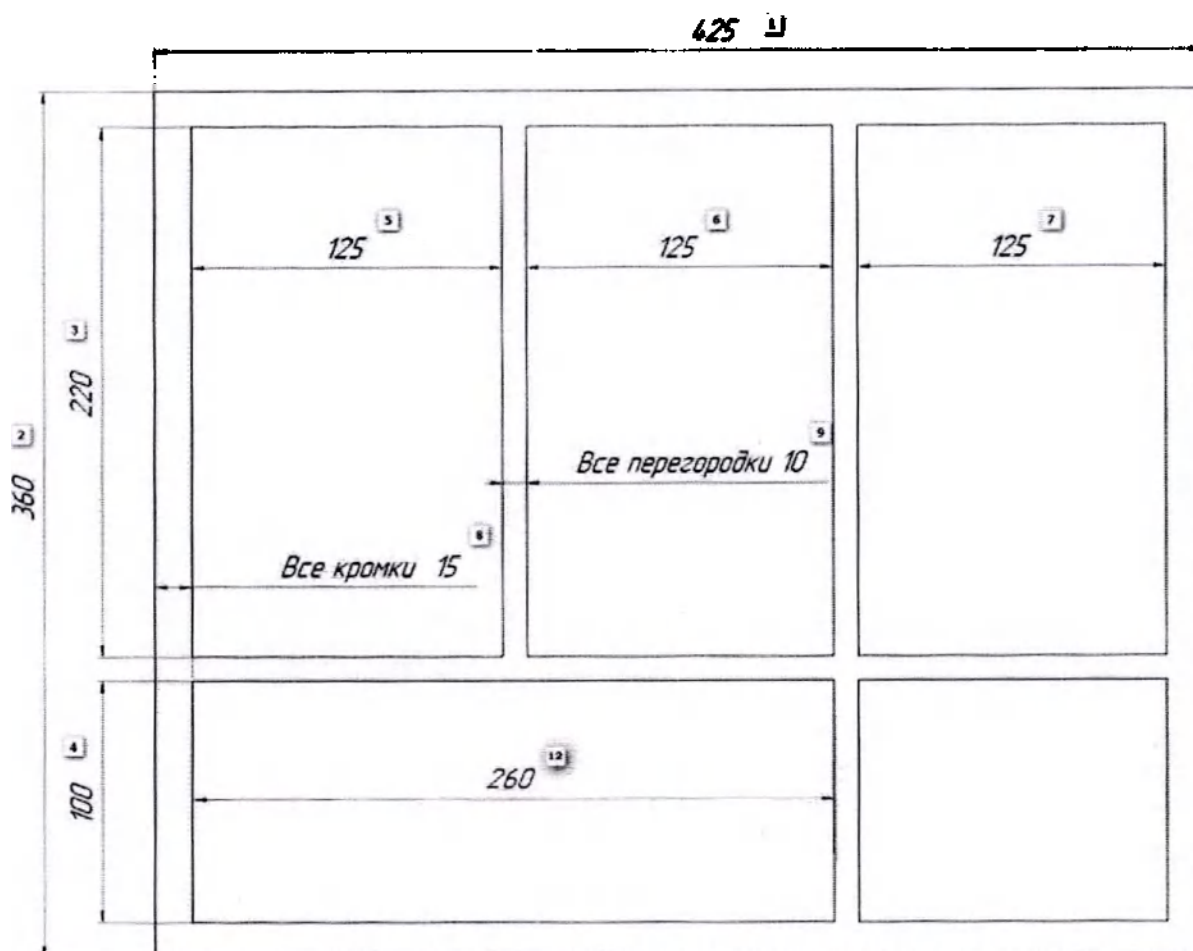


Рисунок Б.25 – Вставка в ящик ВСС — 052

| Позиция | Показатель мм.,<br>±5% |
|---------|------------------------|
| 1       | 425                    |
| 2       | 360                    |
| 3       | 220                    |
| 4       | 100                    |
| 5       | 125                    |
| 6       | 125                    |
| 7       | 125                    |
| 8       | 15                     |
| 9       | 10                     |
| 10      | 260                    |

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «АБ Мед»<br>109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30,<br>пом.106,107, тел. 8(495)255-01-25 | Документ: АШМП.324155.007 РЭ |
|                                                                                               | Версия: 1.2                  |
|                                                                                               | Страница: 63 из 64           |

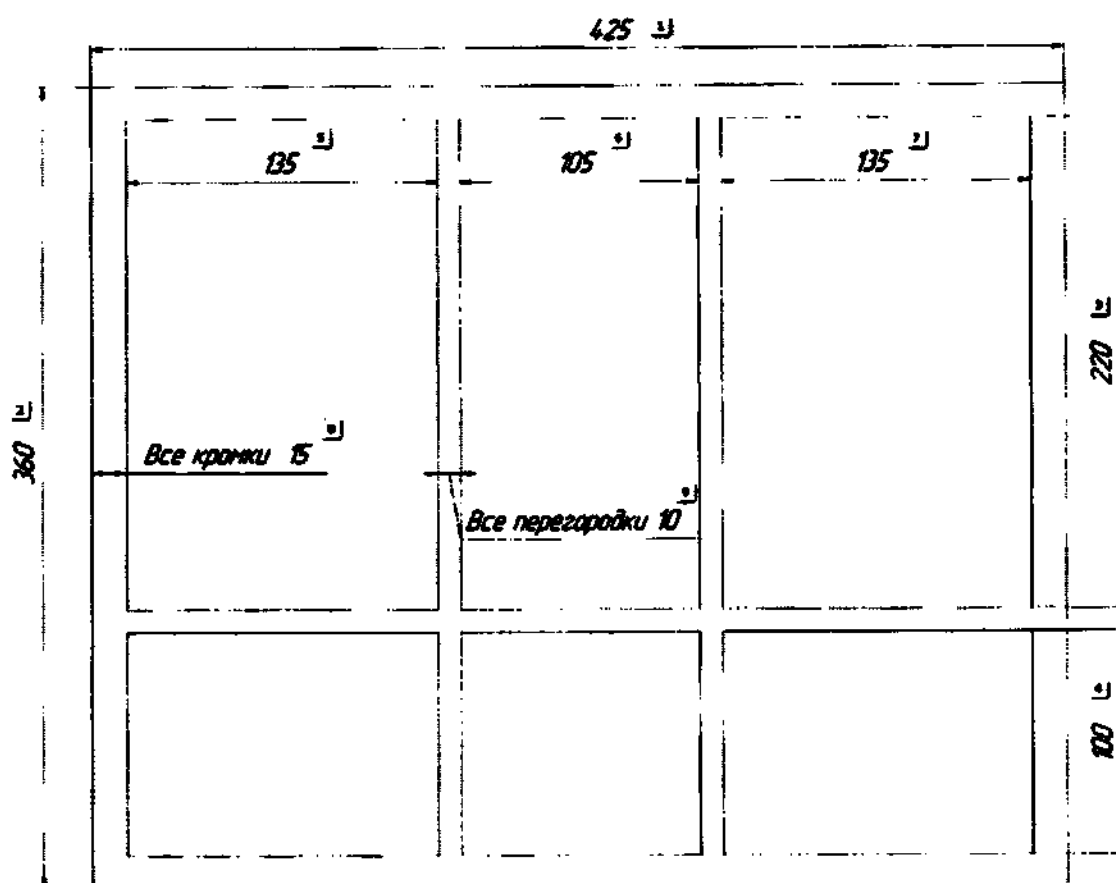


Рисунок Б.26 – Вставка в ящик ВСС — 061

| Потери | Показатель мм.,<br>±5% |
|--------|------------------------|
| 1      | 425                    |
| 2      | 360                    |
| 3      | 220                    |
| 4      | 100                    |
| 5      | 135                    |
| 6      | 105                    |
| 7      | 135                    |
| 8      | 15                     |
| 9      | 10                     |

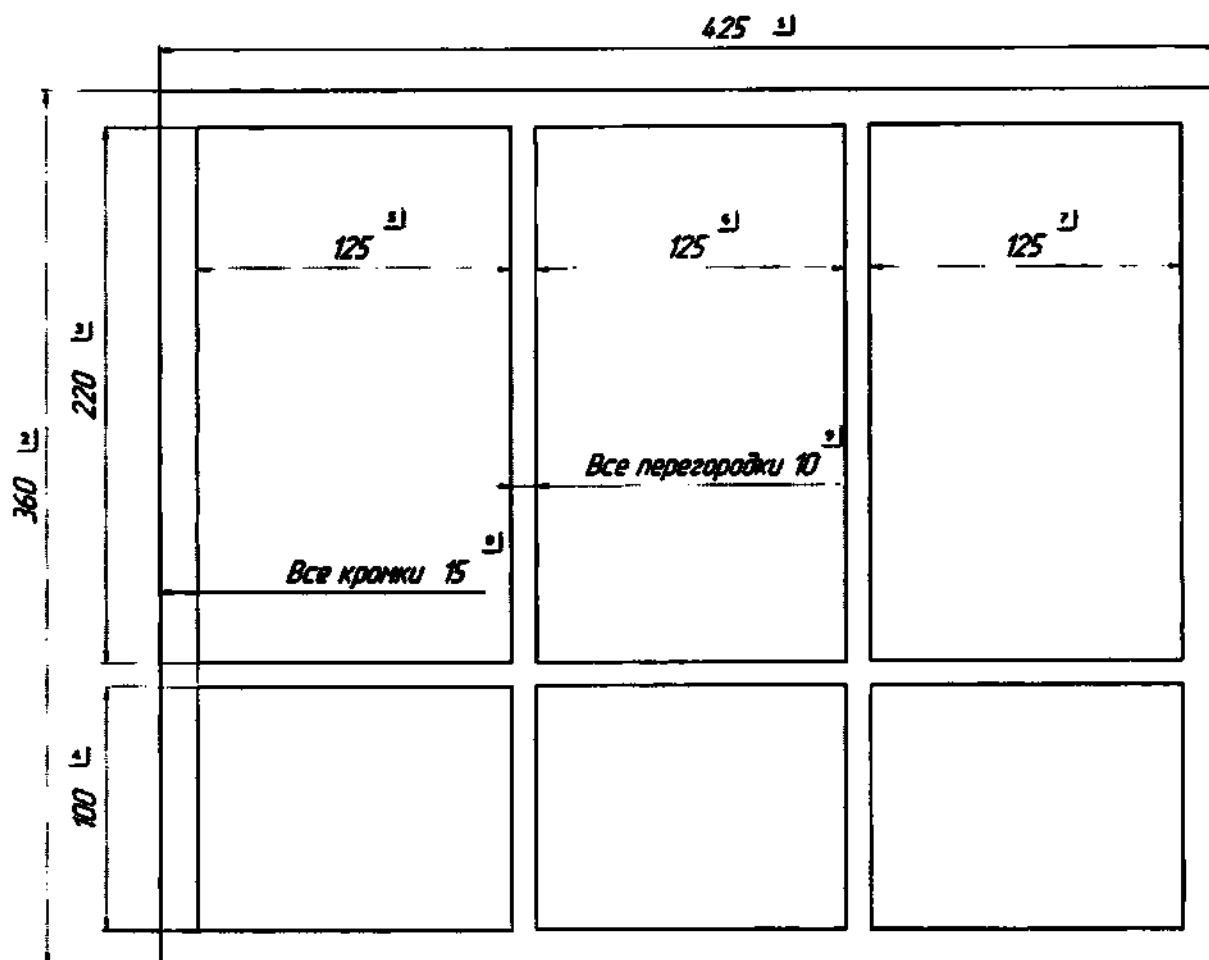


Рисунок Б.27 – Вставка в ящик ВСС — 062

| Поперек | Положительная мм.,<br>±5% |
|---------|---------------------------|
| 1       | 425                       |
| 2       | 360                       |
| 3       | 220                       |
| 4       | 100                       |
| 5       | 125                       |
| 6       | 125                       |
| 7       | 125                       |
| 8       | 15                        |
| 9       | 10                        |

прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 64 (шестидесять четыре) лист(ов)

Директор  
ООО «АБ Мед»

 Савельева И.С.

« 01 » декабря 20 22 г

