

Руководство по эксплуатации

Подъемник стационарный поворотный ПСП-075

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Подъемник стационарный поворотный ПСП-075, (далее – подъемник, рис. 1), предназначен для облегчения гигиенического ухода за инвалидами и лежачими больными массой до 140,0 кг в учреждениях социального обслуживания населения и в быту *с посторонней помощью*.

Конструкция подъемника обеспечивает подъем и опускание пользователя в пределах 200 – 1050 мм, а также его перемещение в горизонтальной плоскости в пределах 180°.

Металлоконструкция подъемника состоит из несущей стойки 1, коромысла 2 и плечиков 3 для подвески гамака 4, изготовленных из стальных труб круглого и прямоугольного сечений.

Стойка подъемника крепится к стене двумя кронштейнами 8 и 9 и имеет упор пола посредством фланца – пятки.

Изделие комплектуется эл.приводом 5 с аккумулятором-адаптером 6 и пультным пультом управления 7, позволяющим осуществлять без применения больших усилий плавное перемещение инвалида (больного) вверх и вниз, преодолевая такие препятствия, как борт ванны, бассейна и т.д.; а также перемещать его в горизонтальной плоскости в пределах 180°.

Гамак 4 изготовлен из водонепроницаемой ткани, имеет петли из стропы для подвески на плечики подъемника.

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА

При эксплуатации подъемника необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

Подготовить подъемник к эксплуатации согласно п. 5 паспорта на изделие.

Перед предполагаемым использованием подъемника подключить аккумулятор-адаптер к сети с напряжением 220V для подзарядки (время полной зарядки аккумулятора – 8 часов).

Гамак снять с плечиков подъемника и разложить его на плоскости сиденья инвалидной коляски, в которой предполагается транспортирование пользователя, например, до ванны. Усадить пользователя в коляску таким образом, чтобы паз гамака располагался под его ягодицами.

Подвезти пользователя в коляске к борту ванны (бассейна) вплотную.

Расположив коромысло подъемника над головой пользователя, произвести подвешивание гамака на плечики способом согласно рис. 2.

Нажатием кнопки на пульте начинают *подъем* инвалида в гамаке с инвалидного кресла на необходимую для преодоления борта ванны высоту, одновременно рукой поворачивая коромысло в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы гамак с инвалидом располагался непосредственно над ванной.

Директор



Е. Я. Никифоров

жатию кнопки на пульте начинают **подъем** инвалида в гамаке с инвалидного
если на необходимую для преодоления борта ванны высоту, одновременно
кой поворачивая коромысло в горизонтальной плоскости таким образом,
обы гамак с инвалидом расположился непосредственно над ванной.
лее нажатием кнопки на пульте **опускают** пользователя в гамаке
ванну с водой.

сле этого необходимо снять петли крепления гамака с плечиков
ъемника, разместив их по своему усмотрению на бортах ванны или
посредственно в воде. Гамак изготовлен из водонепроницаемой
ни и позволяет эксплуатацию в воде.

сле помывки воду из ванны сливают, больного и гамак (по возможности)
тирают, затем петли гамака подвешивают на плечики подъемника, и нажатием
опки на пульте производят подъем больного из ванны и пересадку его на
есло-коляску вместе с гамаком. После чего гамак высвобождается из-под
залида любым приемлемым способом.

сле гигиенической процедуры коромысло подъемника необходимо повернуть
ону отстоя параллельно стене.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

тку и дезинфекцию подъемника производить только после его отключения от
и.

таллоконструкцию подъемника необходимо с периодичностью 1 раз в месяц
цвергать дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%
итрального моющего средства, либо 1% раствором хлорамина ХБ.

как подъемника после каждого применения необходимо промывать теплым
льным раствором и, **не отжимая**, сушить, расположив на плечиках
ъемника или на веревке.

и условии соблюдения правил эксплуатации **гарантийный срок** службы
ъемника стационарного поворотного **ПСП-075** составляет 1 год со дня
дачи потребителю.

остоятельный ремонт и разборка подъемника **запрещены!**

Рис. 1

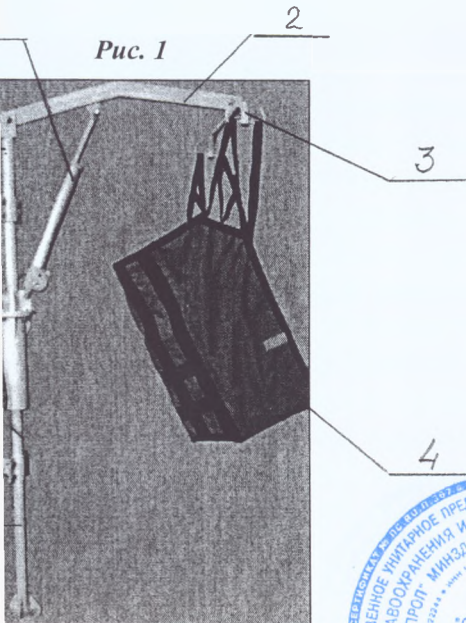


Рис. 2



Директор



Е. Я. Никифоров

Руководство по эксплуатации

Подъемник передвижной ПП-076

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Подъемник передвижной ПП-076, (далее – подъемник, рис. 1), предназначен для облегчения гигиенического ухода за инвалидами и лежачими больными массой до 125,0 кг в учреждениях социального обслуживания населения и в быту с **посторонней помощью**.

Конструкция подъемника обеспечивает с помощью стороннего лица подъем и опускание пользователя в пределах **0 – 1050 мм**, перемещение в горизонтальной плоскости в пределах **90°**, а также перемещение инвалида (больного) внутри помещения, в том числе в ванной комнате, туалете, бассейне и т.д.

Металлоконструкция подъемника состоит из стойки **1**, размещенной на U-образной несущей раме **8** на 4-х самоориентирующихся колесах, два из которых снабжены тормозными устройствами; коромысла **2** и плечиков **3** для подвески гамака (на рис. не показан), имеет ручку **4** для перемещения сторонним лицом. Несущая рама подъемника изготавливается в 2-х вариантах: с нерегулируемой (Н) и регулируемой (Р) по ширине базой.

Изделие комплектуется эл.приводом **5** с аккумулятором-адаптером **6** и кнопочным пунктом управления **7**, позволяющим осуществлять без применения больших усилий плавное перемещение инвалида (больного) вверх и вниз, преодолевая такие препятствия, как борт ванны, бассейна и т.д.

Гамак изготовлен из водонепроницаемой ткани, имеет петли из стропы для подвески на плечики подъемника.

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА

При эксплуатации подъемника необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

Подготовить подъемник к эксплуатации согласно **п. 5 паспорта** на изделие.

Перед предполагаемым использованием подключить адаптер-аккумулятор подъемника к сети с напряжением 220 V для подзарядки (время полной зарядки аккумулятора – 8 часов).

Для транспортировки пользователя к месту принятия гигиенических процедур, необходимо подвезти к нему подъемник.

Гамак снять с плечиков подъемника и разложить его на плоскости сиденья инвалидной коляски или кровати, в которой находится инвалид (лежачий больной). Любым приемлемым способом подвести гамак под инвалида таким образом, чтобы паз гамака располагался под его ягодицами.

Разложив коромысло подъемника над головой пользователя, произвести подвешивание гамака на плечики способом согласно **рис. 2**.

Нажатием кнопки на пульте **поднимают** инвалида в гамаке с инвалидного кресла, кровати и т.д. на удобную для транспортировки высоту.

Подвозят нагруженный подъемник к ванне таким образом, чтобы U-образная несущая рама подъемника **въехала под нее**.

Директор



Е. Я. Никифоров

укой поворачивают коромысло в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы гамак с инвалидом расположился непосредственно над ванной. Далее нажатием кнопки на пульте **опускают** пользователя в гамаке в ванну с водой.

После этого снимают петли крепления гамака с плечиков подъемника, разместив их по своему усмотрению на бортах ванны или непосредственно в воде. Гамак изготовлен из водонепроницаемой ткани и позволяет эксплуатацию в воде. После помывки воду из ванны сливают, больного и гамак (по возможности) вытирают, затем петли гамака подвешивают на плечики подъемника, и нажатием кнопки на пульте производят подъем больного из ванны и пересадку его на кресло-коляску вместе с гамаком, либо транспортировку в гамаке до кровати. После чего гамак высвобождается из-под инвалида любым приемлемым способом. После гигиенической процедуры подъемник необходимо переместить в зону стоя.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Чистку и дезинфекцию подъемника производить только после его отключения от сети.

Металлоконструкцию подъемника необходимо с периодичностью 1 раз в месяц подвергать дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% нейтрального моющего средства, либо 1% раствором хлорамина ХБ.

Гамак подъемника после каждого применения необходимо промывать теплым мыльным раствором и, **не отжимая**, сушить, расположив на плечиках подъемника или на веревке.

При условии соблюдения правил эксплуатации **гарантийный срок** службы подъемника передвижного **ПП-076** составляет 1 год со дня выдачи потребителю. Незастоятельный ремонт и разборка подъемника **запрещены!**

Рис. 1

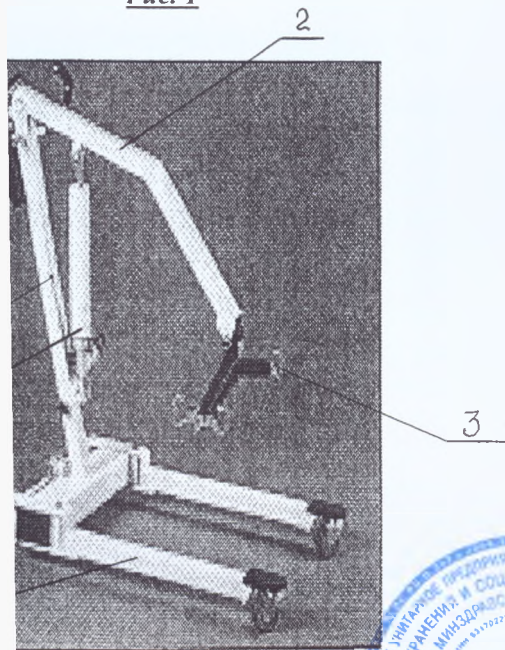


Рис. 2



Директор



Е. Я. Никифоров