




ФГУП «Самарское ПрОП»
Минздравсоцразвития
России

СТОЙКА ОПОРНАЯ
ПРИКРОВАТНАЯ
переносная

ПДК-010

ТУ 9452-905-03151254-2010

ПАСПОРТ

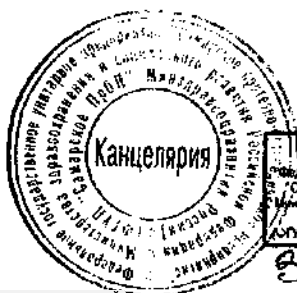



КОПИЯ ВЕРНА
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Самарское прикладное производственное предприятие»
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
ФГУП «Самарское ПрОП» Минздравсоцразвития России

Вар. Ганч

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Стойка опорная прикроватная переносная ПДК-010 (рис.1) предназначена, для удобства инвалиду (лежачему больному) осуществлять самостоятельный подъём из положения «лёжа» в положение «сидя» или подтягивания для смены положения тела в кровати.
- 1.2. Конструкция стойки обеспечивает регулировку её высоты в диапазоне от 1420 до 2000 мм.
- 1.3. Рукоятка и ремень должны быть надёжно закреплены для предотвращения их произвольного ослабления и снятия.
- 1.4. Стойка должна стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из опор основания не должен превышать 3,0 мм.
- 1.5. Стойка не должна опрокидываться при воздействии нагрузки 600Н, приложенной к рукоятке в эксплуатационных направлениях.

- 1.Коромысло с рукояткой
- 2.Кронштейн
- 3.Винт
- 4.Основание

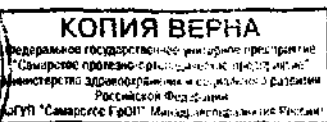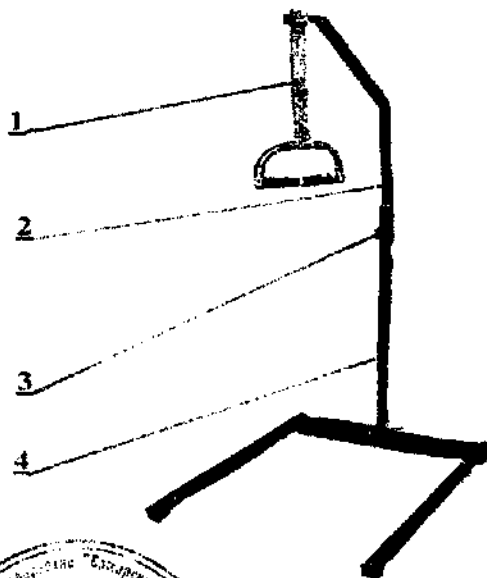

Зав. Канц. 139/

2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры и масса изделия должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Табл. 1

Обозначение изделия	Основные параметры, мм			Масса изделия, кг	Усилие прилагаемой к рукоятке нагрузки, не более, Н
	Длина	Ширина	Высота		
ПДК-010	780	680	1420 - 2000	22,0	600

2.2. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравсоцразвития России.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- основание – 1 шт.;
- кронштейн – 1 шт.;
- коромысло с рукояткой – 1 шт.;
- комплект крепежных изделий – 1 компл.;
- этикетка – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта. Узлы изделия должны быть упакованы в оберточную бумагу и надежно закреплены от перемещения.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в сухих закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, - каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища). Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

5.1. Освободить части комплекта от упаковки.

5.2. Вставить кронштейн в основание и зафиксировать винтом.

5.3. Поставить стойку около кровати так, чтобы основание опоры находилось под кроватью.

6. Обслуживание и уход

Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми и острыми предметами.

7. Требования безопасности

7.1. Запрещается эксплуатировать изделие при его неустойчивом положении на полу.

7.2. Рабочий диапазон температур, для которого допускается эксплуатация изделия, - от +5°C до +50°C.

7.3. Не допускаются к эксплуатации изделия, не имеющие действующего паспорта.

