



ФГУП «Самарское ПрОП»
Минздравоохранения
России

ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ

ХМ – 03

ТУ 9451-902-03151254-2010

ПАСПОРТ



КОПИЯ ВЕРНА
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Самарское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП «Самарское ПрОП» Минздравоохранения России)

Зав. Сам.

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Ходунки на колесиках ХМ-03 (далее – ходунки, рис.) предназначены для дополнительной опоры при ходьбе взрослым и престарелым людям с поражениями опорно-двигательного аппарата.
- 1.2. Ходунки состоят из разборной, регулируемой по высоте несущей рамы из стальной профильной трубы, 4-х обремененных самоориентирующихся колес, два из которых снабжены тормозными устройствами; смягченного подлокотника и 2-х обремененных ручек.
- 1.3. Конструкция ходунков обеспечивает удобство пользования ими и свободу действий пользователя, а также доступность, легкосъемность и взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц при эксплуатации и ремонте.
- 1.4. Устройства регулирования высоты ходунков при нагрузках не имеют свободного хода и обеспечивают надежную фиксацию изделий в рабочем положении.
- 1.5. Основные узлы изделия: рама несущая, регулируемые по высоте стойки, подлокотник, 4 самоориентирующиеся колеса, два из которых с тормозом; ручки поворотные.

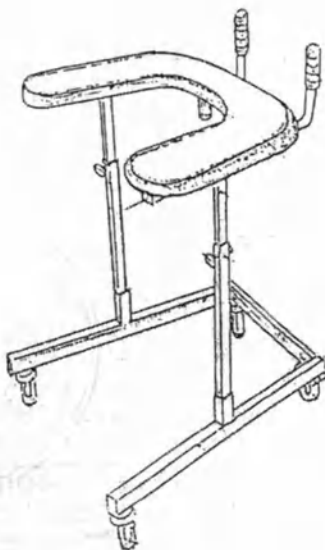


Рис.



КОПИЯ ВЕРНА
Федеральное государственное учреждение
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ОГП "Самарское ПРОП" Минздравсоцразвития России)

Зав. Канц. *[Signature]*

2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры и масса изделия должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Вид изделия	Параметры изделия в рабочем состоянии, мм			Масса изделия не более, кг	Масса пользователя не более, кг
	Длина	Ширина	Высота Н		
ХМ-03	640	630	990-1265	16,0	100,0

2.2. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравсоцразвития России.

3. Комплектность

3.1. Ходунки в сборе – 1 шт., этикетка – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта. Изделия должны быть надежно упакованы и закреплены от перемещения.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, - каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища). Условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

5.1. Освободить ходунки от упаковки.

5.2. Протереть изделие мягкой влажной салфеткой, смоченной теплой водой с добавлением моющих средств.

6. Порядок эксплуатации

6.1. Отрегулировать ходунки по росту пользователя.


6.2. Проверить надежность крепления сборных деталей перед эксплуатацией.

6.3. В целях предотвращения разбалтывания креплений ходунков, необходимо регулярно производить подтяжку мест крепления, один раз в месяц или чаще, - в случае появления люфта ходунков при эксплуатации.

7. Обслуживание и уход

7.1. Ходунки в процессе эксплуатации обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами.

7.2. Необходимо предохранять поверхность металлических деталей изделия от ударов твердыми и острыми предметами для предотвращения порчи защитного декоративного покрытия.

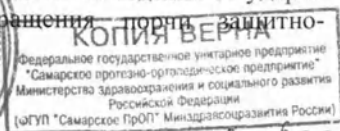

8. Требования безопасности

- 8.1. Материалы, используемые для изготовления ходунков, разрешены к применению Минздравсоцразвития России.
- 8.2. Изделие не предназначено для эксплуатации вне помещений.
- 8.3. Ходунки не допускаются к эксплуатации на поверхности с уклоном, превышающим 7 град. в продольном направлении движения и 4 град. при движении в поперечном направлении.
- 8.4. Запрещена эксплуатация ходунков при отсутствии фиксации подлокотника и спинки.

9. Свидетельство о приемке

Ходунки на колесиках детские

ХМД - 02

(наименование изделия)

(тип)

соответствует требованиям НТД и признано годным к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска _____
(отметка ОКК)

10. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **6 месяцев** со дня выдачи изделия потребителю.

В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока предприятие – изготовитель при обращении по адресу: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47 обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

11. Отметка о выдаче товара потребителю

М.П. торговой организации

Подпись продавца _____
(без печати не действительно)

12. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

№ п/п	Описание дефекта, дата	Устранение дефекта, дата	Отметка ОКК	Примечание


Просим Ваши замечания и отзывы о нашей продукции направлять по вышеуказанному адресу.



КОПИЯ ВЕРНА

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ОГП "Самарское ГРОП" Минздравсоцразвития России)

Сав. Ренат. Еванг.

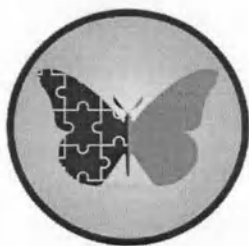

ФГУП «Самарское ПрОП»
Минздравсоцразвития
России

ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ

ХМД – 02

детские

ТУ 9451-902-03151254-2010

П А С П О Р Т



КОПИЯ ВЕРНА
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП "Самарское ПрОП" Минздравсоцразвития России)

Зав. пачкой

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Ходунки на колесиках ХМД-02 детские, (далее – ходунки, рис.), предназначены для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, при которых они лишены возможности самостоятельно передвигаться без помощи ходунков, поддерживающих равновесие ребенка.
- 1.2. Ходунки состоят из разборной, регулируемой по высоте несущей рамы из стальной профильной трубы, 4-х обрешиненных самоориентирующихся колес, два из которых снабжены тормозными устройствами; смягченного подлокотника, съемного мягкого сиденья и смягченной спинки.
- 1.3. Конструкция ходунков обеспечивает удобство пользования ими и свободу действий пользователя, а также доступность, легкосъемность, и взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц при эксплуатации и ремонте.
- 1.4. Устройства регулирования высоты ходунков при нагрузках не имеют свободного хода и обеспечивают надежную фиксацию изделия в рабочем положении.

Основные узлы изделия: рама несущая, подлокотник, спинка, сиденье мягкое, 4 самоориентирующиеся колеса, два из которых с тормозом.

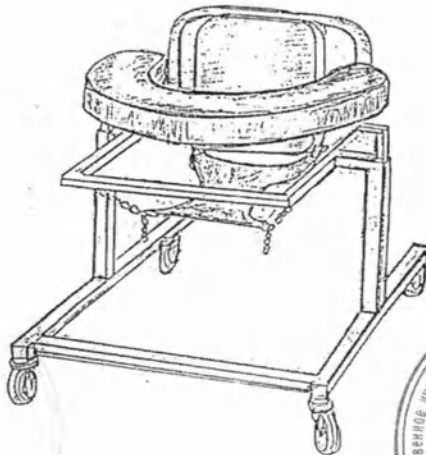


Рис.



КОПИЯ ВЕРНА
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП "Самарское ПрОП" Минздравсоцразвития России)

Зав. Канц. [подпись]

2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры и масса изделия должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Вид изделия	Параметры изделия в рабочем состоянии, мм			Масса изделия, кг	Масса пользователя не более, кг
	Длина	Ширина	Высота Н		
Исполнение 1	720	560	510-660	11,0	40,0
Исполнение 2			610-760	11,5	
Исполнение 3			730-880	12,0	

2.2. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравсоцразвития России.

3. Комплектность

3.1. Ходунки в сборе – 1 шт., этикетка – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта. Изделия должны быть надежно упакованы и закреплены от перемещения.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, - каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища). Условия хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

5.1. Освободить ходунки от упаковки.

5.2. Протереть изделие мягкой влажной салфеткой, смоченной теплой водой с добавлением моющих средств.

6. Порядок эксплуатации

6.1. Отрегулировать ходунки по росту и габаритам ребенка.

6.2. Проверить надежность крепления сборных деталей перед эксплуатацией.

6.3. В целях предотвращения разбалтывания креплений ходунков, необходимо регулярно производить подтяжку мест крепления один раз в месяц или чаще, - в случае появления люфта при эксплуатации.

7. Обслуживание и уход

7.1. Ходунки в процессе эксплуатации обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами.

7.2. Необходимо предохранять поверхность металлических деталей изделия от ударов твердыми и острыми предметами, для предотвращения порчи защитно-декоративного покрытия.

