

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»

В.К. Бунзя

« 2 » сентября 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения

Система инфузионная стерильная
для однократного применения с иглами

**производства: «Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», КНР/
Beijing Fornurse Medical Equipment Co., Ltd, People's Republic Of China**

1. Назначение изделия медицинского назначения

Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами производства «Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», КНР /Beijing Fornurse Medical Equipment Co., Ltd, People's Republic Of China, предназначена для внутривенного вливания инфузионных растворов.

2. Основные технические характеристики изделия медицинского назначения

Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами производства «Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», КНР /Beijing Fornurse Medical Equipment Co., Ltd, People's Republic Of China, состоит из: защитного колпачка; устройства для прокалывания пробок (включает пластиковую иглу с боковым отверстием для прокалывания пробок, металлическую иглу со срезом для прокалывания пробок); воздушного фильтра (или элемента для подачи воздуха); трубки, регулятора подачи; фильтра раствора; инъекционной иглы; внутривенной инфузионной иглы; двойного катетера.

3. Противопоказания к применению изделия медицинского назначения

Не использовать в случае повреждения упаковки, защитного колпачка, а также с просроченным сроком годности.

4. Подготовка к работе и порядок работы изделия медицинского назначения

Проверить целостность упаковки, убедиться в том, что продукция не просрочена, на защитном колпачке отсутствуют повреждения.

Вскрыть упаковку, вынуть инфузионный комплект, закрыть регулятор подачи, вставить наконечник фильтра в мягкое гнездо инфузионной иглы для внутривенного вливания, прочно закрепить.

В соответствии с процедурой стерильности ввести устройство для прокалывания пробок во флакон (мешок) с раствором.

Осторожно открыть регулятор подачи раствора, перевернуть капельницу, дождаться момента, когда раствор наполнит капельницу на две трети. Подвесить капельницу, перевернуть фильтр раствора и дождаться, когда она будет заполнено раствором, выпустить воздух, закрыть регулятор подачи.

Снять защитный колпачок с иглы, в соответствии с процедурой обеспечения стерильности ввести иглу в вену. При введении иглы устройство оттока крови и инфузионная игла должны находиться на одном уровне. После оттока крови медленно открыть регулятор подачи раствора, резиновой лентой закрепить положение иглы. В соответствии с необходимостью регулятором обеспечить скорость подачи жидкости.

При необходимости увеличения количества раствора присоединить к месту подачи дополнительную ёмкость.

Введение осуществлять только гравитационным методом.

Применять однократно, после использования утилизировать.

5. Правила хранения и утилизации изделия медицинского назначения

Использовать в пределах указанного срока годности. Номер партии и данные о сроке годности указаны на герметичной упаковке.

Срок годности продукции 5 лет.

После однократного применения утилизировать как медицинские отходы.

6. Адрес компании-производителя

«Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», KHP /Beijing Fornurse Medical Equipment Co., Ltd, №1, Fengxiang Street, Yangsong Town, Huairou District, 101400 Beijing, People's Republic Of China, tel: +86 10 61678707, fax: +86 10 61678806, E-mail: maihui 1968@yahoo.com.cn.