



КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
SALUBER SRL
Via Monte Verena
31 36022 Cassola (VI) Italy

Smaniotto Claudia

SALUBER srl
Via Monte Verena, 31
1067 SAN ZENO DI CASSOLA (VI)
Fisc. e Part.IVA 02867470243

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

в соответствии с приказом МЗ РФ 11н

«Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения»

SALUBER SRL Via Monte Verena, 31 36022 Cassola (VI) – Italy

Редакция 4.0

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SALUBER SRL
Via Monte Verena
31 36022 Cassola (VI) – Italy

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

SALUBER SRL
Via Monte Verena
31 36022 Cassola (VI) – Italy

1.Наименование медицинского изделия:

Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения:

- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН.27
- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН 30
- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН 46
- Стельки НАТУРАЛ 27
- Стельки НАТУРАЛ 27 детские
- Стельки НАТУРАЛ 30
- Стельки НАТУРАЛ 46
- Стельки ТЕРМО.27
- Стельки ТЕРМО.30
- Стельки ТЕРМО.46
- Стельки ПРЕМИУМ.27
- Стельки ПРЕМИУМ.30
- Стельки ПРЕМИУМ.46
- Стельки ПРЕМИУМ.46 детские
- Стельки ПРЕМИУМ.46 PZ
- Полуствельки ПРЕМИУМ.27
- Полуствельки ПРЕМИУМ.27 детские
- Полуствельки ПРЕМИУМ.30
- Полуствельки ПРЕМИУМ.46
- Стельки КОМФОРТ.27
- Стельки КОМФОРТ.46
- Стельки КОМФОРТ.46 PZ
- Вкладыш для использования в модельной обуви Soft Pad
- Полуствелька 3/4 1 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствелька 3/4 1,5 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствелька 3/4 2 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствелька 3/4 3 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствельки 3/4 кожаные для модельной обуви с поперечной выкладкой
- Стелька разгрузочная FORSTM 15 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 9 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 5 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 3 MM (для диабетической стопы)
- Стельки анатомические MULTISPORT
- Стельки анатомические RUNNING
- Подпяточник с замшевым покрытием Alcantara, со вставкой анти-шок под пяткой

2. Производитель медицинского изделия:

SALUBER SRL
Via Monte Verena
31 36022 Cassola (VI) – Italy

2.1 Место производства медицинского изделия:

SALUBER SRL
Via Monte Verena
31 36022 Cassola (VI) – Italy

3. Назначение медицинского изделия и принципы действия:

«Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения» производства SALUBER SRL, Италия в зависимости от варианта исполнения предназначены для: профилактики и лечения заболеваний стопы, подошвенного фасциита, невритов и/или других заболеваний стопы.

4. Показания, противопоказания к применению медицинского изделия:

Показания:

- плоскостопие продольное, поперечное, комбинированное;
- пяточная шпора;
- межпозвоночные грыжи;
- варусная или вальгусная деформация стопы;
- ревматоидный артрит;
- остеоартроз голеностопного, коленного или тазобедренного суставов;
- диабетическая стопа;
- подагра;
- варикозное расширение вен или тромбофлебит нижних конечностей;
- перекос таза;
- компенсация разной высоты нижних конечностей;
- врожденная патология стоп;
- заболевания (артрит) суставов нижних конечностей;
- симптомы воспаления ахиллова (пяточного) сухожилия (ахиллодинии);
- боль в пяточной области с воспалением подошвенной фасции ("пяточная шпора");
- заболевания суставов нижних конечностей и позвоночника (амортизация);
- воспаление ахиллова сухожилия и окружающих тканей;
- боль в подошвенной области стопы;
- деформации стопы и пальцев;
- нарушение распределения давления под стопой;
- дискомфорт в пяточной области и стопе по причине повышенных нагрузок;
- синдром «уставших ног» по причине длительного нахождения на ногах;
- перегрузки, связанные с разными видами спорта;
- неспецифические перегрузки стопы;
- пяточная боль и талалгия;
- воспаление ахиллового сухожилия;
- профилактика развития, прогрессирования деформаций;
- сколиоз и другие нарушения осанки;
- состояние после травм.

5. Противопоказания.

Сверхчувствительные реакции, опасные для здоровья, на настоящий момент не зафиксированы. В случаях наличия кожных заболеваний/травм соответствующих частей тела, особенно при наличии воспаления, такие средства должны применяться после консультации в медицинском учреждении, в том числе при наличии воспаления рубцовой ткани (отек, покраснение, местная гипертермия).

Пациенты с диабетом или ревматоидными деформациями стопы должны проконсультироваться с лечащим врачом до применения изделия, чтобы обеспечить оптимальное лечение.

6. Способ применения.

Неинвазивный.

1. Если в обуви предусмотрена съемная стелька, необходимо ее удалить и заменить на ортопедическую стельку
2. Разместить стельки в обувь так, чтобы сторона с покрытием из Alcantara® или кожей была сверху. Обувь готова к использованию.

7. Условия применения.

Изделия медицинские ортопедические для обуви должны использоваться только в соответствии с инструкцией, и содержащихся в ней рекомендациях для использования и только для перечисленных зон применения.

Изделие должно быть подобрано один раз и только для одного пациента. Производитель не несет ответственности за использование изделия не по назначению.

Обувь, используемая со стельками, должна иметь достаточный объем, как для стопы, так и для выбранных изделий (достаточная длина и ширина обуви, съёмная, достаточно толстая подкладочная стелька, достаточная поперечная фиксация стельки в открытой обуви). Следует избегать неудобной обуви и избыточного давления обуви на стопу.

Перед началом использования ортопедических стелек необходимо проконсультироваться с терапевтом или ортопедом в связи с возможным риском их использования. Если обувь излишне свободная для стопы и выбранных изделий, или если в обувь вставлены стельки неправильной длины (или с недостаточной поперечной фиксацией в открытой обуви), не исключены проблемы с использованием стелек (сдавливание стопы в обуви, трение стопы о стельку и т.д.).

Стелька должна поддерживать передний отдел, среднюю и заднюю часть стопы, и стопа не должна опираться на края стельки.

Необходимо регулярно проверять стопы на наличие потертостей, воспаления и других изменений, вызванных ортопедическими стельками. Если в процессе использования изделий возникают любые проблемы или какие-то необычные изменения (например, обострение симптомов), необходимо связаться со своим ортопедом или лечащим врачом.

Если стопы опираются на края стелек, на подошвах стопы могут образовываться мозоли. Того же эффекта можно ожидать в случае, если на верхнем или внутреннем слоях стельки образовались неровности, складки или повреждения от механического воздействия. Стельки, поврежденные таким образом, не должны более использоваться.

На изделия устанавливают уровни нагрузок, соответствующие массе пользователя: для детей: 45 кг, для взрослых: 125 кг.

8. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Использование ортопедического изделия обусловлено рекомендациями врача.

Изделие должно быть подобрано только для одного пациента.

В случае неправильно подобранного размера, пациент может испытывать дискомфорт при ношении. Рекомендуется снять изделие и обратиться к врачу.

Изделие не должно подвергаться какой-либо ненадлежащей модификации.

Не допускается ношение стелек при любых занятиях спортом (кроме ходьбы или быстрой ходьбы)

Не использовать стельки для детей в возрасте до 3 лет в связи с недостаточным психомоторным развитием

Лица с весом более 125 кг не могут пользоваться стельками в связи с механическими ограничениями самого продукта

Нельзя носить левую стельку на правой ноге и наоборот (тельки имеют чёткую буквенную маркировку с нижней стороны: «L» - левая и «R» – правая)

Запрещается применение неисправных стелек

Не носить стельки в обуви с каблуком выше 5 см

Запрещается использование стелек после погружения в жидкость (вода, масло и т.п.)

Не допускается применение стелек при диагнозе «Свисающая стопа» – парез малоберцового нерва

Не допускается постоянное использование одной пары стелек более 24 месяцев (предусмотренный срок применения составляет 24 месяца)

Запрещается носить только одну стельку

Запрещается самоинициативное применение стелек без предварительного анамнеза, постановки диагноза.

Не разрешается применение в открытой обуви

Несоблюдение требований по применению может привести к ухудшению характеристик изделия. Производитель не несет ответственности за использование изделия не по назначению. Острый воспалительный процесс мягких тканей стоп (например, плантарный фасциит)

9. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Противопоказаний и побочных действий изделия практически не имеют. С предостережением нужно относиться к неправильному выбору ортопедических стелек детям и пожилым людям, ступня которых имеет свои особенности.

10. Гарантия на медицинские изделия составляет 6 месяцев.

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке при комнатной температуре и влажности; не должны подвергаться прямому воздействию источников света и тепла, таких как печи, нагреватели, радиаторы.

Срок годности не ограничен.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев с момента продажи.

Условия хранения:

Температура $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$

Влажность 45-80%

Атмосферное давление 630-800 мм.рт.ст.

Срок годности при хранении в указанных условиях не установлен.

По окончании периода использования изделия, оно не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

11. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

- не оказывает влияния

12. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия:

«Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения»

предназначены для использования медицинским персоналом и населением в возрасте от 4 до 100 лет.

13. Основные функциональные элементы медицинского изделия:

Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения:

- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН.27
- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН 30
- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН 46
- Стельки НАТУРАЛ 27
- Стельки НАТУРАЛ 27 детские
- Стельки НАТУРАЛ 30
- Стельки НАТУРАЛ 46
- Стельки ТЕРМО.27
- Стельки ТЕРМО.30
- Стельки ТЕРМО.46
- Стельки ПРЕМИУМ.27
- Стельки ПРЕМИУМ.30
- Стельки ПРЕМИУМ.46
- Стельки ПРЕМИУМ.46 детские
- Стельки ПРЕМИУМ.46 PZ
- Полустельки ПРЕМИУМ.27
- Полустельки ПРЕМИУМ.27 детские

- Полуствельки ПРЕМИУМ.30
- Полуствельки ПРЕМИУМ.46
- Стельки КОМФОРТ.27
- Стельки КОМФОРТ.46
- Стельки КОМФОРТ.46 PZ
- Вкладыш для использования в модельной обуви Soft Pad
- Полуствелька 3/4 1 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствелька 3/4 1,5 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствелька 3/4 2 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствелька 3/4 3 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полуствельки 3/4 кожаные для модельной обуви с поперечной выкладкой
- Стелька разгрузочная FORSTM 15 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 9 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 5 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 3 MM (для диабетической стопы)
- Стельки анатомические MULTISPORT
- Стельки анатомические RUNNING
- Подпяточник с замшевым покрытием Alcantara, со вставкой анти-шок под пяткой

14. Описание принадлежностей медицинского изделия:

Поставляется без принадлежностей

15. Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающий в непосредственный или опосредованный контакт с телом человека.

	<u>Материал</u>	<u>Описание материала</u>	<u>Контакт с телом человека</u>
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения НАТУРАЛ КАРБОН.27	- натуральная кожа - углеродная мембрана - вставка анти-шок под пяткой - термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа 0,1 мм	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
			
		Средний слой – углеродная мембрана 3 мм	
			
		Вставка анти-шок под пяткой - Порог 3 мм	
			
		Нижний слой - Термоформованный	


		каркас анатомической формы $\frac{3}{4}$ из смеси пластика и резины  Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения НАТУРАЛ КАРБОН 30	– натуральная кожа – углеродная мембрана – вставка анти-шок под пяткой – амортизатор – Rogon – термоформованный каркас анатомической формы $\frac{3}{4}$ из смеси пластика и резины полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа 0,1 мм Средний слой – углеродная мембрана 3 мм Амортизатор – Rogon 3 мм Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы $\frac{3}{4}$ из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения НАТУРАЛ КАРБОН 46	– натуральная кожа – углеродная мембрана – амортизатор – Rogon – вставки - продольно-поперечные выкладки – термоформованный каркас анатомической формы $\frac{3}{4}$ из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа 0,1 мм Средний слой – углеродная мембрана 3 мм Амортизатор – Rogon 3 мм Вставки - продольно-поперечные выкладки 	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения НАТУРАЛ 27	– натуральная кожа – амортизатор–Рогоп – вставки-продольная выкладка – термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа 0,1 мм Амортизатор – Рогоп 3 мм Вставки - продольная выкладка Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA 	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения НАТУРАЛ 27 (детские)	– натуральная кожа – амортизатор–Рогоп – вставки - продольная выкладка – термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа 0,1 мм Амортизатор – Рогоп 3 мм Нижний слой Вставки - продольная выкладка Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения НАТУРАЛ 30	– натуральная кожа – амортизатор–Rogon – вставки - поперечная выкладка – термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа 0,1 мм Амортизатор – Rogon 3 мм Вставки – поперечная выкладка Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения НАТУРАЛ 46	– натуральная кожа – амортизатор–Rogon – вставки - поперечная выкладка – термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа 0,1 мм Амортизатор – Rogon 3 мм Вставки – поперечная выкладка Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ТЕРМО. 27	– натуральная шерсть – войлок – вставка анти-шок–Rogon – термоформованный	Верхний слой – натуральная шерсть - стриженная шерсть, полученная прямо со стрижки руно, не восстановленная и не	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

	каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины – мембрана - микропористый пвх материал Rogon с эффектом памяти – вкладка-продольная – полихлоропреновый клей	подвергалась повторной переработке.  Изолирующий слой – войлок  Вставка анти-шок - материал Rogon с эффектом памяти  Мембрана - микропористый пвх материал Rogon с эффектом памяти  Вкладка – продольная  Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины	часов
--	--	---	---------------------

			
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ТЕРМО. 30	– натуральная шерсть – войлок – вставка анти-шок – Рогоп – термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины – мембрана - микропористый пвх материал Рогоп с эффектом памяти – вкладка-поперечная – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная шерсть - стриженная шерсть, полученная прямо со стрижки руно, не восстановленная и не подвергалась повторной переработке. Изолирующий слой – войлок Вставка анти-шок - материал Рогоп с эффектом памяти Мембрана - микропористый пвх материал Рогоп с эффектом памяти Вкладка – поперечная Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ТЕРМО. 46	– натуральная шерсть – войлок – вставка анти-шок – Рогоп – мембрана-микропористый пвх материал Рогоп с эффектом памяти – вкладка-продольно-поперечная – термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная шерсть - стриженная шерсть, полученная прямо со стрижки руно, не восстановленная и не подвергалась повторной переработке. Изолирующий слой – войлок Вставка анти-шок - материал Рогоп с эффектом памяти Мембрана - микропористый пвх материал Рогоп с эффектом памяти	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

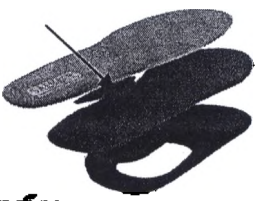		Вкладка – продольно-поперечная Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ПРЕМИУМ.27	- искусственная замша - вставка анти-шок – Rogon - мембрана - материал Memoгу Rogon - вкладка-продольная - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий.  Вставка анти-шок - материал Rogon 3 мм  Мембрана - материал Memoгу Rogon 3мм  Вкладка – продольная	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		 Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины  Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ПРЕМИУМ.30	- искусственная замша - вставка анти-шок – Porofoam - мембрана - материал Mempore Porofoam - вкладка-поперечная - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий.  Вставка анти-шок - материал Porofoam 3 мм  Мембрана - материал	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		Memory Poro 3мм  Вкладка – поперечная  Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины  Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ПРЕМИУМ.46	– искусственная замша – вставка анти-шок – Poro – мембрана - материал Memory Poro – вкладка-продольно- поперечная – термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Poro 3 мм Мембрана - материал Memory Poro 3мм Вкладка – продольно- поперечная Нижний слой -	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ПРЕМИУМ.46 (детские)	- искусственная замша - вставка анти-шок – Poron® - Мембрана - материал Memory Poron - вкладка-продольно-поперечная - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Poron 3 мм Мембрана - материал Memory Poron 3мм Вкладка – продольно-поперечная Нижний слой - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ПРЕМИУМ.46 PZ	- искусственная замша - вставка анти-шок – Poron - мембрана - материал Memory Poron со съёмными кубиками - вкладка-продольно-поперечная	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

	– термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Rogon Мембрана из материала Метопу Rogon 3мм со съемными кубиками (пазл)  Вкладка - продольно-поперечная Нижний слой - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Полустельки ПРЕМИУМ.27	– искусственная замша – вставка анти-шок – Rogon – мембрана - материал Метопу Rogon – вкладка- продольная – термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий.	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		 Вставка анти-шок - материал Poron  Мембрана из микропористого пвх материала Мемогу Poron 3мм  Вкладка – продольная  Нижний слой - термоформованный материал анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины  Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения	- искусственная замша - вставка анти-шок – Poron - мембрана - материал	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный	Контакт с неповрежденным

Полустельки ПРЕМИУМ.27 (детские)	Мемогу Rogop – термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Rogop Мембрана из микропористого пвх материала Мемогу Rogop 3мм Вкладка – продольная Нижний слой - термоформованный материал анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Полустельки ПРЕМИУМ.30	– искусственная замша – вставка анти-шок – Rogop® – мембрана - материал Мемогу Rogop – термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины – полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Rogop Мембрана из микропористого пвх материала Мемогу Rogop 3мм Вкладка – продольная Нижний слой - термоформованный материал	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Полустельки ПРЕМИУМ.46	- искусственная замша - вставка анти-шок - Poron - мембрана - материал Memory Poron - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производства, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Poron Мембрана из микропористого пвх материала Memory Poron 3мм Вкладка – продольная Нижний слой - термоформованный материал анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения КОМФОРТ.27	- искусственная замша - ударопоглощающая вставка с эффектом памяти Poron - мембрана – пенополиуретан - выкладка свода -	Верхний слой – покрытие Alcantara (искусственная замша) – это синтетический материал, производство которого осуществляют в	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18

	продольная - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	сочетании и взаимодействии химического и текстильного процессов. Материал мягкий, долговечный, износостойкий, с водоотталкивающим свойством.  Ударопоглощающая вставка - материал с эффектом памяти Rogon  Мембрана - пенополиуретан с эффектом памяти Rogon®, 5 мм  Выкладка свода - продольная  Нижний слой - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	часов
--	--	---	--------------

		 Клеящий слой - полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения КОМФОРТ.46	- искусственная замша - вставка анти-шок - материал Rogon с эффектом памяти - Мембрана - микропористый пвх материал Мемогу Rogon - Выкладка свода - продольно-поперечная - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	Верхний слой - покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Rogon с эффектом памяти Мембрана - микропористый пвх материал Мемогу Rogon 5мм Вкладка - продольно-поперечная Нижний слой - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов


Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения КОМФОРТ.46 PZ	- искусственная замша - вставка анти-шок материал Rogon с эффектом памяти - Мембрана – микропористый пвх материал Memoгу Rogon - Выкладка свода – продольно-поперечная - Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) - композитный материал, полученный в результате особого сочетания процесса прядения и многочисленных процессов текстильного и химического производств, материал чрезвычайно прочный, мягкий, водоотталкивающий. Вставка анти-шок - материал Rogon с эффектом памяти Мембрана - микропористый пвх материал Memoгу Rogon 5мм Вкладка - продольно-поперечная Нижний слой - термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Вкладыш для использования в модельной обуви Soft Pad	- натуральная кожа - полиуретан - полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа Основная часть - полиуретан Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

			
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Полустелька $\frac{3}{4}$ 1 см для компенсации разной высоты нижних конечностей	– натуральная кожа – полиуретан – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа Основная часть - полиуретан Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Полустелька $\frac{3}{4}$ 1.5 см для компенсации разной высоты нижних конечностей	– натуральная кожа – полиуретан – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа Основная часть - полиуретан Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Полустелька $\frac{3}{4}$ 2 см для компенсации разной высоты нижних конечностей	– натуральная кожа – полиуретан – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа Основная часть - полиуретан Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		ITALIA	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Полустелька $\frac{3}{4}$ 3 см для компенсации разной высоты нижних конечностей	– натуральная кожа – полиуретан – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа Основная часть - полиуретан Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Полустельки 3/4 кожаные для модельной обуви с поперечной выкладкой	– натуральная кожа – полиуретан – полихлоропреновый клей	Верхний слой – натуральная кожа Основная часть - полиуретан Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA 	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Стелька разгрузочная FORSTM 15 MM (для диабетической стопы)	– искусственная замша – съёмные вставки материал Poron – полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) Съемные вставки-материал Poron Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Стелька разгрузочная FORSTM 9 MM (для диабетической стопы)	– искусственная замша – съёмные вставки материал Poron – полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) Съемные вставки-материал Poron Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA 	часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Стелька разгрузочная FORSTM 5 MM (для диабетической стопы)	- искусственная замша - съёмные вставки материал Rogon - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) Съёмные вставки- материал Rogon Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Стелька разгрузочная FORSTM 3 MM (для диабетической стопы)	- искусственная замша - съёмные вставки материал Rogon - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) Съёмные вставки- материал Rogon Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Стельки анатомические MULTISPORT	- искусственная замша - амортизатор материал Rogon - мембрана материал Rogon - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) Амортизатор- материал Rogon Мембрана - материал Rogon Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

		FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA 	
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Стельки анатомические RUNNING	- искусственная замша - амортизатор материал Rogon - мембрана материал Rogon - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) Амортизатор-материал Rogon Мембрана - материал Rogon Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA 	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения Подпяточник с замшевым покрытием Alcantara, со вставкой анти-шок под пяткой	- искусственная замша - амортизатор материал Rogon - мембрана материал Rogon - полихлоропреновый клей	Верхний слой – покрытие Алькантара (искусственная замша) Амортизатор-материал Rogon Мембрана - материал Rogon Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M TODESCHINI FRANCESCO, VIA MADONNETTA 65, 36030 SARCEDO ITALIA	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

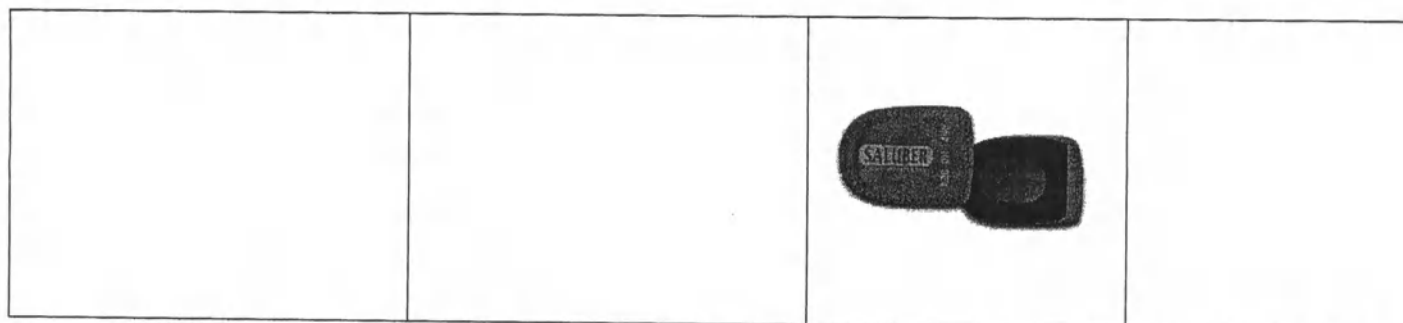

15.1 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки НАТУРАЛ КАРБОН.27:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	$220 \pm 2,5$	$75,5 \pm 1,5$	63	5/15
36	$230 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	64	5/15
37	$240 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	67	5/15
38	$250 \pm 2,5$	$82 \pm 1,5$	70	5/15
39	$255 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	72	5/15
40	$260 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	75	5/15
41	$265 \pm 2,5$	$90 \pm 1,5$	80	5/15
42	$270 \pm 2,5$	$92 \pm 1,5$	83	5/15
43	$280 \pm 2,5$	$93 \pm 1,5$	84	5/15
44	$285 \pm 2,5$	$94 \pm 1,5$	85	5/15
45	$290 \pm 2,5$	$95 \pm 1,5$	92	5/15
46	$300 \pm 2,5$	$96 \pm 1,5$	100	5/15

15.2 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки НАТУРАЛ КАРБОН.30:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	$220 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	65	5/15
36	$230 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	67	5/15
37	$240 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	67	5/15
38	$250 \pm 2,5$	$82 \pm 1,5$	67	5/15
39	$255 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	73	5/15
40	$260 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	76	5/15
41	$265 \pm 2,5$	$90 \pm 1,5$	76	5/15
42	$270 \pm 2,5$	$92 \pm 1,5$	79	5/15
43	$275 \pm 2,5$	$93 \pm 1,5$	81	5/15
44	$285 \pm 2,5$	$94 \pm 1,5$	96	5/15
45	$290 \pm 2,5$	$95 \pm 1,5$	97	5/15
46	$300 \pm 2,5$	$96 \pm 1,5$	101	5/15

15.3 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки НАТУРАЛ КАРБОН.46:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	$220 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	69	5/15
36	$230 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	69	5/15
37	$240 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	69	5/15
38	$250 \pm 2,5$	$82 \pm 1,5$	70	5/15
39	$250 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	74	5/15
40	$260 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	75	5/15
41	$265 \pm 2,5$	$90 \pm 1,5$	76	5/15
42	$270 \pm 2,5$	$92 \pm 1,5$	79	5/15
43	$280 \pm 2,5$	$93 \pm 1,5$	97	5/15
44	$285 \pm 2,5$	$94 \pm 1,5$	98	5/15
45	$290 \pm 2,5$	$95 \pm 1,5$	102	5/15
46	$300 \pm 2,5$	$96 \pm 1,5$	105	5/15

15.4 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки НАТУРАЛ 27:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	$225 \pm 2,5$	$76 \pm 1,5$	56	3/15
36	$230 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	55	3/15
37	$235 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	58	3/15
38	$240 \pm 2,5$	$82 \pm 1,5$	60	3/15
39	$250 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	63	3/15
40	$255 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	62	3/15
41	$265 \pm 2,5$	$90 \pm 1,5$	64	3/15
42	$270 \pm 2,5$	$92 \pm 1,5$	72	3/15
43	$280 \pm 2,5$	$93 \pm 1,5$	83	3/15
44	$285 \pm 2,5$	$94 \pm 1,5$	86	3/15
45	$290 \pm 2,5$	$95 \pm 1,5$	86	3/15
46	$295 \pm 2,5$	$96 \pm 1,5$	88	3/15

15.5 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки НАТУРАЛ 27 (детские):

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
28	$185 \pm 2,5$	$68 \pm 1,5$	37	2/15
29	$190 \pm 2,5$	$70 \pm 1,5$	40	2/15
30	$195 \pm 2,5$	$70 \pm 1,5$	40	2/15
31	$205 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	42	2/15

15.6 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки НАТУРАЛ 30:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	$220 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	53	2/15
36	$230 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	55	2/15
37	$240 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	57	2/15
38	$245 \pm 2,5$	$82 \pm 1,5$	58	2/15
39	$255 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	63	2/15
40	$260 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	65	2/15
41	$265 \pm 2,5$	$90 \pm 1,5$	65	2/15
42	$275 \pm 2,5$	$92 \pm 1,5$	66	2/15
43	$275 \pm 2,5$	$93 \pm 1,5$	67	2/15
44	$285 \pm 2,5$	$94 \pm 1,5$	68	2/15
45	$290 \pm 2,5$	$95 \pm 1,5$	81	2/15
46	$295 \pm 2,5$	$96 \pm 1,5$	82	2/15

15.7 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки НАТУРАЛ 46:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	$225 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	56	2/15
36	$230 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	58	2/15
37	$240 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	58	2/15
38	$245 \pm 2,5$	$82 \pm 1,5$	65	2/15
39	$255 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	62	2/15
40	$260 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	67	2/15
41	$265 \pm 2,5$	$90 \pm 1,5$	67	2/15
42	$270 \pm 2,5$	$92 \pm 1,5$	70	2/15
43	$275 \pm 2,5$	$93 \pm 1,5$	72	2/15
44	$285 \pm 2,5$	$94 \pm 1,5$	86	2/15
45	$285 \pm 2,5$	$95 \pm 1,5$	86	2/15
46	$300 \pm 2,5$	$96 \pm 1,5$	90	2/15

15.8 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ТЕРМО.27:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	$220 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	46	5/15
36	$230 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	47	5/15
37	$240 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	48	5/15
38	$250 \pm 2,5$	$82 \pm 1,5$	50	5/15
39	$255 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	53	5/15
40	$260 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	54	5/15

41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	55	5/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	56	5/15
43	280 ± 2,5	93 ± 1,5	60	5/15
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	69	5/15
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	69	5/15
46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	70	5/15

15.9 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ТЕРМО.30:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	220 ± 2,5	75 ± 1,5	46	5/15
36	230 ± 2,5	80 ± 1,5	47	5/15
37	240 ± 2,5	80 ± 1,5	50	5/15
38	250 ± 2,5	82 ± 1,5	53	5/15
39	255 ± 2,5	85 ± 1,5	55	5/15
40	260 ± 2,5	85 ± 1,5	54	5/15
41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	55	5/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	56	5/15
43	280 ± 2,5	93 ± 1,5	60	5/15
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	62	5/15
45	285 ± 2,5	95 ± 1,5	68	5/15
46	295 ± 2,5	96 ± 1,5	69	5/15

15.10 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ТЕРМО.46:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	225 ± 2,5	76 ± 1,5	46	5/15
36	230 ± 2,5	80 ± 1,5	47	5/15
37	240 ± 2,5	80 ± 1,5	51	5/15
38	250 ± 2,5	82 ± 1,5	53	5/15
39	255 ± 2,5	85 ± 1,5	54	5/15
40	260 ± 2,5	85 ± 1,5	56	5/15
41	260 ± 2,5	90 ± 1,5	58	5/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	60	5/15
43	280 ± 2,5	93 ± 1,5	63	5/15
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	69	5/15
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	70	5/15
46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	72	5/15

15.11 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ПРЕМИУМ.27:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная
--------	-----------	------------	-------------------------------	----------------------------------

				толщина, мм, допуск: $\pm 5\%$
35	225 $\pm$ 2,5	75 $\pm$ 1,5	40	3/15
36	230 $\pm$ 2,5	80 $\pm$ 1,5	41	3/15
37	240 $\pm$ 2,5	80 $\pm$ 1,5	41	3/15
38	250 $\pm$ 2,5	82 $\pm$ 1,5	41	3/15
39	250 $\pm$ 2,5	85 $\pm$ 1,5	47	3/15
40	255 $\pm$ 2,5	85 $\pm$ 1,5	52	3/15
41	260 $\pm$ 2,5	90 $\pm$ 1,5	53	3/15
42	270 $\pm$ 2,5	92 $\pm$ 1,5	53	3/15
43	275 $\pm$ 2,5	93 $\pm$ 1,5	60	3/15
44	285 $\pm$ 2,5	94 $\pm$ 1,5	63	3/15
45	290 $\pm$ 2,5	95 $\pm$ 1,5	64	3/15
46	300 $\pm$ 2,5	96 $\pm$ 1,5	64	3/15

15.12 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ПРЕМИУМ.30:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/ максимальная толщина, мм, допуск: $\pm 5\%$
35	225 $\pm$ 2,5	75 $\pm$ 1,5	40	3/15
36	230 $\pm$ 2,5	80 $\pm$ 1,5	41	3/15
37	240 $\pm$ 2,5	80 $\pm$ 1,5	43	3/15
38	240 $\pm$ 2,5	82 $\pm$ 1,5	43	3/15
39	255 $\pm$ 2,5	85 $\pm$ 1,5	47	3/15
40	260 $\pm$ 2,5	85 $\pm$ 1,5	47	3/15
41	265 $\pm$ 2,5	90 $\pm$ 1,5	51	3/15
42	270 $\pm$ 2,5	92 $\pm$ 1,5	52	3/15
43	275 $\pm$ 2,5	93 $\pm$ 1,5	53	3/15
44	285 $\pm$ 2,5	94 $\pm$ 1,5	62	3/15
45	290 $\pm$ 2,5	95 $\pm$ 1,5	64	3/15
46	300 $\pm$ 2,5	96 $\pm$ 1,5	65	3/15

15.13 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ПРЕМИУМ.46:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/ максимальная толщина, мм, допуск: $\pm 5\%$
35	225 $\pm$ 2,5	75 $\pm$ 1,5	42	3/15
36	230 $\pm$ 2,5	80 $\pm$ 1,5	44	3/15
37	240 $\pm$ 2,5	80 $\pm$ 1,5	44	3/15
38	245 $\pm$ 2,5	82 $\pm$ 1,5	45	3/15
39	250 $\pm$ 2,5	85 $\pm$ 1,5	51	3/15
40	260 $\pm$ 2,5	85 $\pm$ 1,5	51	3/15
41	265 $\pm$ 2,5	90 $\pm$ 1,5	51	3/15
42	270 $\pm$ 2,5	92 $\pm$ 1,5	52	3/15
43	275 $\pm$ 2,5	93 $\pm$ 1,5	55	3/15
44	285 $\pm$ 2,5	94 $\pm$ 1,5	62	3/15
45	290 $\pm$ 2,5	95 $\pm$ 1,5	64	3/15

46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	66	3/15
----	-----------	----------	----	------

15.14 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ПРЕМИУМ.46 (детские):

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
28	185 ± 2,5	66 ± 1,5	50	3/15
29	190 ± 2,5	70 ± 1,5	52	3/15
30	195 ± 2,5	70 ± 1,5	54	3/15
31	205 ± 2,5	75 ± 1,5	56	3/15

15.15 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки ПРЕМИУМ.46 PZ:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	225 ± 2,5	76 ± 1,5	42	3/15
36	230 ± 2,5	80 ± 1,5	44	3/15
37	240 ± 2,5	80 ± 1,5	44	3/15
38	245 ± 2,5	82 ± 1,5	45	3/15
39	250 ± 2,5	85 ± 1,5	51	3/15
40	260 ± 2,5	85 ± 1,5	50	3/15
41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	52	3/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	52	3/15
43	275 ± 2,5	93 ± 1,5	54	3/15
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	61	3/15
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	65	3/15
46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	68	3/15

15.16 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические полустельки ПРЕМИУМ.27:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	170 ± 2,5	70 ± 1,5	35	1/15
36	170 ± 2,5	70 ± 1,5	36	1/15
37	175 ± 2,5	70 ± 1,5	36	1/15
38	180 ± 2,5	70 ± 1,5	38	1/15
39	185 ± 2,5	70 ± 1,5	42	1/15
40	185 ± 2,5	70 ± 1,5	46	1/15
41	185 ± 2,5	70 ± 1,5	46	1/15
42	190 ± 2,5	75 ± 1,5	46	1/15
43	190 ± 2,5	75 ± 1,5	46	1/15
44	210 ± 2,5	80 ± 1,5	53	1/15

45	210 ± 2,5	80 ± 1,5	56	1/15
46	210 ± 2,5	80 ± 1,5	53	1/15

15.17 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические полустельки ПРЕМИУМ.27 (детские):

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
28	120 ± 2,5	60 ± 1,5	19	1/15
29	120 ± 2,5	60 ± 1,5	21	1/15
30	130 ± 2,5	60 ± 1,5	21	1/15
31	130 ± 2,5	65 ± 1,5	21	1/15

15.18 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические полустельки ПРЕМИУМ.30:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	165 ± 2,5	70 ± 1,5	35	2/15
36	170 ± 2,5	70 ± 1,5	38	2/15
37	180 ± 2,5	70 ± 1,5	35	2/15
38	175 ± 2,5	70 ± 1,5	36	2/15
39	185 ± 2,5	70 ± 1,5	42	2/15
40	185 ± 2,5	70 ± 1,5	44	2/15
41	185 ± 2,5	70 ± 1,5	45	2/15
42	190 ± 2,5	75 ± 1,5	42	2/15
43	195 ± 2,5	75 ± 1,5	42	2/15
44	200 ± 2,5	80 ± 1,5	52	2/15
45	210 ± 2,5	80 ± 1,5	54	2/15
46	215 ± 2,5	80 ± 1,5	55	2/15

15.19 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические полустельки ПРЕМИУМ.46:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 %	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	165 ± 2,5	70 ± 1,5	38	2/15
36	170 ± 2,5	70 ± 1,5	37	2/15
37	175 ± 2,5	70 ± 1,5	37	2/15
38	185 ± 2,5	70 ± 1,5	38	2/15
39	185 ± 2,5	70 ± 1,5	43	2/15
40	185 ± 2,5	70 ± 1,5	43	2/15
41	185 ± 2,5	70 ± 1,5	47	2/15
42	190 ± 2,5	75 ± 1,5	47	2/15
43	190 ± 2,5	75 ± 1,5	47	2/15

44	210 ± 2,5	80 ± 1,5	56	2/15
45	210 ± 2,5	80 ± 1,5	59	2/15
46	210 ± 2,5	85 ± 1,5	55	2/15

15.20 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки КОМФОРТ.27:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	225 ± 2,5	75 ± 1,5	46	5/15
36	230 ± 2,5	80 ± 1,5	48	5/15
37	240 ± 2,5	80 ± 1,5	49	5/15
38	250 ± 2,5	82 ± 1,5	50	5/15
39	255 ± 2,5	85 ± 1,5	52	5/15
40	260 ± 2,5	85 ± 1,5	54	5/15
41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	56	5/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	57	5/15
43	275 ± 2,5	93 ± 1,5	58	5/15
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	69	5/15
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	70	5/15
46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	70	5/15

15.21 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки КОМФОРТ.46:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	225 ± 2,5	75 ± 1,5	49	5/15
36	230 ± 2,5	80 ± 1,5	49	5/15
37	240 ± 2,5	80 ± 1,5	50	5/15
38	250 ± 2,5	82 ± 1,5	51	5/15
39	255 ± 2,5	85 ± 1,5	54	5/15
40	260 ± 2,5	85 ± 1,5	55	5/15
41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	58	5/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	57	5/15
43	280 ± 2,5	93 ± 1,5	58	5/15
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	70	5/15
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	72	5/15
46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	72	5/15

15.22 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедические стельки КОМФОРТ.46 PZ:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
--------	-----------	------------	-------------------------------	---

35	225 ± 2,5	75 ± 1,5	50	5/10
36	230 ± 2,5	80 ± 1,5	49	5/10
37	240 ± 2,5	80 ± 1,5	52	5/10
38	250 ± 2,5	82 ± 1,5	54	5/10
39	255 ± 2,5	85 ± 1,5	56	5/10
40	260 ± 2,5	85 ± 1,5	56	5/10
41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	58	5/10
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	61	5/10
43	280 ± 2,5	93 ± 1,5	60	5/10
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	70	5/10
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	73	5/10
46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	75	5/10

15.23 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения ортопедический вкладыш для использования в модельной обуви Soft Pad:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г
S	110 ± 2,5	75 ± 1,5	7
M	120 ± 2,5	80 ± 1,5	9
L	125 ± 2,5	80 ± 1,5	10

15.24 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения полустелька 3/4 1 см для компенсации разной высоты нижних конечностей:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
S	135 ± 2,5	55 ± 1,5	12	2/10
M	145 ± 2,5	65 ± 1,5	13	2/10
L	155 ± 2,5	65 ± 1,5	14	2/10

15.25 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения полустелька 3/4 1,5 см для компенсации разной высоты нижних конечностей:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
S	135 ± 2,5	55 ± 1,5	20	1/15
M	145 ± 2,5	65 ± 1,5	22	1/15
L	155 ± 2,5	65 ± 1,5	24	1/15

15.26 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения полустелька 3/4 2 см для компенсации разной высоты нижних конечностей:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная
--------	-----------	------------	-------------------------------	----------------------------------

				толщина, мм, допуск: $\pm 5\%$
S	$135 \pm 2,5$	$55 \pm 1,5$	23	2/20
M	$145 \pm 2,5$	$65 \pm 1,5$	25	2/20
L	$155 \pm 2,5$	$65 \pm 1,5$	33	2/20

15.26 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения полустелька 3/4 3 см для компенсации разной высоты нижних конечностей:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/ максимальная толщина, мм, допуск: $\pm 5\%$
S	$135 \pm 2,5$	$55 \pm 1,5$	36	2/30
M	$145 \pm 2,5$	$65 \pm 1,5$	40	2/30
L	$155 \pm 2,5$	$65 \pm 1,5$	42	2/30

15.27 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения полустельки 3/4 кожаные для модельной обуви с поперечной выкладкой:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/ максимальная толщина, мм, допуск: $\pm 5\%$
35	$160 \pm 2,5$	$70 \pm 1,5$	10	2/10
36	$160 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	10	2/10
37	$165 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	10	2/10
38	$170 \pm 2,5$	$75 \pm 1,5$	10	2/10
39	$170 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	12	2/10
40	$175 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	13	2/10
41	$180 \pm 2,5$	$80 \pm 1,5$	14	2/10
42	$185 \pm 2,5$	$85 \pm 1,5$	16	2/10
43	$190 \pm 2,5$	$95 \pm 1,5$	16	2/10
44	$195 \pm 2,5$	$100 \pm 1,5$	17	2/10
45	$200 \pm 2,5$	$105 \pm 1,5$	18	2/10
46	$205 \pm 2,5$	$105 \pm 1,5$	19	2/10

15.28 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения стелька разгрузочная FORSTM 15 мм (для диабетической стопы):

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Толщина мм, допуск: $\pm 5\%$
Универсальный размер	$310 \pm 2,5$	$115 \pm 1,5$	128	15

15.29 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения стелька разгрузочная FORSTM 9 мм (для диабетической стопы):

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Толщина, мм, допуск: $\pm 5\%$
--------	-----------	------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Универсальный размер	310 ± 2,5	115 ± 1,5	77	9
----------------------	-----------	-----------	----	---

15.30 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения стелька разгрузочная FORSTM 5 мм (для диабетической стопы):

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Толщина, мм, допуск: ± 5 %
Универсальный размер	310 ± 2,5	115 ± 1,5	54	6

15.31 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения стелька разгрузочная FORSTM 3 мм (для диабетической стопы):

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Толщина, мм, допуск: ± 5 %
Универсальный размер	310 ± 2,5	115 ± 1,5	42	4

15.32 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения стельки анатомические MULTISPORT:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 %	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	225 ± 2,5	75 ± 1,5	30	3/15
36	230 ± 2,5	85 ± 1,5	31	3/15
37	235 ± 2,5	85 ± 1,5	32	3/15
38	250 ± 2,5	85 ± 1,5	36	3/15
39	255 ± 2,5	85 ± 1,5	37	3/15
40	255 ± 2,5	85 ± 1,5	38	3/15
41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	40	3/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	41	3/15
43	275 ± 2,5	93 ± 1,5	42	3/15
44	280 ± 2,5	94 ± 1,5	47	3/15
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	47	3/15
46	295 ± 2,5	96 ± 1,5	47	3/15

15.33 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения стельки анатомические RUNNING:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Масса пары, г., допуск: ± 5 г	Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %
35	225 ± 2,5	75 ± 1,5	29	3/15
36	230 ± 2,5	78 ± 1,5	30	3/15
37	235 ± 2,5	80 ± 1,5	31	3/15
38	250 ± 2,5	82 ± 1,5	35	3/15
39	255 ± 2,5	85 ± 1,5	36	3/15
40	260 ± 2,5	85 ± 1,5	37	3/15

41	265 ± 2,5	90 ± 1,5	38	3/15
42	270 ± 2,5	92 ± 1,5	38	3/15
43	280 ± 2,5	93 ± 1,5	40	3/15
44	285 ± 2,5	94 ± 1,5	45	3/15
45	290 ± 2,5	95 ± 1,5	46	3/15
46	300 ± 2,5	96 ± 1,5	48	3/15

15.34 Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, вариант исполнения подпяточник с замшевым покрытием Alcantara:

<i>Размер</i>	<i>Длина, мм</i>	<i>Ширина, мм</i>	<i>Масса пары, г., допуск: ± 5 %</i>	<i>Минимальная толщина/максимальная толщина, мм, допуск: ± 5 %</i>
S	100 ± 2,5	65 ± 1,5	15	2/10
M	100 ± 2,5	70 ± 1,5	19	2/10
L	100 ± 2,5	75 ± 1,5	23	2/10

16. Сведения о марках и материалах , из которых изготовлено медицинское изделие.

	<u>Материал</u>	<u>Марка/Производитель</u>
НАТУРАЛ КАРБОН.27	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Углеродная мембрана	LDM S.L.
	Вставка анти-шок под пяткой Poron 3 мм	Rogers Corporation (USA)
	Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44M	Larps Group srl
НАТУРАЛ КАРБОН 30	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Углеродная мембрана	LDM S.L.
	Амортизатор Poron 3 мм	Rogers Corporation (USA)
	Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
НАТУРАЛ КАРБОН 46	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Углеродная мембрана	LDM S.L.
	Амортизатор Poron 3 мм	Rogers Corporation (USA)
	Продольно-поперечные выкладки	Brötje GmbH

	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
НАТУРАЛ 27 НАТУРАЛ 27 (детские)	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Амортизатор Poron 3 мм	Rogers Corporation (USA)
	Продольная выкладка	Brötje GmbH
	Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
НАТУРАЛ 30	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Амортизатор Poron 3 мм	Rogers Corporation (USA)
	Поперечная выкладка	REMP Spa
	Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
НАТУРАЛ 46	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Амортизатор Poron 3 мм	Rogers Corporation (USA)
	Поперечная выкладка	Brötje GmbH
	Термоформованный каркас анатомической формы ¾ из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
ТЕРМО. 27	Натуральная шерсть	Mössmer Spa
	Войлок	O.R.V. Manufacturing Spa
	Вставка анти-шок - материал Poron с эффектом памяти	Rogers Corporation (USA)
	Мембрана - микропористый пвх материал Poron с эффектом памяти	Rogers Corporation (USA)

	Вкладка – продольная	Brötje GmbH
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
ТЕРМО. 30	Натуральная шерсть	Mössmer Spa
	Войлок	O.R.V. Manufacturing Spa
	Вставка анти-шок - материал Poron с эффектом памяти	Rogers Corporation (USA)
	Мембрана - микропористый пвх материал Poron с эффектом памяти	Rogers Corporation (USA)
	Вкладка – поперечная	REMP Spa
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
ТЕРМО. 46	Натуральная шерсть	Mössmer Spa
	Войлок	O.R.V. Manufacturing Spa
	Вставка анти-шок - материал Poron с эффектом памяти	Rogers Corporation (USA)
	Мембрана - микропористый пвх материал Poron с эффектом памяти	Rogers Corporation (USA)
	Вкладка – продольно-поперечная	REMP Spa
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
ПРЕМИУМ.27	Покрытие Алькантара (искусственная замша)	Alcantara Spa
	Вставка анти-шок - материал Poron 3 мм	O.R.V. Manufacturing Spa
	Мембрана - материал Memory Poron 3мм	Rogers Corporation (USA)
	Вкладка – продольная	Brötje GmbH

	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
ПРЕМИУМ.30	Покрытие Алькантара (искусственная замша)	Alcantara Spa
	Вставка анти-шок - материал Poron 3 мм	O.R.V. Manufacturing Spa
	Мембрана - материал Memory Poron 3мм	Rogers Corporation (USA)
	Вкладка – поперечная	REMP Spa
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
ПРЕМИУМ.46 ПРЕМИУМ.46 (детские) ПРЕМИУМ.46 PZ	Покрытие Алькантара (искусственная замша)	Alcantara Spa
	Вставка анти-шок - материал Poron 3 мм	O.R.V. Manufacturing Spa
	Мембрана - материал Memory Poron 3мм	Rogers Corporation (USA)
	Вкладка – продольно-поперечная	REMP Spa
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
Полустельки ПРЕМИУМ.27 Полустельки ПРЕМИУМ.27 (детские) Полустельки ПРЕМИУМ.30 Полустельки ПРЕМИУМ.46	Покрытие Алькантара (искусственная замша)	Alcantara Spa
	Вставка анти-шок - материал Poron 3 мм	Rogers Corporation (USA)
	Мембрана - материал Memory Poron 3мм	Rogers Corporation (USA)
	Вкладка – продольная	Brötje GmbH
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
КОМФОРТ.27	Покрытие Alcantara (искусственная замша)	Alcantara Spa
	Ударопоглощающая вставка - материал с эффектом памяти Poron	Rogers Corporation (USA)

	Мембрана – пенополиуретан с эффектом памяти Rogon, 5 мм	Rogers Corporation (USA)
	Выкладка свода – продольная	Brötje GmbH
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
КОМФОРТ.46 КОМФОРТ.46 PZ	Покрытие Алькантара (искусственная замша)	Alcantara Spa
	Вставка анти-шок - материал Rogon с эффектом памяти	Rogers Corporation (USA)
	Мембрана - микропористый пвх материал Метопу Rogon 5мм	Rogers Corporation (USA)
	Вкладка - продольно-поперечная	REMP Spa
	Термоформованный каркас анатомической формы 3/4 из смеси пластика и резины	C.T Plast srl
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
Вкладыш для использования в модельной обуви Soft Pad	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Полиуретан	Cauchos Karey S.A.
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl
Полустелька $\frac{3}{4}$ 1 см для компенсации разной высоты нижних конечностей Полустелька $\frac{3}{4}$ 1.5 см для компенсации разной высоты нижних конечностей Полустелька $\frac{3}{4}$ 2 см для компенсации разной высоты нижних конечностей Полустелька $\frac{3}{4}$ 3 см для компенсации разной высоты	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Полиуретан	Cauchos Karey S.A.
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/M	Larps Group srl

нижних конечностей		
Полустельки 3/4 кожаные для модельной обуви с поперечной выкладкой	Натуральная кожа	Conc. Cacciagli Spa
	Полиуретан	Cauchos Karey S.A.
	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/М	Larps Group srl
Стелька разгрузочная FORSTM 15 ММ (для диабетической стопы)	Покрытие Алькантара (искусственная замша)	Alcantara Spa
Стелька разгрузочная FORSTM 9 ММ (для диабетической стопы)	Съемные вставки- материал Poron	Rogers Corporation (USA)
Стелька разгрузочная FORSTM 5 ММ (для диабетической стопы)	Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/М	Larps Group srl
Стелька разгрузочная FORSTM 3 ММ (для диабетической стопы)		
Стельки анатомические MULTISPORT Стельки анатомические RUNNING Подпяточник с замшевым покрытием Alcantara, со вставкой анти-шок под пяткой	Покрытие Алькантара (искусственная замша)	Alcantara Spa
	Амортизатор- материал Poron	Rogers Corporation (USA)
	Мембрана - материал Poron	Rogers Corporation (USA)
	Клеящий слой - Полихлоропреновый клей на основе растворителя TENACOL 44/М	Larps Group srl

17. Маркировка и упаковка

Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения:

- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН.27
- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН 30
- Стельки НАТУРАЛ КАРБОН 46
- Стельки НАТУРАЛ 27
- Стельки НАТУРАЛ 27 детские
- Стельки НАТУРАЛ 30
- Стельки НАТУРАЛ 46
- Стельки ТЕРМО.27
- Стельки ТЕРМО.30
- Стельки ТЕРМО.46
- Стельки ПРЕМИУМ.27
- Стельки ПРЕМИУМ.30
- Стельки ПРЕМИУМ.46
- Стельки ПРЕМИУМ.46 детские

- Стельки ПРЕМИУМ.46 PZ
- Полустьелки ПРЕМИУМ.27
- Полустьелки ПРЕМИУМ.27 детские
- Полустьелки ПРЕМИУМ.30
- Полустьелки ПРЕМИУМ.46
- Стельки КОМФОРТ.27
- Стельки КОМФОРТ.46
- Стельки КОМФОРТ.46 PZ
- Вкладыш для использования в модельной обуви Soft Pad
- Полустьелка 3/4 1 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полустьелка 3/4 1,5 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полустьелка 3/4 2 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полустьелка 3/4 3 см для компенсации разной высоты нижних конечностей
- Полустьелки 3/4 кожаные для модельной обуви с поперечной выкладкой
- Стелька разгрузочная FORSTM 15 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 9 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 5 MM (для диабетической стопы)
- Стелька разгрузочная FORSTM 3 MM (для диабетической стопы)
- Стельки анатомические MULTISPORT
- Стельки анатомические RUNNING
- Подпяточник с замшевым покрытием Alcantara, со вставкой анти-шок под пяткой

Производитель:

SALUBER SRL
Via Monte Verena
31 36022 Cassola (VI) – Italy

Место производства:

SALUBER SRL
Via Monte Verena
31 36022 Cassola (VI) – Italy

17.1 Маркировка на упаковке производителя:

Маркировка на упаковке производителя:

- Логотип, название и адрес компании-изготовителя.
- Индекс на изделие, название изделия.
- Номер партии и размер изделия.
- Доступные размеры изделия.
- Изображение изделия.
- Название и адрес дистрибьютора и импортера в России.
- Знак «Обратитесь к инструкции по использованию» 
- Символ «Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и стандартам Европейского союза» 
- Знак вторичной переработки 
- Соответствие требованиям стандарта Oeko-Tex 100 
- Знак или надпись: Материал безвреден, подлежит переработке 
- Знак, показывающий, что компания-производитель выплачивает определенную компенсацию на восстановление окружающей среды 

Маркировка (проект) этикетки на упаковке для обращения на территории РФ:

- Наименование изделия.
- Номер партии. 

- Номер по каталогу/артикул 
- Дата изготовления и упаковывания. 
- Размер изделия.
- Комплектность/количество изделий в упаковке.
- Гарантийный срок и срок годности. 
- Информация об изготовителе (наименование компании, юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, веб-сайт). 
- Информация об уполномоченном представителе производителя (наименование компании, юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, веб-сайт).
- Номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
- Знак или надпись о наличии/отсутствии латекса в материале изделия. 
- Знак соответствия требованиям стандарта Oeko-Tex 100 
- Знак «Обратитесь к инструкции по использованию» 
- Знак соответствия требованиям директивы ЕС. 
- Знак соответствия требованиям Российских государственных стандартов. 
- Знак или надпись: Материал безвреден, подлежит переработке. 
- Знак, показывающий, что компания-производитель выплачивает определенную компенсацию на восстановление окружающей среды. 
- Штрих-код.

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия


SALUBER SRL
Via Monte Verena, 31 36022 Cassola (VI) – Italy

Стельки ТЕРМО.27, размер: 40

РУ № _____

 XX.XX.XXXX
 XX.XX.XXXX

LOT XXXXX **REF** XXXXX










УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ»
141018 Московская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, 6, VII, комнаты 1-10
Тел.: 8 (495) 543-77-20; 8 (926) 602-71-77



SALUBER SRL

Via Monte Verena, 31 36022 Cassola (VI) – Italy

Стельки ТЕРМО.27, размер: 40

РУ № _____ от _____



XX.XX.XXXX



.XX.XX.XXXX



XXXXX



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ»
141018 Московская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, 6, VII, комнаты 1-10
Тел.: 8 (495) 543-77-20; 8 (926) 602-71-77

17.2 Вид упаковки

Каждое изделие вместе с инструкцией по применению упаковывается в картонную коробку. Варианты исполнения: Полустелька $\frac{3}{4}$ 1 см для компенсации разной высоты нижних конечностей; Полустелька $\frac{3}{4}$ 1.5 см для компенсации разной высоты нижних конечностей; Полустелька $\frac{3}{4}$ 2 см для компенсации разной высоты нижних конечностей; Полустелька $\frac{3}{4}$ 3 см для компенсации разной высоты нижних конечностей; Полустельки $\frac{3}{4}$ кожаные для модельной обуви с поперечной выкладкой упаковываются в полиэтиленовый пакет.



18. Перечень рисков, идентифицированных в процессе анализа рисков

На основании результатов проведенного анализа рисков установлено, что предпринимаемые меры по минимизации рисков являются эффективными и остаточный риск является приемлемым.

19. Маркировка

■ Этикетка

На этикетке полностью указана вся необходимая информация. Однако, следует выделить размер стопы.

■ Упаковка

На этикетке полностью указана вся необходимая информация. Однако, следует выделить размер стопы.

▪ **Инструкция по применению**

Инструкция по применению содержит всю необходимую информацию.

19. Экологическая безопасность

Стельки и подпяточники при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации не приносят вреда окружающей среде

20. Сведения о верификации и валидации медицинского изделия

«Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения» поставляются не стерильными.

21. Материалы животного или человеческого применения с указанием сведений об их биологической совместимости.

Компания производитель SALUBER SRL, Италия с полной ответственностью заявляет, что при производстве медицинского изделия «Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения» материалы животного и человеческого применения не используются.

22. Лекарственные вещества входящие в состав медицинского изделия.

Компания производитель SALUBER SRL, Италия с полной ответственностью заявляет, что при производстве медицинского изделия «Изделие медицинское ортопедическое для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения», лекарственные вещества не применяются.

23. Метод стерилизации.

Медицинское изделие поставляется не стерильным.

24. Техническое обслуживание, ремонт

Техническое обслуживание медицинского изделия «Изделия медицинские ортопедические САЛУБЕР, в вариантах исполнения» не требуется.

25. Утилизация для Российской Федерации

Изделие изготовлено из экологически безопасных материалов, которые относятся к классу эпидемиологически безопасных отходов и подлежат полной утилизации без каких-либо ограничений в пунктах сбора и утилизации. С целью утилизации изделие необходимо поместить в мусоросборный контейнер или иную емкость для сбора отходов.

Упаковка может быть переработана.

Необходимо строго выполнять правовые нормы пользовательского сообщества.

26. Транспонирование

Транспортирование упакованных изделий должно осуществляться в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, в трюмах судов, отапливаемых и герметизированных отсеках самолетов в соответствии с требованиями правил, действующих на данном виде транспорта, при следующих условиях окружающей среды:

- температура окружающего воздуха от – 20 до + 50 0С;
- относительная влажность, не более 70%;

27. Сведения по уходу за медицинским изделием

При использовании изделия, его необходимо регулярно очищать и мыть.

Очистку изделий можно производить тряпочкой, намоченной в теплом мыльном растворе или мягкой щеткой. После ополаскивания протереть мягкой тканью. Не мыть в воде выше 40 °С, не сушить вблизи от нагревательных приборов, так как изделия могут потерять свою форму.

Изделия из натуральной кожи допускается протирать и проветривать, но не мыть.

28. Условия хранения

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке при комнатной температуре и влажности; не должны подвергаться прямому воздействию источников света и тепла, таких как печи, нагреватели, радиаторы.

29. Гарантийные обязательства, срок службы медицинского изделия

На «Изделия медицинские ортопедические для обуви САЛУБЕР, в вариантах исполнения» предоставляется 6-месячная гарантия (с даты продажи) на случай производственных дефектов. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, несоблюдением условий хранения, неправильным использованием или неправильной модификацией со стороны покупателя.

30. Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ »

141018 Московская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, 6, VII, комнаты 1-10

Тел.: 8 (495) 543-77-20

8 (926) 602-71-77

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA
VICENZA CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY HANDCRAFT AND AGRICULTURE

In relazione all'istanza registrata al n. 501 del 07/07/2022 di Sig. SHANIOTTO CLAUDIA

titolare della ditta SALUBER SRL

con la quale si è convenuto che la medesima ha potuto in forma legale e
ordinaria della ditta impresa a valere per l'estero.

In relazione all'istanza registrata al n. 501 del 07/07/2022 di Sig. SHANIOTTO CLAUDIA

proprietaria della ditta SALUBER SRL

con la quale si è convenuto che la medesima ha potuto in forma legale e
ordinaria della ditta impresa a valere per l'estero.



Bassano del Grappa

01 07 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Paola Cavallin





Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Stato: **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2 è stato firmato da

Cavallin Paola

3 in qualità di p. Il Segretario Generale

4 è munito del contrassegno/timbro di

**Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura Vicenza - Ufficio di Bassano del Grappa**

Attestato

5 in Vicenza 6 il 04/07/2022

7 da Prefettura di Vicenza - U.T.G.

8 col numero 9983

9 Sigillo/bollo

101 Funzionario Assistente Sociale
Dr.ssa Daria Leonardi



ПРОМЫШЛЕННАЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА Г. ВИНЧЕНЦА
В связи с запросом, представленным **ЗМАНИОТТО КЛАУДИЕЙ**
Владелец/официальный представитель/доверенное лицо компании **ООО «САЛУБЕР»**

БАССАНО-ДЕЛЬ-ГРАППА

01.07.2022 г.

**ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И
РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА Г. ВИНЧЕНЦА**

**Генеральный секретарь
Паска Каваллин /подпись/**

/круглая печать/:
**ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ, РЕМЕСЛЕННАЯ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПАЛАТА Г. ВИНЧЕНЦА**
Отдел БАССАНО-ДЕЛЬ-ГРАППА

ГЕРБ Итальянской Республики/

**ПРЕФЕКТУРА Г. ВИЧЕНЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна **ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА**
Настоящий официальный документ
2. Подписан **КАВАЛЛИН ПАОЛОЙ**
3. Выступающим в качестве **ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАТОРА**
4. Скреплен печатью/штампом **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И РЕМЕСЛЕННОЙ ПАЛАТЫ Г. ВИЧЕНЦА – ОТДЕЛ БАССАНО-ДЕЛЬ-
ГРАППА**

УДОСТОВЕРЕНО

5. В г. **ВИНЧЕНЦА** 6. 04/07/2022
7. ПРЕФЕКТУРОЙ Г. ВИЧЕНЦА – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
8. За № 9933
9. Место печати

/печать/:

**ПРЕФЕКТУРА Г. ВИЧЕНЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

10. Подпись
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
/подпись/ Дария Леонарди

/печать/:

ПРЕФЕКТУРА Г. ВИЧЕНЦА

Министерство **ГЕРБОВАЯ МАРКА**
Экономики и Финансов 16,00 €
(ШЕСТНАДЦАТЬ/00)
00025278 00001FD9 W1DGF001
00000352 04/07/2022 10:05:20
4578-00088 03A1502S7103W
ID: 011905293872101
/Машиносчитываемая строка/

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого сентября две тысячи двадцать второго года


**Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.**

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2022-41 - 2346

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

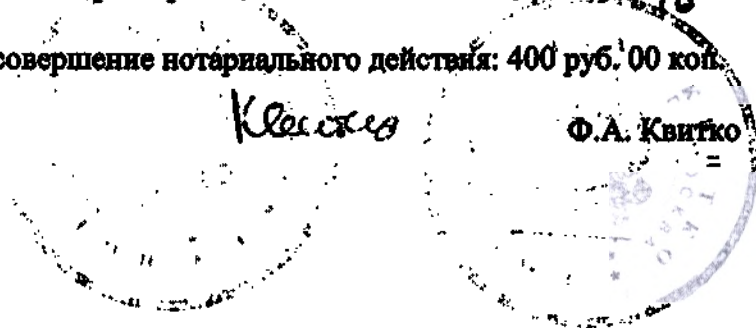

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 52 листов

Нотариус Квитко

Российская Федерация
Город Москва

Двадцатого сентября две тысячи двадцать второго года
Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне
документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2022-41-2347
Уплачено за совершение нотариального действия: 3180 руб.



Квитко

Ф.А. Квитко

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 53 лист(а) (ов)

Нотариус Квитко

Ф.А. Квитко

