

УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ТОНУС»
С.В.НАТАЛУХА
«26» ОКТЯБРЯ 2022 Г.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
КОРРЕКТОР ОСАНКИ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ
«ЭЛАСМА» ПО ТУ 32.50.22-018-10434277-2018**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Производительное общество «Тонус» (АО «Тонус»)
Россия, 243300, Брянская область, район Унечский, г. Унеча, ул.
входная, дом 30.
т./факс (4832)50-51-55 {499}374-67-95
электронные почты: unga@unga.ru, tonus@yandex.ru

**НАИМЕНОВАНИЕ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ
32.50.22-018-10434277-2018, варианты исполнения:

Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела
позвоночника «ЭЛАСМА», модель С-810, размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, в составе:

Корректор одного размера – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела
позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА», модель С-820,
размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в составе:

Корректор одного размера – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми
ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830, размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
модель С-830 ЮНИОР, размерный ряд: 1, 2, 3, в составе:

Корректор одного размера/одной модели – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Корректор осанки медицинский эластичный универсальный с
регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-840, в составе:

Корректор с двумя кольцами – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

далее – изделие, медицинское изделие, корректор

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначен для профилактики и лечения деформаций позвоночника
с целью компрессионной коррекции шейного, грудного, поясничного и
крестцового отделов позвоночника.

Рекомендуется для формирования навыков физиологически правильной
осанки у взрослых и детей. Для устранения болезненного напряжения
мышц в области грудного и шейного отделов позвоночника при
больших нагрузках и деформациях в сидячем положении. Является
необходимым ортопедическим приспособлением.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Профилактической целью для предупреждения искривления осанки,
для профилактики и лечения таких заболеваний как: сутулость,
остеохондроз и сколиоз верхних отделов позвоночника на ранних
стадиях.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия,
острые инфекции мягких тканей.

**ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Выбор неправильного размера и вида корректора осанки может вызвать
дискомфорт.

Состав медицинского изделия

Полотно трикотажное эластичное, состав: хлопок -36%, ПАН-29%,
полиэстер-16%, лайкра-19% (Корректор осанки медицинский
эластичный для верхнего отдела позвоночника «ЭЛАСМА», модель С-
810, размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Полотно трикотажное эластичное, состав: ПАН - 61%, полиэстер - 15%,
лайкра - 24% (Корректор осанки медицинский эластичный универсальный с
регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-840).

отдела позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА», модель С-820,
размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Полотно трикотажное эластичное, состав: ПАН - 61%, полиэстер - 15%,
лайкра - 24% (Корректор осанки медицинский эластичный с
регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830, размерный ряд: 1,
2, 3, 4, 5, 6; модель С-830 ЮНИОР, размерный ряд: 1, 2, 3).

Полотно трикотажное эластичное, состав: хлопок 36%, ПАН - 29%,
полиэстер - 16%, лайкра - 19% или ПАН - 64%, полиэстер - 15%, лайкра
- 21% (Корректор осанки медицинский эластичный универсальный с
регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-840).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Величина
Растяжимость, %, не менее	80
Поверхностная плотность, г/м2, не менее	400
Разрывная нагрузка, Н, не менее	147,0
Остаточные деформации, %, не более	10,0
Усадка после стирки, %, не более	10,0
Рабочая растяжимость, %, не более	20
Разрывное удлинение, %	Не менее значения растяжимости
Разрывное удлинение после стирки, % не более значения до стирки	20

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Очень важно выбрать правильный размер, который обеспечит
оптимальный эффект и правильный срок службы продукта. Правильно
подобранный корректор не должен сползать, давить и вызывать другие
неприятные ощущения.

Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела
позвоночника «ЭЛАСМА», модель С-810, размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 подходит пациентам с обхватом тела на уровне лопаток от 95 до 135
см. Измерения пациента должны проводиться на уровне плеч поверх
прижатых к телу рук, как показано на рисунке (у женщин при измерении
лента должна проходить над грудью).

Таблица типоразмеров:

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8
Обхват тела на уровне плеч	95- 100	101- 105	106- 110	111- 115	116- 120	121- 125	126- 130	131- 135

Правильно подобранный размер обеспечит оптимальный эффект и
сократит время использования изделия. При выборе размера
необходимо измерить обхват груди на уровне лопаток (у женщин
измерительная лента должна проходить под грудью) и сопоставить его
с таблицей.

Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела
позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА», модель С-820
размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 подходит пациентам с обхватом тела на
уровне подмышек от 70 до 135 см.

Таблица типоразмеров:

Размер	1	2	3	4	5	6	7
Обхват тела на уровне подмышек	70- 79	80- 89	90- 99	100- 109	110- 119	120- 127	128- 135

Правильно подобранный размер обеспечит оптимальный эффект и
сократит время использования изделия. При выборе размера
необходимо измерить обхват груди на уровне подмышек и сопоставить
его с таблицей.

Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями
«ЭЛАСМА», модель С-830, размерный ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6; модель С-830
ЮНИОР, размерный ряд: 1, 2, 3 подходит пациентам с обхватом тела на
уровне подмышек от 70 до 127 см.

Таблица типоразмеров:

МОДЕЛЬ С-830

Размер	1	2	3	4	5	6
Обхват груди на уровне подмышек	70- 79	80- 89	90- 99	100- 109	110- 119	120- 127

ИЗДЕЛИЕ С-830 ЮНИОР

	Размер	1	2	3
	Обхват груди на уровне подмышек	54-58	59-64	65-69

Правильно подобранный размер обеспечит оптимальный эффект и продлит время использования изделия. При выборе размера необходимо измерить обхват груди на уровне подмышек и сопоставить с таблицей.

НАзначение МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Консультируйтесь с врачом о необходимости носить корректор и о долговечности его ношения. Рекомендуется надевать на хлопчатобумажную одежду.

Носить изделие как показано на рисунке потребительской упаковки. Справьте и отрегулируйте положение бретелей и ремней, закрепите корректор на талии с помощью застежки велкро (при ее наличии). В некоторых случаях в процессе надевания или снятия изделия может потребоваться посторонняя помощь.

При нагибании или иных физических нагрузках можно ослабить компрессию до комфортного состояния. Плотность прилегания регулируйте пряжками и застежкой. Следите за тем, чтобы не было складок одежды под лентами корректора осанки.

УХОД ЗА МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

Перед стиркой из медицинского изделия необходимо вынуть жесткие элементы. Стирать руками с добавлением нейтральных моющих средств при температуре не выше +40° С. Изделия с застежкой велкро перед стиркой застегнуть. Сушить при комнатной температуре в расправленном виде. После сушки перед следующим использованием можно вставить ребра жесткости на прежнее место.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

не применимо.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными действующими ТУ.

Гарантийный срок хранения — 5 лет с момента его изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

лет.

УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

При нормальной эксплуатации изделие не оказывает негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своем составе изделие не содержит драгоценных металлов, веществ, опасных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.

Утилизация изделия и его составных частей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Изделие после окончания использования может утилизироваться как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как бытовые отходы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия в транспортной упаковке устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании и хранении по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при температуре до +42°С и относительной влажности до 80%.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

НАЛИЧИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В составе изделия отсутствуют лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения.

РЕКЛАМАЦИЯ

По вопросам качества медицинского изделия обращаться:

Акционерное общество «Тонус» (АО «Тонус»)

Россия, 243300, Брянская область, район Унечский, г. Унеча, ул. Совхозная, дом 30.

тел./факс (4832)50-51-55 (499)374-67-95

электронные почты: unga@unga.ru, tonus@yandex.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись [подпись] /Наталуха С.В. /

«26» октября 2022 г.

М.П.

