

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
(УДОСТОВЕРЕНИЕ) ПОДПИСИ
личности от имени корпорации**

תס"ס 1291/22

**אימות חתימתו
של אדם
בשם תאגיד**

Я, нижеподписавшаяся, Зингерман
Орли, нотариус, номер лицензии
299856, адрес ул. Жаботинского, 35, г.
Рамат Ган, Израиль, настоящим
документом подтверждаю, что
30.11.2022, в моем присутствии
находилась госпожа Чертков
Светлана, личность которой
установлена мной в соответствии с
предъявленным мне паспортом
государства Израиль № 21807002
Выданным 11.09 2014 года в городе
Кфар Саба, в Израиле.

Я убедилась, что госпожа Чертков
Светлана, поняла смысл данного
документа и подписала его по
собственному желанию,
обозначенный буквой «А» от имени
корпорации MEDEREN NEOTECH LTD
No. 515505329, находящейся в Тель-
Авиве, Израиль.

Как подтверждение сказанному выше,
госпожа Чертков Светлана подписала
приложенный документ,
обозначенный буквой «А» выданный
от имени корпорации.

В подтверждение этого я,
удостоверившись в личности
Чертков Светланы, своей личной
подписью.
Дата 30.11.2022

Печать и подпись нотариуса

30.11.2022



ושוכנעתי כי הניצב/ת/ים בפני הבי/ה/ו הבנה
מלאה את משמעות הפעולה
וחתם/מה/ו מרצונו/ם החופשי על המסמך
המצורף בזה ומסון באות "א", בשם חברה
מדרו נאוטע "מ"
שמספרה 515505329

שמיקומה: תל אביב, ישראל

בתולף תפקידו/ה/ם וסמכותו/ה/ם וסמכותו/ה/ם
כמורשה/ת/
חתימה מטעם ובשם החברה, אני מאשר

כראיה להנחת, להנחת דעתי, לשם הוכחת
רשותו/ה/ם של מל מר(ת) צירטקוב סבטלנה
לחתום על המסמך הרצ"ב והמסומן באות "א"
תשם החברה הנייל
ולאיה נני מאמת את חתימתו/ה/ם של
החותם/ים הנ"ל

היום 30.11.2022

שכ"ט נוסטריוני 322+מע"מ




Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

УТВЕРЖДАЮ

Mederen Neotech Ltd.

Генеральный директор Светлана Чертков

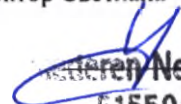
Mederen Neotech Ltd.
515505329

Инструкция по применению

Контуры дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной
вентиляции легких

Версия 7



2022

Разработчик и производитель: «Медерен Неотех Лтд.» / Mederen Neotech Ltd.
Адрес разработчика/производителя: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016
Место производства: R Vent Medikal Üretim A.Ş. Address: 29 Ekim Mah. Balkan Cad. No. 33 TORBALI
İZMİR/TÜRKİYE.
(Р Вент Медикал Уретим А.Ш. Адрес: 29 Эким Мах. Балкан Джад., №33 Торбалы Измир/Турция)





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Контурь дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких в вариантах исполнения:

- I. Контурь дыхательные анестезиологические;
- II. Контурь дыхательные полузакрытые;
- III. Контурь дыхательные с клапаном автоматического ограничения давления (APL);
- IV. Контурь дыхательные для искусственной вентиляции лёгких;
- V. Контурь для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPV);
- VI. Контурь для дыхательной терапии на дому;
- VII. Контурь дыхательные с подогревом;
- VIII. Контурь дыхательные неонатальные;
- IX. Контурь дыхательные для СРАР-терапии;
- X. Контурь дыхательные для ВРАР-терапии.

Каждый вариант исполнения контуров разделяется на модели. Модели контуров приведены в разделе «Комплектность» настоящей инструкции по применению.

Общая информация

Настоящие руководство распространяются на Контурь дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких в вариантах исполнения (далее по тексту – контурь).

Разработчик и производитель: «Медерен Неотекс Лтд.» / Mederen Neotech Ltd.

Адрес разработчика/производителя: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal code: 6777016

Место производства: R Vent Medikal Üretim A.Ş. Address: 29 Ekim Mah. Balkan Cad. No. 33 TORBALI İZMİR/TÜRKİYE.

(Р Вент Медикал Уretim А.Ш. Адрес: 29 Эким Мах. Балкан Джад., №33 Торбалы Измир/Турция)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

Адрес: 197229, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Лахтинский дом 113, корпус ЛИТЕР А, офис 2

Тел. +7 (812) 324-41-00

e-mail: info@alfamedex.ru

Назначение медицинского изделия:

Контурь предназначены для обеспечения беспрепятственной подачи воздуха, кислорода или газово-воздушной смеси пациентам при наркозе, в послеоперационном периоде, а также при острых и хронических состояниях, сопровождающихся нарушениями дыхательной функции.

Информация о потенциальных потребителях и область применения: Используются врачами в лечебных учреждениях, машинах скорой медицинской помощи, а также в амбулаторных условиях в качестве обеспечения подачи газово-воздушной смеси пациентам.

По классификации контурь относится к:

- медицинским изделиям длительного применения по длительности применения;
- неинвазивным медицинским изделиям по степени инвазивности;
- медицинским изделием, имеющим контакт с человеческим телом;
- медицинским изделием не использующихся для применения на жизненно важных органах (сердце, центральная система кровообращения, центральная нервная система);
- медицинским изделиям без источника энергии.

Показания к применению

Контурь дыхательный используется у пациентов при наркозе, в послеоперационном периоде, а также при острых и хронических состояниях, сопровождающихся нарушениями дыхательной функции.

Противопоказания

Контурь дыхательный является неинвазивным медицинским изделием, применяющимся по жизненным показаниям. Абсолютных противопоказаний нет.

Побочные действия

Осложнения при применении контура дыхательного будут связаны не напрямую с медицинским изделием, а являться следствием нарушения техники использования, либо неисправности аппарата искусственной вентиляции лёгких.



Внимание! Предупреждения

- Изделие должно применяться только квалифицированным медицинским персоналом.
- Контур нестерильный, клинически чистый.
- Не использовать при нарушении целостности упаковки.
- Предназначен для одноразового использования.
- Контуры не подлежат стерилизации, дезинфекции и повторному применению.
- Максимальный срок использования у пациента – 7 суток.
- Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.
- Хранить при температуре от +5 до +35°C, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
- Утилизация в установленном порядке (биологически опасные отходы).

Описание контуров

Контуры являются одноразовыми медицинскими изделиями и не подлежат стерилизации, дезинфекции и повторному применению.

Контуры поставляются в сборе, все составляющие соединены в единое неразборное изделие.

I. Контуры дыхательные анестезиологические;

Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует газовая смесь от наркозного аппарата к пациенту и обратно. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха (кроме коаксиальных), соединенных посредством Y-образного коннектора, присоединяемого к угловому коннектору с капнографическим портом со стороны пациента. Дыхательные трубки со стороны аппарата заканчиваются прямыми коннекторами стандартного диаметра.

Коаксиальные дыхательные контуры представляют собой конструкцию «трубка в трубке» для увлажнения и обогрева вдыхаемого воздуха посредством выдыхаемого. Состоят из наружной и внутренней гофрированных трубок, углового коннектора с капнографическим портом со стороны пациента и патрубка выдоха с прямым коннектором.

II. Контуры дыхательные полужакрытые;

Представлены двумя модификациями: Jackson Rees и Bain, в которых вдох осуществляется от аппарата с помощью линии подачи воздушной смеси, а выдох – в атмосферу. Состоят из гофрированной дыхательной трубки с угловым коннектором, резервуарного мешка и встроенной или невстроенной в дыхательную трубку линии подачи воздушной смеси. Мешок резервуарный в модификации контура Jackson Rees имеет хвостовой клапан.

III. Контуры дыхательные с клапаном автоматического ограничения давления (APL);

Представляют собой системы для спонтанной вентиляции. Имеют регулируемый клапан ограничения давления (далее – клапан APL), который выпускает избыток дыхательной смеси на вдохе, создаваемый возрастающим давлением внутри контура при подкачке резервуарного мешка, в патрубок для подачи свежей смеси и не допускает попадания внешнего воздуха в систему во время вдоха.

Модификации Mapleson D и Mapleson A имеют в своем составе дыхательную гофрированную трубку, угловой коннектор со стороны пациента, клапан APL и мешок резервуарный 2 л. Модификация контура Mapleson C состоит из углового коннектора с линией подачи воздушной смеси, клапана APL и мешка резервуарного 2 л.

IV. Контуры дыхательные для искусственной вентиляции лёгких;

Используются в интенсивной терапии. Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует дыхательная смесь, подаваемая от аппарата ИВЛ, и выдыхаемый воздух от пациента. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха, соединенных посредством Y-образного коннектора с портами для капнографии и температурного датчика, и углового коннектора для присоединения к пациенту. Дыхательные трубки со стороны аппарата заканчиваются прямыми коннекторами стандартного диаметра. В состав контура могут включаться один или два влагоотборника, располагающиеся на трубке выдоха или на трубках вдоха и выдоха и/или камера увлажнителя.

V. Контуры для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPB);

Используются при проведении кратковременной процедуры создания перемежающегося положительного давления в дыхательных путях пациента, находящихся как на принудительной вентиляции легких, так и на спонтанном дыхании. Состоят из дыхательной трубки, присоединяемой к аппарату с помощью прямого коннектора, коннектора IPPB, обеспечивающего особый режим респираторной поддержки, линии мониторинга давления и линии клапана выдоха.



VI. Контуры для дыхательной терапии на дому;

Используются при проведении неинвазивной процедуры вентиляции с помощью специальных дыхательных аппаратов, применяемых в домашних условиях. Состоят из дыхательной трубки, присоединяемой к аппарату с помощью прямого коннектора, коннектора IPPV, обеспечивающего особый режим респираторной поддержки, линии мониторинга давления и линии клапана выдоха.

VII. Контуры дыхательные с подогревом;

Используются в интенсивной терапии с целью согревания дыхательной смеси.

Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует газовая смесь, подаваемая от аппарата ИВЛ к пациенту и обратно. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха, соединенных посредством Y-образного коннектора с портами для капнографии и температурного датчика, встроенных линий обогрева и углового коннектора с портом для отбора проб газов со стороны пациента. Линии обогрева могут располагаться в трубке вдоха или в трубках вдоха и выдоха. Контуры с обогревом могут иметь в составе влагосорбент или камеру увлажнителя.

VIII. Контуры дыхательные неонатальные;

Неонатальные дыхательные контуры имеют внутренний диаметр трубок 10 мм. Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует газовая смесь, подаваемая от аппарата ИВЛ, и выдыхаемый воздух от пациента. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха, со встроенной линией обогрева трубки вдоха или трубок вдоха и выдоха, соединенных посредством Y-образного коннектора с портами для капнографии и температурного датчика, T-образного коннектора с портом и углового коннектора с капнографическим портом со стороны пациента. В состав неонатальных контуров входят камера увлажнителя и влагосорбент (для контуров с линией обогрева только на вдохе).

IX. Контуры дыхательные для СРАР-терапии;

Используются при проведении СРАР-терапии. Представляют собой системы для вентиляции с постоянным положительным давлением. Состоят из трубки вдоха/выдоха или одиночной дыхательной трубки, с прямыми коннекторами со стороны аппарата и лицевой СРАР-маски для не инвазивной вентиляции со стороны пациента. Для удобства использования контур комплектуется фиксатором маски.

X. Контуры дыхательные для ВРАР-терапии.

Используются при проведении ВРАР-терапии. Представляют собой системы для вентиляции с двухуровневым положительным давлением. Состоят из одиночной дыхательной трубки со впаянным прямым коннектором со стороны аппарата. Доступны модели без маски, с лицевой маской и с назальной маской для не инвазивной вентиляции. Контуры с масками комплектуется фиксатором маски.


В зависимости от назначения контуры могут содержать различные функциональные элементы(составляющие, модули), включённые в его конфигурацию и/или в комплект поставки:

а) Основные функциональные составляющие в конфигурации контура:

Составляющие контура	Функциональное назначение
дыхательные трубки (гофрированные, конфигурируемые, гладкоствольные, коаксиальные)	Предназначены для обеспечения циркуляции дыхательной смеси между коннектором пациента и аппаратом, обеспечивают создание дыхательного контура
коннекторы - угловые, прямые, Y-образные, T-образные	Соединители для совместимых комплектующих дыхательного контура, обеспечивают создание дыхательного контура. Коннекторы функционируют только в составе дыхательного контура. Является неотъемлемой составляющей контура

б) Функциональные модули, включаемые в комплект поставки в зависимости от конфигурации контура:

Наименование модуля контура	Функциональное назначение
-----------------------------	---------------------------

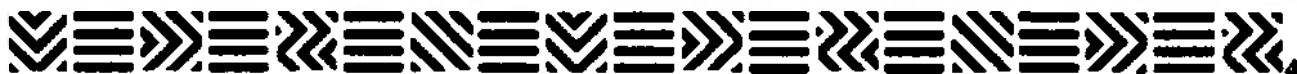

дополнительный шланг (лимб)	Для присоединения резервуарного мешка, увлажнителя или замыкания контура – апп. ИВЛ.. Имеет прямые коннекторы с обеих сторон. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
мешок резервуарный	Для накопления газовой смеси и проведения вентиляции легких пациенту без собственного спонтанного дыхания. Присоединяется к дыхательному контуру благодаря универсальному коннектору 22F. Изготовлен из латекса или неопрена. Доступны мешки взрослые объемом 2 л и детские - 1 л. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
влагосборники	Для накопления образующегося в ходе вентиляции конденсата, могут отсоединяться для слива накопившегося конденсата без разгерметизации контура. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
интегрированный провод нагрева	Провод, обеспечивающий нагрев дыхательного воздуха/газа. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
линия газоанализа или мониторинга давления	Для мониторинга ингаляционных анестетиков и CO ₂ . Предназначена для мониторинга состава газовой смеси и давления. Подключается к газоанализатору с помощью коннектора Луер Лок. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
клапан выдоха CO ₂	Односторонний клапан, предназначен для направления потока дыхательных газов, предотвращающий возвратное вдыхание газа. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
клапан положительного давления в конце выдоха (РЕЕР-клапан)	Предотвращает экспираторное закрытие дыхательных путей. Клапан устанавливается в нижний разъем CPAP маски и направляет воздух, который выдыхается, в соответствующий порт. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
держатель трубок	Держатель предназначен для более плотной фиксации трубок в собранном контуре. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
фиксатор маски	Держатель предназначен для более плотной фиксации маски на пациенте. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
Камера увлажнителя	Применяется для увлажнения и согревания дыхательной смеси, которая доставляется пациенту во время вентиляции лёгких. Представляет собой резервуар, заполняемый водой, через который проходит дыхательная смесь, насыщаясь водяными парами. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
линия подачи воздушной смеси	Для обеспечения подачи воздушной смеси или ингаляционного наркоза в легкие пациента. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
клапан APL	Для регулировки/сброса уровня давления
маска для CPAP-терапии	Подсоединяется на рот/нос пациента и служит для направления воздушной смеси из контура в дыхательные пути пациента в целях вентиляции лёгких постоянным положительным давлением. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
маска для BIPAP-терапии	Подсоединяется на рот/нос пациента и служит для направления воздушной смеси из контура в дыхательные пути пациента в целях вентиляции лёгких двухуровневым положительным давлением. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
фильтр бактериально-вирусный	Предназначен для удаления микроорганизмов из медицинских газов для предотвращения воздействия на пациента в процессе вдыхания воздуха/газа через дыхательный контур. В зависимости от варианта исполнения является



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

неотъемлемым модулем контура

В комплекте с некоторыми моделями (вариантами исполнения) контуров также могут поставляться фильтры бактериально-вирусные, маски анестезиологические или маски лицевые и назальные для СРАР- и ВРАР-терапии.

В зависимости от назначения, контуры дыхательные имеют конструктивные особенности и варианты комплектации.

В закрытых контурах циркуляция газовой смеси и выдыхаемого воздуха между пациентом и аппаратом ИВЛ осуществляется по отдельным трубкам (магистральям) вдоха и выдоха. Трубки могут располагаться параллельно или одна внутри другой по типу «трубка в трубке» (коаксиальный контур).

В полужакрытых контурах пациент вдыхает газовую смесь из аппарата по трубке вдоха, избыток газа при выдохе стравливается в атмосферу через клапаны.

В зависимости от конструкции трубок вдоха и выдоха контуры могут быть гофрированными, конфигурируемыми (гофрированными растягивающимися), гладкоствольными (спиральное армирование снаружи и гладкий просвет внутри).

По диаметру трубок контуры делятся на взрослые (Ø 22 мм), педиатрические/детские (Ø 15 мм) и неонатальные (Ø 10 мм).

Контуры имеют стандартные коннекторы 15F/22M для соединения с эндотрахеальной трубкой/анестезиологической маской и 22F для соединения с аппаратом ИВЛ.

Длина трубок дыхательных контуров бывает: 140 см, 150 см, 160 см, 180 см, 200 см и 300 см.

Соппротивление потоку при 30 л/мин - < 0.1 кПа.

Конфигурация (состав) контура дыхательного соответствует его назначению.

Произведены в клинически чистых условиях.

Условия эксплуатации контуров: при температуре окружающего воздуха от + 5 до плюс 35°C и относительной влажности 30-85%.

Для изготовления контуров используют следующие материалы:

1. Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), марка Tyril 867E, производитель Dow Plastics, США
2. Бутадиенстирол (СБС), марка Styrolux 656 C, производитель «Styrolution America LLC», США»
3. Латекс натуральный, марка отсутствует, производитель Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
4. Неопрен, марка отсутствует, производитель Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
5. Поливинилхлорид (ПВХ), марка AM72/R W113, производитель «TPV Compound Srl», Италия
6. Поликарбонат (ПК), марка LEXAN 143R, производитель «Sabic innovative plastics Europe»
7. Полипропилен (ПП), марка PPR 7220, производитель «TOTAL PETROCHEMICALS», Бельгия»
8. Полиэтилен (ПЭ), марка LDPE 352 E, производитель «DOW Europe GmbH», Швейцария
9. Силикон, марка MF160U, производитель Elkem AS, Норвегия
10. Стиролакрилонитрил (САН), марка Tyril SAN, производитель «Dow Plastics», США
11. Этиленвинилацетат (ЭВА), марка EVA Copolymer FC-45, производитель «Polimeri Europa S.p.A.», Италия

Порядок работы

1. Контур поставляется в соответствующей упаковке. Извлеките контур дыхательный из упаковки. Предварительно проверьте целостность упаковки и срок годности. Не используйте контур при визуальных признаках повреждения изделия.

2. Проверьте комплектность и правильность сборки контура, убедитесь в надёжности соединения составных частей. Не разъединяйте модули и не изменяйте конфигурацию контура.

3. Присоедините дыхательный контур к аппарату искусственной вентиляции лёгких с помощью коннекторов соответствующего диаметра (в комплекте).

4. Проверьте герметичность соединений и проходимость просвета методом повышения давления внутри контура и перекрытия просвета контура со стороны пациента. Проверьте функцию резервуарного мешка (при его наличии).

5. Соедините коннектор 15F/22M контура с эндотрахеальной трубкой или наркозной маской пациента.

Внимание!

• *Производитель не несёт ответственность в случае повторного использования МИ, которое может привести к серьёзным проблемам для пациента, таким как ВИЧ, гепатит, инфекционные/заразные заболевания и т.п.*

• *Неадекватное обращение или транспортировка могут повредить изделие или упаковку.*





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

• Изделие не токсично при условии неповреждённой упаковки ООО «АЛЬФАМЕДЭКС» не несёт ответственность за любые последствия ненадлежащего использования изделия.

Транспортировка и хранение

Транспортирование контуров может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Расстановка и крепление транспортировочных ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение и отсутствие смещения во время транспортирования.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности 30-85%.

Необходимо предпринимать меры по надлежащей упаковке, если ожидается воздействие экстремальных температур при транспортировке.

Условия хранения в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения +5° C + 35° C и относительной влажности 30-85%.

Не допускается хранить изделия в помещениях, где возможно воздействие/попадание на медицинское изделие прямых солнечных лучей.

Комплектность

Контур поставляется в соответствующей упаковке. Комплектность контуров определяется их вариантом исполнения и соответствующей моделью (все варианты исполнения и модели контуров приведены в пункт 2 настоящего технического файла). В состав поставки обязательно должна входить инструкция по применению.

Комплектация. Содержимое одной индивидуальной упаковки.

I. Контур дыхательный анестезиологический:

1. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл;

Коннектор Y-образный - 1 шт;

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

2. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR121-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл;

Коннектор Y-образный - 1 шт;

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

3. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR132-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл.


Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

4. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR131-01.

Комплектация:

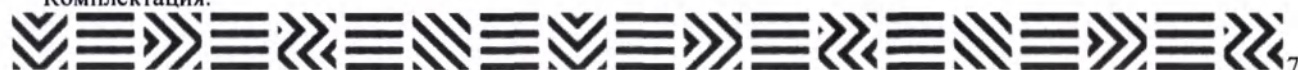



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

5. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR142-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

6. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

7. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-02N.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

8. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт., Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR121-02.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 80 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

9. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR132-02N


Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 90 см - 1 шт.

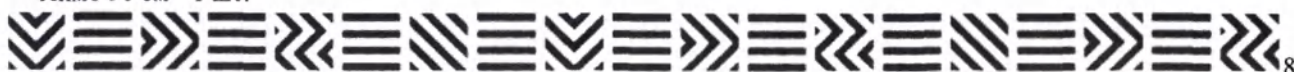



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

10. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR131-02.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 75 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

11. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR142-02.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 90 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

12. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-02.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 75 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

13. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-16.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.


Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 80 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

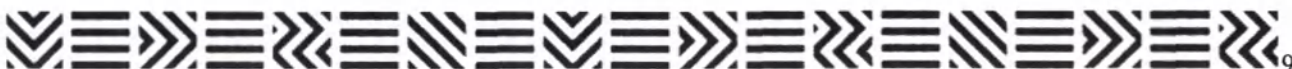

14. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF 0114-MR121-03
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 80 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
15. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR132-03.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
16. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR131-03.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 75 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
17. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - MR142-03.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
18. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-03.
Комплектация:



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 75 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

19. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-03N.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 80 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

20. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR121-04.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

21. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR132-04N.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 90 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 3.0 л - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

22. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR131-04.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Лимб 75 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

23. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR142-04.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

24. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-04.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 75 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

25. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-17.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 80 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

26. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR121-05.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 80 см - 1 шт.



Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

27. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR132-05.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 90 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

28. Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR131-05.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха конфигурируемые 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 75 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

29. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR142-05.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 90 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

30. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-05.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. К

оннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

31. Контур дыхательный анестезиологический для закиси азота и кислорода конфигурируемый взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка дыхательная конфигурируемая 300 см. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор Т-образный с клапаном - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR132-06.

Комплектация:

Трубка дыхательная конфигурируемая 300 см.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор Т-образный с клапаном - 1 шт.

32. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт. Линия газоанализа - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR142-06.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 90 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.

Линия газоанализа - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

33. Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 75 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Линия газоанализа - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-06.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 75 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.

Линия газоанализа - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

34. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 80 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт. Линия газоанализа - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Маска анестезиологическая - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-04L.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Лимб 80 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.

Линия газоанализа - 1 шт.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Маска анестезиологическая - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

35. Контур дыхательный анестезиологический гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт. Линия газоанализа - 1 шт. 34.7. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Маска анестезиологическая - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-04.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.

Линия газоанализа - 1 шт. 34.7.

Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.

Маска анестезиологическая - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

36. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный взрослый, Ø 26 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR112-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Патрубок выдоха - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

37. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR111-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Патрубок выдоха - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

38. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный взрослый, Ø 26 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт. Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR112-02.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Патрубок выдоха - 1 шт.

Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

39. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт. Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR111-02.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Патрубок выдоха - 1 шт.

Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.



Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

40. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный взрослый, Ø 26 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR112-03.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

41. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR111-03.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

42. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный взрослый, Ø 26 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR112-04.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

43. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR111-04.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

44. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный взрослый, Ø 26 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR112-05.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 2.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
45. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR111-05.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Патрубок выдоха - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (без латекса) 1.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
46. Контур дыхательный, анестезиологический коаксиальный гофрированный взрослый, Ø 26 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт.
Линия газоанализа - 1 шт. Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR112-06.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха 180 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Патрубок выдоха - 1 шт.
Линия газоанализа - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (латекс) 2.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
47. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Линия газоанализа - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR111-06.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха 140 см - 1 компл.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Линия газоанализа - 1 шт.
Лимб конфигурируемый 90 см - 1 шт.
Мешок резервуарный (латекс) 1.0 л - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.



48. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка дыхательная гофрированная 180 см. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Патрубок выдоха - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR112-07.

Комплектация:

Трубка дыхательная гофрированная 180 см.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Патрубок выдоха - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

II. Контур дыхательные полузакрытые:

49. Контур дыхательный полузакрытый Jackson Rees взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 140 см - 1 шт. Коннектор угловой, линия подачи воздушной смеси - 1 шт. Мешок резервуарный (без латекса) 2,0 л с клапаном - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR102-01.

Комплектация:

Трубка гофрированная 140 см - 1 шт.

Коннектор угловой, линия подачи воздушной смеси - 1 шт.

Мешок резервуарный (без латекса) 2,0 л с клапаном - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

50. Контур дыхательный полузакрытый Jackson Rees детский, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 140 см - 1 шт, коннектор угловой - 1 шт, линия подачи воздушной смеси - 1 шт, мешок резервуарный (без латекса) 0,5 л с клапаном - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR101-01.

Комплектация:

Трубка гофрированная 140 см - 1 шт,

коннектор угловой - 1 шт,

линия подачи воздушной смеси - 1 шт,

мешок резервуарный (без латекса) 0,5 л с клапаном - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

51. Контур дыхательный полузакрытый Bain взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 140 см - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, встроенная линия подачи воздушной смеси - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс), 2,0 л - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR102-02.

Комплектация:

Трубка гофрированная 140 см - 1 шт.

Коннектор угловой - 1 шт,

встроенная линия подачи воздушной смеси - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

52. Контур дыхательный полузакрытый Bain детский, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 160 см - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, встроенная линия подачи воздушной смеси - 1 шт. Мешок резервуарный (латекс) 1,0 л - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR101-02.

Комплектация:

Трубка гофрированная 160 см - 1 шт.

Коннектор угловой - 1 шт,

встроенная линия подачи воздушной смеси - 1 шт.

Мешок резервуарный (латекс) 1,0 л - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

III. Контур дыхательные с клапаном автоматического ограничения давления (APL):

53. Контур дыхательный с клапаном автоматического ограничения давления (APL) Mapleson D-Deluxe взрослый Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 140 см - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, клапан APL - 1 шт. Мешок резервуарный - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR102-03.

Комплектация:

Трубка гофрированная 140 см - 1 шт.

Коннектор угловой - 1 шт

клапан APL - 1 шт.
Мешок резервуарный - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

54. Контур дыхательный с клапаном автоматического ограничения давления (APL) Mapleson A взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 140 см - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, клапан APL - 1 шт. Мешок резервуарный - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR102-04.

Комплектация:
Трубка гофрированная 140 см - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт
Клапан APL - 1 шт.
Мешок резервуарный - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

55. Контур дыхательный с клапаном автоматического ограничения давления (APL) Mapleson C взрослый, Ø 22 мм, в составе: Коннектор угловой - 1 шт, клапан APL - 1 шт. Мешок резервуарный - 1 шт, линия подачи воздушной смеси - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR102-05.

Комплектация:
Коннектор угловой - 1 шт
Клапан APL - 1 шт.
Мешок резервуарный - 1 шт,
Линия подачи воздушной смеси - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

IV. Контурные дыхательные для искусственной вентиляции лёгких:

56. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-05.

Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

57. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный детский, Ø 15 мм в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR121-06.

Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

58. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR142-07.

Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

59. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-07.

Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

60. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-06.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборник - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

61. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR121-07.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборник - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

62. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR142-08.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборник - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

63. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-08.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборник - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

64. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-07.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
65. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR121-08.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
66. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR142-09.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
67. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR141-09.
Комплектация:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
68. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный с тепловлагообменником - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-08.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный с тепловлагообменником - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

69. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гофрированный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный с тепловлагообменником - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR121-09.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный с Тепловлагообменником - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

70. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR142-10.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

71. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе:
Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой - 1 шт. Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт. Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт. Влагосборники - 2 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR141-10.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой - 1 шт.
Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт.
Фильтр бактериально-вирусный - 1 шт.
Влагосборники - 2 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

72. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Линия мониторинга давления - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Камера увлажнителя - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR142-11.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 180 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Влагосборник - 1 шт.

Линия мониторинга давления - 1 шт.

Лимб 60 см - 1 шт.

Камера увлажнителя - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

73. Контур дыхательный для искусственной вентиляции лёгких гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Линия мониторинга давления - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Камера увлажнителя - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR141-11.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.

Коннектор Y-образный с портами коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.

Влагосборник - 1 шт.

Линия мониторинга давления - 1 шт.

Лимб 60 см - 1 шт.

Камера увлажнителя - 1 шт.

Коннектор прямой - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

V. Контур для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPB):

74. Контур для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPB) гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 160 см - 1 шт. Коннектор IPPB - 1 шт. Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт. Линия мониторинга давления - 1 шт. Линия клапана выдоха - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-09.

Комплектация:

Трубка гофрированная 160 см - 1 шт.

Коннектор IPPB - 1 шт.

Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт.

Линия мониторинга давления - 1 шт.

Линия клапана выдоха - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

75. Контур для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPB) гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гладкоствольная 180 см - 1 шт. Коннектор IPPB - 1 шт. Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт. Линия мониторинга давления - 1 шт. Линия клапана выдоха - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR142-12.

Комплектация:

Трубка гладкоствольная 180 см - 1 шт.

Коннектор IPPB - 1 шт.

Коннектор угловой конфигурируемый с портом для бронхоскопии - 1 шт.

Линия мониторинга давления - 1 шт.

Линия клапана выдоха - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

VI. Контур для дыхательной терапии на дому:

76. Контур для дыхательной терапии на дому гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 180 см - 1 шт. Коннектор IPPB - 1 шт. Линия мониторинга давления - 1 шт. Линия клапана выдоха - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-10.

Комплектация:

Трубка гофрированная 180 см - 1 шт.
Коннектор IPPB - 1 шт.
Линия мониторинга давления - 1 шт.
Линия клапана выдоха - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

77. Контур для дыхательной терапии на дому гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гладкоствольная 180 см - 1 шт. Коннектор IPPB - 1 шт. Линия мониторинга давления - 1 шт. Линия клапана выдоха - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR142-13.

Комплектация:

Трубка гладкоствольная 180 см - 1 шт.
Коннектор IPPB - 1 шт.
Линия мониторинга давления - 1 шт.
Линия клапана выдоха - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

78. Контур для дыхательной терапии на дому гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 200 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Коннектор IPPB - 1 шт. Линия клапана выдоха - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Держатели трубок - 3 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-11.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 200 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Влагосборник - 1 шт.
Коннектор IPPB - 1 шт.
Линия клапана выдоха - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Держатели трубок - 3 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

VII. Контур дыхательные с подогревом:

79. Контур дыхательный с подогревом линии вдоха гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-18

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Влагосборник - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

80. Контур дыхательный с подогревом линии вдоха гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR141-12.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Влагосборник - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

81. Контур дыхательный с подогревом линии вдоха/выдоха гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные с подогревом 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR122-19

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные с подогревом 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

82. Контур дыхательный с подогревом линии вдоха/выдоха гладкоствольный детский, Ø 15 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные с подогревом 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт. Лимб 60 см - 1 шт. Коннектор прямой - 1 шт, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR141-13.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гладкоствольные с подогревом 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор угловой с портом CO₂ - 1 шт.
Лимб 60 см - 1 шт.
Коннектор прямой - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

VIII. Контурные дыхательные неонатальные:

83. Контур дыхательный неонатальный с подогревом линии вдоха гофрированный, Ø 10 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор T-образный - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 40 см - 1 шт. Камера увлажнителя - 1 шт, Проксимальная линия - 1 шт., Коннекторы - 1 компл, Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR120-01.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор T-образный F- 1 шт.
Влагосборник - 1 шт.
Лимб 40 см - 1 шт.
Камера увлажнителя - 1 шт,
Проксимальная линия - 1 шт.,
Коннекторы - 1 компл.
Инструкция по применению - 1 шт.

84. Контур дыхательный неонатальный с подогревом линии вдоха/выдоха гофрированный, Ø 10 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные с подогревом 150 см - 1 компл. Коннектор Y-образный с портами - 1 шт. Коннектор T-образный - 1 шт. Влагосборник - 1 шт. Лимб 40 см - 1 шт. Камера увлажнителя - 1 шт, Проксимальная линия - 1 шт., Коннекторы - 1 компл., Инструкция по применению - 1 шт, REF - 0114-MR120-02

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные с подогревом 150 см - 1 компл.
Коннектор Y-образный с портами - 1 шт.
Коннектор T-образный - 1 шт.
Влагосборник - 1 шт. Лимб 40 см - 1 шт.
Камера увлажнителя - 1 шт,
Проксимальная линия - 1 шт.,



Коннекторы – 1 компл.

Инструкция по применению – 1 шт.

XI. Контуры дыхательные для CPAP-терапии:

85. Контур дыхательный для CPAP-терапии гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл. Маска лицевая для CPAP-терапии - 1 шт. Держатель маски силиконовый - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-12.

Комплектация:

Трубки вдоха/выдоха гофрированные 160 см - 1 компл.

Маска лицевая для CPAP-терапии - 1 шт.

Держатель маски силиконовый - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

86. Контур дыхательный для CPAP-терапии гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 160 см - 1 шт. Маска лицевая для CPAP-терапии - 1 шт. Клапан РЕЕР - 1 шт. Держатель маски силиконовый - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-13.

Комплектация:

Трубка гофрированная 160 см - 1 шт.

Маска лицевая для CPAP-терапии - 1 шт.

Клапан РЕЕР - 1 шт.

Держатель маски силиконовый - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

X. Контуры дыхательные для BIPAP-терапии:

87. 1 Контур дыхательный для BIPAP-терапии гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 160 см - 1 шт. Маска лицевая - 1 шт. Держатель маски силиконовый - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-14.

Комплектация:

Трубка гофрированная 160 см - 1 шт.

Маска лицевая - 1 шт.

Держатель маски силиконовый - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

88. Контур дыхательный для BIPAP-терапии гофрированный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гофрированная 160 см - 1 шт. Маска назальная - 1 шт. Держатель маски силиконовый - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR122-15.

Комплектация:

Трубка гофрированная 160 см - 1 шт.

Маска назальная - 1 шт.

Держатель маски силиконовый - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

89. Контур дыхательный для BIPAP-терапии гладкоствольный взрослый, Ø 22 мм, в составе: Трубка гладкоствольная 180 см - 1 шт. Клапан выдоха CO₂ - 1 шт. Линия газоанализа - 1 шт, Инструкция по применению – 1 шт, REF - 0114-MR142-16.

Комплектация:

Трубка гладкоствольная 180 см - 1 шт.

Клапан выдоха CO₂ - 1 шт.

Линия газоанализа - 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Маркировка продукта

Маркировочная надпись на индивидуальную упаковку (этикетку) наносится типографским способом. В содержании маркировочной надписи этикетки должны быть указаны:

- наименование, адрес и товарный знак (при наличии) предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- регистрационное удостоверение (номер и дата).



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

- символ «не стерильно»;
- предупреждение «произведено в клинически чистых условиях»;
- символ «запрет на повторное применение»;
- символ «не использовать при повреждении упаковки»;
- символ «содержит натуральный латекс» либо символ «не содержит натуральный латекс»
- символ «диапазон влажности»
- символ «осторожно! обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «температурный диапазон»
- символ «не допускать воздействия солнечного света»
- символ «беречь от влаги»
- символ «не токсично»

Переменная информация может быть нанесена на дополнительный стикер или впечатана на этикетку в предназначенном для неё поле:

- тип/размер дыхательного контура;
- информация о партии (LOT);
- каталожный номер данного изделия (REF);
- дата изготовления (год-месяц);
- срок годности (год-месяц).





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Схематичное изображение маркировочной надписи на индивидуальной упаковке:



BREATHING CIRCUIT SEMI-CLOSED


RUS

Контур дыхательный полузакрытый Jackson Rees
детский, Ø 22 мм

REF

0114-MR101-01

Состав: трубка гофрированная 140 см, коннектор угловой, линия подачи
воздушной смеси, мешок резервуарный (без латекса) 0.5 л с клапаном

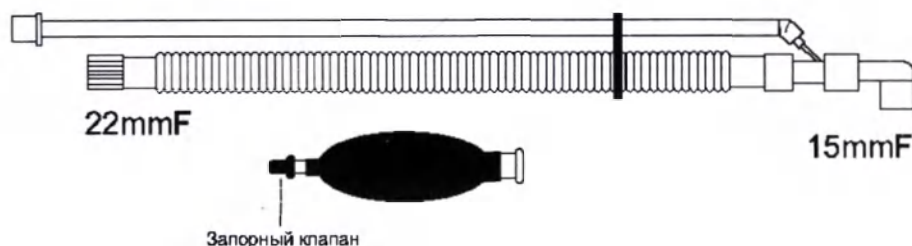

Производитель: «Медерен Неотех Лимитед», Mederen Neotech Ltd.
Адрес: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com.
Завод-изготовитель: «Р ВЕНТ МЕДИКАЛ УРЕТИМ А.Ш.» (R VENT MEDİKAL
URETIM A.S.), Адрес: 29 Ekim Mah. Balkan Cad. No: 33 Torbali, Izmir, Turkey.



Произведено
в условиях
чистых
помещений





Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

Маркировка на транспортной упаковке (картонной коробке) нанесена несмываемой краской (при помощи штампа, трафарета или бумажного ярлыка) и включает:

- наименование, адрес и товарный знак (при наличии) предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- количество изделий в коробке;
- символ «осторожно! обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «использовать до»
- вес нетто;
- вес брутто;
- размеры коробки;
- информация о партии (LOT);
- каталожный номер данного изделия (REF);
- дата изготовления (год-месяц);
- срок годности (год-месяц);
- штрих-код (при наличии).

Схематичное изображение маркировочной надписи на транспортной упаковке:



BREATHING CIRCUIT SEMI-CLOSED

RUS Контур дыхательный полузакрытый Jackson Rees
детский, Ø 22 мм

REF 0114-MR101-01

Состав: трубка гофрированная 140
см, коннектор угловой, линия подачи
воздушной смеси, мешок резервуарный
(без латекса) 0.5 л с клапаном

Qty : 50 pcs
Кол-во : шт.

NON-TOXIC



LOT



Производитель: «Медерен Неотех Лимитед»,
Mederen Neotech Ltd. Адрес: Harakevet St. 58,
Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com.
Завод-изготовитель: «Р ВЕНТ МЕДИКАЛ УРЕТИМ
А.Ш.» (R VENT MEDIKAL URETIM A.S.), Адрес: 29
Ekim Mah. Balkan Cad. No: 33 Torbali, Izmir, Turkey.

MEAS:400x800x560mm

ПУ: № РЗН 2019/9002 от 29.04.2021



17290113093086

Упаковка

Контуры дыхательные помещены в нестерильную клинически чистую индивидуальную упаковку – полиэтиленовый или бумажно-плёночный пакет, на котором размещён стикер с наименованием изделия, логотипом компании-производителя, данными компании-производителя и организации, уполномоченной на принятие претензий. Кроме того, на стикер нанесён перечень комплектности изделия, размеры (при необходимости), номер регистрационного удостоверения, предупреждающие символы по хранению, транспортировке и применению изделия.

Групповая (транспортная) упаковка представляет собой ящик из гофрокартона, на который нанесены символы по транспортировке и хранению изделия, а также стикер с наименованием изделия, данными компании-



производителя, указанием габаритных размеров тары, веса нетто/брутто, количество в упаковке, предупреждающие символы.

Транспортировка и хранение

Транспортирование контуров может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Расстановка и крепление транспортировочных ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение и отсутствие смещения во время транспортирования.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности 30-85%.

Необходимо предпринимать меры по надлежащей упаковке, если ожидается воздействие экстремальных температур при транспортировке.

Условия хранения в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения +5° C + 35° C и относительной влажности 30-85%.

Не допускается хранить изделия в помещениях, где возможно воздействие/попадание на медицинское изделие прямых солнечных лучей.

Гарантия изготовителя

Контур является одноразовыми медицинскими изделиями и не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Срок годности контуров составляет 5 лет с даты изготовления. Срок годности на упаковке указывает период, в течение которого изделие должно быть использовано.

Внимание! Запрещается использовать изделие после окончания срока годности. Максимальный рекомендуемый срок использования у пациента – 7 суток.

Возврат повреждённого изделия

Возврат необходимо производить в оригинальной упаковке, идентифицированной по номеру лота, со ссылкой на номер заказа и указанием причины возврата.

Утилизация использованного изделия и упаковки

Контур подлежит утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- создающие угрозу жизни и здоровью обслуживающему персоналу или пациенту.

Утилизации должна подлежать вся упаковка.

Убедитесь в безопасной и надлежащей утилизации использованного изделия во избежание нежелательного влияния на окружающую среду, детей и бездомных животных.

Утилизация должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Контур относится к классу Б – эпидемиологические опасные отходы.

После одноразового использования контуры подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами.

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую деятельность, участка по обеззараживанию/обезвреживанию или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов, принятой на административной территории, контуры обеззараживаются персоналом данной организации в местах их образования химическими/физическими методами.

Контуры собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твёрдую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) жёлтого цвета или имеющие жёлтую маркировку.

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора контуров должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel,
postal code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

приспособлений, исключаящих высыпание. Твёрдые (непрокальваемые) ёмкости закрываются крышками. Перемещение за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.

При окончательной упаковке контуров для удаления их из подразделения (организации) одноразовые ёмкости (пакеты, баки) маркируются надписью "Отходы. Класс Б" с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Используемые контуры из подразделений в закрытых одноразовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещается.

При организации участков обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов с использованием аппаратных методов разрешается сбор, временное хранение, транспортирование медицинских отходов класса Б без предварительного обеззараживания в местах образования, при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

При этом организация, осуществляющая медицинскую деятельность, должна быть обеспечена всеми необходимыми расходными средствами, в том числе одноразовой упаковочной тарой.

Допускается перемещение необеззараженных контуров, упакованных в специальные одноразовые ёмкости (контейнеры), из удалённых структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты) и других мест оказания медицинской помощи в медицинскую организацию для обеспечения их последующего обеззараживания/обезвреживания.



Перевод с английского языка на русский язык

№ 1291/22

Я, нижеподписавшаяся, Зингерман Орли, нотариус, номер лицензии 299856, адрес ул. Жаботинского, 35, г. Рамат Ган, Израиль, настоящим документом подтверждаю, что 30.11.2022, в моем присутствии находилась госпожа Чертков Светлана, личность которой установлена мной в соответствии с предъявленным мне паспортом государства Израиль № 21807002

Выданным 11.09 2014 года в городе Кфар Саба, в Израиле.

Я убедилась, что госпожа Чертков Светлана, поняла смысл данного документа и подписала его по собственному желанию, обозначенный буквой «А» от имени корпорации MEDEREN NEOTECH LTD No. 515505329, находящейся в Тель-Авиве, Израиль.

Как подтверждение сказанному выше, госпожа Чертков Светлана подписала приложенный документ, обозначенный буквой «А» выданный от имени корпорации.

В подтверждении этого я, удостоверяю подпись госпожи Чертков Светланы своей личной подписью.

Дата 30.11.2022

Нотариус + 322 НДС

Печать и подпись нотариуса

\подпись\

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

На каждой странице сверху:

МЕДЕРЕН НЕОТЕХ ЛТД. (MEDEREN NEOTECH LTD.)

Адрес: ул. Харакевет, д. 58, Тель-Авив, Яффа, Израиль, почтовый индекс: 6777016

Корпорация номер: 515505329

www.mederen.com info@mederen.com

УТВЕРЖДЕНО

Медерен Неотех Лимитед

/подпись/

Штамп: Медерен Неотех Лтд. (Mederen Neotech Ltd.) * 515505329

Инструкция по применению

Контурные дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной вентиляции легких

Версия 7

2022

Разработчик и производитель: «Медерен Неотех Лтд.»/Mederen Neotech Ltd.

Адрес разработчика/производителя: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Место производства: R Vent Medikal Üretim A.Ş. Address: 29 Ekim Mah. Balkan Cad. No. 33

TORBALI İZMİR/TÜRKİYE.

(Р Вент Медикал Уретим А.Ш. Адрес: 29 Эким Мах. Балкан Джад., №33 Торбалы Измир/Турция)

/документ представлен на русском языке, в переводе не нуждается/

А

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

/подпись/

Я, **Алешина Александра Игоревна**, дипломированный переводчик, владеющая русским и английским языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Переводчик: *Алешина Александра Игоревна*

**Санкт-Петербург, Российская Федерация,
восьмого декабря две тысячи двадцать второго года.**

Я, **Демидова Нина Анатольевна**, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Алесиной Александры Игоревны**.

Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № *47/22-4/78-2022-14-1652*

Уплачено за совершение нотариального действия: 500 руб. 00 коп.



Н.А. Демидова

Итого в настоящем документе

34 (тридцать четыре) листа

Нотариус

Н.А. Демидова

