

«УТВЕРЖДАЮ»

ИП Федоров А.А.



Федоров А.А.

2011 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ

Бандажи дородовые и послеродовые
по ТУ 9396-001-81781806-2011


г. Москва
2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ:


1. ОПИСАНИЕ
2. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ
4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

1. ОПИСАНИЕ

Бандаж дородовый – предназначен для ношения в течении всего срока беременности не ограничивая развития малыша, поддерживает и предохраняет живот от растяжек, уменьшает нагрузку на позвоночник. Помогает сохранить правильную осанку и продолжать активный образ жизни даже на поздних сроках беременности. Удобен каждодневной носке, прост в применении и незаметен под одеждой.

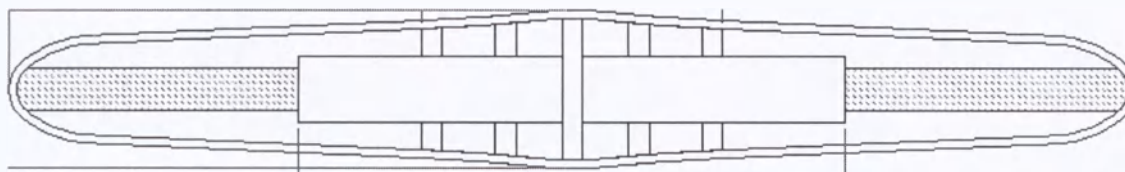

Бандаж послеродовый – предназначен для ношения после родов для восстановления тонуса брюшных мышц, а также после кесарева сечения для фиксации послеоперационного шва и поддержки нижней части брюшной стенки. Для дополнительной фиксации и регулировки степени компрессии применяется эластичная съемная стяжка.

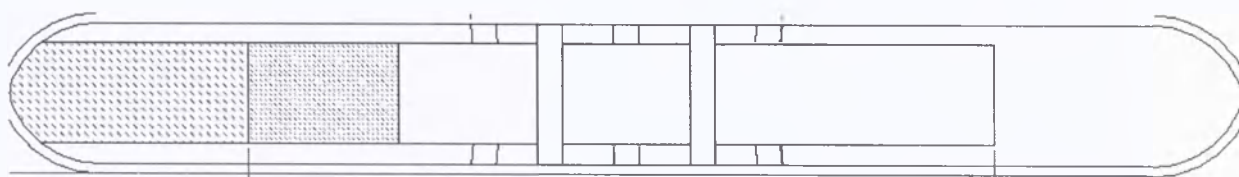

2. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- надеть бандаж на нижнее белье, лежа на спине. Зафиксировать спереди контактной лентой;
- расположить широкую часть на области пояснично-крестцового отдела, узкую - под животом;
- обеспечить дополнительную фиксацию двумя эластичными боковыми стяжками;
- в раннем послеродовом периоде на переднюю панель бандажа установить аппликатор.

Применяется под контролем врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материала.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки изделия должен включать в себя:

- бандаж 1 шт;
- этикетку 1 шт;
- упаковку 1 шт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения изделий – 5 лет со дня их изготовления.

Гарантийный срок службы изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Пронумеровано, прошнуровано
скреплено печатью

