

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ОАО «Амфодент»

Полушина Т. В.
2008 г.

A circular stamp identical to the one on the left, but with a handwritten signature "Т. В. Полушина" over the word "ОДЕНТ".

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Материалы композитные стоматологические в наборах с принадлежностями.

Производства компании:

ITENA s.a.s 153 avenue Viktor Hugo 75116, Paris, France.

1) Проведите предварительную клиническую подготовку зуба, 2) Изолируйте зуб от попадания слюны. Рекомендуется использование прорезиненных накладок, 3) При необходимости, обработайте протравкой все участки зуба с использованием 32%-40% фосфорной кислоты в течение 5 секунд 4) Промойте зуб от кислоты струей воды, как минимум в течение 15 секунд. Протравленная эмаль должна выглядеть матовой 5) Смешайте равное количество капель композита и Bond Activator и нанесите 3 слоя на подготовленную зубную поверхность. При использовании бондингового композита от другого производителя, следуйте инструкции по его использованию в работе с материалом двойного отверждения, 6) Оставьте нанесенный бондиновый композит на 15 секунд и затем тщательно просушите сухим воздухом в течение 15 секунд. 7) Нанесите на обработанный зуб необходимое количество композита для наращивания соответствующей формы. 8) Не трогайте композит в период его отверждения. Воздействуйте лампой для светоотверждения в течение как минимум 40 секунд. Проверьте степень полного отверждения. Химическое отверждение в ротовой полости происходит примерно в течение 3 минут с момента готовности/нанесения композита. Фиксация композита вне ротовой полости происходит немного дольше.