



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Амфодент»


Полушкин В.
«АМФОДЕНТ» 2008 г.


ИНСТРУКЦИЯ по применению

Цементы стоматологические в наборах с принадлежностями.

Производства компании:

ITENA s.a.s 153 avenue Viktor Hugo 75116, Paris, France.

1) Подготовка к цементированию.

Перед цементацией коронки, проверьте соответствие формы, завершите все необходимые процедуры. Высушите и изолируйте подготовленный участок. Нет необходимости в чрезмерном высушивании.

- 2) Снимите защитный колпачок со шприца. Выдавите небольшую порцию композита, тщательно смешайте обе части при использовании двухкомпонентного цемента.
- 3) Нанесите подготовленный цемент на внутреннюю часть коронки. В Вашем распоряжении 30-60 секунд для проведения работ.
- 4) Поместите коронку на подготовленный участок в полости рта, придержите коронку на месте фиксации до отверждения (в течение рекомендованного времени).
- 5) Удалите излишки цемента.