

- при открытом резиновом клапане инструментального канала 21 (рисунок 1) вставить в него до упора разъем 4 устройства заполнения каналов (далее УЗК) (рисунок 11);
- при снятых с устройства видеоэндоскопического клапанах отсоса 17 и подачи воды и воздуха 18 (рисунок 1) вставить разъемы 2, 3 и 4 (рисунок 11 и 12) устройства видеоэндоскопического в отверстия, свободные от клапанов, до упора (рисунок 11 и 12);
- опустить устройство видеоэндоскопическое вместе с УЗК в дезинфицирующий раствор для обработки и заполнить им каналы, прокачав раствор 5-10 раз с помощью шприца 5 (рисунок 11), при этом всасывание раствора осуществляется через отверстие клапана на дне корпуса 1 УЗК;
- отсоединить УЗК от устройства видеоэндоскопического и оставить его в дезинфицирующем растворе на рекомендуемое время.

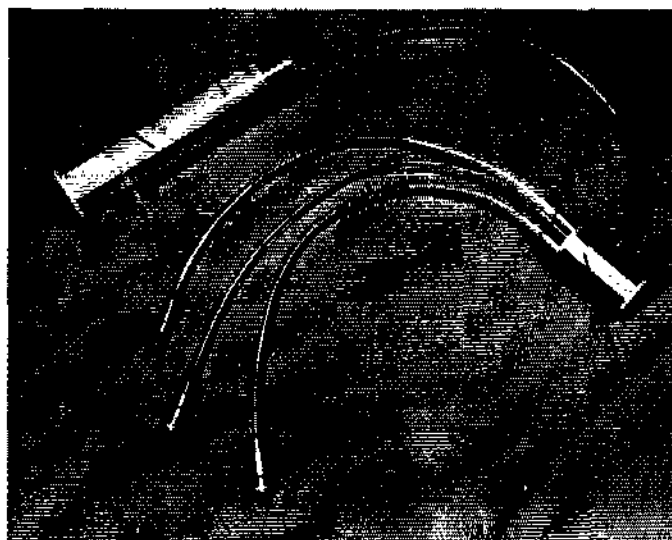


Рисунок 11 Устройство заполнения каналов УЗК
1 – корпус; 2 – разъем; 3 – разъем; 4 – разъем, 5 – шприц

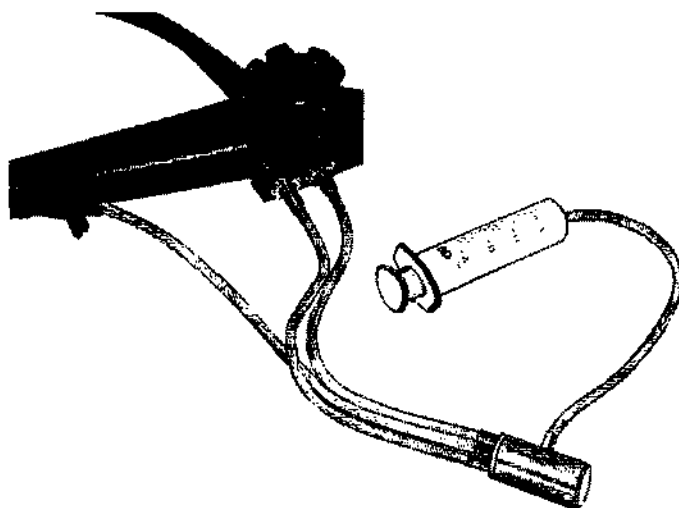


Рисунок 12 Устройство заполнения каналов, подключенное к устройству видеоэндоскопическому

Тщательно продезинфицировать съёмные детали устройства видеоэндоскопического (клапаны подачи воды-воздуха, отсоса и инструментального канала) и места их присоединения, выполняя рекомендации изготовителя дезинфицирующего раствора в отношении концентрации, времени воздействия и температуры дезинфицирующего раствора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

9740.00.000РЭ

Лист

40

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата