

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП
«Московский ЦРОП»
Минздравсоцразвития России
«» М.В. Давыдов
2011г.

Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-05

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации «Аппарата ортопедического на коленный сустав АН4-05» и содержит сведения о его назначении, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение аппарата АН4-05.

1.1 Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-05 предназначен для всех половозрастных групп потребителей в период восстановительного лечения при травмах капсульно – связочного аппарата коленного сустава, артрозах-артритах, бурситах, синовитах.

1.2 Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-05 может быть использован в предупреждениях социальной защиты, здравоохранения и образования, а также для реабилитации на дому и в условиях повседневной жизни.

1.3 Аппарат изготавливается в правом и левом исполнении. Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-05 имеет восемь типоразмеров и определяется длиной окружности в области колена от 30см до 57см.

2. Надевание и пользование аппаратом АН4-05.

2.1 На нижнюю конечность надевают хлопчатобумажный чулок.

2.2 В положении «сидя» конечность располагают в аппарате и фиксируют его.

2.3 Приемная полость не должна оказывать болевого воздействия на мягкие ткани конечности, отрегулировать натяжение крепления застежек.

2.4 Для снятия аппарата расфиксировать застежки, развести в стороны края приемной гильзы, снять аппарат.

2.5 При болезненности нижней конечности и нарушении подкосоустойчивости в коленных шарнирах, необходимо прекратить пользование аппаратом и обратиться на предприятие-изготовитель для дополнительной подгонки аппарата.

3. Уход за аппаратом АН4-05.

3.1. Аппарат устойчив к санитарно-гигиенической обработке растворами моющих средств по ГОСТ 25644-96. Рекомендуются проводить обработку 1 раз в месяц.

3.2. Аппарат при контакте с кожей потребителя устойчив к воздействию биологической жидкости-пота по МУ 25.1.01

3.3. Аппарат необходимо оберегать от поломок и деформаций отдельных элементов, нельзя бросать.

3.4. Нельзя хранить аппарат вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4. Уход за нижней конечностью.

Ежедневно, после пользования аппаратом, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж конечности, фантомно-импульсивная гимнастика, обработка кожи защитными лосьонами.

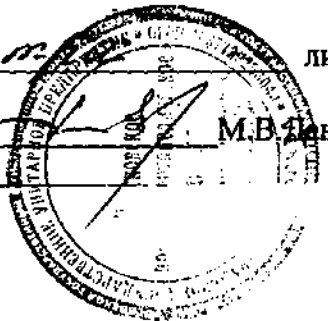
5. Гарантии предприятия

Срок службы аппарата ортопедического на коленный сустав АН4-05 сохраняется на протяжении времени его медицинского назначения.

Срок сохраняемости аппарата составляет 6 (шесть) месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи аппарата в эксплуатацию. В течение этого срока, в случае выхода из строя аппарата, при соблюдении требований, прописанных в памятке по пользованию «Аппарат ортопедический на коленный сустав АН4-05», предприятие-изготовитель аппарата производит необходимый ремонт или его замену бесплатно.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

(3) м. лист 2
Директор  М.В. Давыдов