

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП
«Московское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
 М.В. Давыдов
«» 2011г.

«Тутор на коленный сустав ТН4-12»

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации «Тутор на коленный сустав ТН4-12» и содержит сведения о его назначении, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение тутора.

1.1. Тутор на коленный сустав ТН4-12 (далее тутор) предназначен для всех половозрастных групп потребителей в реабилитационный период после травм и операций коленного сустава, легкой нестабильности коленного сустава, артрозо-артритах, бурситах, синовитах.

1.2 Тутор может быть использован в учреждениях социальной защиты, здравоохранения, а также для реабилитации на дому и в условиях повседневной жизни.

1.3 Тутор на коленный сустав ТН4-12 имеет семь типоразмеров и определяется длиной окружности в области колена от 30см до 51см.

2. Надевание и пользование тутором.

2.1 На нижнюю конечность надевают хлопчатобумажный чулок.

2.2 В положении «сидя» конечность располагают в туторе и фиксируют его, с помощью застежки «Контакт».

2.3 Приемная полость не должна оказывать болевого воздействия на мягкие ткани конечности, отрегулировать натяжение крепления застежек.

2.4 Для снятия тутора расфиксировать застежки, снять тутор.

2.5 При болезненности и нарушении удержания тутора или неудобном креплении, необходимо прекратить пользование тутором и обратиться на предприятие-изготовитель для дополнительной подгонки тутора.

3. Уход за тутором.

3.1. Гильзу периодически 1 раз в месяц рекомендуется подвергать санитарно-гигиенической обработке раствором детского мыла, с последующей просушкой

3.2. Нельзя хранить тутор вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4. Уход за нижней конечностью.

Ежедневно, после пользования тутором, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов, обмывание теплым

мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж конечности, фантомно-импульсивная гимнастика, обработка кожи защитными лосьонами.

5. Гарантии предприятия

Средний срок службы татора сохраняется на протяжении времени его медицинского назначения.

Гарантийный срок эксплуатации татора шесть месяцев со дня выдачи татора в эксплуатацию. В течении этого срока предприятие-изготовитель производит замену при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

(3) *тум*

листо**в**

Директор

М.В. Давыдов

М.В. Давыдов

