



Утверждаю

Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»

Минздравсоцразвития России

В.Г. Чуйков

**Руководство по эксплуатации распорки детской
«Перинка Фрейка» ПИО-33**

Распорку надевают между ног у ребенка, передняя часть распорки доходит до середины грудной клетки, фиксация осуществляется с помощью ленты, проходящей от задней части тела ребенка к передней и закрепленной на передней части двумя застежками.

Распорка удерживает бедра ребенка в положении сгибания и отведения в тазобедренных суставах, обеспечивая тем самым выгодное положение для формирования тазобедренных суставов.

Конструкция изделия обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия, не оказывает избыточного давления на кожные покровы ребенка.

Самостоятельный ремонт изделия запрещен.

Обработку проводить методом двукратной протирки поверхностей распорок 3% раствором перекиси водорода с добавлением синтетических моющих средств. Интервал между протирками 10-15 минут. После протирки поверхности изделия вытирают насухо чистой салфеткой.. При этом внешний вид и размеры распорок не должны изменяться.

Не следует хранить изделие вблизи источника тепла.

Инженер-технолог

М.С. Айзатуллова