


Министерство здравоохранения и социального развития РФ
Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию
ФГУП «Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие» Росздрава

УТВЕРЖДАЮ:

*Директор ФГУП «Ульяновского
протезно-ортопедического
предприятия» Росздрава*

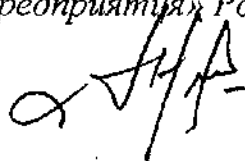

В.Г. Чуйков

Памятка по пользованию

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

КРО-107

2006 год

Корсет полужёсткий на поясничный отдел позвоночника КР0-107 (далее – корсет) предназначен преимущественно детям и взрослым с умеренно выраженной подкожной жировой клетчаткой при туберкулёзных спондилитах в затихающей или затихшей стадиях, при люмбагиях, после ламинэктомии, компрессионные переломы тел позвонков в стадии консолидации.

НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КОРСЕТА

В положении «стоя» корсет надевают на туловище, а голову располагают в головодержателе. В положение «лёжа» производится подгонка корсета и его фиксация. Корсет должен плотно прилегать к телу не оказывая болезненного давления на костные выступы и мышечные ткани в зафиксированном положении. Голова в головодержателе располагается таким образом, чтобы условная линия проведённая через мочку уха и кончик носа была перпендикулярна плоскости спины.

УХОД ЗА КОРСЕТОМ

При пользовании корсетом, следует оберегать его от механических повреждений. Внутреннюю поверхность корсета следует протирать 2-3 раза в неделю нейтральными гигиеническими средствами с последующей просушкой. Не следует хранить корсет вблизи отопительных приборов и открытого огня.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

Проводить гигиеническую обработку кожных покровов, не реже двух раз в сутки, теплым мыльным раствором, салициловым спиртом, с последующим массажем всей спины.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРСЕТА

Ежедневно после снятия корсета проводить физические упражнения, направленные на укрепление мышц спины («бабочка», наклоны и повороты туловища), дыхательную гимнастику.