



Утверждаю

Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»

Минздравсоцразвития России

В.Г. Чуйков

**Руководство по эксплуатации распорки детской
«Разводящая с манжетами» (по типу «Шины Виленского»)
ПНО-34**

Распорку надевают в лежачем положении на нижние конечности ребенка в области голени, разводящая штанга регулируется ограничительным винтом, соединенная через шарниры с двумя манжетами. Ограничительный винт позволяет изменять угол разведения ног. Фиксация манжет осуществляется на нижней конечности ребенка с помощью застёжки текстильной «контакт».

В положении стоя проверить удобство размещения ног в распорке, сопряженность движений.

При нагрузке обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия, не оказывает избыточного давления на кожные покровы ребенка, при его появлении необходимо прекратить пользоваться распорками и обратиться на предприятие-изготовитель.

Самостоятельный ремонт изделия запрещен.

Пользоваться неисправными распорками противопоказано.

Обработку проводить методом двукратной протирки поверхностей распорок 3% раствором перекиси водорода с добавлением синтетических моющих средств. Интервал между протирками 10-15 минут. После протирки поверхности изделия вытирают насухо чистой салфеткой. При этом внешний вид и размеры распорок не должны изменяться.

Не следует хранить изделие вблизи источника тепла.

Инженер-технолог

М.С. Айзатуллова