

Утверждаю
Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
В.Г. Чуйков

**Руководство по эксплуатации
Бандажей ортопедических на коленный сустав
(неразъемного) БНЗ-03; (разъемного) БНЗ-04**

Бандажи ортопедические на коленный сустав БНЗ-03, БНЗ-04 предназначены для фиксации коленного сустава при легкой нестабильности, артрозо-артритах, бурситах, гемартрозах.

Бандажи изготавливаются по индивидуальному заказу потребителя.

Конструкция бандажей обеспечивает удобство пользования ими при эксплуатации, плотно прилегает к телу, не оказывает болезненного давления и не смещается вдоль тела

Бандаж надевается «сидя» в области коленной чашечки, фиксируется застежкой из ворсовой ленты «Контакт». Для дополнительной фиксации бандажей к задней детали пояс - подхват из ленты эластичной, передняя часть которой крепится на застежку ворсовую «Контакт» или подхват из эластичного полотна, втаченного в боковые швы.

Самостоятельно ремонтировать запрещено.

Бандаж стирают в воде с температурой до $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 1-2 раза в неделю с применением моющих средств или мыльным раствором с последующей просушкой.

Не следует хранить бандаж вблизи источника тепла.

Инженер-технолог



М.С. Айзатуллова