



Утверждаю
Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
В.Г. Чуйков

Руководство по эксплуатации бандажа грыжевого пахового

Бандажи грыжевые паховые: БН5-15 и БН5-16, являются паллиативным средством, улучшающим состояние больного, препятствующим дальнейшему развитию заболевания при противопоказании к операции. Применяются при вправляемых паховых, пахово-мошоночных грыжах. Бандажи способствуют удержанию грыжевого дефекта при помощи пелота, закрывающего грыжевое кольцо.

Бандаж надевается в положении стоя на нижнее белье потребителя, плотно охватывая таз и закрывая грыжевое кольцо, препятствуя грыжевому выпячиванию при сидении, ходьбе, движениях и при кашле. Фиксация бандажа осуществляется с помощью застежки на крючке и отверстия в крышке пелота и подбедренников.

Бандаж не ограничивает дыхательное движение брюшной полости и не оказывает болезненного давления.

Самостоятельная разборка и ремонт запрещен.

Бандаж стирают в воде с температурой до $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ с применением моющих средств или мыльным раствором.

Не следует хранить бандаж вблизи источника тепла. Металлические детали и элементы крепления следует предохранять от попадания влаги.

Инженер-технолог

М.С. Айзатуллова