

Министерство труда и социального развития РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
"ФЦЭРИ"



Зам. ген. директора по
протезированию и
реабилитационной индустрии

С.В.Сергеев

ПОЯС ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КРО-34

Инструкция по назначению
КРО-34.00.00 ИИ

№ инст.	Подпись и дата	Взам. и ин. №	Изм. № и дата	Подпись и дата
1/553	27.12.01			

Сопров. бер на
регистрацию
В. И. Пучков

Инструкция предназначена для работников протезно-ортопедических предприятий, осуществляющих протезирование больных, страдающих пояснично-крестцовыми болями на почве остеохондроза или спондилолистеза I ст.

Пояс ортопедический КРО-34 (далее -пояс) представляет собой кожаный пояс с накладкой, надеваемый на поясничный отдел туловища и таз. Сзади пояс расширен и захватывает весь поясничный и частично крестцовый отдел позвоночника, по бокам облегает область талии и крылья таза, сужаясь переходит на область передней стенки живота, где и застегивается при помощи штрипок и капок с пряжками.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЯСА

1.1. Пояс назначается больным с целью частичной стабилизации, фиксации, разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника и уменьшения "отвисания" живота.

Осуществляемая фиксация и коррекция не должны затруднять ходьбу и сидение.

1.2. Пояс назначается лечалым врачом-ортопедом, невропатологом или нейрохирургом. Им же устанавливается режим и сроки пользования поясом (как правило, на период обострения болевого синдрома).

2. ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Пояс показан при:

- умеренно выраженных пояснично-крестцовых болях на почве остеохондроза, особенно при преимущественном поражении дисков;
- спондилолистезе I ст.;
- в позднем послеоперационном периоде после резекции дисков и спондилодезе.

КРО-34.00.00 ИН

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Скоблин	<i>[Подпись]</i>	2009.9
Провер.		Сливак	<i>[Подпись]</i>	2009.9

Пояс ортопедический
КРО-34

Лит.	Лист	Листов
А	2	4

000-000

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Пояс противопоказан при:

- резко выраженном болевом синдроме, когда ходьба и положение "сидя" больному запрещены;
- воспалительных заболеваниях кожных покровов в области фиксации поясом;
- чрезмерно развитой подкожно-жировой клетчатке, ожирении 3 ст., при которых эффективность воздействия пояса минимальна.

И.в. № подл.	Подп. и дата	И.в. инв. №	И.в. № дубл.	Подп. и дата
10553	<i>С.К.С.</i> 27.12.01			

КРС-01.00.00 ИИ

Дата

С

Лист регистрации изменений

№, К. подл.	Подп. и дата	Взам. ин. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
00553	<i>[Signature]</i> 27.12.01			

[illegible]