

Утверждаю
Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
В.Г. Чуйков



Руководство по эксплуатации бандажа на голеностопный сустав БНЗ-64

Бандажи ортопедические на голеностопный сустав БНЗ-64, предназначены для профилактики травм, нестабильность голеностопного сустава легкой и средней степени, состояние после травм капсульно - связочного аппарата голеностопного сустава, артрозы, артриты, теносиновиты, ахиллобурситы.

Конструкция бандажей обеспечивает удобство пользования ими при эксплуатации, плотно прилегает к телу, не оказывает болезненного давления и не смещается вдоль тела.


Бандаж надевается «сидя» на голень, фиксируется застежкой из ворсовой ленты «Контакт». Для дополнительной фиксации бандажей к задней детали пояса — подхват из ленты эластичной, передняя часть которой крепится на застежку ворсовую «Контакт» или подхват из эластичного полотна, втаченного в боковые швы.

Самостоятельно ремонтировать запрещено.

Бандаж стирают в воде с температурой до $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 1-2 раза в неделю с применением моющих средств или мыльным раствором с последующей просушкой.

Не следует хранить бандаж вблизи источника тепла.

Инженер-технолог

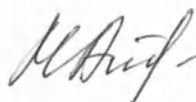

М.С. Айзатуллова