


ЗАО "Аксиома-Сервис"

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

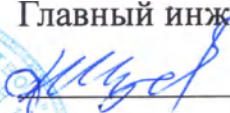

 А.Н.Шустов

**СТОЙКИ ПРИБОРНЫЕ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ, ЭНДО-
СКОПИЧЕСКИЕ, ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ И АППАРАТНЫЕ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ АППАРАТОВ И ПРИБО-
РОВ - «АКСИ»**

Паспорт

9452 ПС

2018

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики «Стоек приборных видеоэндоскопических, эндоскопических, лапароскопических и аппаратных для размещения медицинских аппаратов и приборов - "АКСИ" (в дальнейшем – стойки). Документ устанавливает правила их эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание их в постоянной готовности к работе.

Показания: стойки предназначены для размещения диагностического и операционного оборудования, приборов, дисплеев в лечебных учреждениях. Оптимально подходят для установки в операционных, лечебно-смотровых и диагностических кабинетах

Противопоказания и побочные действия к применению стоек отсутствуют.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Стойки предназначены для размещения, подключения к электропитанию и перемещению аппаратов и оборудования при выполнении видеоэндоскопических, эндоскопических и лапароскопических операций. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.2 Рабочие условия эксплуатации:

температура:

верхнее значение - плюс 35° С;

нижнее значение - плюс 5° С;

влажность:

65-80%;

давление:

630-800 мм. рт. ст.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Габаритные размеры стоек, мм, не более:

- тип 1 – высота х ширина х глубина - 1759±23х1021±12,5х769±12,5
- тип 2 – высота х ширина х глубина - 1682±23х1021±12,5х660±12,5
- тип 3 – высота х ширина х глубина - 1682±23х750±12,5х660±12,5
- тип 4,5 – высота х ширина х глубина - 1325±23х750±12,5х660±12,5
- тип 6 – высота х ширина х глубина - 1680±23х750±12,5х770±12,5
- тип 7 – высота х ширина х глубина - 920±16,5х747±12,5х769±12,5

3.2 Грузоподъемность каждой полки, кг, не более 20

3.3 Суммарная мощность подключаемых приборов, ВА, не более 2000



3.4 Длина шнура питания 3 м

3.5 Масса стойки в собранном виде, кг, не более:

- тип 1-6 - 55 кг.

- тип 7 - 20 кг.

3.6 Наружные поверхности стойки устойчивы к циклу дезинфекции по МУ 287-113-98 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

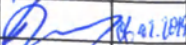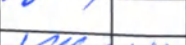					9452ПС			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	«Стойки приборные видеоэндоскопические, эндоскопические, лапароскопические и аппаратные для размещения медицинских аппаратов и приборов - "АКСИ" Паспорт	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Королев		06.01.2019		A	2	15
Пров.		Пресман		14.01.2019				
Н.контр.		Шустов		14.01.2019				
					ЗАО «Аксиома-Сервис»			

4. ТИПЫ СТОЕК

4.1 Типы стоек и отметка о изготовлении приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Отметка о из- готовленном исполнении
Стойка СПЛ-01 – «АКСИ» тип 1 лапароскопическая с рамкой для крепления монитора	8100.00.000	
Стойка СПЛ-02 – «АКСИ» тип 2 лапароскопическая с кронштейном для крепления монитора	8200.00.000	
Стойка СПЛ-03 – «АКСИ» тип 3 лапароскопическая	8300.00.000	
Стойка СПЭ-01 – «АКСИ» тип 4 эндоскопическая	8500.00.000	
Стойка СПЭ-02– «АКСИ» тип 5 эндоскопическая с держателем клавиатуры	8700.00.000	
Стойка СПВЭ – «АКСИ» тип 6 видеоэндоскопическая	8900.00.000	
Стойка СПА – «АКСИ» тип 7 аппаратная	8215.00.000	

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки стоек должен соответствовать, указанному в табл.2

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Количество шт.						
		Тип						
		1	2	3	4	5	6	7
1.Стойки приборные видеоэндоскопи- ческие, эндоскопические, лапароско- пические и аппаратные для размеще- ния медицинских аппаратов и прибор- ов-«АКСИ»								
тип 1	8100.00.000	1						
тип 2	8200.00.000		1					
тип 3	8300.00.000			1				
тип 4	8500.00.000				1			
тип 5	8700.00.000					1		
тип 6	8900.00.000						1	
тип 7	8215.00.000							1
2. Отвертка универсальная		1	1	1	1	1	1	1
3. Ключ торцевой шестигранный		2	2	2	2	2	2	2
4. Провод для заземления полок, дли- ной 9 м		1	1	1	1	1	1	1
5. Стойки приборные видеоэндоско- пические, эндоскопические, лапаро- скопические и аппаратные для раз- мещения медицинских аппаратов и приборов-«АКСИ» Паспорт	9452ПС	1	1	1	1	1	1	1

9452ПС

Лист

6. СОСТАВ СТОЕК

6.1 Состав стоек тип 1...6 указан в таблице 3 и рис.1

Таблица 3

.Поз.	Наименование	8100.00. 000 Тип 1	8200.00. 000 Тип 2	8300.00. 000 Тип 3	8500.00. 000 Тип 4	8700.00. 000 Тип 5	8900.00. 000 Тип 6
1	Полки	3	3	4	3	3	3
2	Тележка с колесами и ящиком	1	1	1	1	1	1
3	Опора левая	1	1	1	1	1	1
4	Опора правая	1	1	1	1	1	1
5	Кронштейн для установки ёмкостей	1	1	1	1	1	1
6	Установка основная для монитора медицинского	1					
7	Кронштейн для установки дисплея медицинского		1	1			1
8	Штатив для инструментов				1	1	1
9	Штатив для эндоскопа				1	1	1
10	Кронштейн для крепления камерной головки	1	1	1	1	1	1

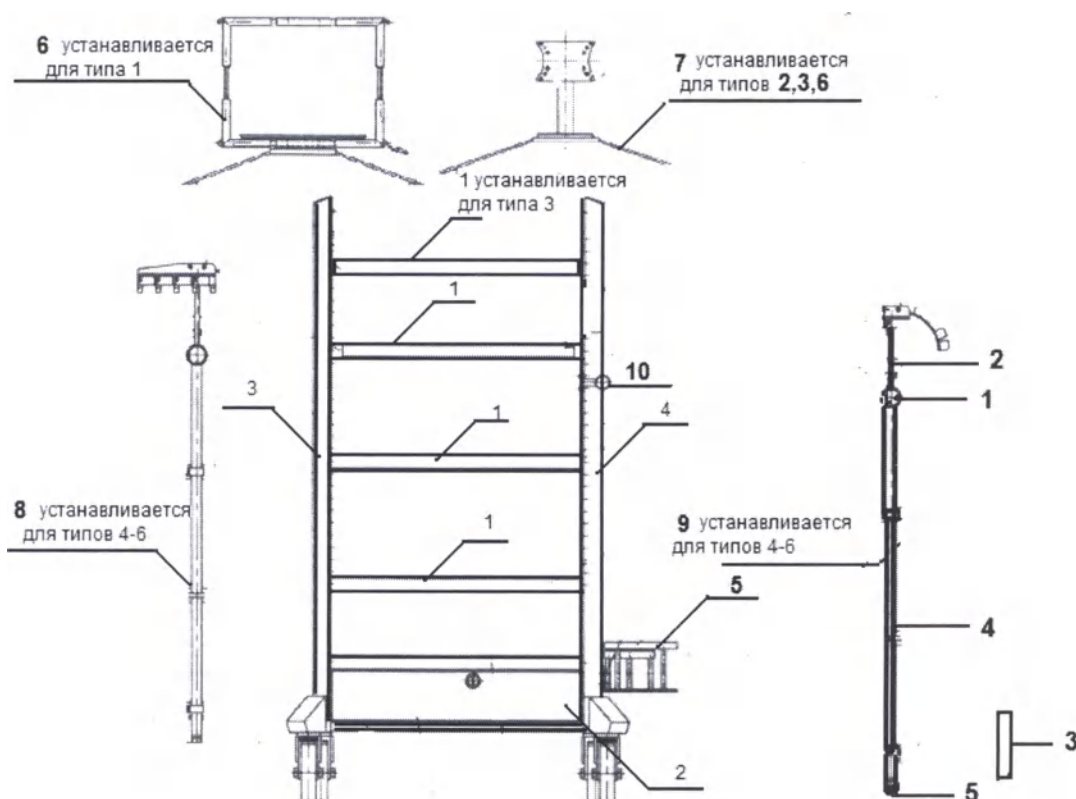


Рис.1

6.2 Состав стойки тип 7 указан в таблице 4 и рис.2

Таблица 4

Поз.	Наименование	Количество
1	Полка съёмная	1
2	Опора левая	1
3	Опора правая	1
4	Ящик	1
5	Тележка с колёсами	1

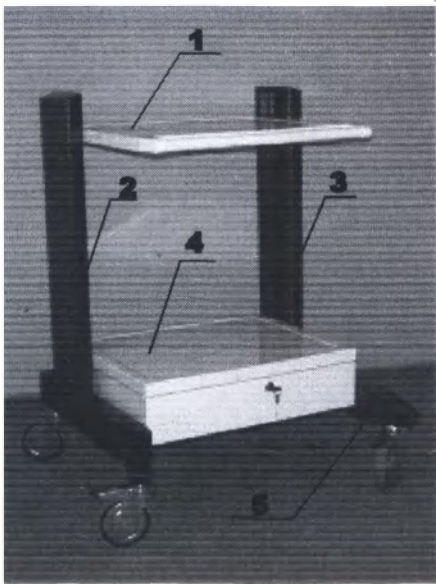


Рис.2

7. ПОРЯДОК СБОРКИ СТОЕК

7.1 Сборка стоек типа 1...6

7.1.1 Перед началом сборки необходимо распаковать стойку, проверить состав согласно таблице 3.

7.1.2 Сборку стойки необходимо производить в следующей последовательности:

7.1.2.1 Вынуть выдвижной ящик из направляющих, преодолев некоторое усилие, выдвинув его вперед и наклонив вверх (рисунок 3)



Рисунок 3

7.1.2.2 Закрепить правую и левую опоры винтами М8х16 с пружинными шайбами из комплекта. Стойку собирать в горизонтальном положении (рисунок 4).

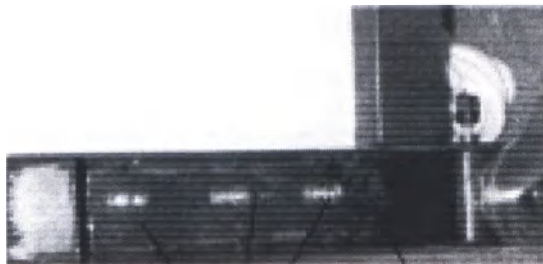


Рисунок 4



ВНИМАНИЕ! На левой опоре имеется направляющий штифт.

7.1.2.3 Установить нижнюю полку между опорами и закрепить ее винтами М6х16 и шайбами пружинными и плоскими из комплекта. Винты ставятся под полкой.

7.1.2.4 Установить аналогичным образом на необходимой высоте оставшиеся полки, заведя с внутренней стороны опор квадратные гайки из комплекта (рисунок 5)

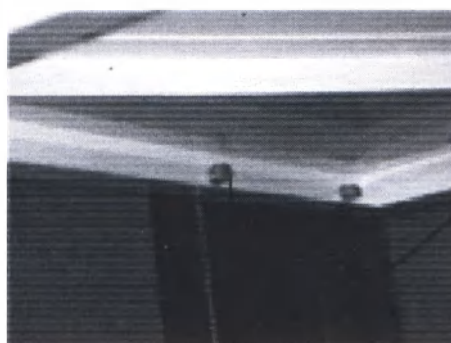


Рисунок 5

7.1.2.5 Установить кронштейн для дисплея медицинского или установку для монитора медицинского в соответствии с поставкой и закрепить крепежом из комплекта.

7.1.2.6 Сборка штатива для эндоскопа

7.1.2.6.1 Ослабить рукоятку 1

7.1.2.6.2 Выдвинуть стержень 2 вверх.

7.1.2.6.3 Вставить дополнительную трубку 3 в трубку 4 до упора.

7.1.2.6.4 Вставить заглушку 5.

7.1.2.7 Установить штативы для эндоскопа и инструмента в соответствии с поставкой и закрепить крепежом из комплекта.

7.1.2.8 Установить кронштейн для емкостей и закрепить крепежом из комплекта.

7.1.2.9 Установить кронштейн для камерной головки и закрепить крепежом из комплекта.

7.2 Сборка стойки тип 7

7.2.1 Перед началом сборки необходимо распаковать стойку, проверить состав согласно таблице 4.

7.2.2 Сборку стойки необходимо производить в следующей последовательности:

7.2.2.1 Вынуть выдвижной ящик из направляющих, преодолев некоторое усилие, выдвинув его вперед и вытаскивая, опустить вниз.



Внимание! В левой опоре имеется направляющий штифт.

7.2.2.2 Наживить правую и левую опоры винтами с шайбами М8, ввернув их снизу тележки с колёсами.

7.2.2.3 Стойку собирать в горизонтальном положении. Прикрепить нижнюю полку к опорам с помощью 4-х винтов М6 с шайбами (гровер и простой). Винты ставятся под полкой.

7.2.2.4 Установить аналогичным образом на необходимой высоте полку съемную с помощью оставшихся 4-х винтов М6 с шайбами (гровер и простой).

7.2.2.5 Затянуть все винты.

8. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Для подготовки к работе необходимо стойку продезинфицировать протираанием марлевой салфеткой, смоченной раствором, в соответствии с МУ287-11-98 п. 3.6 настоящего паспорта. Заземлить с помощью медного провода, входящего в комплект, полки стойки. Для этого, начиная с верхней полки, провести конец провода через отверстие на задней стороне полки, подсоединить его к клемме на ребре жесткости полки (рядом имеется знак заземления), провести провод до следующей полки и заземлить её. Таким же образом заземлить все оставшиеся полки. Провод от последней полки подсоединить к клемме на задней стороне тележки.

Без заземления работать запрещается!

8.2 Разместить необходимые приборы и оборудование на полках.

8.3 Установить монитор или дисплей медицинский.

8.4 Снять защитную крышку с многоместного соединителя отвернув винты 1, подключить сетевые вилки от аппаратов и установить защитную крышку с применением винтов 1 (рисунок 6).

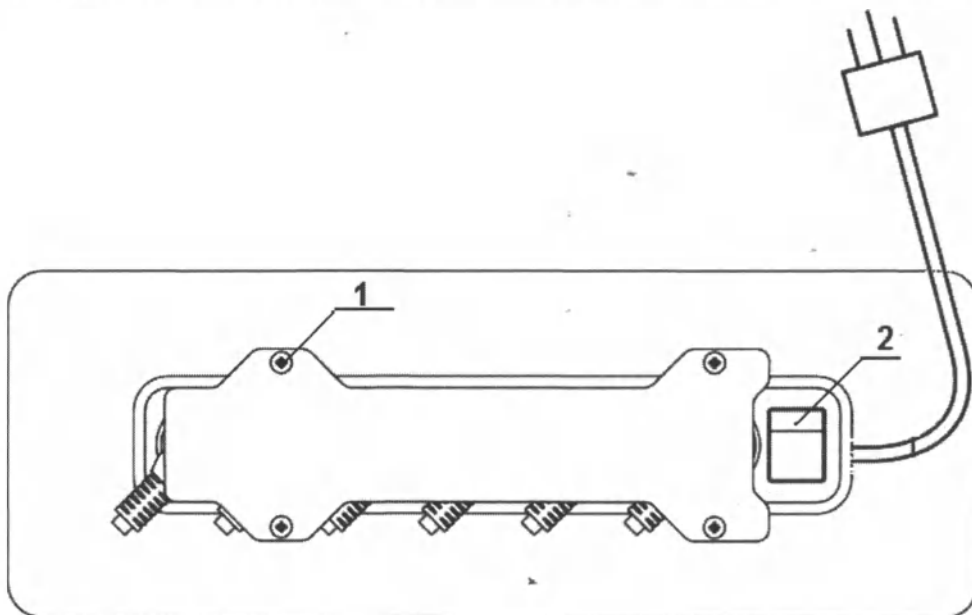


Рис.6

8.5 После этого включить сетевую вилку в сеть.

8.6 Включить сетевой выключатель 2.



Внимание:

1. Категорически запрещается подключать дополнительный многоместный соединитель или удлинительный шнур к многоместному соединителю, установленному на стойке.
2. Разрешается подключать к многоместному соединителю только медицинские изделия, относящиеся к лапароскопическим хирургическим вмешательствам (видеокамера, инсуффлятор, электрохирургический аппарат, аспиратор – ирригатор, осветитель, дисплей или монитор медицинский).
- 3 Категорически запрещается подключать к многоместному соединителю немедицинские изделия.
- 4 Изделия, не включенные в систему медицинскую электрическую, категорически

запрещается подключать к многоместному соединителю, даже если эти изделия являются медицинскими. Подключение таких изделий может превысить допустимое значение мощности, разрешенное для подключения к установленному многоместному соединителю. Допустима суммарная мощность, подключаемых медицинских изделий не должна превышать 2000 ВА.

9. РАЗЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НАНЕСЕННЫХ НА СТОЙКАХ



Общий знак предупреждения безопасности от поражения электрическим током 220 В; 2000 ВА с указанием напряжения и максимальной суммарной мощности подключаемых аппаратов.



Осторожно, хрупкий товар



Беречь от влаги.



Верх товара. Указывает правильное вертикальное положение груза



Особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Адрес производителя



Дата изготовления



Серийный (заводской) номер



Обратиться к инструкции по эксплуатации



Рабочая часть типа BF

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 Стойки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 при температуре от +40 С° до +5 С° (отапливаемое помещение) по ГОСТ 15150-69 не более одного года.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Транспортирование стоек в упаковке предприятия изготовителя может производиться всеми видами транспорта (кроме морского) в закрытых транспортных средствах на любое расстояние. Условия транспортирования по условиям хранения 5 при температуре от +50 С° до -50 С° по ГОСТ 15150-69.

11.2 Расстановка и крепление тары с упакованными стойками в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение тары и отсутствие ее перемещения во время транспортирования.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стоек требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации «Стойки приборных видеоэндоскопических, эндоскопических, лапароскопических и аппаратных для размещения медицинских аппаратов и приборов –

«АКСИ» " – 1 год со дня продажи

течение гарантийного срока предприятие-изготовитель ремонтирует или заменяет стойки и его части по предъявлению претензий.

Послегарантийное обслуживание производится по отдельному договору

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

«Стойка _____ – «АКСИ» тип заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-048-27507632-2010 и признана годной для эксплуатации.

дата выпуска " _____ " _____ 20 ____ г.

(подпись лица ответственного за приемку)

«Стойка _____ – «АКСИ» тип заводской № _____ упакована _____

(наименование предприятия производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 9452-048-27507632-2010.

Дата упаковки " _____ " _____ 20 ____ г.

Упаковку произвёл _____

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПОСТАВКЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

«Стойка _____ – «АКСИ» тип заводской № _____ введё-
на в эксплуатацию (поставлена торгующей организацией) _____

_____ (наименование торгующей организации, кем установлен)

согласно требованиям, предусмотренными паспортом.

Дата ввода в эксплуатацию (поставки торг. организации)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Подпись _____

14. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Дата установки (сня- тия) с учета	Условия хранения	Должность, Ф.И.О, подпись лица, ответственного за хране- ние

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Гарантийный срок эксплуатации медицинского изделия «Стойка

– «АКСИ» тип – 1 год со дня продажи

Неисправности, обнаруженные в течение указанных сроков, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, устраняются предприятием-изготовителем безвозмездно по адресу:

Юридический адрес: 194100, Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д.5, корп. 9, лит. Б.

ЗАО «Аксиома-Сервис»

Адрес производства: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д.14А помещение 1Н, 2Н,

3Н литД ЗАО «Аксиома-Сервис»

Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 8, ЗАО «Аксиома-Сервис»

Телефоны: (812) 380-05-40

Электронная почта: info@aksioma.com. Интернет-сайт: www.aksioma.com

Пересылка стойки для гарантийного ремонта производится за счёт потребителя.

При направлении стойки в гарантийный ремонт наличие настоящего паспорта обязательно!

В рекламации должно быть указано: заводской номер и дата выпуска стойки ; в чем выражается дефект; предполагаемая неисправность; принятые меры для устранения неисправности; название и адрес предъявителя рекламации.

15 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

15.1 Пришедшие в негодность изделия утилизируют в установленном порядке как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-2010 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

При отсутствии печати производителя гарантийный талон недействителен!

Юридический адрес: 194100, Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д.5, корп. 9, лит. Б.
ЗАО «Аксиома-Сервис»

Адрес производства: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д.14А помещение 1Н, 2Н,
3Н литД ЗАО «Аксиома-Сервис»

Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 8, ЗАО «Аксиома-Сервис»

Телефоны: (812) 380-05-40

Электронная почта: info@aksioma.com Интернет-сайт: www.aksioma.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники: «Стойка

- «АКСИ» тип

ТУ 9452-048-27507632-2010

заводской № _____ дата выпуска

продан _____ введен в эксплуатацию _____

(наименование организации)

(дата и подпись)

М.П. _____

(дата)

Владелец и его адрес: _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Дата _____

Представитель предприятия-изготовителя: Владелец:

Подпись _____

Подпись _____

9452ПС

Лист

12

При отсутствии печати производителя гарантийный талон недействителен!

Юридический адрес: 194100, Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д.5, корп. 9, лит. Б.
ЗАО «Аксиома-Сервис»

Адрес производства: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д.14А помещение 1Н, 2Н,
3Н литД ЗАО «Аксиома-Сервис»

Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 8, ЗАО «Аксиома-Сервис»
Телефоны: (812) 380-05-40

Электронная почта: info@aksioma.com. Интернет-сайт: www.aksioma.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники: «Стойка

– «АКСИ» тип

ТУ 9452-048-27507632-2010

заводской № _____

дата выпуска _____

продан _____ введен в эксплуатацию _____

(наименование организации)

(дата и подпись)

М.П. _____

(дата)

Владелец и его адрес: _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Дата _____

Представитель предприятия-изготовителя: Владелец:

Подпись _____

Подпись _____

9452ПС

Лист

13

При отсутствии печати производителя гарантийный талон недействителен!

Юридический адрес: 194100, Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д.5, корп. 9, лит. Б.
ЗАО «Аксиома-Сервис»

Адрес производства: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д.14А помещение 1Н, 2Н,
3Н литД ЗАО «Аксиома-Сервис»

Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 8, ЗАО «Аксиома-Сервис»

Телефоны: (812) 380-05-40

Электронная почта: info@aksioma.com. Интернет-сайт: www.aksioma.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники: «Стойка

«АКСИ» тип

ТУ 9452-048-27507632-2010

заводской № _____

дата выпуска _____

продан _____ введен в эксплуатацию _____

(наименование организации)

(дата и подпись)

М.П. _____

(дата)

Владелец и его адрес: _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Дата _____

Представитель предприятия-изготовителя: Владелец:

Подпись _____

Подпись _____

9452ПС

Лист

14



Юридический адрес: 194100, Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д.5, корп. 9, лит. Б. ЗАО «Аксиома-Сервис»

Адрес производства: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д.14А
помещение 1Н, 2Н, 3Н литД ЗАО «Аксиома-Сервис»

Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 8,
\ЗАО «Аксиома-Сервис»

Телефоны: (812) 380-05-40

Электронная почта: info@aksioma.com. Интернет-сайт: www.aksioma.com



www.aksioma.com

Прошнуровано и скреплено
печатью 15 листов

Генеральный директор

Подпись

"12" 02 2019г.