

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАТРАЦ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ С ЭФФЕКТОМ ЗАПОМИНАНИЯ ФОРМЫ (МОДЕЛИ 574, 576)

О п и с а н и е: Матрац предназначен для равномерного распределения давления на тело пациента и профилактики образования пролежней у контингента больных с нарушением опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях позвоночника и болях в спине.

Матрацы – комбинированные изделия, состоящие из 2-х (модель 576) или 3-х (модель 574) формообразующих подушек, поверхность которых оформлена из отдельных квадратных ячеек, обеспечивающих циркуляцию воздуха.

Бактерицидный чехол обладает стойким бактерицидным эффектом за счет наноструктурированного покрытия раствором бентонита в серебряной форме (ТУ 9336-002-99699175-07).

К о м п л е к т а ц и я: Матрацы используются в клинических, поликлинических условиях и в быту, комплектуются съемными хлопчатобумажными и бактерицидными чехлами. Модели 574 и 576 комплектуются чехлом из клеенки подкладной на полиэфирной основе, модели 574/1 и 576/1 комплектуются чехлом из ткани биэластик.

П р и м е н е н и е: Изделие укладывается на кровати (спальном месте). При надлежащем уходе изделие прослужит Вам длительный период времени. Для увеличения срока эксплуатации соблюдайте простые правила:

- Используйте матрац и подушку только в чехле и непосредственно по назначению.
- Не проливайте на нее красящие вещества, напитки и лекарства.
- Избегайте использования колюще-режущих предметов.
- При необходимости возможна машинная или ручная стирка хлопчатобумажного чехла. Для этого аккуратно извлеките элемент матраца или подушку из чехла, при этом не допускайте рывков и резких движений.



ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ

П. Н. МАХОНИН

Технические характеристики:

Модель	Габаритные размеры (мм)	Вес (кг)	Допустимая нагрузка (кг)
574	1950x850x80	11,5	120
576	1300x850x80	7,5	120

Уход за изделием:

Бактерицидный чехол матраца или подушки-сидения протирается влажной тканью и просушивается вдали от отопительных приборов.

При необходимости можно производить санитарную обработку подушки-сидения или элементов матраца мягкой тканью, смоченной в растворе детского мыла с последующим протиранием влажной тканью без моющего средства. Затем следует просушить изделие в хорошо проветриваемом помещении вдали от отопительных приборов.

ТУ 9396-053-03151337-2013

Гарантийный талон

Производитель: ФГУП «РЭЗ СП» Минтруда России гарантирует соответствие ТУ в течение 24 месяцев с даты продажи (выдачи) в эксплуатацию при соблюдении вышеуказанных условий (инструкции).

Гарантия распространяется только на производственный брак.

Дата изготовления указана на этикетке.

С условиями эксплуатации ознакомлен (а) _____

Подпись, дата

Дата продажи (выдачи) _____



КОПИЯ
Директор предприятия

П. И. МАХОНИН

De

ЛИСТОВ

Г.И.