



Фотография 1 общего вида медицинского изделия:

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ «**Медицинский индивидуальный с эластичным бинтом стерильный по ТУ 21.20.24-114-58379990-2020»**



Фотография 2 общего вида медицинского изделия:

ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ С ЭЛАСТИЧНЫМ БИНТОМ

СТЕРИЛЬНЫЙ

по ТУ 21.20.24-114-58379990-2020

Компрессионный эластичный бинт
Нетканые впитывающие подушечки
Фиксация от случайной размотки
Застежка текстильная «лента контакт»



Ширина бинта	10	CM
Количество подушечек	2	
Номер партии	01/04	A
Дата стерилизации	04	24
Годен до	04	29

Изготовитель ООО «Спецмедтехника»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, 194044, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, пом. 25Н
Тел.: +7 (812) 329-54-80, info@spmt.ru, www.spmt.ru

СПЕЦМЕДТЕХНИКА

СДЕЛАНО
В РОССИИ

РУ № РЗН 2022/18627 от 18.10.2022 г.

Фотография 1 маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Наложите подушечку на рану, удерживая свободный край бинта поврежденной рукой.




2 В случае необходимости сдвиньте вторую подушечку вдоль бинта и зафиксируйте ее на ране.




3 Сделайте полный оборот бинта вокруг поврежденного места. Убедитесь, что подушечки закрывают рану.



4 Продолжайте обматывать вокруг раны, постепенно освобождая бинт от нити, фиксирующей намотку.

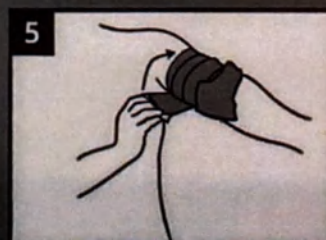

5 Закрепите бинт ленточкой.

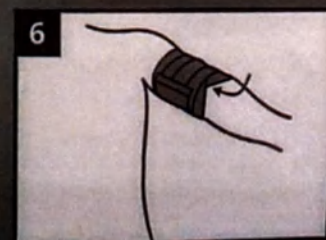

6 Свободный край бинта разместите между слоями намотки в любом удобном месте.

Не использовать при поврежденной упаковке.

Фотография 2 маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия:



Фотография медицинского изделия в индивидуальной упаковке:

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
листа (листов)
Подпись
МП

