

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Подготовка

Установить насадку (3) в ручку (2).

5.2 Работа

- подключить блок питания (1) к розетке ~220/230В 50/60Гц;
- нагрев включается на время удержания кнопки (4) на ручке (2), при этом загорается светодиод (5);
- по окончании работ отсоединить ТН от сети.

5.3 Предупреждения и рекомендации

Не деформировать рабочую часть насадки во избежание ее обрыва.

Внимание !



Устройство укомплектовано блоком питания с диаметром штырей евровилки 4 мм. Необходим контроль надёжности контакта вилка-розетка, особенно, при включении в эту розетку вилок с более толстыми штырями.
Повторное включение не ранее, чем через 1 мин.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование ТН проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°C.

6.2 ТН должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один

ряд при температуре от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C. Не допускается хранение **ТН** совместно с кислотами и щелочами.

7 ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Методы дезинфекции, стерилизации съемных насадок – химические, по МУ-287-113.

Очистку корпуса **ТН** производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь **ТН**.

По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

8 ГАРАНТИИ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ножа термозлектрического для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 требованиям технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему документу.

8.2 Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи, если не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем

Гарантия не распространяется на сменные насадки. Срок службы – 3 года.

8.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

8.4 Изготовитель (Представительство) безвозмездно осуществляет ремонт или замену **ТН** в течение

ABE 240.000.000 PЭ

гарантийного срока эксплуатации при выполнении п.п.8.1,8.3 по письменной заявке владельца, предъявлении настоящего документа, копии документа, подтверждающего оплату (чек, платежное поручение) и комплектации изделия:

- для замены – согласно покупной комплектации, в упаковке Изготовителя;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Изготовитель:

620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
 тел. (343) 234-65-86, www.averon.ru
 факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
 сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

Адреса представительств, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт оборудования АВЕРОН:

МОСКВА	АВЕРОН-М	(495) 785-93-48
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	АВЕРОН-СПб	(812) 275-53-09
АЛМАТЫ	ЛУЧ	(10-73-272) 742-998, ф. 740-157
АРХАНГЕЛЬСК	ИНМЕД	(8182) 63-31-52, 63-31-74, ф. 63-32-02
АСТРАХАНЬ	ЧП САВИН	(8512) 38-28-67, ф. 38-35-84
БАКУ	АРАШ	(10-99-412) 974-216, ф. 977-689
БАРНАУЛ	СИБ. СТОМ. КОМПАНИЯ	(3852) 659-317, ф. 659-318
БЕЛГОРОД	ВЛАДИМВА	(4722) 313-500, ф. 313-502
БИШКЕК	ГРЕЦОВ С.А.	(10-996) 555-77-57-80
ВЛАДИВОСТОК	ДЕНТАЛЬ-ПЛЮС	(4232) 418-094, ф. 418-510
	СТОМАТЕХНИКА	(4232) 405-960, 339-253, ф. 339-983
ВОЛГОГРАД	КРИСТАЛЛ СТОМА	(8442) 377-738, ф. 339-335
	РЕНОМЕ	(8442) 385-258, ф. 385-244
ВОРОНЕЖ	МЕДИКАСЕРВИС	(4732) 532-881, ф. 532-466
ЕРЕВАН	ЛЕВАДЕНТ	(10-37410) 455-456
ИРКУТСК	БЛИК-ТРЕЙД	(3952) 291-071, ф. 258-420
ИЖЕВСК	УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ	(3412) 225-575, 254-006
КАЗАНЬ	РОКАДА ДЕНТ	(843) 570-68-81, ф. 570-68-80
КАЛИНИНГРАД	ИП УМНОВ	(4012) 642-371, 8-906-213-99-54
КИРОВ	ГАММА-ДЕНТ	(8332) 677-910, ф. 677-810
КРАСНОЯРСК	МЕДИА	(3912) 586-880, ф. 365-773
КУСТАНАЙ	СТОМЕД	(10-73-142) 280-160, ф. 280-165
ЛИПЕЦК	ПРЕД-ТИЕ ПО РЕМОНТУ МЕД. ТЕХНИКИ	(4742) 412-378, ф. 406-294
МИНСК	ЛОДЭ-С	(10-37-517) 284-03-04, ф. 284-17-95


v.08-01

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Проверять перед работой надежность установки насадки в ручку.

Остерегаться прикосновения к нагретой части насадки.

4 УСТРОЙСТВО

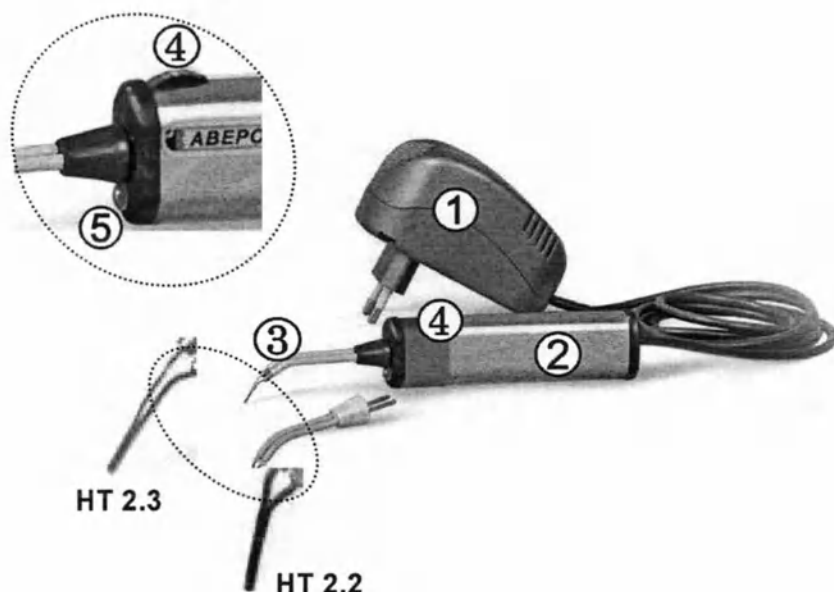

- 1 – блок питания
- 2 – ручка термоножа
- 3 – насадка
- 4 – кнопка включения/выключения
- 5 – светодиод для подсветки рабочей части

Изготовитель вправе изменять конструкцию для улучшения качества изделия.

ABE 240.000.000 PЭ

1.3 Особенности

- два вида режущих насадок;
- быстрая смена насадок;
- малые вес и габариты;
- питание от сети переменного тока.

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25 °C, не более 80 %

1.5 Основные технические характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 200мА
- масса, не более

ручки термоножа	80 г
блока питания	600 г
- габариты блока питания, не более 65×100×95 мм

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- блок питания ~220/+12В 1 шт
- ручка термоножа 1 шт
- насадка НТ 2.2 1 шт
- насадка НТ 2.3 1 шт
- Руководство по эксплуатации АВЕ 240.000.000 РЭ

Нанесенная маркировка по безопасности:



- До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации



- Рабочая часть типа В



- Изделие класса II

МОСКВА	БЕЛМЕДТЕХНИКА	(10-37-517) 284-22-55, ф. 236-92-91
	ГЕОСОФТ-ДЕНТ	(495) 681-90-46, ф. 681-93-06
	РОКАДА МЕД	(495) 933-40-34
	СТОМАТОРГ СЕРВИС	(495) 205-33-69, ф. 744-34-80
НАХОДКА	СТОМАТЕХНИК	(4236) 620-948, ф. 620-458
НОВОСИБИРСК	ИНВЕРСИЯ	(383) 276-02-99, ф. 276-14-56
Н-НОВГОРОД	ФАРМАСТОМ	(831) 216-64-15, ф. 439-32-71
ОДЕССА	ЦЕЛЛИТ	(10-380-48) 7-230-238
ОМСК	ИП МАЛЫШКИН	(3812) ф. 247-333
ОРСК	СТОМАКС	(3537) 272-892, ф. 272-894
ПЕРМЬ	СТЭЛС	(342) 240-96-13, ф. 241-59-74
ПИНСК	МЕДТЕХНИКА	(10-37-5165) 380-724, ф. 380-674
ПЯТИГОРСК	ДЕНТ-АЛ	(87-933) 39-272, ф. 39-275
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИЛЬИН И СЫНОВЬЯ	(863) 267-59-39 ф. 263-04-58
САМАРА	ИНВЕРСИЯ	(846) 233-25-02, ф. 333-23-07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	МЕДЭКСПРЕСС	(812) 326-29-17, ф. 567-80-05, 567-19-77
	СИМТЕХ	(812) 912-39-12, ф. 274-52-47
САРАТОВ	ЕВРОСТОМ	(8452) ф. 237-471
ТАШКЕНТ	SVID	(10-99-871) 173-02-02, 173-19-35
УФА	АНЖЕЛИКА	(3472) 356-210, ф. 337-575
ХАБАРОВСК	СТОМА-ТРЕЙД	(4212) 212-854, ф. 315-752
ЧИТА	МЕДЦЕНТР МЕДИКС	(3022) 360-360, ф. 360-400
ЯРОСЛАВЛЬ	МАГИСТРАЛЬ-КОНТРОЛЬ	(4852) 580-178, ф. 736-983

ABE 240.000.000 PЗ



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие ножа термозлектрического для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов требованиям действующей технической документации

НТ-01 АВЕРОН	
Заводской номер	
Дата выпуска	

Контролер _____
 ООО «ВЕГА-ПРО» (подпись, штамп)

Продавец _____
 (подпись)

Дата продажи _____



Гарантия по дате продажи действительна
 при наличии даты продажи, печати и подписи продавца.

**АВЕРОН**электронная и
медицинская техника

НОЖ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 АВЕРОН

Рег. удостоверение №ФС 022а2004/0831-05 от 15.11.2004

Руководство по эксплуатации АВЕ 240.000.000 РЭ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на нож термoeлектрический для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 АВЕРОН, ОКП 945220, ТУ 9452-029-25014322-2004, (далее - **ТН**).

1.2 **ТН** предназначен для:

- срезания пучков гуттаперчевых штифтов в области устья канала с возможностью конденсации;
- срезания центрального пластмассового штифта при работе с термопластической гуттаперчей;
- локальной, неглубокой гингивотомии при кариозных полостях II класса, totally разрушенных коронках зубов.

