

Руководство по эксплуатации изделия медицинского назначения.

Костыль опорный КМ-753.

Костыли КМ-753 предназначены для опоры при ходьбе и облегчения самостоятельного передвижения при заболеваниях и деформациях позвоночника, выраженном парапарезе нижних конечностей, параличе и выраженном парезе одной нижней конечности.

Костыли оснащены устройством против скольжения.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.

1. Освободить костыль от упаковки.
2. Выставить удобное положение ручки и зафиксировать. Для этого открутить гайку с одной стороны ручки и вытянуть шпильку; переместить ручку на нужную высоту, вставить шпильку и зафиксировать ручку гайкой.
3. Выбрать удобное положение подмышечной опоры и зафиксировать. Для этого переместить ножку в нижней части фиксатора по отверстиям и зафиксировать.
4. Воспользоваться устройством против скольжения, позволяющим пользоваться изделием на скользкой поверхности. Для этого выдвинуть штырь и зафиксировать положение.
5. Протереть изделие теплой водой с моющими средствами.
6. В процессе эксплуатации, либо после длительного хранения необходимо производить осмотр костылей на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Фирма-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и рекомендаций настоящей инструкции.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи при выполнении требований и рекомендаций настоящей инструкции.

Все замечания и предложения по качеству изделий просим Вас направлять по адресу:

195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 52

ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минздравсоцразвития России

Директор ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП»
Минздравсоцразвития России

О.Н.Прокопчук

