

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СПЕКТРУМ»

Федюнина М.А.

«10» ноября 2021 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ И ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

«Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках»

Изменено (Изм. №1): 26.08.2024

Москва, 2021 г.



**ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН**

6X10 CM

**ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВЛЯЕТ
ОТ СУХИХ МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ**

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ**

**Салициловая
кислота**



Смягчает огрубевшие
участки кожи

**Чайный
фенол**



Антибактериальное
и антисептическое
действия

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ
ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН**

6X10 CM

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения или/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.
Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН в отдельных упаковках, размер, см: 6,0 x 10,0.
Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чай – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.
Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °С до +30 °С и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.
 Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.
Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джейджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко., ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортер в РФ: ООО «СПЕКТРИМ», 105066, г. Москва, вилтер, г. муниципальный округ Басманный, ул. Никиты Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/б. Тел./факс: +7 495 663 80 58. E-mail: info@spectrumunion.ru




ру № _____

Дата выпуска:  _____

Годен до:  _____

Партия №:  _____

Символы маркировки на потребительской упаковке (в приближении, здесь и далее) :

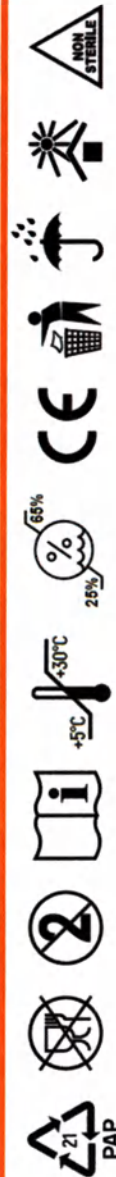

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ ДОКТОР МОЗОЛЬКИН

6X10 CM

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полосу.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.


Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН в отдельных упаковках, размер, см: 6.0 x 10.0.

Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чай – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла. Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джедджанг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Никитя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

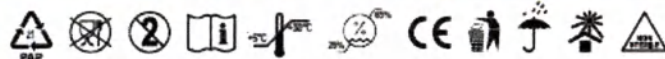

РУ № _____

Дата выпуска:



Годен до:



Партия №:



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ ДОКТОР МОЗОЛЬКИН

3,8 X 3,8 CM

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полосу.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках. Вариант исполнения:

лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН в отдельных упаковках, размер, см: 3.8 x 3.8.


Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чай – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.

Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джедджанг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Никитя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

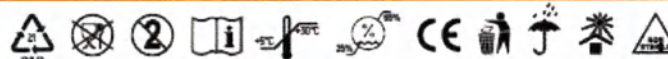

РУ № _____

Дата выпуска:



Годен до:



Партия №:



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

6,0 X 5,0 CM

ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках. Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН в отдельных упаковках, размер, см: 6,0 x 5,0.


Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чай – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.

Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджянганг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед») №668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. с. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

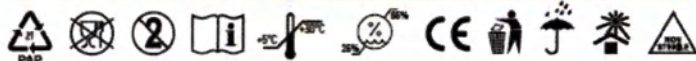

РУ № _____

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

LOT	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

2,2 CM

ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.

Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН в отдельных упаковках, размер, см: диаметр 2,2.


Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чай – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.

Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджянганг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед») №668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. с. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

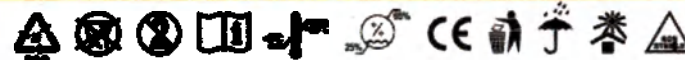

РУ № _____

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

LOT	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН

6,0 X 8,0 CM

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках. Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН в отдельных упаковках, размер, см: 6,0 x 8,0.


Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чая – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.

Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джедхонг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед») №668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

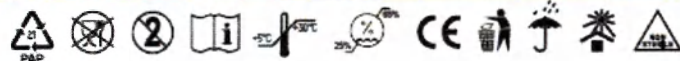

РУ № _____

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

LOT	
-----	--

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН

1,0 X 3,8 CM

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках. Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН в отдельных упаковках, размер, см: 1,0 x 3,8.


Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чая – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.

Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джедхонг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед») №668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

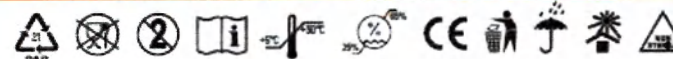

РУ № _____

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

LOT	
-----	--

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

6,0 X 10,0 CM

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках. Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный Master Uni в отдельных упаковках, размер, см: 6,0 x 10,0. Состав: тканевая основа, клей – 94,3%, салициловая кислота – 5%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла. Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед») No 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru



РУ № _____

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

Дата выпуска:	
Годен до:	
Партия №:	LOT

8 594202 462909

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

6X10 CM



Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках. Вариант исполнения:

лейкопластырь мозольный КЛИНСА в отдельных упаковках, размер, см: 6,0 x 10,0.

Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чай – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.

Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед») №668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru



РУ № _____

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

Дата выпуска:	
Годен до:	
Партия №:	LOT

8 594202 462930


FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВЛЯЕТ
ОТ СУХИХ МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ

САЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА
+
ЧАЙНОЕ
ДЕРЕВО

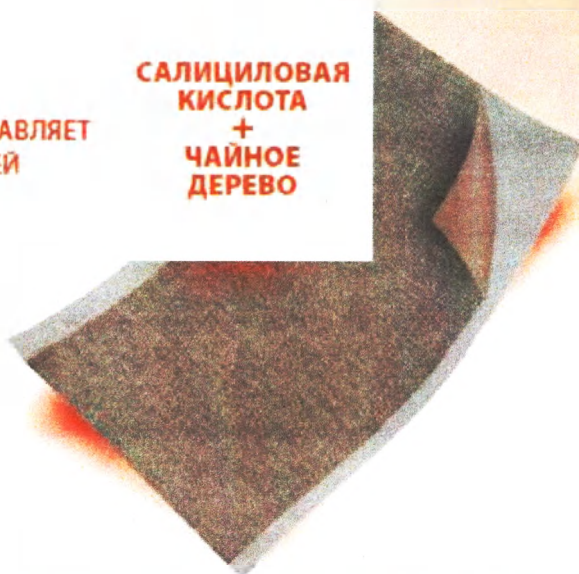

1 штука

6 x 10 см

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ



**салициловая
кислота**
смягчает
огрубевшие
участки кожи



**чайный
фенол**
антибактериальное
и антисептическое
действие

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ, ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
Лейкопластырь мозольный FirstAid в отдельных упаковках, размер, см: 6.0 x 10.0.

Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%,
фенол чай – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

БУДЬ ЗДОРОВ!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ☑ Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
- ☑ По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
- ☑ Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
- ☑ Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1–2 дня.
- ☑ Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
- ☑ При необходимости повторите процесс 3–4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ☑ Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
- ☑ Только для однократного применения.
- ☑ В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла. Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

РУ №

■ **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джедзианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/ИМПОРТЕР В РФ:

ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.




Дата изготовления/Mfg date: _____


Годен до/Use before: _____

Партия №/LOT: _____



Фотографические изображения изделия

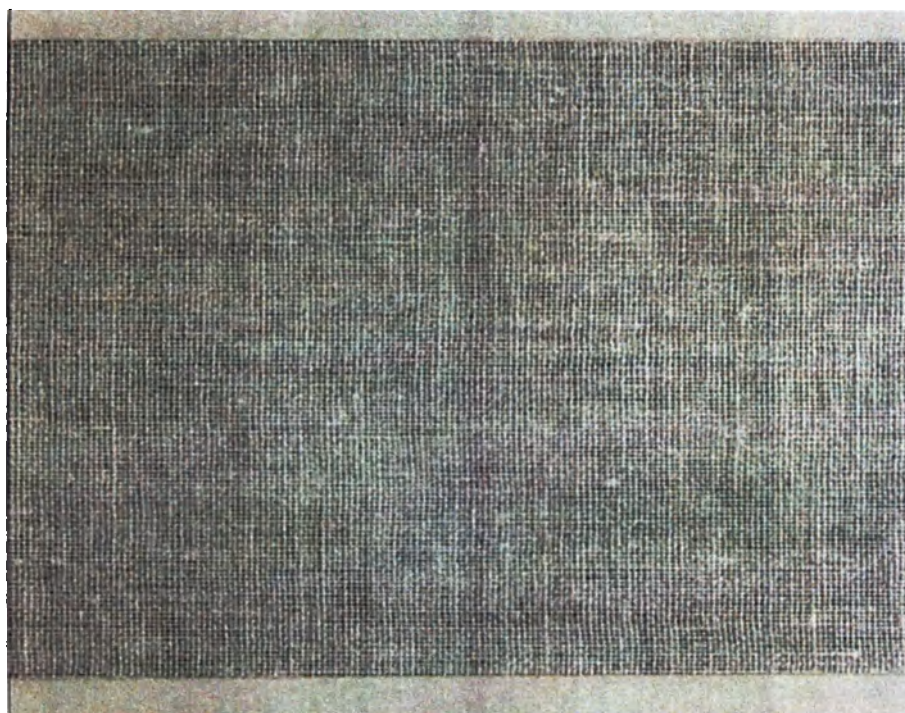

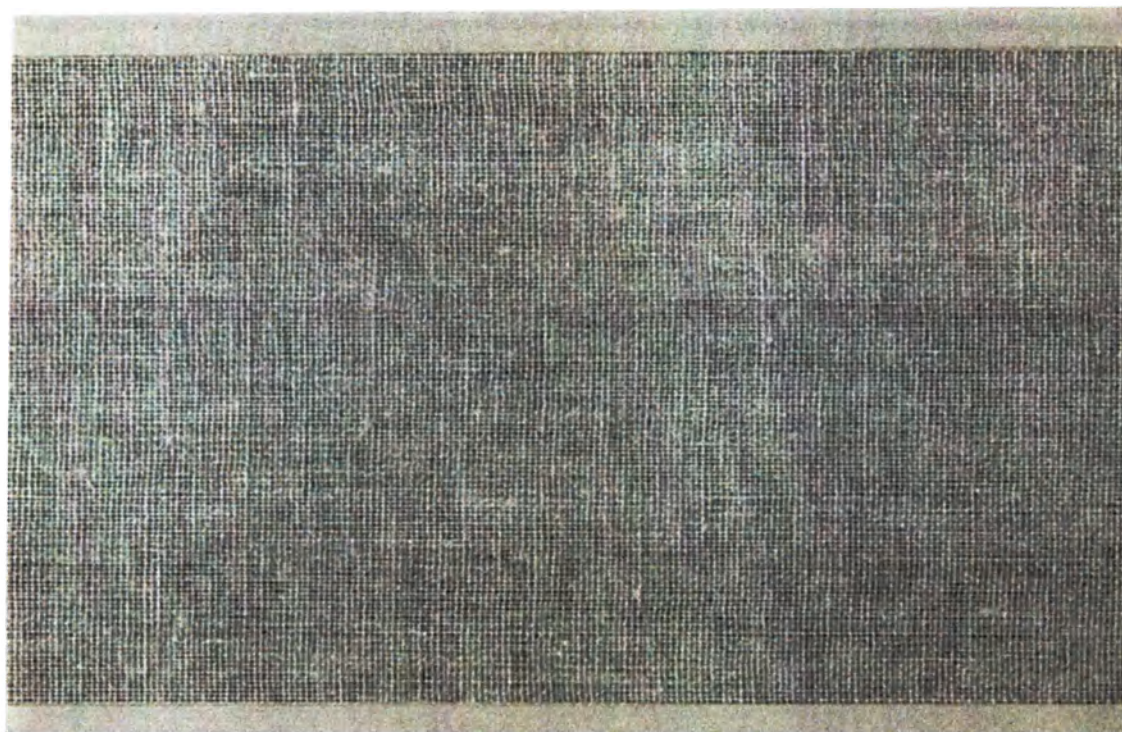

41



50
PCS/ШТ.

Состав: тканевая основа, клей – 94,3%,
салициловая кислота – 5%,
вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%,
пищевой пигмент – 0,1%.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость, повышенная
чувствительность к активным веществам,
кожные заболевания, нарушение
целостности кожных покровов в местах
предполагаемого наложения пластыря.

Правила хранения: хранить в сухом,
защищённом от света месте, при
температуре от +5 °С до +30 °С и влажности
не более 65%, вдали от источников тепла.
Не являются восстановленными.
Отпускаются без рецепта.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ

consumed

50
PCS/ШТ.

РУ №

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical
Commodity Co., LTD» («Джедзианг Хонгу
Медикал Коммодити Ко. Лимитед»). No.668
ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional
Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская
Народная Республика.

**Уполномоченная организация/Импортер
в РФ:** Уполномоченная организация/
Импортер в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35,
стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495
665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. ОТДЕЛИТЕ ВЕРХнюю ЧАСТЬ КОРОБА
ПО ПЕРФОРАЦИИ
2. АККУРАТНО РАЗЛОЖИТЕ ПЛАСТЫРИ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления ороговевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

4X10 CM

50 PCS/ШТ.





ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН



50
PCS/ШТ.

Состав: тканевая основа, клей – 93,3%,
салициловая кислота – 5%, фенол чая –
1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой
пигмент – 0,1%.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость, повышенная
чувствительность к активным веществам,
кожные заболевания, нарушение
целостности кожных покровов в местах
предполагаемого наложения пластыря.
Правила хранения: хранить в сухом,
защищенном от света месте, при
температуре от +5 °С до +30 °С и влажности
не более 65%, вдали от источников тепла.
Не являются восстановленными.
Отпускаются без рецепта.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН



50
PCS/ШТ.

ру №

Производитель: «Zhejiang Hongyu
Medical Commodity Co., LTD» («Джедзюанг
Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед»),
No.668 ChanHua Road, Fotang Town
Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортёр
в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вк.тер. с муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64,
этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665
80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

КОРОБ-ТРАНСФОРМЕР ЛЕГКО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
В УДОБНЫЙ ДИСПЛЕЙ-ПОДСТАВКУ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. ОТДЕЛИТЕ ВЕРХнюю ЧАСТЬ КОРОБА
ПО ПЕРФОРАЦИИ
2. АККУРАТНО РАЗЛОЖИТЕ ПЛАСТЫРИ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый
кусочек, снимите защитную бумажную полосу.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным
лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного
удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо
проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической
реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.



50 PCS/ШТ. 3.8X3.8 CM

6X10 CM

**ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН**



ДОКТОР МОЗОЛЬКИН

**ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВЛЯЕТ
ОТ СУХИХ МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ**

**ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН**



2. АНКУРАТНО РАЗЛОЖИТЕ ПЛАСТЫРИ



Способ применения

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, снимите пластырь или оторвите необходимый кусочек, оставив заготовку бумажную подложку.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации заклейте пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного излечения отягчающей болезни.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения или/и аллергической реакции, прекратить использование пластыря и обратиться к врачу.

50
PCS/UNIT

Состав: тефалевый порошок - 95,3%,
салициловая кислота - 5%, фенол - 1%,
азобелин - 0,4%, стирол - 0,2%, глицерин
пигмент - 0,1%.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность и наличием заболеваний, включая заболевания, нарушающие целостность кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Противопоказано применять в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °С до +30 °С и влажности не более 65%, вдали от источников тепла. Не является восстановленным. Относится к безрецептурным.

Салициловая кислота



**Смягчает огрубевшие
участки кожи**

Чайный фенол



**Антибактериальное
и антисептическое
действия**


254

Ил. Производители: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.» («Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.»)

No.668 Chonghua Road, Foting Town
Industrial Functional Area, 320002 Yiwu City,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, Kuznetsovskaya Prospekt 100, Moscow

Учебно-научная организация/Импортер
в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вместе с муниципальным округом Басманный,
ул. Новая Красносельская, дом 35, стр. 64,
этаж 6, комната 3 Н/Б.
Тел./факс: +7 495 665 80 58.
E-mail: info@spec-trum.ru

Партия №:

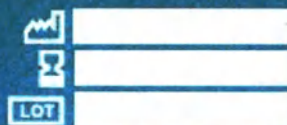

14

ДОКТОР МОЗОЛЬКИН



50
PCS/ШТ.

Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чая – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла.

Не являются восстановленными.

Отпускаются без рецепта.

ДОКТОР МОЗОЛЬКИН



50
PCS/ШТ.

РУ №

■ **Производитель:** «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джедзианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6.

Тел./факс: +7 495 665 80 58.

E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

1. ОТДЕЛИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ КОРОБА ПО ПЕРФОРАЦИИ

2. АККУРАТНО РАЗЛОЖИТЕ ПЛАСТЫРИ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

6X10 CM

50 PCS/ШТ.



FIRSTAID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ****FIRSTAID**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ****50
штук**

СОСТАВ: тканевая основа, клей – 95,3%, салициловая кислота – 0,5%, фенол чай – 1%, козимины – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевая перламутр – 0,1%.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным ингредиентам, клещевые заболевания, нарушения целостности кожных покровов в местах приклеивания лейкопластыря.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: применять в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C вдали от источников тепла. Не является восстановительным. Отпускается без рецепта.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты производства. Дата производства указана на упаковке. RU №

FIRSTAID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

**САЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА
+
ЧАЙНОЕ
ДЕРЕВО**

**50
штук****ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВЛЯЕТ
ОТ СУХИХ МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ**

**чайный
фенол**
антибактериальное
и антисептическое
действие



**салициловая
кислота**
смягчает
огрубевшую
участки кожи

FIRSTAID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ****50
штук**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джейдюанг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChuanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/ИМПОРТЕР В РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вент. с. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

**КОРБ-ТРАНСФОРМЕР
ЛЕГКО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
В УДОБНЫЙ
ДИСПЛЕЙ-ПОДСТАВКУ!**

Инструкция по использованию:

- Отделите верхнюю часть корба по перфорации.
- Аккуратно разложите пластыри.

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МОЗОЛЬНЫЙ
В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ****6 x 10 см****СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
 - По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
 - Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
 - Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1 – 2 дня.
 - Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
 - При необходимости повторите процесс 3 – 4 раза до полного удаления ороговевшей кожи.
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**
- Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
 - Только для однократного применения.
 - В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

Дата изготовления/Mfg date: Годен до:/Use before: Партия №/LOT:

**50
штук**

СОСТАВ: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чая – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от +5 °С до +30 °С и влажности не более 65%, вдали от источников тепла. Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты производства. Дата производства указана на упаковке.
 РУ № _____

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

**50
штук**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджянгу Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.
УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/ИМПОРТЕР В РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
 E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

КОРОБ-ТРАНСФОРМЕР ЛЕГКО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В УДОБНЫЙ ДИСПЛЕЙ-ПОДСТАВКУ!

Инструкция по использованию:

- Отделите верхнюю часть короба по перфорации.
- Аккуратно разложите пластыри.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

6 x 10 см

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
- По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
- Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
- Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1 – 2 дня.
- Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
- При необходимости повторите процесс 3 – 4 раза до полного удаления ороговевшей кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
- Только для однократного применения.
- В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

MASTER UNI

6X10 CM

MASTER UNI

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

MASTER UNI

ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВЛЯЕТ
ОТ СУХИХ МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

50
PCS/LIT.

Состав: полимерная основа - 94,3%,
салициловая кислота - 5%,
вазелин - 0,4%, спирт - 0,2%,
линейный пигмент - 0,1%.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость, повышенная
чувствительность к активным веществам,
кожные заболевания, нарушение
целостности кожного покрова в местах
предполагаемого наложения пластыря.
Правила хранения: хранить в сухом,
защищенном от света месте при
температуре от +5°C до +30°C и влажности
не более 65%, вдали от источников тепла.
Не являются восстановленными.
Отпускается без рецепта.

Салициловая
кислота



Снимает ороговевшие
участки кожи

50
PCS/LIT.

РУ №

Производитель: «Zhejiang Hongyu
Medical Commodity Co., LTD» («Зhejiang Hongyu
Medical Commodity Co., Limited»),
No.668 Changhua Road, Foting Town
Industrial Functional Area, 321002 Yiwu City,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортер
в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вост. в. муниципальный округ Бауманский,
ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64,
этаж 6, помещ. 3 Н/Б. Тел./факс: +7 495 665
80 58. E-mail: info@spectrumtrade.ru

КОРОБ-ТРАНСФОРМЕР ЛЕГКО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
В УДОБНЫЙ ДИСПЛЕЙ-ПОДСТАВКУ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. ОТДЕЛИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ КОРОБА
ПО ПЕРФОРАЦИИ
2. АККУРАТНО РАЗЛОЖИТЕ ПЛАСТЫРИ




ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

Способ применения:

1. Сделайте разрыв по линии для легкого применения пластыря.
2. По окончании процедуры удалите наклейку пластыря.
3. Вскройте упаковку, выньте пластырь или отрежьте необходимый
кусочек, снимите защитную бумагу со стороны
наклеиваемой поверхности пластыря на кожу, оставив на 1-2 дня.
4. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным
лекарственным или бытовым скотчем.
5. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного
удаления ороговевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пластырь с салициловой кислотой перед применением не следует
применять на поврежденную кожу.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения или аллергической
реакции, немедленно удалите пластырь и обратитесь к врачу.

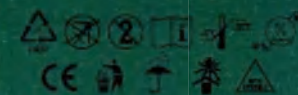

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

LOT

50
PCS/ШТ.

Состав: тканевая основа, клей – 94,3%,
салициловая кислота – 5%,
вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%,
пищевой пигмент – 0,1%.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость, повышенная
чувствительность к активным веществам,
кожные заболевания, нарушение
целостности кожных покровов в местах
предполагаемого наложения пластыря.

Правила хранения: хранить в сухом,
защищенном от света месте, при
температуре от +5 °С до +30 °С и влажности
не более 65%, вдали от источников тепла.
Не являются восстановленными.
Отпускаются без рецепта.

50
PCS/ШТ.

РУ №

Производитель: «Zhejiang Hongyu
Medical Commodity Co., LTD» («Джеджианг
Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед»),
No.668 ChanHua Road, Fotang Town
Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, Китайская Народная Республика.
**Уполномоченная организация/Импортер
в РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вн.тер. г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64,
этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665
80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru


ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления огрубевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

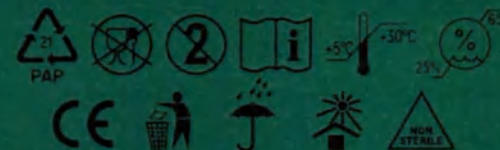

6X10 CM

50 PCS/ШТ.





50
PCS/ШТ.

Состав: тканевая основа, клей – 93,3%, салициловая кислота – 5%, фенол чая – 1%, вазелин – 0,4%, спирт – 0,2%, пищевой пигмент – 0,1%.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к активным веществам, кожные заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.

Правила хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 °C до +30 °C и влажности не более 65%, вдали от источников тепла. Не являются восстановленными. Отпускаются без рецепта.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ



50
PCS/ШТ.

ру №

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджинанг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед»), No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика. Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru

**КОРОБ-ТРАНСФОРМЕР ЛЕГКО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
В УДОБНЫЙ ДИСПЛЕЙ-ПОДСТАВКУ!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. ОТДЕЛИТЕ ВЕРХнюю ЧАСТЬ КОРОБА ПО ПЕРФОРАЦИИ
2. АККУРАТНО РАЗЛОЖИТЕ ПЛАСТЫРИ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

Способ применения:

1. Сделайте теплую ванночку для ног перед применением пластыря.
2. По окончании процедуры вытрите ноги полотенцем насухо.
3. Вскройте упаковку, возьмите пластырь или отрежьте необходимый кусочек, снимите защитную бумажную полоску.
4. Зафиксируйте пластырь на коже, оставьте на 1-2 дня.
5. Для лучшей фиксации закрепите пластырь обычным лейкопластырем или бинтом, если необходимо.
6. При необходимости повторите процесс 3-4 раза до полного удаления ороговевшей кожи.

Меры предосторожности:

1. Пациентам с сахарным диабетом перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Только для однократного применения.
3. В случае возникновения раздражения и/или аллергической реакции, прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу.

6X10 CM

50 PCS/ШТ.



Образец маркировки на транспортной упаковке

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.

Вариант исполнения:

лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН
в отдельных упаковках, размер, см: 4.0 x 10.0

Corn plaster in separate packs.

Design type: corn plaster ДОКТОР МОЗОЛЬКИН
in separate packs, size, cm: 4.0 x 10.0

XXXX-XXX

ДОКТОР
МОЗОЛЬКИН

12 кор./boxes x 50 шт./pcs = 600 шт./pcs

600 pcs.



РУ № _____

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: LOT

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.

Вариант исполнения:

лейкопластырь мозольный ДОКТОР МОЗОЛЬКИН
в отдельных упаковках, размер, см: 1.0 x 3.8

Corn plaster in separate packs.

Design type: corn plaster ДОКТОР МОЗОЛЬКИН
in separate packs, size, cm: 1.0 x 3.8

XXXX-XXX

ДОКТОР МОЗОЛЬКИН


12 кор./boxes x 50 шт./pcs = 600 шт./pcs

600 pcs.



РУ № _____

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортер в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

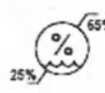

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: LOT

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.

Вариант исполнения:

лейкопластырь мозольный MASTER UNI
в отдельных упаковках, размер, см: 6.0 x 10.0

Corn plaster in separate packs.

Design type: corn plaster MASTER UNI
in separate packs, size, cm: 6.0 x 10.0

XXXX-XXX

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ


12 кор./boxes x 50 шт./pcs = 600 шт./pcs

600 pcs.



РУ № _____

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джедзианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

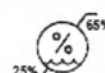

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: LOT

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.
Вариант исполнения: лейкопластырь мозольный Firstaid
в отдельных упаковках, размер, см: 6.0 x 10.0.

Corn plaster in separate packs.
Design type: corn plaster Firstaid
in separate packs, size, cm: 6.0 x 10.0

1917-002

FIRSTAID



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

12 кор./boxes x 50 шт./pcs = 600 шт./pcs



РУ № _____

Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,LTD»
(«Джедзианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road,
Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортер в РФ: ООО «СПЕКТРУМ»,
105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

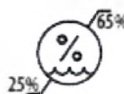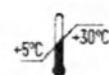

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT: **LOT**

Лейкопластырь мозольный в отдельных упаковках.

Вариант исполнения:

лейкопластырь мозольный CONSUMED
в отдельных упаковках, размер, см: 4.0 x 10.0

Corn plaster in separate packs.
Design type: corn plaster CONSUMED
in separate packs, size, cm: 4.0 x 10.0

XXXX-XXX

consumed





12 кор./boxes x 50 шт./pcs = 600 шт./pcs

600 pcs.



РУ № _____


Производитель: «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD» («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД») No.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Китайская Народная Республика.
Уполномоченная организация/Импортер в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

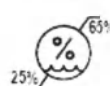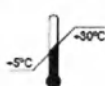

Дата изготовления:/Mfg date: 

Годен до:/Use before: 

Партия №:/LOT: LOT

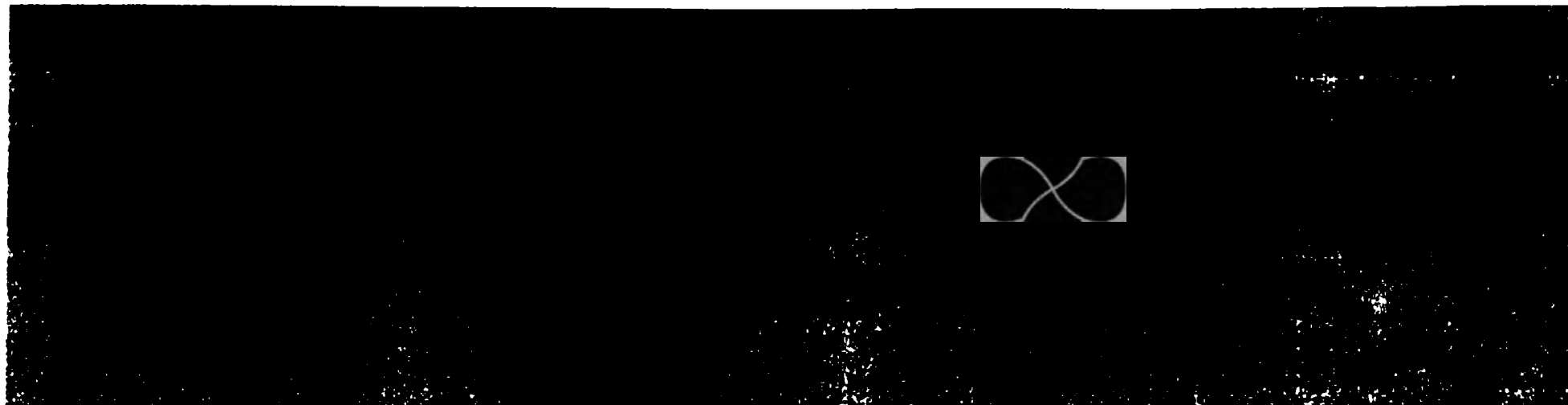

600 pcs.

Партия №:/LOT:

LOT



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

27 листах

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»

Федюнина М.А

