

3.3 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ С-ДУГИ

<ОРБИТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ С-ДУГИ>


С-дуга способна совершать орбитальное движение на своей стойке по дуге в 120 градусов.

После установки С-дуги в требуемое положение следует зафиксировать блокиратор орбитального движения.

Положение фиксации обозначено как LOCK, отсутствие фиксации – OFF.



[Рис3.1] Орбитальное движение С-дуги

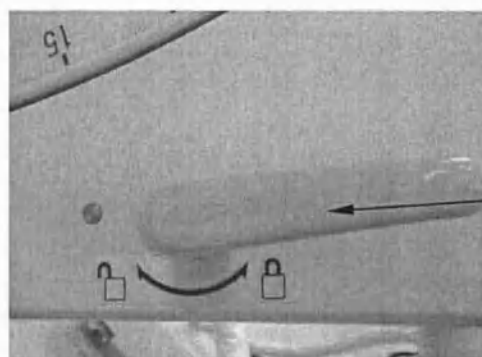

Фиксатор вращения

[Рис 3.2] Блокиратор орбитального движения

Внимание!

Между С-дугой и выступом передней крышки существует зона защемления. Не ставьте ногу на выступ во время управления вертикальной колонной либо позиционирования С-дуги.

Внимание!

Между С-дугой и ее опорой существует зона защемления. Во время позиционирования С-дуги избегайте попадания в эту зону пальцев и одежды.