

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

И.В.Тетюхин

29.04.2016 г.




Вертикализатор наклонный СН 38.01

ТУ 9444-014-40259145-2016

Руководство по эксплуатации

СН38.01РЭ

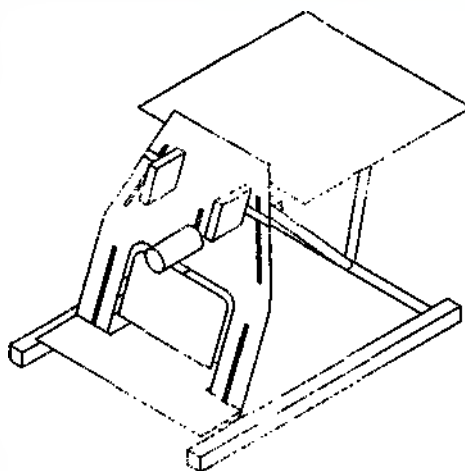

г. Москва

1 Назначение

Вертикализатор наклонный СН 38.01 предназначен для обучения функции вертикального стояния у больных с мозжечковыми и вестибулярными расстройствами, при параличах и парезах нижних конечностей, ДЦП, постинсультных состояниях, травмах спинного мозга, а также, для устранения контрактур тазобедренных, коленных, голеностопных суставов

2 Технические параметры

	СН 38.01.01	СН 38.01.02	СН 38.01.03
Ширина, мм, не более	640	640	720
Длина, мм, не более	1000	1200	1400
Высота, мм, не более	890	1140	1340
Угол наклона стола, °	0...20	0...20	0...20
Угол наклона ложемента, °	90...70	90...70	90...70
Масса, кг, не более.	20	25	35

3 Комплектность

№	Наименование	Количество (шт.)
1	Вертикализатор	1
2	Матрасик	1
3	Ремень	1
4	Абдуктор	1
5	Упор боковой	2
6	Упор коленный	1
7	Накладка (только для СН 38.01.01)	1

СН 38.01РЭ

Вертикализатор
наклонный СН 38.01
Руководство по
эксплуатации

Лит. Масса Масштаб


Лист 2 Листов 5

КОНМЕТ ХОЛДИНГ

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гераскина	<i>Г.И. Гераскина</i>	29.02.2016
Пров.		Верходанов	<i>В.И. Верходанов</i>	29.02.2016
Т. контр.				
Нач. гр.				
Н. контр		Новиков	<i>Н.И. Новиков</i>	29.02.2016

4 Описание конструкции

Вертикализатор СН 38.01 состоит из основания на колесах (1) на котором крепятся стойки (2,3,4), ложемент (5), стол (6). На ложементе крепятся с помощью фиксаторов (11) регулируемые по высоте подножка (7), абдуктор с накладкой (8), коленный упор (9), ремень для спины (17) упоры боковые (10), а также накладка 13, фиксируемая замком 12, (только для СН 38.01.01) и матрасик (14). Ложементу и столу можно придать необходимый наклон с помощью пальца (15) и фиксирующей гайки (16), для этого необходимо ослабить гайку и оттянув палец придать ложементу или столу нужное положение, отпустить палец и зафиксировать его гайкой. В трубе (2) для ложемента имеется кнопка фиксатор конечного положения. Для разблокирования конечного положения, надавите на кнопку и опустите трубу (3) вниз.

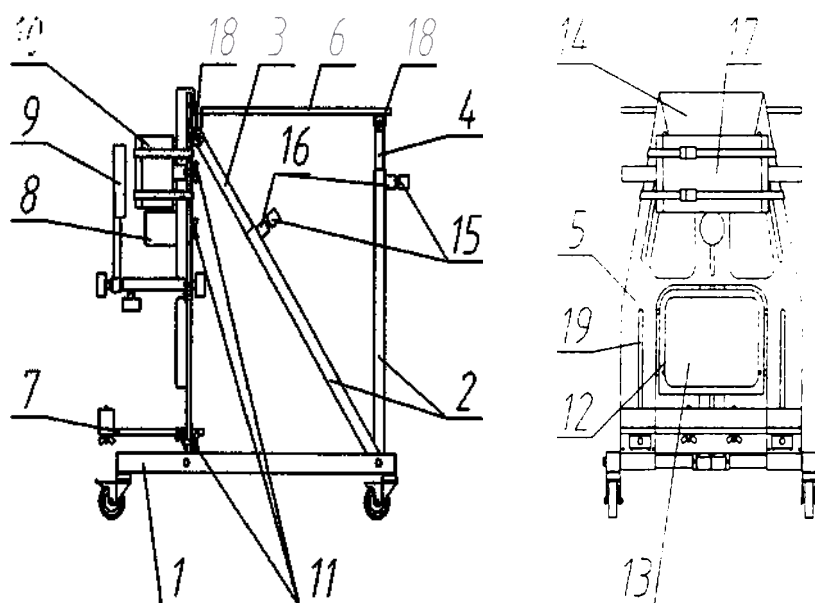

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой вертикализатора к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте его визуальным осмотром, проверьте комплектность.

5.3. Соберите изделие после транспортировки:

5.3.1 Конец трубы (3) (Рис.1) вставьте между пластинами (18) и стяните болтом;

5.3.2 Аналогично соберите узел (4);

5.3.3 На нужной высоте в отверстиях ложемента (19) закрепите подножку (7).

5.3.4 В центральном пазе ложемента закрепите абдуктор (8) и коленный упор (9);

5.3.5 В наклонных пазах установите боковые упоры (10);

СН 38.01РЭ

5.3.6 При необходимости, установите накладку (13) (только для модификации СН 38.01.01);

5.3.7 Для установки нужного угла наклона ложемент необходимо ослабить гайку фиксатор (16), осторожно вытянуть палец (15), наклонить ложемент на требуемый угол, вставить палец в отверстие, зафиксировать гайку.

5.3.8 Аналогично установите нужный наклон стола.

6 Техническое обслуживание и ремонт

6.1 Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.

6.2 По мере необходимости подтягивайте ослабевшие крепежные детали вертикализатора.

6.3 При возникновении неисправности в работе вертикализатора необходимо обращаться на завод-изготовитель или в сервисную службу по месту эксплуатации.

7 Меры безопасности

7.1 Перед началом использования проверьте исправность вертикализатора.

7.2 Перед началом процедуры проверьте надежность крепления пользователя на ложементе.

8 Условия транспортирования, хранения, утилизации

8.1 Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Транспортирование изделия морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки - контейнерная и мелкая.

8.2 Условия транспортирования изделия, изготовленного по условиям климатического исполнения УХЛ 4.2, по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

8.3 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

8.4 Утилизация изделия производится по нормам СанПин 2.1.7.2790-10 по классу 1 (ТБО- твердые бытовые отходы).

9 Свидетельство о приемке

Вертикализатор наклонный СН 38.01 _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.

М.П.

подпись

дата

10 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу вертикализатора в течение 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, возникшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производится изготовителем по адресу:

125413, г. Москва, ул. Онежская, д.24/1,

ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

тел.: (495) 456-97-50

www.conmetholding.ru

М.П.

подпись

дата

СН 38.01РЭ

Лист

5

Листов _____
Генеральный директор ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

И.В.Тетюхин

